

## Användarmanual

### AmbuTech Teleskopkäpp


#### Längdjustering

Justera käppens längd genom att ta tag i övre och nedre delen av käppen och vrid moturs tills delarna är lösa. Dra/skjut in den undre delen till önskad längd och vrid medurs tills delarna låses. Vrid ej för hårt!

#### Byte av doppsko

Doppskon är gängad (8 mm) och kan tas lös genom att hålla i den tillplattade plastdelen längst ner på käppen och samtidigt vrida doppskon. Det finns en rad olika doppskor att köpa som tillbehör:

- Enkel marshmallowformad doppsko i plast
- Keramisk doppsko
- Snöboll
- Rullande doppsko, marshmallowformad
- Pennformad doppsko

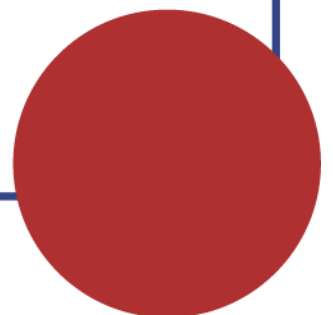

## **Polar Print**

Teknisk hjälp och support  
Tel 020-82 69 13

[Info@polarprint.se](mailto:Info@polarprint.se)  
[help@polarprint.se](mailto:help@polarprint.se)

## **Region nord**

### **Huvudkontor, Luleå**

Polar Print  
Box 950  
971 28 LULEÅ  
Tel 0920-20 34 30  
Fax 0920-878 86

### **Umeå**

Köksvägen 11  
901 89 UMEÅ  
Tel 090-13 95 72  
Fax 090-13 94 83

## **Region öst**

### **Stockholm**

Liljeholmsvägen 30  
117 61 STOCKHOLM  
Tel 08-442 42 70  
Fax 08-442 42 79

## **Region väst**

### **Göteborg**

Aminogatan 34  
431 53 MÖLNDAL  
Tel 031-339 99 90  
Fax 031-80 26 52

## **Region syd**

### **Malmö**

Gasverksgatan 2  
211 29 MALMÖ  
Tel 040-97 17 00  
Fax 040-97 17 71

### **Växjö**

Tel 0470 – 390 30