

Användarmanual



PLEXTALK PTN-2
version 3

Viktig Information

FCC-information

Överensstämmelsedeklaration

Modellnummer: PTN2

Handelsnamn: PLEXTALK

Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adress: 6-15-26 Chuo, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012 JAPAN

Denna enhet överensstämmer med del 15 av regelverket FCC och användning av enheten sker under följande två villkor:

- (1) Enheten får ej skapa skadliga störningar, och
- (2) Enheten måste hantera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan skapa driftproblem.

Denna utrustning har testats och överensstämmer med begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt del 15 av regelverket FCC. Dessa begränsningar är designade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan stråla energi i form av radiovågor, och om den inte installeras samt används enligt instruktionerna kan den skapa skadlig störning för radiokommunikation. Emellertid finns det inga garantier för att störningar inte inträffar i en specifik installation. Om utrustningen skapar skadlig störning för radio- eller TV-mottagning som kan upptäckas genom att slå på och av utrustningen bör användaren försöka en eller flera av följande åtgärder för att korrigera störningen:

- Byt plats på eller rikta om den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen i ett uttag som inte är i förbindelse med uttaget som mottagaren är anslutet till.
- Konsultera din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Observera:

Alla ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av garantiskyldiga parter kan upphäva slutanvändarens rätt att använda utrustningen.

Innehållsförteckning

Viktig Information	3
FCC-information	3
Innehållsförteckning	4
1. Lag- och copyright-information	7
1.1. Copyright-information om denna användarmanual	7
1.2. Licenser och varumärken.....	7
1.3. Restriktioner för kopiering	7
1.3.1. Allmän information.....	7
1.3.2. Musikkivor.....	7
2. Kom igång	8
2.1. Terminologi och konventioner som används.....	8
2.2. Vad som finns i lådan.....	8
2.3. Beskrivning av enheten.....	8
2.3.1. Ovansidan	8
2.3.2. Framsidan	10
2.3.3. Vänstersidan	10
2.3.4. Baksidan	10
2.3.5. Undersidan.....	10
2.4. Ladda PLEXTALK.....	10
2.5. Underhåll och batteriskötsel.....	11
2.5.1. Skötsel av enheten.....	11
2.5.2. Batteriskötsel.....	11
2.5.3. Märke med överkryssad soptunna.	11
2.6. Slå på och av PLEXTALK.....	12
2.7. Funktionen knappbeskrivning	12
2.8. Funktionen knapplås.....	12
2.9. Sätta in och mata ut SD-kort, USB-minne och CD-skivor	12
3. Introduktion till menysystemet	14
3.1. Huvudmenyn.....	14
3.2. Aktivera och navigera meny.....	14
4. Ställa in din PLEXTALK	15
4.1. Ställ in din önskade talsyntes	15
4.2. Ställ in tonhöjden för talsyntesen.....	15
4.3. Ställ in datum och tid.....	15
4.4. Välj önskat vänteljud	16
5. Strömfunktioner	17
5.1. Varning vid låg batterinivå.....	17
5.2. Funktionen energispar	17
5.3. Påtvingad avstängning.....	17
5.4. Automatisk avstängning.....	17
5.4.1. Ställa in Automatisk avstängning.....	17
5.4.2. Avbryt Automatisk avstängning	18
6. Uppspelningsfunktioner gemensamma för alla format	19
6.1. Starta och stoppa uppspelningen.....	19
6.2. Snabbspolning framåt och bakåt	19
6.3. Ändra volymen för uppspelning	19
6.4. Ändra volymen för guiderösten	20
6.5. Ändra hastigheten för uppspelning	20
6.6. Ändra tonläget för ljudet.....	20
6.7. Använda Navigationsmenyn	20
6.8. Välj media och bok.....	21
6.9. Navigation efter mapp, kategori och titel.....	21
6.10. Få information om media och bok.....	21

6.11. Meddela aktuell status	22
6.12. Välj uppspelningsläge	22
6.13. Använda bokmärken	22
6.13.1. Bokmärke typer	22
6.13.2. Lägga in bokmärken	23
6.13.3. Navigera till bokmärken	23
6.13.4. Ta bort bokmärken	23
7. Spela Daisyböcker	24
7.1. Navigation bland rubriker	24
7.2. Flytta till början eller slutet i en Daisyboken	24
7.3. Sidnavigation	24
7.4. Navigering efter grupp	25
7.5. Navigation efter fras	25
7.6. Navigera efter skärm, stycke, rad, mening, ord eller tecken (Daisy endast text)	26
7.7. Uppspelningsläge	26
8. Spela upp ljudfiler eller musikskivor	27
8.1. Navigation efter spår	27
8.2. Flytta till början av ett album	27
8.3. Navigation efter album	28
8.4. Uppspelningsläge	28
8.5. Meddelar album och spår vid namn eller nummer	28
9. Spela upp textfiler	29
9.1. Navigera efter skärm, stycke, rad, mening, ord eller tecken	29
9.2. Navigering efter procent	29
9.3. Uppspelningsläge	29
10. Spela ljudböcker	30
11. Kopiera	31
11.1. Allmän information om kopiera och flytta	31
11.2. Kopiera en bok eller album från en CD till annat media	31
11.3. Kopiera en bok eller album mellan SD-kort och USB-media	31
11.4. Kopieringstid för en musikskiva	32
12. Funktioner vid mediahantering	33
12.1. Radera en bok	33
12.2. Radera ett SD-kort	33
13. Andra användbara funktioner	34
13.1. Den inbyggda hjälpfilen	34
13.2. Kontrollera systemegenskaper	34
13.3. Inställningar för "Överhoppningsbara"	34
13.4. Återställ PLEXTALK till fabriksinställningar	35
Appendix A - Huvudspecifikationer	36
Allmänna specifikationer	36
Ljudegenskaper	37
Huvudfunktioner	37
Batterispecifikationer	38
Upphovsrättsinformation om Ogg Vorbis	38
Appendix B - Menyhierarkin	39
Uppspelningsinställningar:	39
Överhoppningsbara:	39
Hantera lagringsmedia:	40
Systeminställningar:	40
Appendix C - Felsökning	41
Generella driftproblem	41
Felmeddelanden vid uppspelning av Daisy	41
Fel vid uppspelning av musikskivor eller CD med ljudfiler	42
Fel vid mediahantering	42
Fel vid uppspelning av musikskivor eller CD med ljudfiler	43

Fel vid mediahantering	43
Appendix D - Ordlista	44
AMR-WB+	44
Bithastighet	44
CD-DA	44
Upphovsrättsinformation	44
Daisybok	44
dB	44
Försidor	44
Grupp	44
Rubrik	44
HTML	45
Nivå	45
Media	45
Meny	45
Mp3	45
Skivor med multipla böcker	45
Multivolymskivor	45
Fras	45
SD-kort	45
SDHC-kort	45
Avsnitt	46
Specialsidor.....	46
Talsyntes.....	46
Titel (Daisy-definition).....	46
USB.....	46
Wave-filer	46

1. Lag- och copyright-information

Detta kapitel innehåller viktig information om copyright, licenser och varumärken. Det beskriver också restriktioner som gäller vid användning av PLEXTALK för kopiering och inspelning av digitalt ljud. Du rekommenderas verkligen att läsa detta kapitel ordentligt innan du fortsätter.

1.1. Copyright-information om denna användarmanual

Shinano Kenshi reserverar alla rättigheter till att modifiera produkterna som beskrivs i denna manual när som helst utan tidigare förvarning.

Ytterligare reserverar Shinano Kenshi Co., Ltd. Rätten att revidera denna manual och göra ändringar i dess innehåll utan skyldighet att underrätta någon person eller organisation om sådan revidering.

Denna manual är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter reserverade. Den får inte kopieras, fotokopieras, översättas eller överföras till något elektroniskt medium eller maskinläsbar form utan förbehållna rättigheter från Shinano Kenshi.

Användarmanual copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

1.2. Licenser och varumärken

Alla licenser och varumärken är egendom för sina respektive ägare.

1.3. Restriktioner för kopiering

Innan du använder din PLEXTALK bör du läsa följande viktig information för att försäkra dig om att du förstår de lagliga restriktioner som gäller vid användning av vissa funktioner.

1.3.1. Allmän information

Denna PLEXTALK är designad för att hjälpa dig spela in och reproducera ljudarbeten för vilka du äger rättigheterna till eller som du har fått rättigheter till utav rättighetsägaren. Så till vida du inte äger rättigheterna eller fått tillåtelse från rättighetsägaren kan dina icke auktoriserade inspelningar, reproduktioner eller distributioner resultera i lagbrott under rättighetslagar och internationella upphovsrättslagar. Om du är osäker på dina rättigheter, kontakta juridisk rådgivning.

Under inga omständigheter kan Shinano Kenshi hållas ansvariga för konsekvenser efter någon form av olaglig kopiering utförd med denna PLEXTALK.

1.3.2. Musikskivor

Kopior av musikskivor är endast för enskilt bruk och får, under upphovsrättslagarna, inte användas på andra sätt utan särskild tillåtelse från rättighetsägaren.

2. Kom igång

2.1. Terminologi och konventioner som används

Detta avsnitt beskriver terminologin och konventioner som används i manualen. Detaljer följer nedan:

- **Varning:** En varning betyder att skaderisk föreligger.
- **Observera:** Observera betyder att det föreligger risk att skada eller förstöra PLEXTALK, förstöra inspelningsmedium, förstöra eller påverka lagrad data eller datorkonfiguration.
- **Notera:** Notera används för att ge ytterligare viktig information, som ej redan nämnts, om en funktion. Generellt sett listas dessa efter instruktionsbeskrivningar.
- **SD-kort:** PLEXTALK kan använda kort av typen "SD" och "SDHC". I denna användarmanual är båda korten kallade "SD-kort".

2.2. Vad som finns i lådan

Nedan följer en lista med alla delar som du bör finna i lådan tillsammans med din PLEXTALK. Försäkra dig om att alla delar finns med. Om det saknas någon del, var god kontakta din lokala återförsäljare.

- 1 PLEXTALK PTN2
- 1 Tangentbordsöverlägg
- 1 strömadapter
- 1 skiva med användarmanual
- 1 snabbguide
- 1 guide med säkerhetsinstruktioner

Notera: Det är starkt rekommenderat att du behåller förpackningen i fall du behöver återsända din PLEXTALK i framtiden av någon orsak.

2.3. Beskrivning av enheten

Detta avsnitt ger en fysisk beskrivning av PLEXTALK, knapparnas placering och andra kontroller så att du kan finna dem när de nämns i senare kapitel. Namnen och huvudsyftena beskrivs också här.

Medan du försiktigt håller enheten kan du ta dig lite tid att hitta ovan- och undersidan. Ovansidan har 27 gummiknappar medan undersidan endast har 5 gummifötter, fyra nära hörnen och en som är en lång rak fot.

Sök reda på den perforerade ytan som är högtalargallret på din PLEXTALK. Roter enheten medan den står på fötterna så att denna högtalare placeras i det borte högra hörnet. PLEXTALK ligger nu i sin normala position för användning. Du kan bekräfta detta genom att känna på den längsta kanten närmast dig. Där ska det finnas en smal, men tydlig, springa. Detta är CD-Läsaren.

2.3.1. Ovansidan

PLEXTALK har 27 gummiknappar på ovansidan. Dessa är grupperade i 5 block – en kolumn med 4 knappar på vänstra sidan, ett rektangulärt block med 12 knappar i mitten, en rad med 3 knappar både nedanför och ovanför det rektangulära blocket samt en kolumn med 5 knappar på den högra sidan.

I kolumnen med fyra knappar på den vänstra sidan är den översta knappen oval till formen och den nedersta knappen är triangelformad. De övriga två knapparna i mitten är diamantformade.

Uppifrån och ner är dessa fyra knappar:

- Menyknappen – används för att komma till huvudmenyn.
- Mediaknappen – används för att växla media.
- Knappen Gå till – används för navigering via sida och rubrik.
- Bokmärkesknappen – används för navigering via bokmärken, lägga in och ta bort bokmärken.

Det rektangulära blocket med 12 knappar kallas för sifferknappar eller numeriska knappar och finns i mitten av ovansidan. Det är organiserat precis som knapparna på en telefon med 3 knappar i 4 rader. Knappen 5 har en liten taktill punkt i mitten som hjälper dig att finna den.

Knappen Fyrkant som finns i nedre högra hörnet bland sifferknapparna används för att bekräfta. Den kommer att kallas för Enter härnäst i manualen. På liknande sätt används knappen Stjärna, längst nere till vänster bland sifferknapparna, som avbryt och kommer härnäst att kallas för knappen Avbryt.

Vissa knappar har sekundära funktioner och dessa listas nedan:

Nummer 2 = Pil Upp eller Avbryt
Nummer 4 = Pil Vänster eller Flytta Bakåt
Nummer 6 = Pil Höger eller Flytta Framåt
Nummer 8 = Pil Ner eller Enter
Nummer 9 = Kopiera Filer
Stjärna = Ångra
Fyrkant = Gör Om

Under sifferknapparna finns en rad med 3 knappar. De två yttersta knapparna är cirkulära till formen. Den mittersta knappen är rektangulär och har en distinkt inbuktning i ytan för att man enkelt ska kunna hitta den. Från vänster till höger är namnet samt funktionerna på dessa tre knappar följande:

- Knappen Bakåt – tillbaka eller snabb bakåtspolning (om den hålls nertryckt)
- Knappen Start/Stopp – start/stopp
- Knappen Framåt – framåt eller snabbspolning framåt (om den hålls nertryckt)

Ovanför sifferknapparna finns en rad med 3 knappar. De två knapparna på utsidan är vertikala, avlånga, ovalformade och den mittersta knappen är stor och ovalformad. Knapparna är uppdelade i en övre och nedre del. Från vänster till höger är namnet samt funktionerna på dessa tre knappar:

- Knappen Tonläge – den övre sidan kallas "Tonläge upp" den nedre sidan kallas "Tonläge ner".
- Volymknapp – den övre sidan kallas "Volym upp" den nedre sidan kallas "Volym ner".
- Hastighetsknapp – den övre sidan kallas "Öka hastighet" den nedre sidan kallas "Minska hastighet".

Den sista gruppen med knappar på ovansidan är de 5 knapparna på höger sida. Denna knapp som sitter direkt till höger av nummer 3 eller 6 är Informationsknappen. Den är oval till formen. Denna knapp som sitter direkt till höger om knappen Framåt är knappen Boklista. Knappen är uppdelade i en vänster och höger del. På höger sida kallas knappen "Nästa bok" och på vänster sida kallas den "Föregående bok". Dessa knappar har följande funktioner:

- Informationsknapp – används för att få information om Daisyböcker, ljudfiler och textfiler. Tryck ner och håll inne knappen för att höra aktuellt datum och tid.

- Knappen Boklista – används för att växla media genom att trycka på höger och vänster sida samtidigt eller trycka ner och hålla inne höger eller vänster sida. För att växla mellan böcker, tryck på höger sidan kallad "Nästa bok" eller på vänster sida kallad "Föregående bok".

De andra tre knapparna är arrangerade i en rad på höger sida om enheten. Den översta knappen är liten och rund till formen och den nedersta knappen är liten och fyrkantig till formen. Mellan dessa två knappar sitter en större rund knapp som är lätt insjunken.

Uppifrån och ner är dessa tre knappar:

- Knapp för automatisk avstängning – används för att ställa in automatisk avstängning
- Strömknapp – används för att slå av och på enheten.
- Knappen Mata ut – används för att mata ut CD-skivor.

2.3.2. Framsidan

CD-läsaren finns i framkanten av enheten. Sätt in din DAISY-bok, musik-CD eller MP3-CD i denna springa. Så snart CD-skivan har satts in en bit i springan kommer CD-skivan att dras in i enheten automatiskt.

2.3.3. Vänstersidan

På vänster sida av enheten finns tre saker. Framifrån och bakåt är dessa: plats för SD-kort, hörlursuttag och USB-kontakt. Platsen för SD-kort passar för både SD-kort och SDHC-kort. USB-kontakten kan användas för USB-minnen.

2.3.4. Baksidan

Det finns en sak på baksidan av enheten. I mitten finns ett litet runt hål med en svag taktil fyrkant runt om. Detta är strömkontakten där man ansluter strömadaptern.

2.3.5. Undersidan

Det finns en batterilucka på undersidan. Batteriluckan sitter fast med en skruv. För att byta ut batteriet måste skruven tas bort, luckan öppnas och batteriet sedan dras ut.

Varning: Du bör endast använda rekommenderade batterier i denna enhet. Om man inte gör det kan i värsta fall en explosion eller brand uppstå.

2.4. Ladda PLEXTALK

För att ladda det interna batteriet måste du ansluta PLEXTALK till ett strömuttag via strömadaptern. Gör följande:

- För att ladda batteriet via strömkontakten, anslut den medföljande strömadaptern i strömkontakten på baksidan.
- Anslut sedan strömadaptern till ett strömuttag. Uppladdningen kommer att starta.

2.5. Underhåll och batteriskötsel

2.5.1. Skötsel av enheten

Torka av damm och smuts från PLEXTALK med en mjuk tygbit fuktad med mildt neutralt diskmedel och torka sedan av med en torr tygbit.

Varning: Se till att PLEXTALK inte är ansluten till en strömkälla när du rengör den.

2.5.2. Batteriskötsel

För att få ut så mycket som möjligt ur ditt uppladdningsbara batteri bör du noga läsa följande punkter.

- Batteriet tar normalt 4 timmar att ladda fullt. När du använder din PLEXTALK för första gången eller efter en månad utan användning bör du ansluta den till en strömkälla och ladda i minst 24 timmar.
- Batterilivslängden beror på hur ofta det används och återuppladdas. Dess kapacitet att lagra elektrisk laddning minskar med tiden. När tiden för praktisk användning mellan varje uppladdning blir för kort behöver du ersätta batteriet med ett nytt. Dessa kan köpas från din lokala återförsäljare. Din återförsäljare kan också ge dig råd om återvinning och hantering av förbrukade batterier.
- Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och miljö.

För att behålla batteriets prestanda bör följande procedur utföras var sjätte månad:

- Ladda batteriet fullt
- Köra enheten på batteri tills det tar slut
- Ladda upp

2.5.3. Märke med överkryssad soptunna.

Symbolen som kallas "överkryssad soptunna" finns tryckt på ena sidan av batteriet.



Notera: Denna symbol gäller endast för EU-länder.

Denna symbol motsvarar direktiven 2006/66/EC. Denna symbol betyder att batterier och ackumulatörer skall hållas separat från annat avfall efter att de förbrukats. Om en kemisk symbol finns under symbolen ovan betyder denna kemiska symbol att batteriet eller ackumulatören innehåller tungmetall i en specifik koncentration som visas nedan.

Hg: Kvicksilver (0.0005%)
Cd: Kadmium (0.002%)
Pb: Bly (0.004%)

Dessa substanser kan orsaka skada på både människa och miljö om de inte tas omhand om på rätt sätt. Inom EU finns separata insamlingsystem för använda batterier och ackumulatörer. Var god se till att du lämnar in använda batterier och ackumulatörer på återvinningscentraler. Vår produkt är designad och tillverkad med batteri- och ackumulatörkomponenter som kan återvinnas eller återanvändas.

2.6. Slå på och av PLEXTALK

Du kan slå på eller av enheten genom att göra följande:

- Tryck ner och håll inne Strömknappen tills enheten startar. När strömmen är på kommer strömknappen att lysa grönt.
- Tryck ner och håll inne Strömknappen för att slå av enheten.

Notera: Uppstartsprocessen tar ungefär 30 sekunder när enheten används för första gången eller efter att batteriet har laddats upp.

2.7. Funktionen knappbeskrivning

Knappbeskrivningsläget aktiveras och avaktiveras med hjälp av Menyknappen.

Precis som namnet anger, ger funktionen knappbeskrivning användaren en beskrivning av knapparna på PLEXTALK.

- Aktivera knappbeskrivningsläget genom att trycka ner och hålla inne Menyknappen. När du nu trycker på någon knapp kommer enheten att ge en beskrivning om den samt dess funktioner.
- Avaktivera knappbeskrivningsläget genom att trycka ner och hålla inne Menyknappen.

2.8. Funktionen knapplås.

Knapplås kan användas för att låsa knapparna och kontrollerna så att de inte aktiveras av misstag.

- För att låsa knapparna, tryck ner och håll inne knapparna Framåt och Bakåt samtidigt.
- För att låsa upp knapparna, tryck ner och håll inne knapparna Framåt och Bakåt samtidigt igen.

2.9. Sätta in och mata ut SD-kort, USB-minne och CD-skivor

För sätta in ett SD-kort, gör följande:

- Slå av enheten.
- Håll SD-kortet så att det avkapade hörnet finns framme till höger. Med andra ord ska det avkapade hörnet vara närmast den främre kanten på enheten.
- Sätt in SD-kortet i kortplatsen på enhetens vänstra kant.
- Tryck in kortet hela vägen i kortplatsen tills det klickar på plats och kortets kant ligger i nivå med ytan på enhetens vänstra kant. Använd inte onödig kraft när du gör detta.

För ta ut ett SD-kort, gör följande:

- Slå av enheten.

- Tryck in SD-kortet lite så att det klickar och fjädrar ut. SD-kortets ena kant skall hoppa ut en bit ur enheten.
- Ta försiktigt tag i kortet och dra ut det ur kortplatsen.

Observera: PLEXTALKs kortläsare är endast kompatibel med SD- och SDHC-kort. Om du sätter in andra minneskort såsom Memory Stick eller MMC kan spelaren sluta att fungera korrekt, undvik detta.

Notera: SD-kort har en liten låsknapp som låter dig skydda den lagrade datan om du vill. Den finns på vänster sida av kortet, på motsatt sida av det avkapade hörnet. Om knappen är i positionen mot den främre kanten av SD-kortet (den lite räfflade kanten på SD-kortet) kan du spela in samt radera information. Om knappen är i positionen från den främre räfflade kanten är datan på SD-kortet skyddad.

För sätta in ett USB-minne, gör följande:

- Slå av enheten.
- Sätt in USB-minnet i USB-kontakten.

För ta ut ett USB-minne, gör följande:

- Slå av enheten.
- Dra ut USB-minne rakt från enheten.

Notera: Extern USB-CD/DVD-spelare kan inte användas med PLEXTALK.

För att sätta in en CD-skiva i PLEXTALK, gör följande:

- Försäkra dig om att PLEXTALK är igång.
- Vrid CD-skivan så att sidan med etiketten är uppåt.
- Tryck försiktigt in CD-skivan i CD-springan på framkanten av PLEXTALK.
- Fortsätt trycka in CD-skivan i springan tills PLEXTALK tar över och drar in skivan resten av biten.

Notera: Om du av misstag sätter in en CD-skiva upp och ner kommer den att matas ut.

För att mata ut en CD-skiva, gör följande:

- Tryck ner och håll inne knappen Mata ut.
- CD-skivan matas ut. Du kan nu dra ut skivan resten av biten ut ur springan.

3. Introduktion till menysystemet

Man kan komma åt ett antal funktioner i PLEXTALK via det inbyggda menysystemet. Detta kapitel ger dig förståelse för hur menyn är uppbyggd samt hur du använder den.

3.1. Huvudmenyn.

Högsta nivån är huvudmenyn som har 4 objekt. Dessa är:

- Uppspelningsinställningar - låter dig lyssna upprepat på ljudfiler.
- Överhoppningsbara - låter dig välja om du vill hoppa över vissa objekt eller inte.
- Hantera lagringsmedia - ger dig information om mediet, låter dig radera filer på ett media förutom CD-skiva.
- Systeminställningar - ger dig systeminformation för att kontrollera vad särskilda funktioner styr eller spelar.

3.2. Aktivera och navigera menyn

För att navigera runt i menyn, använd följande metoder:

- Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen en gång.
- För att välja ett annat alternativ på samma nivå i menyn, tryck antingen Knapp 4 för att flytta till vänster eller Knapp 6 för att flytta till höger. När du flyttar till ett nytt menyalternativ kommer det att uttalas.
- Alla menyer fungerar så att om du fortsätter i samma riktning kommer du till slut fram till startpunkten i den menyn, då de är designade att gå runt i en cirkel.
- För att välja ett menyalternativ, tryck på Knapp 8 eller Enter. Förutsatt att det finns en undermeny och att den går att komma åt vid det aktuella tillfället. Detta tar dig ner en nivå i menystrukturen och lämnar dig på den relevanta undermenyn.
- För att flytta upp en nivå i menyn, tryck på knapp 2 eller knappen Avbryt.
- För att avsluta menysystemet direkt, oberoende av menynivå, tryck på Menyknappen.

Notera: Några menyalternativ ger dig information som kan vara svår att komma ihåg efter att du hört den en gång, till exempel systemets versionsnummer och PLEXTALKs serienummer. I dessa situationer repeteras informationen tills du väljer att avbryta meddelandet. Om du vill avbryta meddelandet samt avsluta menysystemet helt, tryck på Menyknappen. Om du vill avbryta meddelandet och stanna i menysystemet, tryck på knapp 2 eller knappen Avbryt (Stjärna).

4. Ställa in din PLEXTALK

4.1. Ställ in din önskade talsyntes

Du har möjlighet att välja en av två röster för talsyntesen. För att välja önskad röst för talsyntesen, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet "Välj talsyntesröst" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att välja röst samt välj den önskade rösten genom att trycka knapp 8 eller Enter.

4.2. Ställ in tonhöjden för talsyntesen

För att justera tonhöjden för den inbyggda talsyntesen, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet "Inställning av tonhöjd för talsyntes" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att välja din önskade inställning för tonhöjd i området -5 till +5 med 0 som normal inställning och bekräfta den genom att trycka knapp 8 eller Enter.

4.3. Ställ in datum och tid

För att ställa in datum och tid för den interna klockan, gör följande:

- Tryck på Menyknappen och välj "Systeminställningar" genom att använda knapp 4 eller 6 och tryck sedan knapp 8 eller Enter för att bekräfta.
- Välj alternativet "Ställ in datum och tid" ur menyn och tryck knapp 8 eller Enter.
- Använd sifferknapparna för att skriva in aktuellt år med 4 siffror och tryck Enter, eller tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna.
- Använd sifferknapparna för att skriva in aktuell månad med 2 siffror och tryck Enter, eller tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna.
- Använd sifferknapparna för att skriva in aktuell dag med 2 siffror och tryck Enter, eller tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna.
- Använd sifferknapparna för att skriva in den aktuella tiden med 4 siffror och tryck Enter. Använd inledande nollor när det är nödvändigt.
- Som en bekräftelse kommer datumet och tiden som du just ställt in att meddelas.

Notera: Om du skriver in felaktiga siffror kan du trycka på Avbryt för att rensa de inskrivna siffrorna.

4.4. Välj önskat vänteljud

När PLEXTALK är upptagen som när den läser ett media, spelas ett ljud som indikerar att en process utförs.

För att välja önskat vänteljud, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet "Välj vänteljud" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att lyssna på tillgängliga alternativ och tryck Enter när du befinner dig på vänteljudet som du önskar.

5. Strömfunktioner

5.1. Varning vid låg batterinivå

När PLEXTALK drivs på batteriström och strömnivån går ner till en nivå där uppladdning behövs säger PLEXTALK "Låg batterinivå." Spelaren kommer att stänga av om en minut. Om du vill fortsätta att använda PLEXTALK måste du ansluta strömadaptern.

5.2. Funktionen energispar

För att spara batteriström kommer PLEXTALK automatiskt att stänga av efter 15 minuter av inaktivitet även om batterinivån är ok.

Notera: PLEXTALK kommer inte att stänga av automatiskt om den körs på nätström.

5.3. Påtvingad avstängning

Om PLEXTALK av någon anledning inte stänger av eller du inte kan navigera med några knappar kan du prova en påtvingad avstängning som alternativ till att plocka ut batteriet.

För att använda funktionen påtvingad avstängning ska du trycka ner och hålla inne knapparna Automatisk avstängning samt Strömknappen tillsammans i mer än 10 sekunder. PLEXTALK bör slå av.

Notera: Om denna metod inte fungerar och din PLEXTALK fortfarande är igång kan du dra ut strömadaptern samt ta ut batteriet och sätta in det igen.

5.4. Automatisk avstängning

Funktionen Automatisk avstängning låter dig specificera tiden efter vilken PLEXTALK ska stänga av.

5.4.1. Ställa in Automatisk avstängning

För att ställa in automatisk avstängning, gör följande:

- Tryck på Automatisk avstängning en gång. PLEXTALK kommer att säga "Automatisk avstängning. 15 minuter. Inställt."
- Tryck på Automatisk avstängning igen för att öka tiden för den automatiska avstängningen. Tiden för den automatiska avstängningen ökar med 15 minuter för varje tryckning upp till maximalt 1 timme. Tryck upprepat på knappen Automatisk avstängning tills du når den önskade inställningen.

Notera: När du trycker på knappen Automatisk avstängning igen kommer PLEXTALK att meddela den återstående tiden innan avstängning. När detta sker kan du trycka på Automatisk avstängning igen för att öka tiden för den automatiska avstängningen.

5.4.2. Avbryt Automatisk avstängning

För att avbryta automatisk avstängning, gör följande:

- Tryck på Automatisk avstängning en gång. PLEXTALK meddelar att den automatiska avstängningen är på och antalet minuter som återstår innan enheten stänger av.
- Tryck upprepade gånger på Automatisk avstängning tills PLEXTALK säger "Av".

6. Uppspelningsfunktioner gemensamma för alla format

PLEXTALK kan spela upp Daisyböcker, ljudfiler, textfiler samt ljudböcker.

- PLEXTALK kan identifiera och spela upp ljudfiler i följande filformat: Mp3, Wave, WMA, AMR-WB+ och Ogg Vorbis.
- Textfiler är filer i antingen vanligt textformat, Microsoft Word .doc-format eller HTML-format.
- Ljudböcker är filer som kommer från "Audible.com".

Notera: Om en CD har flera sorters innehåll, till exempel, Daisyfiler och ljudfiler kommer PLEXTALK endast att identifiera en typ av innehåll.

6.1. Starta och stoppa uppspelningen

För att starta eller stoppa uppspelningen, gör följande:

- För att påbörja uppspelningen, tryck på knappen Start/Stop. PLEXTALK kommer att återuppta uppspelningen från positionen där den stoppades tidigare.
- För att stoppa uppspelningen, tryck på knappen Start/Stop.

Notera: För att starta eller stoppa uppspelningen, tryck på knappen Start/Stop. Om du trycker ner och håller inne knappen meddelas aktuell status.

6.2. Snabbspolning framåt och bakåt

Funktionerna snabbspolning framåt och bakåt använder knapparna Bakåt och Framåt på var sin sida om knappen Start/Stop.

- För att spola tillbaka, tryck ner och håll inne knappen Bakåt. Uppspelningen kommer att starta när du släpper knappen.
- För att spola framåt, tryck ner och håll inne knappen Framåt. Uppspelningen kommer att starta när du släpper knappen.

När du spelar en Daisybok med ljud eller ljudfiler och håller inne knappen Framåt eller Bakåt kommer snabbspolningen framåt eller bakåt att hoppa 1 minut, 5 minuter, 10 minuter, 20 minuter och så vidare. Om du släpper upp knappen innan alternativet "10 minuter" uttalas, kommer uppspelningen att starta på platsen där knappen släpps upp. Om knappen släpps upp efter denna punkt kommer snabbspolningen bakåt eller framåt att fortsätta tills knappen Start/Stop trycks in för att stoppa processen. Uppspelningen kommer sedan att starta automatiskt.

6.3. Ändra volymen för uppspelning

Volymen kan ställas in med 1 steg i taget på en skala från 0 till 25 där 0 är tyst och 25 är högsta volymen.

- För att öka volymen vid uppspelning, tryck antingen Volym upp upprepade gånger för att öka volymen en nivå i taget eller tryck uppåt och håll inne Volym upp tills volymen nått önskad nivå.
- För att minska volymen vid uppspelning, tryck antingen Volym ner upprepade gånger för att minska volymen en nivå i taget eller tryck ner och håll inne Volym ner tills volymen nått önskad nivå.

- Om du trycker på Volym upp och ner samtidigt ställs volym direkt till sin mittposition, normalvolymen 13.

6.4. Ändra volymen för guiderösten

Den interna talsyntesen i PLEXTALK kallas för guiderösten. Volymen för guiderösten kan antingen justeras tillsammans med volymen för uppspelning eller justeras separat.

För att ställa in volymen för guiderösten separat, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Välj guidevolym" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att välja önskad guidevolym och tryck knapp 8 eller Enter för att bekräfta inställningen.

6.5. Ändra hastigheten för uppspelning

Det finns 11 hastighetsinställningar från -2 till +8, som kan justeras 1 nivå i taget. Normal hastighet är i position 0. -2 är halv normal hastighet, +4 är dubbel normal hastighet och +8 är trippel hastighet.

- Öka uppspelningshastigheten genom att trycka på Hastighet upp.
- Minska uppspelningshastigheten genom att trycka på Hastighet ner.
- Genom att trycka på knapparna Hastighet upp och ner samtidigt kan du snabbt ställa in spelaren på normal uppspelningshastighet.

Notera: Om du trycker ner och håller inne knappen Hastighet upp eller ner kommer hastigheten snabbt att ändras i den valda riktningen. På detta sätt behöver du inte trycka på en knapp upprepade gånger.

6.6. Ändra tonläget för ljudet

Det finns 13 inställningar för tonläge från -6 till +6, som kan justeras 1 nivå i taget.

- Öka Tonläget genom att trycka på Tonläge upp.
- För att minska tonläget, Tryck på knappen Tonläge ner.
- Genom att trycka på knapparna Tonläge upp och ner samtidigt kan man snabbt ställa in spelaren på normalt tonläge.

Notera: Om du trycker ner och håller inne knappen Tonläge upp eller ner kommer tonläget snabbt att ändras i den valda riktningen. På detta sätt behöver du inte trycka på en knapp upprepade gånger.

6.7. Använda Navigationsmenyn

En av de mest användbara funktionerna i PLEXTALK är möjligheten att välja hur du vill navigera.

För att använda navigationsmenyn, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att flytta uppåt eller neråt. Objekten som läses upp är de alternativ som finns tillgängliga för dig vid det aktuella tillfället.

- När du har valt önskad navigationsmetod kan du använda knapparna 4 eller 6 för att flytta bakåt eller framåt på den valda navigationsnivån.
- Till exempel, när du använder den inbyggda användarmanualen och går till alternativet "Nivå 1" med knapp 2 eller 8 och sedan använder knapp 4 eller 6 kommer du att kunna flytta bakåt eller framåt till nästa rubrik på nivå 1.

6.8. Välj media och bok.

Ibland vill man växla från SD-kort till ett annat media eller tvärt om. Du kan göra detta på följande sätt:

- Tryck ner knapparna Nästa bok och Föregående bok samtidigt eller tryck ner och håll inne knappen Nästa bok eller Föregående bok eller tryck på knappen Boklista upprepade gånger tills önskad media meddelas. PLEXTALK kommer att växla mellan 3 tillgängliga alternativ, "SD-kort", "USB" och "CD".
- Efter att önskat media har meddelats, använd knappen Nästa bok eller Föregående bok för att bläddra bland det tillgängliga innehållet på mediet.
- När du hittat ett objekt som du önskar spela upp, tryck på knappen Start/Stop och uppspelningen kommer att fortsätta där den sist avbröt i det aktuella objektet.

6.9. Navigation efter mapp, kategori och titel

I situationer när det finns flera objekt på SD-kortet eller USB-minnet kan det tänkas att du vill växla från objektet som du läser till ett annat.

För att navigerar efter mappar, gör följande:

- Tryck på knappen Boklista upprepade gånger tills du hör mediet som du vill gå till.
- Tryck på knapp 2 en gång för att välja navigation efter "mapp".
- Tryck på knapparna 4 eller 6 för att flytta stegvis mellan tillgängliga mappar.
- Om mappen innehåller boken som du vill spela upp kan du trycka på knappen Nästa bok eller Föregående bok för att välja boken.

Notera: Alla ljudfiler kommer att grupperas i en ensam logisk mapp kallad "ljud".

För att välja en specifik bok via sifferknapparna, gör följande:

- Tryck på knappen Boklista upprepade gånger tills du hör mediet som du vill gå till.
- Tryck på knapp 2 två gånger för att välja navigation efter "kategori".
- Tryck på knapp 4 eller 6 för att flytta stegvis genom de tillgängliga kategorierna som är "Daisy", "Ljud", "Text" och "Ljudbok".
- Tryck på knappen Gå till.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på boken som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att spela upp eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.

6.10. Få information om media och bok.

För att få information om det aktuella mediet samt bok, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Hantera lagringsmedia" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.

- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Bokinformation för lagringsmedia" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- PLEXTALK kommer att meddela information om det aktuella mediet samt boken.
- När du har hört klart informationen, tryck Enter för att avsluta menysystemet.

6.11. Meddela aktuell status.

Du kan få en mängd information om den aktuella statusen, om rubriker, sidor, bokmärken och så vidare. Oberoende om PLEXTALK spelar eller inte, gör följande:

- Tryck på Informationsknappen en gång. Eller tryck ner och håll inne knappen Start/Stopp.
- Information kommer att uttalas.
- Om du har hört det du vill höra kan du stoppa den upplästa informationen genom att trycka på Enter eller Start/Stopp.

Notera: Om du inte vill lyssna på all information utan hoppa mellan enskilda objekt på ett snabbt sätt kan du göra detta genom att trycka på Informationsknappen upprepade gånger.

6.12. Välj uppspelningsläge

För att välja något av uppspelningslägena slumpvis uppspelning och upprepa, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Uppspelningsinställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Inställningar för slumpvis uppspelning samt upprepning" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till det önskade uppspelningsläget och aktivera det med knapp 8 eller Enter.

6.13. Använda bokmärken

6.13.1. Bokmärkestyper

Det finns 2 typer av bokmärken som du kan använda i PLEXTALK, nämligen följande:

- Numrerade bokmärken – du kan lägga in upp till 10000 numrerade bokmärken. Varje bokmärke får ett unikt nummer mellan 1 till 65000.
- Automatiska bokmärken – för varje bok, album eller textfil sparas den aktuella spelpositionen automatiskt så att uppspelningen kan återupptas från den senaste positionen nästa gång boken, albumet eller textfilen spelas. Automatiska bokmärken läggs in automatiskt av PLEXTALK när du flyttar till en annan bok, album eller fil eller när du stänger av spelaren. Du behöver inte göra någonting för att detta skall fungera.

Notera: PLEXTALK sparar automatiska bokmärken och annan information för upp till 1000 böcker, album eller textfiler.

6.13.2. Lägga in bokmärken

Du kan lägga in ett numrerat bokmärket, oberoende på om PLEXTALK spelar eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Bokmärkesknappen två gånger.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret som du vill ge detta bokmärke.
- Om du låter PLEXTALK ange ett nummer ska du inte skriva in ett nummer eller skriva in "0".
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.

Notera: När du låter PLEXTALK tilldela numret väljer PLEXTALK det minsta möjliga icke upptagna numret.

6.13.3. Navigera till bokmärken

Du kan hoppa till ett numrerat bokmärket, oberoende på om PLEXTALK spelar eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Bokmärkesknappen en gång.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på bokmärket som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du skrivit in ett giltigt nummer kommer PLEXTALK att gå till positionen för bokmärket och starta uppspelningen automatiskt.

Så snart du har lagt in bokmärken i en bok, album eller fil kommer navigationsmenyn "Bokmärke" att bli tillgänglig. Du kan navigera till nästa bokmärke med ett lägre eller högre nummer, genom att göra följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet "Bokmärke" i navigationsmenyn.
- Tryck på knapp 4 för att flytta till nästa bokmärke med ett lägre nummer. Uppspelningen kommer att starta automatiskt.
- Tryck på knapp 6 för att flytta till nästa bokmärke med ett högre nummer. Uppspelningen kommer att starta automatiskt.

6.13.4. Ta bort bokmärken

För att ta bort ett numrerat bokmärke, gör följande:

- Tryck på Bokmärkesknappen tre gånger.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på bokmärket som du vill radera.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- Tryck på knapp 0 följt av Enter för att ta bort alla bokmärken i den aktuella Daisyboken eller textfilen. När det gäller musikfiler kommer denna process att radera alla bokmärken i alla album på det aktuella mediet.

7. Spela Daisyböcker

Detta kapitel beskriver ytterligare funktioner som kan användas när du spelar upp en Daisybok.

7.1. Navigation bland rubriker

Det finns 2 sätt att navigera till rubriker inom en Daisybok. Du kan antingen gå direkt till en rubrik eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga rubriker en i taget.

För att gå direkt till en specifik rubrik, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på rubriken som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du har skrivit in ett giltigt rubriksnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK att växla till rubriken du valt och starta uppspelningen där automatiskt.

För att navigera mellan rubriker i en följd, med hjälp av rubriknivåerna, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att välja önskad navigationsnivå, till exempel nivå 1, nivå 2 etc.
- Tryck på knapp 4 för att flytta bakåt till föregående rubrik på den valda nivån. PLEXTALK kommer att flytta till rubriken och starta uppspelningen där automatiskt.
- Tryck på knapp 6 för att flytta framåt till nästa rubrik på den valda nivån. PLEXTALK kommer att flytta till rubriken och starta uppspelningen där automatiskt.

Notera: När du navigerar på detta sätt kommer PLEXTALK att stanna vid alla rubriker som ligger på samma nivå eller en högre än den nivå som du har valt. Till exempel, om du har valt att navigera på nivå 3 hittar PLEXTALK alla rubriker på nivå 1, nivå 2 och nivå 3 när du flyttar bakåt eller framåt.

7.2. Flytta till början eller slutet i en Daisyboken

För att flytta till början av en Daisybok, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger.
- Tryck på knappen Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till början av den aktuella boken.

För att flytta till slutet av en Daisybok, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger.
- Tryck på knappen 0 följt av Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till slutet av den aktuella boken.

7.3. Sidnavigation

Navigation efter sidor är väldigt lik navigering efter rubriker.

För att gå direkt till en specifik sida, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på sidan som du vill gå till.

- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du har skrivit in ett giltigt sidnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK att hoppa till sidan du valt och starta uppspelningen där automatiskt.

För att navigerar bland sidor i en följd, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet "Sida" i navigationsmenyn.
- Tryck på knapp 4 för att gå bakåt till föregående sida. PLEXTALK kommer att flytta till den föregående sidan och starta uppspelningen där automatiskt.
- Tryck på knapp 6 för att gå framåt till nästa sida. PLEXTALK kommer att flytta framåt till nästa sida och starta uppspelningen där automatiskt.

Notera: Om det inte finns några sidmarkeringar i boken kommer alternativet "Sida" inte att visas i listan i navigationsmenyn.

7.4. Navigering efter grupp

Du kan flytta bakåt eller framåt en grupp i taget, genom att göra följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet "Grupp" i navigationsmenyn.
- Använd knapp 4 för att flytta bakåt till den föregående gruppen i boken. PLEXTALK kommer att flytta till den föregående gruppen och starta uppspelningen där automatiskt.
- Använd knapp 6 för att flytta framåt till nästa grupp i boken. PLEXTALK kommer att flytta till nästa grupp och starta uppspelningen där automatiskt.

Notera: Om det inte finns några gruppmarkeringar i boken kommer alternativet "Grupp" inte att visas i listan i navigationsmenyn.

7.5. Navigation efter fras

För att flytta bakåt eller framåt en fras i taget, gör följande:

- För att hoppa tillbaka en fras, tryck på knapp 2 eller 8 för att välja alternativet "Fras" i navigationsmenyn och tryck på knapp 4 en gång. PLEXTALK kommer att flytta till den föregående frasen och starta uppspelningen där automatiskt.
- För att hoppa framåt en fras, tryck på knapp 2 eller 8 för att välja alternativet "Fras" i navigationsmenyn och tryck sedan på knapp 6. PLEXTALK kommer att flytta till nästa fras och starta uppspelningen där automatiskt.

Ett alternativ är enligt följande:

- För att hoppa tillbaka en fras, tryck på Knappen Bakåt. För att hoppa framåt en fras, tryck på Knappen Framåt.

7.6. Navigera efter skärm, stycke, rad, mening, ord eller tecken (Daisy endast text).

Daisy textfiler ger dig alltid navigationsalternativen "Skärm", "Stycke", "Rad", "Mening", "Ord" och "Tecken". Dessa alternativ blir automatiskt tillgängliga i navigationsmenyn när du använder denna typ av fil.

För att navigera efter något av dessa alternativ, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att välja önskad navigationsmetod såsom skärm, stycke, rad, mening, ord eller tecken.
- Använd knapp 4 för att hoppa bakåt i filen den valda mängden.
- Använd knapp 6 för att hoppa framåt i filen den valda mängden.

Notera: "Skärm" betyder 40 rader.

7.7. Uppspelningsläge

- Normal avspelning – det spelar genom boken och stannar när den är klar.
- Upprepa bok – den aktuella boken kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.

8. Spela upp ljudfiler eller musikskivor

Detta kapitel beskriver funktionerna som är specifika vid uppspelning av ljudfiler eller musikskivor.

PLEXTALK kan spela följande ljudfiler:

- Mp3-filer – MPEG1 Layer 3 från 32kbps till 320kbps och MPEG2 Layer 3 från 16kbps till 160kbps.
- Wave-filer
- WMA-filer; PLEXTALK har inte stöd för DRM-skyddade WMA-filer.
- AMR-WB+
- Ogg Vorbis - från 45kbps till 320kbps.

Observera: PLEXTALK kan inte spela musikskivor som inte följer CD digital audio-standarden (CD-DA), såsom kopieringsskyddade musikskivor.

8.1. Navigation efter spår

Du kan antingen gå direkt till ett spår eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga spår ett i taget.

För att gå direkt till ett specifikt spår, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på spåret som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du har skrivit in ett giltigt spårnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK att hoppa till spåret du valt och starta uppspelningen där automatiskt.

För att navigerar bland spår i en följd, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet "Spår" i navigationsmenyn.
- Tryck på knapp 4 för att gå bakåt till föregående spår. PLEXTALK kommer att flytta till det föregående spåret och starta uppspelningen där automatiskt.
- Tryck på knapp 6 för att gå framåt till nästa spår. PLEXTALK kommer att flytta framåt till nästa spår och starta uppspelningen där automatiskt.

Ett alternativ är enligt följande:

- Tryck på Knappen Bakåt för att gå bakåt till föregående spår. Tryck på Knappen Framåt för att gå framåt till nästa spår.

Notera: När du flyttar bakåt ett spår i taget men låter spåret spela mer än 3 sekunder så kommer du att hoppa till början av det aktuella spåret nästa gång du flyttar bakåt ett spår. Om du flyttar bakåt ytterligare en gång inom 3 sekunder kommer du att hoppa till föregående spår.

8.2. Flytta till början av ett album

För att flytta till början av ett album, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång.
- Tryck på knappen Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till början av den aktuella boken.

8.3. Navigation efter album

Du kan antingen gå direkt till ett album eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga album ett i taget.

För att gå direkt till ett specifikt album, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger.
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på albumet som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du har skrivit in ett giltigt albumnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK att hoppa till albumet som du valt och starta uppspelningen där automatiskt.

För att navigerar bland album i en följd, gör följande:

- Tryck på knapp 2 eller 8 och välj "Album" i navigationsmenyn.
- Tryck på knapp 4 för att gå bakåt till föregående album.
- Tryck på knapp 6 för att gå framåt till nästa album.

8.4. Uppspelningsläge

När du spelar ljudfiler kan du välja ett antal olika uppspelningslägen. De tillgängliga alternativen är följande:

- Normal avspelning – den spelar det aktuella albumet och stannar när den är klar.
- Upprepa spår – det aktuella spåret kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.
- Upprepa album – det aktuella albumet kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.
- Upprepa alla album – alla album kommer att upprepas i en följd tills uppspelningen stoppas.
- Slumpmässig upprepning – filerna i albumet kommer att spelas upp kontinuerligt i en slumpvis ordning tills uppspelningen stoppas.

8.5. Meddelar album och spår vid namn eller nummer.

När man navigerar efter album eller spår meddelar PLEXTALK album eller spår vid sitt namn eller nummer. Man kan välja om namn eller nummer skall meddelas.

För att ändra denna inställning, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Uppspelningsinställningar" och aktivera det med Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet "Läser namn på ljudfil" och aktivera det med Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att växla mellan "Läs namn på ljudfil" och "Läs nummer för ljudspår" och välj genom att trycka Enter.

9. Spela upp textfiler

Inom denna guide kan Textfiler antingen bestå av vanlig text, Microsoft Word .doc-filer eller html.

9.1. Navigera efter skärm, stycke, rad, mening, ord eller tecken

Textfiler ger dig alltid navigationsalternativen "Skärm", "Stycke", "Rad", "Mening", "Ord" och "Tecken". Dessa alternativ visas automatiskt i navigationsmenyn när du använder denna typ av fil.

För Word och html-filer som har kodats med rubriker får du ett ytterligare navigationsalternativ i navigationsmenyn. Detta kallas "Nivå".

För att navigera efter något av dessa alternativ, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att välja önskad navigationsmetod såsom skärm, stycke, rad, mening, ord eller tecken.
- Använd knapp 4 för att hoppa bakåt i filen den valda mängden text.
- Använd knapp 6 för att hoppa framåt i filen den valda mängden text.

För att navigera efter stycken i en följd, gör följande:

- För att hoppa tillbaka en stycke, tryck på Knappen Bakåt. För att hoppa framåt en stycke, tryck på Knappen Framåt.

Notera: "Skärm" betyder 40 rader.

9.2. Navigering efter procent

I textfiler kan du navigera via procent.

För att navigerar efter procent, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång.
- Skriv in en procentenhet mellan 0 och 100 och tryck Enter.
- PLEXTALK kommer att förflytta uppspelningspositionen till den nya positionen i textfilen.

9.3. Uppspelningläge

- Normal avspelning – den spelar genom boken och stannar när den är klar.
- Upprepa bok – den aktuella boken kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.

10. Spela ljudböcker.

PLEXTALK kan spela upp "ljudböcker" som finns på "audible.com". Navigation i ljudböcker liknar navigation i Daisyböcker förutom i några fall.

- Navigation efter rubrik och procent finns tillgängligt via knappen Gå Till.
- Du kan välja rubrik, tio minuter, 30 sekunder och bokmärke som navigationsalternativ med knapp 2 eller 8 och använda det med knapp 4 eller 6.
- Två uppspelningslägen "Normal avspelning" och "Upprepa bok" kan väljas under Inställning för uppspelning.

11. Kopiera.

11.1. Allmän information om kopiera och flytta

Innan du kopierar någon data bör följande punkter noteras:

- När du kopierar eller flyttar data från ett media till ett annat kallas det första för "källmedia" och det senare för "målmedia".
- Du kan kopiera olika sorters data från en CD till ett annat media. CD-läsaren kan endast användas som en källa vid kopiering.
- Om du kopierar från en musikskiva kan du välja vilken ljudkompression som ska användas. Den kopieras som ljudfiler och inte i Daisyformat.
- Under kopieringsprocessen ger PELXTALK varningsmeddelanden om det finns för lite utrymme tillgängligt på målmediet.

11.2. Kopiera en bok eller album från en CD till annat media

För att kopiera en bok eller album från en CD till ett annat media, gör följande:

- Om du kopierar en bok eller album till ett SD-kort eller USB-media, sätt in ett SD-kort eller USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är upplåst.
- Sätt in käll-CD-skivan i CD-läsaren.
- Navigera till boken eller albumet på skivan som du vill kopiera.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen.
- När du kopierar från en musikskiva, tryck på knapp 4 eller 6 för att välja önskad ljudkompression och tryck på knapp 8 eller Enter för att bekräfta ditt val.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på knapp 8 eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta.
- Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när kopieringen är slutförd.

Notera: Om du vill avbryta kopieringsprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt.

11.3. Kopiera en bok eller album mellan SD-kort och USB-media.

För att kopiera en bok eller album mellan SD-kort och USB-media, gör följande:

- Sätt in ett SD-kort och USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är upplåst.
- Navigera till boken eller albumet på källmediet som du vill kopiera.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på knapp 8 eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta.
- Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när kopieringen är slutförd.

Notera: Om du vill avbryta kopieringsprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt.

11.4. Kopieringstid för en musikskiva

För olika samplingshastigheter eller bithastigheter ges den ungefärliga kopieringstiden nedan:

Kopiering av ungefär 50 minuter ljud från en musikskiva till ett SD-kort:

- PCM 44.1kHz Stereo: Ungefär 35 minuter.
- MP3 256K Stereo Hög Kvalité: Ungefär 50 minuter.
- MP3 256K Stereo: Ungefär 40 minuter.
- MP3 128K Stereo Hög Kvalité: Ungefär 55 minuter.
- MP3 128K Stereo: Ungefär 40 minuter.

Notera: Alla tider är ungefärliga. Tiden för kopieringen beror på storleken på källboken samt antalet filer. Den beror också på SD-kortets skrivhastighet.

12. Funktioner vid mediahantering

12.1. Radera en bok

PLEXTALK ger dig möjlighet att radera en bok, album eller textfil.

För att radera en bok, gör följande:

- Gå till boken som du vill radera.
- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Hantera lagringsmedia" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Radera markerad bok" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att avbryta.

Notera: Böckerna på en optisk skiva kan inte raderas.

12.2. Radera ett SD-kort

PLEXTALK låter dig radera datan på ett SD-kort så många gånger du vill.

För att radera ett SD-kort, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Hantera lagringsmedia" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet "Radera alla filer på SD kortet" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med formateringsprocessen. Tryck knapp 8 eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta.
- Om du väljer att fortsätta kommer formateringsprocessen att starta. PLEXTALK kommer att meddela när processen är klar.

Notera: Om SD-kortet raderas kommer all data på kortet att försvinna.

13. Andra användbara funktioner

13.1. Den inbyggda hjälpfilen

För att aktivera den inbyggda hjälpfilen, gör följande:

- Tryck på knapp 0 en gång.
- Navigering i filen sker på samma sätt som i andra böcker av formatet Daisy endast text.

För att avsluta den inbyggda hjälpfilen, gör följande:

- Tryck på knapp 0 en gång.

13.2. Kontrollera systemegenskaper

För att få reda på systemversionen eller serienumret på din PLEXTALK, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systemegenskaper" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Systemversionen och serienumret kommer att upprepas till du avbryter.
- PDTB-informationen kommer endast att spelas upp om du har installerat nyckeln.
- När du har noterat informationen som du behöver, tryck knapp 8 eller Enter för att avsluta menysystemet.

13.3. Inställningar för "Överhoppningsbara"

Vissa Daisyböcker innehåller objekt som du har möjlighet att hoppa över. PLEXTALK ger dig möjlighet att välja om dessa ska hoppas över eller ej. Denna funktion kallas "Överhoppningsbara". Följande är överhoppningsbara element:

- Sidnummer
- Fotnot
- Anteckningsreferenser
- Kommentarer
- Radnummer
- Sidfält
- Producentanteckningar

För att ställa in "Överhoppningsbara", gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Överhoppningsbara" och aktivera det med Enter.
- Använd knapp 2 eller 8 för att välja överhoppningsbara element och använd knapp 4 eller 6 för att välja "Hoppa över" eller "Spela upp".
- Efter att du ställt in vilka element som ska hoppas över och vilka som inte ska hoppas över, tryck Enter.

13.4. Återställ PLEXTALK till fabriksinställningar

För att återställa alla inställningarna till fabriksinställningar, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Återställer till grundinställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck Enter för att återställa alla inställningar till fabriksens standardinställningar eller knappen Avbryt för att avbryta.
- PLEXTALK startar om efter en kort stund.

Nedan följer en lista över fabriksinställningarna för PLEXTALK.

- Volym för uppspelning (huvudvolym): 13
- Hastighet för uppspelning: Normal
- Tonläge för uppspelning: Normal
- Inställning för uppspelning: Normal uppspelning
- Överhoppningsbara element: Spela
- Guidevolym: Normal
- Talsyntesröst: Svenska
- Vänteljud: Vänteljud 1
- Tonläge för talsyntes: Normal

Appendix A - Huvudspecifikationer

Notera: Shinano Kenshi reserverar alla rättigheter till att modifiera produkterna som beskrivs i denna manual när som helst utan tidigare förvarning.

Detta avsnitt beskriver i detalj huvudspecifikationerna för PLEXTALK PTN2.

Allmänna specifikationer

CD-läsaren:

Inmatning via springa

Kompatibla CD-skivor:

CD, CD-R och CD-RW med 12 centimeter diameter. PLEXTALK är endast kompatibel med runda 12cm CD-skivor. 8 cm CD-skivor samt oregelbundet formade CD-skivor, som t ex visitkortsformade, kan skada enheten och skall inte användas.

Plats för SD-kort:

SD/SDHC card

Uppspelningsbart innehåll:

Böcker som följer standarden DAISY 2.0, 2.02 och 3.0.

Ljudfiler i formatet MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) format och Audible Format 4(.aa).

Musikskivor (CD-DA)

Ljudingång och ljudutgång:

Hörlursuttag (Stereo)

Inbyggd mikrofon (Mono)

Anslutningskontakter för externa enheter:

USB 2.0

Klockprecision:

Ungefär 60 sekunder per månad

Elektrisk strömkälla:

Strömadapter, AC 100 V till 240 V, 50 eller 60 Hz

Dimensioner och vikt:

Längd 219 mm

Bredd 170 mm

Höjd 56 mm

Ungefärlig vikt 1300g

Strömkonsumtion (maximalt):

25W

Arbetstemperatur och luftfuktighet:

Fahrenheit från 40 till 104

Celsius från 5 till 40

Luftfuktighet från 20% till 80%, ingen fukt.

Ljudegenskaper

Hörlurar (linjeutgång):

Kompatibel impedans 32 ohm, obalancerad
Kontakt, 3.5mm i diameter stereo mini-plugg

Inbyggd högtalare:

Utgångsimpedans 4 ohm
Uteffekt 2.0W

Huvudfunktioner

Guideröst:

Meddelar information om den aktuella operationen i talform
Ger knappbeskrivningar i knappbeskrivningsläget
Uttalar menyalternativ
Ger hjälpinformation (tryck på Informationsknappen)

Sökfunktion:

Rubrik, Grupp, Sida, Fräs, Bokmärke, Album, Spår, Skärm, Stycke, Rad, Mening, Ord, Tecken

Justering av volym:

0 till 25 (i steg om 1)

Justering av guidevolym:

-5 till +5 (i steg om 1)

Justering av uppspelningshastighet:

11 inställningar från -2 till 0 till +8 (i steg om 1)
Normal hastighet är 0.
-2 är halv hastighet, +4 dubbel hastighet, +8 trippel hastighet.

Justering av tonhöjd:

13 inställningar från -6 till 0 till +6 (i steg om 1)
Normal tonhöjd är 0.

Minnesfunktion:

Bokmärken, maximalt 10000

Batterispecifikationer

Typ: Ni-MH

Dimensioner:

Längd 53,64 mm

Bredd 56,68 mm

Höjd 29,00 mm

Kapacitet: 1800 mAh

Laddningstid: Ungefär 4 timmar

Drifttid:

Daisyformat, CD-uppspelning, 5 timmar

Musikskiva (CD-DA-format), CD-uppspelning, 2 timmar

Daisyformat, SD-kort-uppspelning, 8 timmar

Notera: Alla tider är ungefärliga

Notera: Laddningstiden och drifttiden kan variera beroende på omgivande temperatur samt arbetsförhållanden.

Upphovsrättsinformation om Ogg Vorbis.

Denna mjukvara tillhandahålls av upphovsrättsägarna "som den är" och alla tydliga eller antydda garantier, inklusive, men ej begränsad till, den antydda garanti av säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål är förkastad. Inte i något fall skall grundaren eller medarbetare hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, tillfällig, speciell eller följdriktig skada (inklusive, men ej begränsad till, anskaffande av utbytesvara eller tjänst; förlust, data, vinst eller användning; eller störning av affärsverksamhet) hur den än uppkommit och oberoende av alla ansvarsteorier samt om det står i kontrakt, eller inneburit kränkning (inklusive vårdslöshet eller annat) som uppstått på något sätt genom användning av denna mjukvara, även om information om möjlighet till sådan skada tillhandahållits.

Appendix B - Menyhierarkin

Detta appendix listar alla menyalternativ i huvudmenyn samt underliggande menyer i deras hierarkiska ordning.

Uppspelningsinställningar:

- Inställningar för slumpvis uppspelning samt upprepning
 - Normal avspelning
 - Upprepa bok (Daisy, text, ljudbok)
 - Upprepa spår (Ljudfiler)
 - Upprepa album (Ljudfiler)
 - Upprepa alla album (Ljudfiler)
 - Slumpmässig upprepning (Ljudfiler)
- Läser namn på ljudfil
 - Läs namn på ljudfil
 - Läs nummer för ljudspår

Överhoppningsbara:

- Välj sidnummer
 - Spela upp
 - Hoppa över
- Välj fotnot
 - Spela upp
 - Hoppa över
- Välj anteckningsreferenser
 - Spela upp
 - Hoppa över
- Välj kommentarer
 - Spela upp
 - Hoppa över
- Välj radnummer
 - Spela upp
 - Hoppa över
- Välj sidofält
 - Spela upp
 - Hoppa över
- Välj producentanteckningar
 - Spela upp
 - Hoppa över

Hantera lagringsmedia:

- Bokinformation för lagringsmedia
- Radera alla filer på SD Kortet
- Radera markerad bok (album)

Systeminställningar:

- Systemegenskaper

 - Systemversion

 - Serienummer

 - Installerad nyckel (om någon finns)

- Välj guidevolym (på en skala från -5 till +5)

- Välj talsyntesröst

 - Svenska

 - Engelska

- Välj vänteljud

 - Vänteljud 1

 - Vänteljud 2

 - Inget vänteljud

- Ställ in datum och tid

- Inställning av tonhöjd för talsyntes (på en skala från -5 till +5)

- Återställer till grundinställningar

Appendix C - Felsökning

Generella driftproblem

Symptom: Du trycker på Strömknappen med enheten startar inte.

Möjlig orsak: Glapp eller lös sladd eller strömadapter.

Lösning: Sätt in strömkontakten ordentligt i PLEXTALK och försäkra dig om att strömadaptern är ordentligt insatt i väggkontakten.

Symptom: Strömmen är på med PLEXTALK fungerar inte.

Möjlig orsak: Knapplåset är på.

Lösning: Slå av knapplåset genom att trycka på knapparna Bakåt och Framåt samtidigt.

Symptom: PLEXTALK stänger inte av och inga knappar fungerar.

Möjlig orsak 1: Knapplåset är på.

Lösning: Slå av knapplåset genom att trycka på knapparna Bakåt och Framåt samtidigt.

Möjlig orsak 2: Okänt fel.

Lösning: Tryck ner och håll inne knapparna Automatisk avstängning och Strömknappen i mer än 10 sekunder, PLEXTALK kommer att starta om. Om detta inte fungerar, ta ur strömadaptern och batteriet ur enheten och sätt in dem igen.

Symptom: Samma album eller spår upprepas hela tiden.

Möjlig orsak: Uppspelningsläget upprepa har valts.

Lösning: Växla till läget "Normal uppspelning" i menyn "Inställningar för uppspelning".

Symptom: Det finns ingen guideröst.

Möjlig orsak 1: Guidevolymen har ställts till '0'.

Lösning: Öka guidevolymen så att guiderösten kan höras.

Möjlig orsak 2: Strömmen är avslagen.

Lösning: Slå på strömmen.

Felmeddelanden vid uppspelning av Daisy

Guideröst: "SD-kortet stöds ej" eller "USB-enheten stöds ej".

Möjlig orsak: SD-kortet eller USB-mediet har formaterats med ett filsystem som inte stöds.

Lösning: Sätt in ett SD-kort som har formaterats som FAT-16 eller FAT-32.

Guideröst: "Sidan finns inte"

Möjlig orsak: Den angivna sidan finns inte i den aktuella boken.

Lösning 1: Ange en giltig sida. Tryck på Informationsknappen för att få information om sidorna i den aktuella boken och tryck sedan på knappen Gå till en gång samt skriv in ett giltigt sidnummer.

Lösning 2: Välj "Sida" med knapp 2 eller 8 och använd sedan knapp 4 eller 6 för att flytta bakåt eller framåt en sida i target.

Guideröst: "Ingen bok har valts. Var god välj en annan bok."

Möjlig orsak: Det finns inget media med källan anslutet.

Lösning: Sätt in antingen ett SD-kort, USB-media eller en CD med passande innehåll. Välj sedan en bok med knappen Föregående bok eller Nästa bok.

Guideröst: "Rubriken finns inte"

Möjlig orsak: Den angivna rubriken finns inte i den aktuella Daisyboken.

Lösning 1: Tryck Informationsknappen för att få rubrikinformation och tryck sedan på knappen Gå till två gånger och försök att skriva in ett giltigt rubriknummer.

Lösning 2: Välj navigationsnivå med knapp 2 eller 8 och flytta sedan bakåt eller framåt med knapp 4 eller 6.

Guideröst: "Bokmärket finns inte"

Möjlig orsak: Det finns inga bokmärken alls eller det angivna bokmärket finns inte.

Lösning 1: Tryck på Bokmärkesknappen en gång och skriv in ett giltigt bokmärkesnummer.

Lösning 2: Välj "Bokmärke" med knapp 2 eller 8 och flytta sedan bakåt eller framåt med knapp 4 eller 6.

Guideröst: "Läsfel"

Möjlig orsak: Boken kan inte spelas upp.

Lösning: Tryck på knappen Föregående bok eller Nästa bok för att försöka välja en annan bok eller växla till ett annat media som innehåller en bok.

Fel vid uppspelning av musikskivor eller CD med ljudfiler

Guideröst: "Nummer xx finns inte" (När du försöker navigera till ett numrerat album)

Möjlig orsak: Det finns endast ett album eller det angivna albumet innehåller inte ljudfiler.

Lösning 1: Tryck på knappen Gå till två gånger och skriv in ett giltigt albumnummer.

Lösning 2: Använd knapp 2 eller 8 för att välja "Album" i navigationsmenyn och använd knapp 4 eller 6 för att välja albumet du önskar.

Guideröst: "Nummer xx finns inte" (När du försöker navigera till ett numrerat spår)

Möjlig orsak: Det angivna spåret finns inte på musikskivan eller bland ljudfilerna.

Lösning 1: Tryck på knappen Gå till en gång och skriv in ett giltigt spårnummer.

Lösning 2: Använd knapp 2 eller 8 för att välja "Spår" i navigationsmenyn och använd knapp 4 eller 6 för att välja spåret du önskar.

Fel vid mediahantering

Guideröst: "Det finns inget målmedia"

Möjlig orsak: Du har inte satt in någon passande media för kopiering.

Lösning: Sätt in antingen ett SD-kort eller anslut ett USB-media med tillräcklig lagringsplats för att utföra kopieringen och försök igen.

Guideröst: "SD-kortet är låst"

Möjlig orsak: Du har skrivskyddat SD-kortet med hjälp av låsknappen på sidan av kortet.

Lösning: Ta ut kortet, flytta låsknappen till sin upplåsta position, sätt in det i PLEXTALK samt försök igen. Lösning 2: Välj navigationsnivå med knapp 2 eller 8 och flytta sedan bakåt eller framåt med knapp 4 eller 6.

Guideröst: "Bokmärket finns inte"

Möjlig orsak: Det finns inga bokmärken alls eller det angivna bokmärket finns inte.

Lösning 1: Tryck på Bokmärkesknappen en gång och skriv in ett giltigt bokmärkesnummer.

Lösning 2: Välj "Bokmärke" med knapp 2 eller 8 och flytta sedan bakåt eller framåt med knapp 4 eller 6.

Guideröst: "Läsfel"

Möjlig orsak: Boken kan inte spelas upp.

Lösning: Tryck på knappen Föregående bok eller Nästa bok för att försöka välja en annan bok eller växla till ett annat media som innehåller en bok.

Fel vid uppspelning av musikskivor eller CD med ljudfiler

Guideröst: "Nummer xx finns inte" (När du försöker navigera till ett numrerat album)

Möjlig orsak: Det finns endast ett album eller det angivna albumet innehåller inte ljudfiler.

Lösning 1: Tryck på knappen Gå till två gånger och skriv in ett giltigt albumnummer.

Lösning 2: Använd knapp 2 eller 8 för att välja "Album" i navigationsmenyn och använd knapp 4 eller 6 för att välja albumet du önskar.

Guideröst: "Nummer xx finns inte" (När du försöker navigera till ett numrerat spår)

Möjlig orsak: Det angivna spåret finns inte på musikskivan eller bland ljudfilerna.

Lösning 1: Tryck på knappen Gå till en gång och skriv in ett giltigt spårnummer.

Lösning 2: Använd knapp 2 eller 8 för att välja "Spår" i navigationsmenyn och använd knapp 4 eller 6 för att välja spåret du önskar.

Fel vid mediahantering

Guideröst: "Det finns inget målmedia"

Möjlig orsak: Du har inte satt in någon passande media för kopiering.

Lösning: Sätt in antingen ett SD-kort eller anslut ett USB-media med tillräcklig lagringsplats för att utföra kopieringen och försök igen.

Guideröst: "SD-kortet är låst"

Möjlig orsak: Du har skrivskyddat SD-kortet med hjälp av låsknappen på sidan av kortet.

Lösning: Ta ut kortet, flytta låsknappen till sin upplåsta position, sätt in det i PLEXTALK samt försök igen.

Appendix D - Ordlista

AMR-WB+

Är en standard för kompression av ljuddata och är en av 3 standarder som PLEXTALK känner igen samt kan spela upp. Förkortningen står för Adaptive Multi Rate - WideBand plus. Det är en ljudcodec som är en påbyggnad till AMR-WB. Den lägger till stöd för stereosignaler samt högra samplingshastigheter.

Bithastighet

Bithastighet är en mätning på dataöverföringshastighet. Siffran talar om vilket antal databitar som överförs per sekund.

CD-DA

Detta är ett CD-format. CD-DA är en förkortning för CD-Digital Audio (digitalt ljud). Musikkivor som spelas upp med ljudutrustning sparas i detta format.

Upphovsrättsinformation

Detta innehåller information om året för publikation samt ägaren av bokens upphovsrätt.

Daisybok

DAISY står för Digital Accessible Information System (system för tillgänglig digital information). En inspelning gjord i Daisyformat är generellt kallad för Daisybok eller Daisytitel. Daisyformatet ger bokens producent möjlighet att koda en hierarkis navigationsstruktur med upp till 6 nivåer. Mer information om Daisyformatet finns i kapitel 3 i denna manual.

dB

En förkortning för decibel. En decibel är en enhet för mätning av volym.

Försidor

Framsidan på vissa böcker. Dessa är vanligtvis numrerade med romerska siffror eller alfabetiska tecken istället för vanliga siffror. I PLEXTALK spelas dessa in som försidor. Du kan inte använda knappen Boklista för att flytta till denna typ av sida men du kan däremot flytta till denna typ av sida genom att välja alternativet "Sida" i navigationsmenyn och flytta bakåt eller framåt med knapparna 4 och 6.

Grupp

En grupp är en navigationsfunktion i Daisyformatet som låter användaren hitta specifika objekt snabbt. Till exempel kan grupper användas för att markera diagram, tabeller eller bilder.

Rubrik

Första frasen i ett stycke och platsen där stycket ändras kallas ofta för rubrik.

HTML

En förkortning för "Hyper Text Markup Language". HTML är det dominerande programmeringsspråket som används för att bygga upp strukturen för informationen som visas på webbsidor. Det är ett strukturerat språk som kan visa olika objekt såsom paragrafer, rubriker, sidor, länkar, bilder och tabeller på ett standardiserat sätt så att webbläsarna kan känna igen och visa dem korrekt.

Nivå

Producenten av en Daisybok kan använda upp till 6 nivåer av navigation. Nivåer används vanligtvis för att identifiera saker som kapitel, avsnitt och underavsnitt i inspelningen. När strukturen har skapats kan användaren hoppa över information som de inte vill läsa för stunden.

Media

Med detta menas media från vilket PLEXTALK läser. PLEXTALK kan använda SD-kort, USB-media, det interna minnet samt CD-skivor. Du kan växla mellan olika medier med Mediaknappen på PLEXTALK.

Meny

PLEXTALK har ett menysystem från vilket flera funktioner kan nås. För att komma åt menyn, tryck på Menyknappen. Menyn innehåller "Inställningar för uppspelning", "Överhoppningsbara element", "Hantera lagringsmedia" och "Systeminställningar".

Mp3

Det är en förkortning för MPEG Audio Layer 3 (ISP eller IEC 13818-3:1995). Det är en standard för komprimering av ljudinformation som kan bibehålla CD-kvalité med en filstorlek på en tiondel av originalet.

Skivor med multipla böcker

Dessa innehåller flera olika böcker på en och samma skiva.

Multivolymskivor

Det är en Daisybok som är inspelad på flera skivor. Hela boken ligger uppdelad på flera skivor.

Fras

I Daisyformatet är en fras det inspelade ljudet mellan en stunds tystnad och nästa. Längden av tystnad som upptäcks innan en ny fras skapas kallas för paustid mellan fraser.

SD-kort

Secure Digital (SD) är ett minneskort av flash-typ utvecklat av Matsushita, SanDisk och Toshiba för användning i portabla enheter. Idag används det överallt i digitalkameror, datorer, PDA-enheter, mobiltelefoner, GPS-mottagare och TV-spel.

SDHC-kort

Står för Secure Digital High Capacity och är ett minneskort av flash-typ som klarar minneskapaciteter större än 4GB.

Avsnitt

Ett avsnitt i en Daisybok är en mängd ljud mellan en rubrik och nästa. Rubriker används för att markera kapitel, avsnitt och underavsnitt i en bok. Blanda inte ihop avsnitt i en Daisybok med avsnitt i en bok. Se kapitel 3 för ytterligare information om Daisystrukturen.

Specialsidor

Detta är en Daisyfunktion som låter vissa sidor behandlas av regler som skiljer sig från textsidorna. Till exempel infogade tabeller och figurer i böcker spelas in som specialsidor. Du kan inte navigera till en specialsida med hjälp av knappen Boklista men du kan stega fram till dem med hjälp av alternativet "Sida" i navigationsmenyn.

Talsyntes

Talsyntesen konverterar text till syntetiskt tal och ger tillgång till information som annars vore otillgänglig.

Titel (Daisy-definition)

Titelsidan ger bokens hela titel, namnet på författaren, redigerare eller översättare samt namnet och platsen för publiceringen. Om boken är en ny utgåva av något som tidigare publicerats kan nummret på utgåvan också visas på titelsidan efter bokens titel. Ytterligare objekt såsom året för publikationen samt förord visas också på titelsidan.

USB

Står för Universal Serial Bus. Det är en standard för anslutning av yttre enheter till datorer. Syftet är att använda samma kopplingstyp för möss, tangentbord, skrivare, modem och högtalare som tidigare har varit olika.

Wave-filer

Detta är ett digitaliserat ljudformat för Microsoft Windows som har ".wav" som filändelse. De flesta programmen som används för att plocka ut CD-spår (CD-ljud) och skriva dem till en hårddisk använder filtypen wave. Försäkra dig om att du har tillräckligt med utrymme på din hårddisk när du plockar över låtar från en CD till wave-filer. Till exempel tar en 4 minuters sång ungefär 40-50 MB i utrymme när den skrivs som en wave-fil. Det är en digital konvertering som resulterar i en perfekt kopia av originalsången eller spåret om den görs korrekt. Wavefiler kan ha olika kvalitéer beroende på hur de skapas eller sparas men den vanligaste är 44.1kHz, 16-Bit, stereo. Detta motsvarar ljudspår på en Musikskiva.

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

Info@polarprint.se
help@polarprint.se

Region nord

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86

Umeå

Twistevägen 47C
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72
Fax 090-13 94 83

Region öst

Stockholm

Liljeholmsvägen 30
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70
Fax 08-442 42 79

Region väst

Göteborg

Aminogatan 34
431 53 MÖLNDAL
Tel 031-339 99 90
Fax 031-80 26 52

Region syd

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 MALMÖ
Tel 040-97 17 00
Fax 040-97 17 71

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 VÄXJÖ
Tel 0470-390 30