

Kom igång (lättläst)



Victor Stratus 12 (Basic och M)

1 Kom igång

1.1 Uppackning

När spelaren packas upp sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade funktioner.



Victor Stratus med borttaget överlägg



Victor Stratus med överlägget monterat

Vid leverans följer, förutom själva spelaren, tangentbordsöverlägget och denna instruktion, följande med:

- Batteriladdare
- En komplett instruktionsbok på svenska på papper
- En skiva med användarmanualen som talbok

1.2 Översikt av Victor Stratus med överlägget på



1.3 Slå på spelaren och spela upp en bok eller en text

Slå på spelaren genom att trycka på och hålla inne På/av tills en signal hörs och knappen lyser grönt.

Notera: Uppstartsprocessen tar ungefär 15 sekunder.

Det går att spela upp Daisyböcker, ljudböcker och musikskivor. Tryck på Start/stopp för att börja spela upp boken.

2 Uppspelningsfunktioner

Gäller uppspelning av alla format, Daisyböcker, ljudböcker och MP3-filer.

2.1 Starta och stoppa uppspelningen

- Tryck på knappen Start/Stopp. Uppspelningen kommer att återupptas från positionen där den stoppades tidigare.
- För att stoppa uppspelningen, tryck på knappen Start/Stopp.

2.2 Snabbspolning framåt och bakåt

Funktionerna snabbspolning framåt och bakåt använder knapparna Spola bakåt och Spola framåt på var sin sida om knappen Start/Stopp.

- För att spola tillbaka, tryck ner och håll inne knappen Bakåt. Uppspelningen kommer att starta när knappen släpps.
- För att spola framåt, tryck ner och håll inne knappen Framåt. Uppspelningen kommer att starta när knappen släpps.

När en Daisybok med ljud eller ljudfiler spelas och knappen Framåt eller Bakåt hålls inne kommer snabbspolningen framåt eller bakåt att hoppa 1 minut, 2 minuter, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter och så vidare.

2.3 Ändra volymen för uppspelning

Volymen kan ställas in med 1 steg i taget på en skala från 1 till 20 där 1 är tyst och 20 är högsta volymen.

- För att öka volymen vid uppspelning, tryck Volym upp upprepade gånger för att öka volymen ett steg i taget.
- För att minska volymen vid uppspelning, tryck Volym ner upprepade gånger för att minska volymen ett steg i taget.

2.4 Ändra tonläget för ljudet

Det finns 15 inställningar för tonläge från -7 till +7.

- Öka Tonläget genom att trycka på Tonläge upp.
- För att minska tonläget, Tryck på knappen Tonläge ner.
- När man växlar till normalt tonläge, 0, hörs ett pip.

2.5 Ändra läshastighet

Det finns 14 inställningar för läshastighet från -3 till +10.

- Öka hastigheten genom att trycka på Läshastighet upp.
- För att minska hastigheten, tryck på knappen Läshastigheten ner.
- När man växlar till normalt tonläge, 0, hörs ett pip.


3 Navigera i en bok

En Daisybok innehåller ofta kapitel, avsnitt och sidor. Det går att hoppa i bokens struktur. För att kunna göra det måste tangentbordsöverlägget tas bort. Strukturen ser olika ut i olika böcker. Den minsta beståndsdelen i en Daisybok med ljudfiler är alltid fras (normalt en mening). Sen kan det finnas rubriker i olika nivåer. Nivå 1 kan vara delar i boken, nivå 2 kapitel och nivå 3 underrubriker i kapitlet. Observera igen att strukturen skiljer sig mellan olika böcker och detta var bara ett exempel.

Ett exempel:

Jag vill hoppa till början på ett kapitel i en bok som har kapitel på Nivå 2. Gör så här:

- Tryck kappen Nivå uppåt eller knappen Nivå ner tills spelaren säger "Nivå 2".
- Tryck knappen Framåt eller Bakåt
- Uppspelingen börjar automatiskt på det valda stället

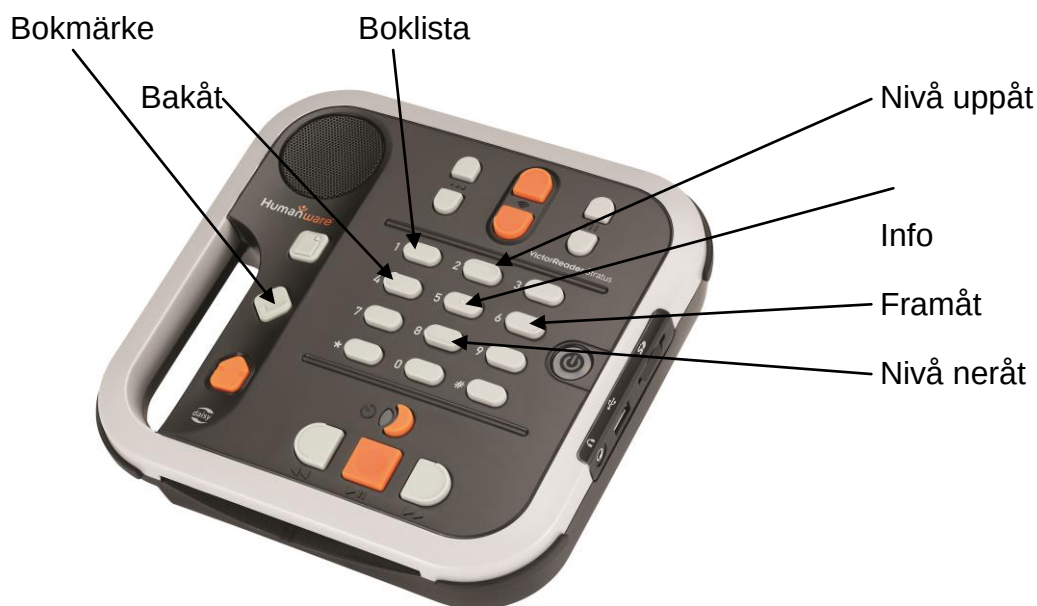

En fullständig manual på papper och CD följer med spelaren vid leverans.

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Region nord

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72

Region öst

Stockholm

Rosterigränd 14
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70

Region väst

Falköping

Tel 076-241 69 89

Region syd

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö
Tel 040-97 17 00

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö
Tel 0470-39030