

Snabbguide för ClearView C

Grundläggande kontrollpanel



Överblicks-knapp Förstoringsvred & Ström På / Av
Lägesknapp

Överblicks-knapp: Tryck en gång för överblicksläge, tryck igen för att zooma in på intressant område.

Tryck ner i 3 sekunder för positionslokator – visar röd punkt där kameran tittar.

Förstoringsvred & Lägesknapp: Vrid förstoringsvredet för att öka eller minska förstoring. Tryck på Lägesknappen för att växla mellan olika visningslägen. Tryck på Lägesknappen i 4 sekunder för att stänga av belysningen.

Ström På / Av: Tryck för att starta ClearView C. Tryck igen för att stänga av.



Höger och vänster bromsreglage: Dra mot mitten för att öka friktion eller helt låsa läsbordet. Dra mot kanterna för att lösgöra läsbordet. Höger påverkar läsbordet i djupled, vänster påverkar läsbordet i sidled.

Avancerad kontrollpanel (tag lös och rotera kontrollpanelen)



Justera bilden: Vid otydlig bild, tryck på knappen och vrid sedan på förstoringsvredet för att prova justera bilden.

Läslinjer & gardiner: Tryck för att växla mellan olika läslinjer och gardiner.

Tryck ner i 3 sekunder för att justera aktiva läslinjer eller gardiner. Ändra läget med förstoringsvredet. Tryck igen för att ändra andra läslinjen/gardinen och justera med förstoringsvredet.

Meny: Aktiverar menyn i ClearView C. Ändra menyval med förstoringsvredet. Bekräfta med Lägesknappen (mitt i förstoringsvredet).

Växla bild: Växla bild till annan bildkälla som t ex en dator om en sådan är ansluten till ClearView C.

Fokuslås: Tryck på knappen för att låsa fokus så att enheten inte försöker autofokusera hela tiden. Bra när man skriver eller sysslar med handarbete under kameran.