


# Compact + HD Snabbguide

Starta enheten genom att trycka ner och hålla inne den **Orangefärgade På/Av-knappen** uppe till vänster om skärmen i en sekund.



Handtaget kan fällas ut för att enkelt hålla i enheten. Ta tag under På/Av-knappen. För handtaget uppåt och sväng ut det tills det klickar på plats till höger om skärmen.

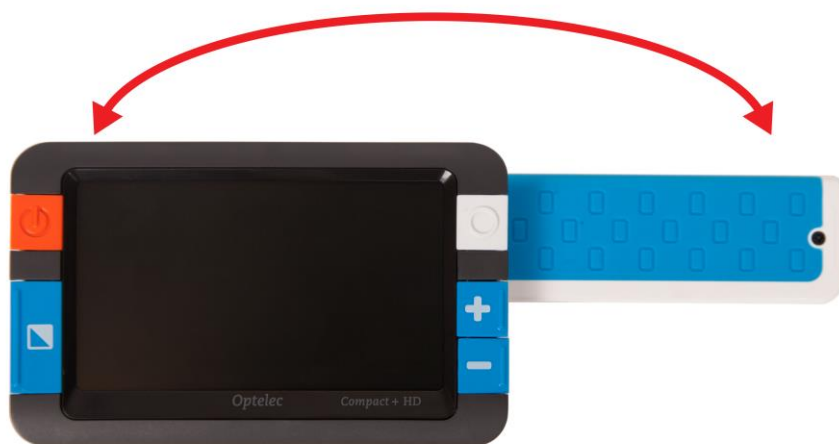

## Förstoring



Genom att trycka på + eller – knapparna till höger om skärmen så ökas eller minskas förstoringen.

## Frys bild



Knappen för att ta ett foto (frysa bilden) sitter till höger ovanför förstöringsknapparna. Tryck på den för att ta en temporär bild som kan studeras i lugn och ro.

## Visningsläge



Genom att trycka på knappen för visningsläge, på vänster sida om skärmen så växlar man mellan de visningslägen som finns. Genom att hålla inne denna knapp i tre sekunder så slås belysningen av.

Ladda batteriet i enheten genom att ansluta strömadaptern till strömkontakten på vänstra kanten nära knappen Visningsläge.

