

Snabbguide för ClearView C

Grundläggande kontrollpanel



Överblicks-knapp

Ström På / Av

Förstoringsvred & Lägesknapp

Överblicks-knapp: Tryck en gång för överblicksläge, tryck igen för att zooma in på intressant område.

Tryck ner i 3 sekunder för positionslokator – visar röd punkt där kameran tittar.

Förstoringsvred & Lägesknapp: Vrid förstoringsvredet för att öka eller minska förstoring. Tryck på Lägesknappen för att växla mellan olika visningslägen.

Tryck på Lägesknappen i 4 sekunder för att stänga av belysningen.

Ström På / Av: Tryck för att starta ClearView C. Tryck igen för att stänga av.



Höger och vänster bromsreglage: Dra mot mitten för att öka friktion eller helt låsa läsbordet. Dra mot kanterna för att lösgöra läsbordet. Höger påverkar läsbordet i djupled, vänster påverkar läsbordet i sidled.

Avancerad kontrollpanel

(tag lös och rotera kontrollpanelen)



Justera bilden

Meny

Fokuslås

Läslinjer & gardiner

Växla bild

Justera bilden: Vid otydlig bild, tryck på knappen och vrid sedan på förstoringsvredet för att prova justera bilden.

Läslinjer & gardiner: Tryck för att växla mellan olika läslinjer och gardiner.

Tryck ner i 3 sekunder för att justera aktiva läslinjer eller gardiner. Ändra läget med förstöringsvredet. Tryck igen för att ändra andra läslinjen/gardinen och justera med förstöringsvredet.

Meny: Aktiverar menyn i ClearView C. Ändra menyval med förstöringsvredet. Bekräfta med Lägesknappen (mitt i förstöringsvredet).

Växla bild: Växla bild till annan bildkälla som t ex en dator om en sådan är ansluten till ClearView C.

Fokuslås: Tryck på knappen för att låsa fokus så att enheten inte försöker autofokusera hela tiden. Bra när man skriver eller sysslar med handarbete under kameran.