

## Användarmanual



EXPLORE 3

20151127










# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>INTRODUKTION .....</b>	<b>2</b>
<b>1. DELAR OCH TILLBEHÖR .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ÖVERSIKT .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ANVÄNDA DIN EXPLORÉ 3.....</b>	<b>4</b>
3.1 KOPPLA FAST REMMEN.....	4
3.2 ANVÄNDA DIN EXPLORÉ 3 .....	4
3.2.1 Ström på/av.....	4
3.2.2 Öka och minska förstoring .....	5
3.2.3 Färgläge samt kamerabelysning.....	6
3.2.4 Justering av ljusstyrka.....	7
3.2.5 Frys-funktionen .....	7
3.2.6 Minnesfunktionen.....	8
3.2.7 Ställa in strömsparfunktionen.....	8
3.2.8 Utmatning till TV.....	8
<b>4. FELSÖKNING .....</b>	<b>9</b>
<b>5. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .....</b>	<b>10</b>
<b>6. TEKNISKA SPECIFIKATIONER .....</b>	<b>11</b>
<b>7. GARANTI .....</b>	<b>12</b>



# Introduktion


explorē 3 är en handhållen elektronisk förstoringskamera designad för att vara elegant och portabel. Den passar i fickan så du kan alltid ha den med dig när du behöver den. Enhetens avancerade autofokus och skarpa bild löser många problem med otydlig bild, skuggor samt svindelkänsla. Den vikbara skrivställningen gör skrivning enkel och bekväm. 8 kontrastlägen finns tillgängliga för användare. Jämfört med andra 3,5 tums förstoringskameror ger explorē 3:s eleganta och portabla design tydlighet, bekvämlighet samt stabilitet så att du kan njuta av läsningen så mycket som möjligt.

## 1. Delar och tillbehör

 Förstoringskamera	 Handledsrem	 Användarmanual
 Video-kabel	 Skyddande fodral	 Strömadapter
 USB-kabel		


## 2. Översikt

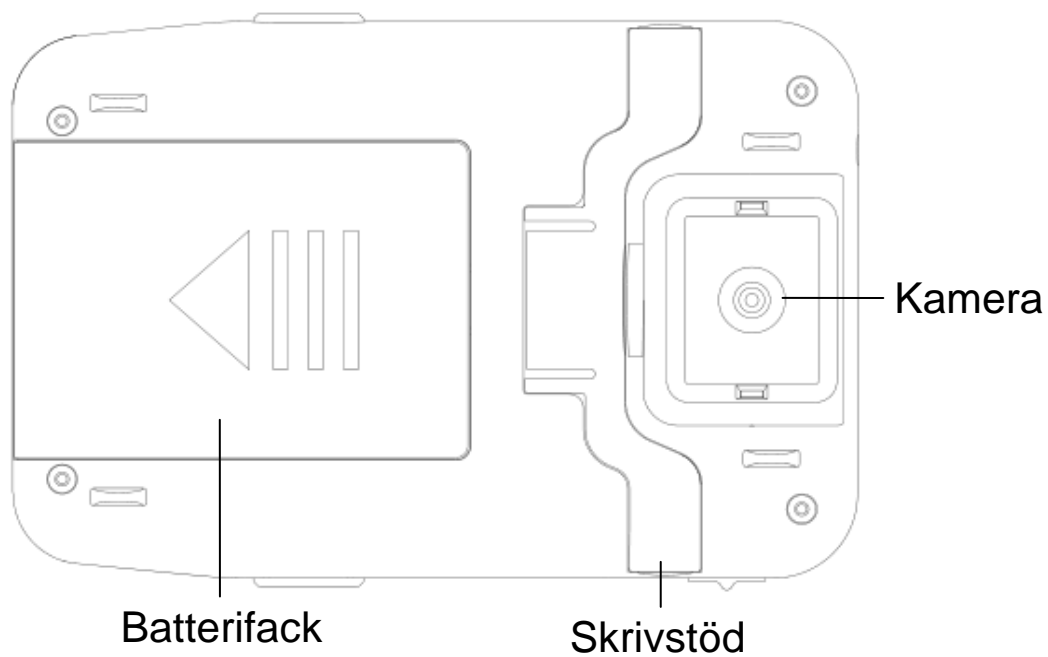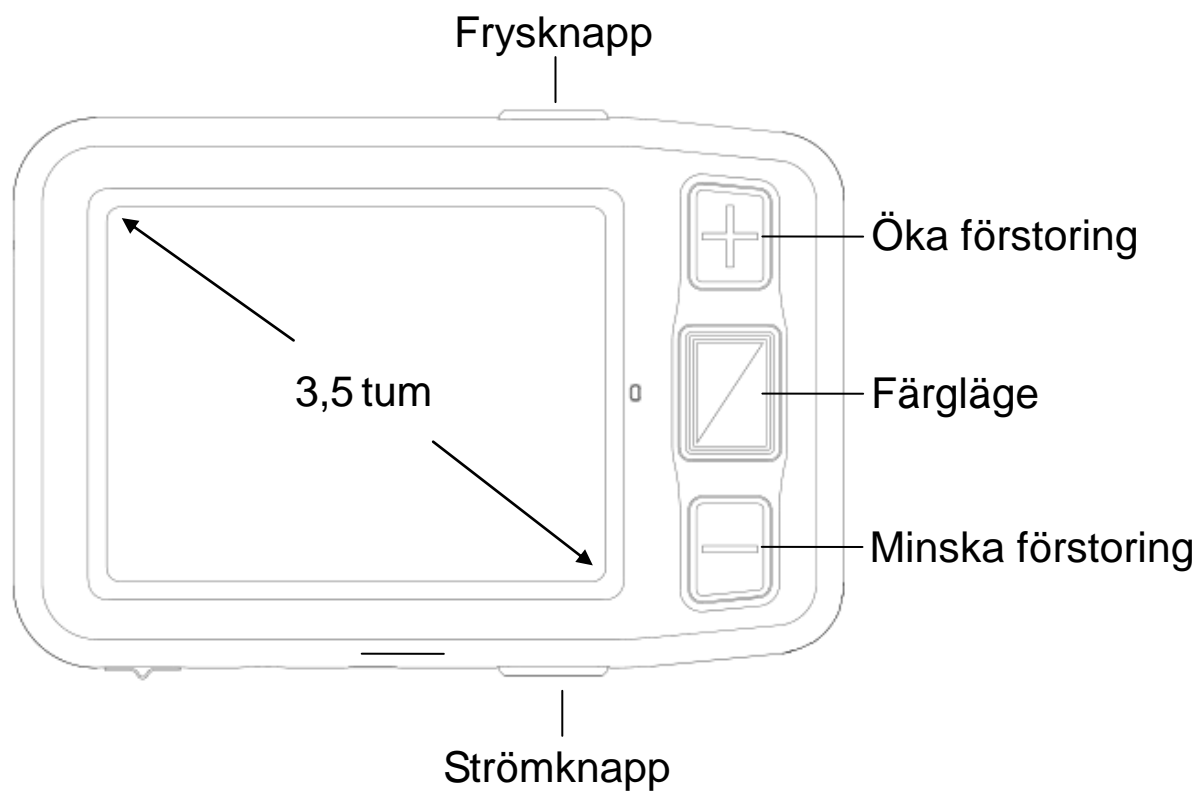

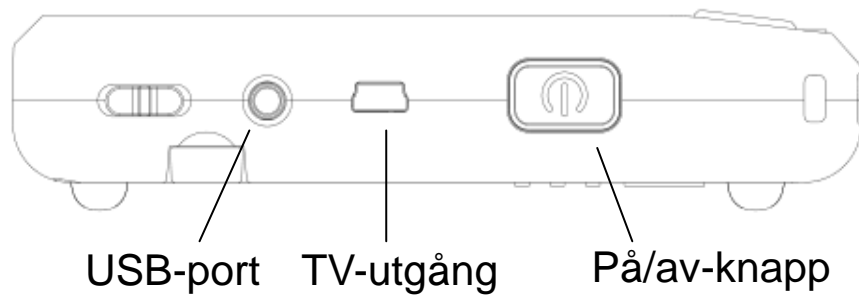


## 3. Använda din explorē 3

### 3.1 Koppla fast remmen

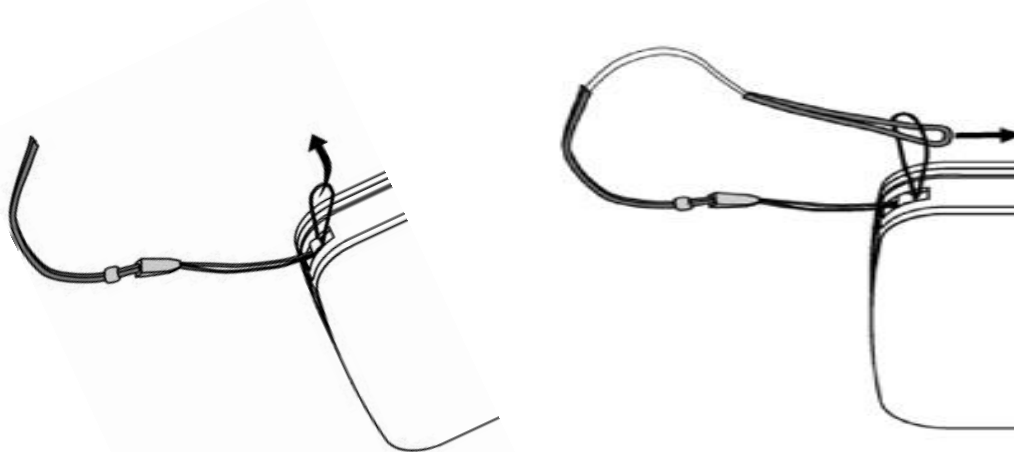


### 3.2 Använda din explorē 3

#### 3.2.1 Ström på/av

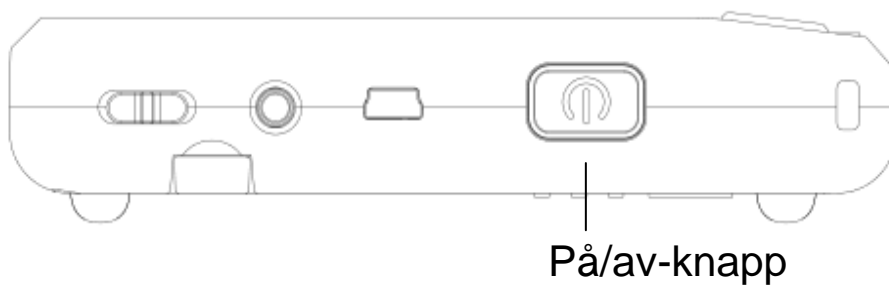


- Starta enheten genom att hålla in **Strömknappen** i 3 sekunder tills ett pip hörs. Skärmen visar en startbild i 2 sekunder och sedan aktiveras förstoringläget.
- Tryck ner och håll inne **Strömknappen** i 3 sekunder för att stänga av enheten.

### 3.2.2 Öka och minska förstoring

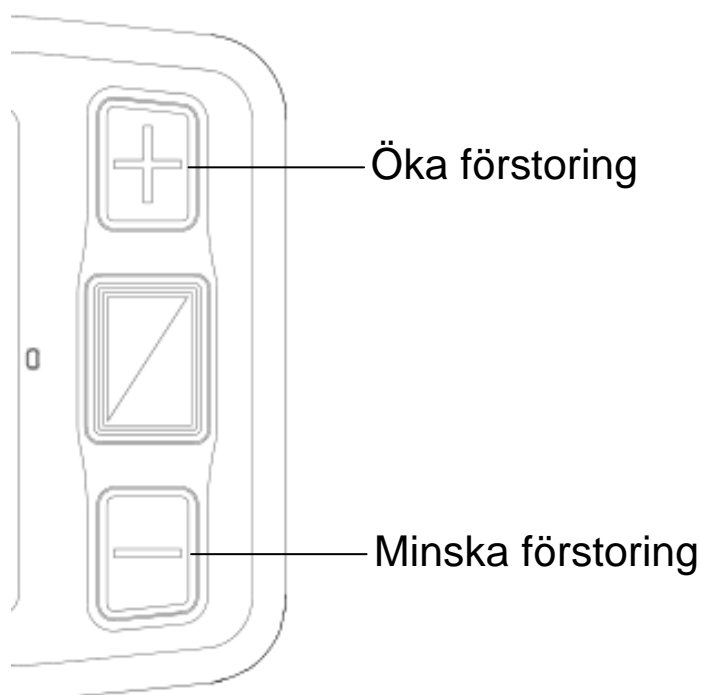

- Tryck på knappen “+” för att öka förstoringen och tryck på knappen “-” för att minska förstoringen.

### 3.2.3 Färgläge samt kamerabelysning

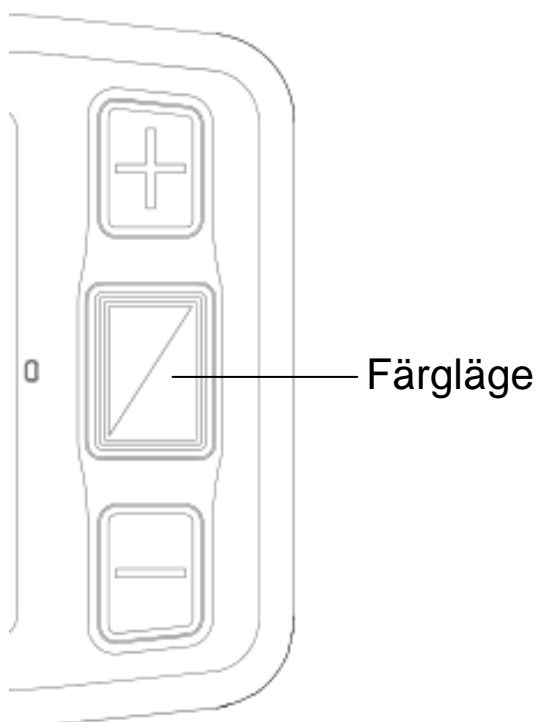

- Normalt läge och favoritlägen är tillgängliga för färgläge med hög kontrast.
- Tryck ner och håll inne Kontrastknappen i 2 sekunder för att växla mellan normalt läge, favoritläge samt inverterat (såsom vitt på blått och blått på vitt).
- I favoritläget kan du trycka på Lägesknappen för att växla mellan 3 grundlägen: fullfärg, ditt favoritkontrastläge och inverterat (såsom vitt på blått & blått på vitt).
- I normalläget kan du trycka på Lägesknappen för att växla mellan följande 8 färglägen:
  - Fullfärgs fotoläge
  - Gråskala
  - Hög kontrast vit text på svart bakgrund




- Hög kontrast svart text på vit bakgrund
- Hög gul text på svart bakgrund
- Hög kontrast svart text på gul bakgrund
- Hög kontrast blå text på gul bakgrund
- Hög kontrast gul text på blå bakgrund
- Tryck ner och håll inne Kontrastknappen i 5 sekunder för att slå på eller av belysningen.

### 3.2.4 Justering av ljusstyrka

- Håll nere **Frysknappen** och **Öka förstoring** samtidigt för att justera ljusstyrka.
- En mätare för ljusstyrka kommer att visas. Tryck på **Öka förstoring** för att öka ljusstyrkan och **Minska förstoring** för att minska den.

### 3.2.5 Frys-funktionen

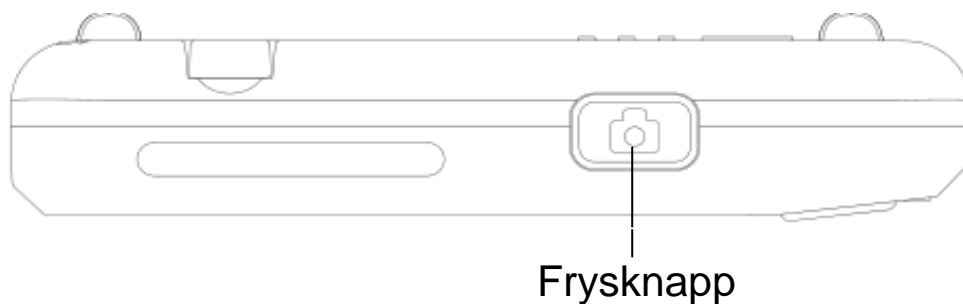

- Använd **Frysknappen** för att ta stillbilder av bilder och bokstäver. Ta enheten närmare för att se bättre. Du kan också förstora eller skala ner bilder genom att trycka på förstoringknapparna samt ändra kontrastläge via **Lägesknappen**.

- Tryck på **Frysknappen** igen för att avsluta.

### **3.2.6 Minnesfunktionen**

- Enheten kommer automatiskt ihåg de senaste inställningarna (färgläge, förstöringsgrad, utmatningsformat för video, pip för knappar samt ljusstyrka) och använder dem nästa gång enheten startar.

### **3.2.7 Ställa in strömsparfunktionen**

- I förstöringsläget kommer enheten automatiskt att stänga av om den inte har använts under 3 minuter.

### **3.2.8 Utmatning till TV**

- Om enhetens skärmstorlek inte är stor nog kan du använda utmatningsfunktionen för TV och ansluta enheten till en TV för större förstoring.
- Så snart en TV är ansluten till enheten kan du starta den. Bilden kommer automatiskt att visas på din TV.

## 4. Felsökning

Problem	Lösningar
Svart skärm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Försäkra dig om att enheten är igång.</li><li>• Kontrollera så att kameranlinsen är ren.</li><li>• Minska Förstoringsgraden.</li></ul>
Enheter startar inte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera så att batteriet sitter i enheten samt att det är uppladdat.</li><li>• Försök använda strömadaptern för att starta din enhet.</li></ul>
Bilden är mörk och förvrängd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera så att läsmaterialet ligger plant.</li><li>• Försäkra dig om att kamerabelysningen är av.</li></ul>
Inget visas efter att enheten ansluts till en TV	<ul style="list-style-type: none"><li>• Försäkra dig om din TV är igång.</li><li>• Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten till TV-utgången samt din TV.</li><li>• Kontrollera att du har aktiverat utmatningsläget TV.</li></ul>
Kan inte ladda batteriet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Försäkra dig om att strömadaptern är ansluten.</li></ul>

## 5. Säkerhetsföreskrifter

För att hålla förstoringskameran i god kondition, läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter:

- Utsätt inte explorē 3 för överdriven värme eller direkt solljus för att undvika brandrisk.
- Håll enheten borta från fuktighet, regn, vätska och kemikalier.
- Använd inte förstoringskameran nära otillräckligt avskärmad medicinsk utrustning.
- Använd endast explorē 3 inom temeperaturområdet 10°C och 40°C.
- Försök inte själv reparera eller öppna förstoringskameran då detta upphäver garantin. Kontakta din återförsäljare för att få service om utrustningen kräver det.
- Dra alltid ut strömadaptern innan du rengör systemet. Använd en mjuk fuktig tygbit för att rengöra utsidan. Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel eftersom dessa skadar din enhet.
- Använd endast en kompatibel strömadapter för att ladda enheten, annars kan den skadas.

## 6. Tekniska specifikationer

- 3,5-tums TFT LCD-skräm
- 2x -16x kontinuerlig förstoring
- Fokus: Autofokus
- TV-utmatning: PAL/NTSC
- Strömsparläge: enheten kommer automatiskt att stänga av om den inte har använts under 3 minuter.
- Skrivstöd
- Snabb läsning utan flimmer eller otydlighet
- Laddningstid: Ungefär 3,5 timmar
- Funktioner: Frysa bild, växla färgläge, öka/minska förstoring
- Inställningar sparas efter att enheten har stängts av
- Belysning
- Batteri-indikator: positiv
- Låg vikt på endast 150 g
- 8 högkontrast färglägen (3 favoritfärglägen)
- Batteri: laddningsbart litium-batteri med 4 timmars kontinuerlig användning
- Tillbehör: användarmanual, strömadapter, kort rem, skyddsfodral, video-kabel
- Förhållande vid transport och förvaring: Luftfuktighet < 70%  
temperatur: 10-40°C

## 7. Garanti

- Huvudenhet: tre år
- Strömadapter och tillbehör: ett år
- Om du råkar ut för problem, god kontakta din återförsäljare. Om du inte kan lösa problemen själv läs noga igenom garanti-informationen och skicka enheten tillsammans med kortet till oss. Vi kommer att kontakta dig så snart vi har fått enheten.



## **Polar Print**

Teknisk hjälp och support  
Tel 020-82 69 13

[info@polarprint.se](mailto:info@polarprint.se)  
[help@polarprint.se](mailto:help@polarprint.se)

Växel  
Tel 010-470 99 00

### **Huvudkontor, Luleå**

Polar Print  
Box 950  
971 28 LULEÅ

### **Umeå**

Tvistevägen 47 C  
907 36 UMEÅ

### **Stockholm**

Rosterigränd 14  
117 61 STOCKHOLM

### **Falköping**

Rantens Gårds väg 3  
521 31 FALKÖPING

### **Malmö**

Gasverksgatan 2  
211 29 Malmö

### **Växjö**

Merkuriusvägen 3  
352 64 Växjö