

Användarmanual



Förstoringsglas, fickljuslupp
20210907

Användning

Slå på och av belysningen med den blå strömbrytaren på handtagets ovansida. För strömbrytaren mot linsen för att slå på belysningen, för den bakåt för att slå av.

Håll förstoringsglaset en bit ovanför det som skall läsas. Lämpligt läsavstånd varierar med förstoringsglasets styrka.

Rengöring

Ta loss batterierna före rengöring (om fuktad trasa används).

Rengör plastdelarna med lätt fuktad trasa och milda rengöringsmedel. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas.

För att rengöra linsen, använd en linsduk eller annan mjuk, luddfri duk.

För att avlägsna smuts och fläckar från linsen kan duken fuktas med en eller två droppar isopropylalkohol.

Låt förstoringsglaset torka ordentligt innan batterierna sätts tillbaka.

Varning


Lämna inte förstoringsglaset i direkt solsken utan att täcka över det (brandfara). Se heller aldrig direkt mot solen med förstoringsglaset.

De medlevererade batterierna är inte uppladdningsbara – försök inte att ladda upp dem i en batteriladdare.


Se till att batterierna återvinns på rätt sätt när de är förbrukade.

Isättning av batteri / batteribyte

Skjut strömbrytaren mot handtaget, alltså åt samma håll som när belysningen slås av, men ytterligare ett snäpp.

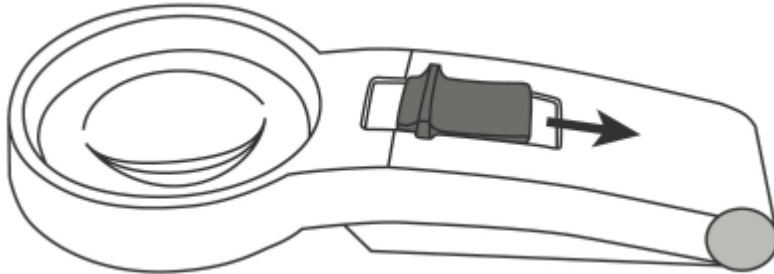

Vik upp den övre delen handtaget och sätt in batterierna, 3st 1,5 V AAA-batterier.

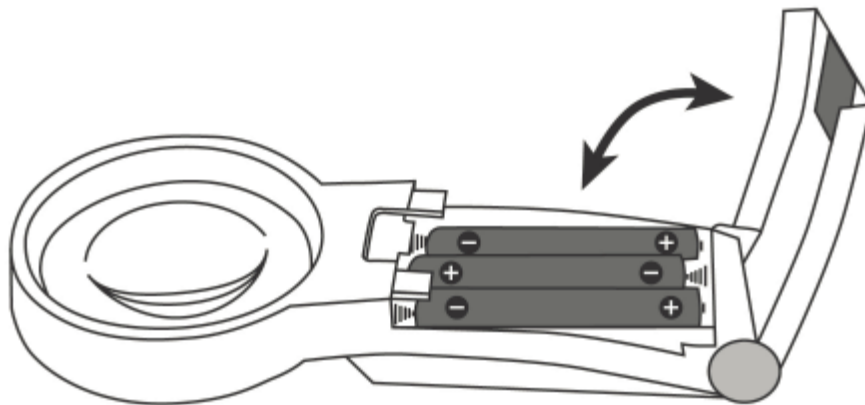

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Växel
Tel 010-470 99 00

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Twistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHOV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ