

Användarmanual



Förstoringsglas, fast avstånd med ljus
20210907

Användning

Slå på och av belysningen med den blå strömbrytaren på handtagets ovansida. För strömbrytaren mot linsen för att slå på belysningen, för den bakåt för att slå av.

Håll förstoringsglaset mot det som skall läsas. Förstoringsglaset skall ligga an mot det som skall förstoras.

Rengöring

Ta loss batterierna före rengöring (om fuktad trasa används).

Rengör plastdelarna med lätt fuktad trasa och milda rengöringsmedel. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas.

För att rengöra linsen, använd en linsduk eller annan mjuk, luddfri duk.

För att avlägsna smuts och fläckar från linsen kan duken fuktas med en eller två droppar isopropylalkohol.

Låt förstoringsglaset torka ordentligt innan batterierna sätts tillbaka.


Varning

Lämna inte förstoringsglaset i direkt solsken utan att täcka över den (brandfara). Se heller aldrig direkt mot solen med förstoringsglaset.


De medlevererade batterierna är inte uppladdningsbara – försök inte att ladda upp dem i en batteriladdare. Se till att de återvinns på rätt sätt när de är förbrukade.

Isättning av batteri / batteribyte

Öppna batterifacket genom att skruva den blå ändan av handtaget som bilden visar.

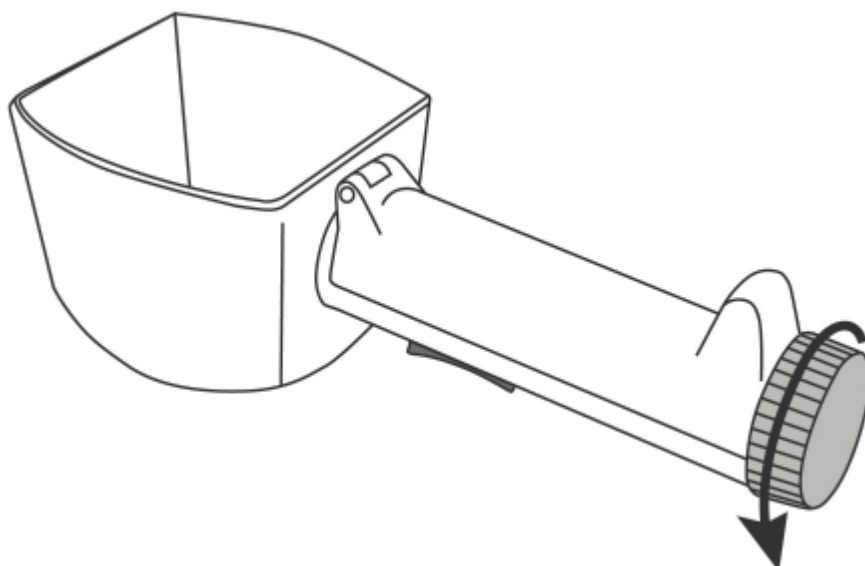

Vik upp den undre delen av handtaget och sätt in batterierna, 3st 1,5 V AA-batterier.

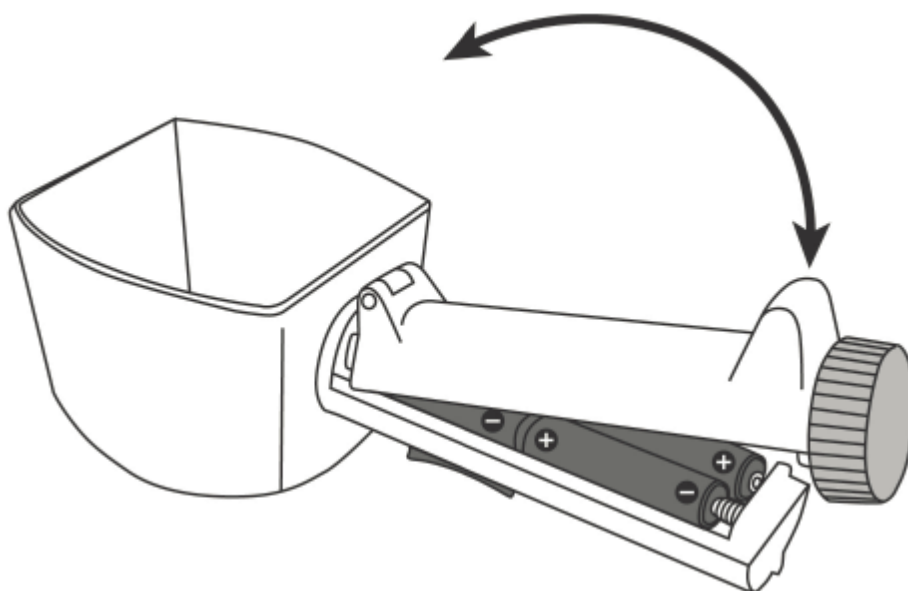

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Växel
Tel 010-47 09 900

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Rosterigränd 14
117 61 STOCKHOLM

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö