

Användarmanual

AmbuTech Telskopiska käppar

Ställa in längden

Längden regleras genom att vrida på den nedre delen, justera längden samt vrida igen för att låsa önskad längd.

Skötsel

Se till att käppen inte är onödigt smutsig när den justeras till kortare längd för att undvika att sandkorn etc. letar sig in under rörkonstruktionen. Se rengöringsråden nedan för instruktioner om hur käppen hålls ren.

Rengöring

Käppen rengörs enklast med fuktad trasa. Vatten eller milda rengöringsmedel kan användas. Sitter smutsen fast ordentligt kan man skrubba med t ex disksvamp vid rengöring.

Byte av doppsko

Doppskon sitter fast med gängor i nedre änden av käppen.

- Ta lös doppsko: Vrid doppskon moturs för att skruva av den.
- Sätta fast doppsko: Vrid doppskon medurs för att skruva fast den.

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Växel
Tel 010-470 99 00

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ

Umeå

Twistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Rosterigränd 14
117 61 STOCKHOLM

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö