

E-bot PRO kortkommandon till PC

Observera! När E-bot är kopplad till PC Viewer är det inte möjligt att använda fjärrkontrollen för att öppna eller navigera i menyer.

NÄRA / AVSTÅND	
Närläge	Ctrl + N
Flytta till förinställd kameraposition	Ctrl + N
Avståndsläge	Ctrl + D
Flytta till förinställd favoritposition	Ctrl + D
FÖRSTORING	
Zooma in	+ eller mushjul upp
Zooma ut	- Eller mushjul ned
Positionera kameran	Piltangenterna eller vänsterklick + drag
Nästa rad i texten	Enter
Översiktsläge	Ctrl + F
Färg, nästa	M eller vänsterklick
Färg, naturlig / artificiell	N

Öka kontrast	C
Minska kontrast	Shift + C
Autofokus av / på	Ctrl + I
Automatisk läsning på / av	Ctrl + A
Pausa / starta automatisk läsning	Mellanslag
OCR / TAL	
OCR	O eller klicka med mushjulet
Läs upp	Mellanslag
Öka talhastighet	Å
Minska talhastighet	` (Accent)
Nästa / föregående mening	Pil höger / vänster
Nästa / föregående stycke	Pil ned / upp
Öppna OCR-menyn (i OCR-läge)	Ctrl + M eller högerklick
Förhandsgranskning / OCR, växla	Ctrl + P

Lämna OCR-läge, gå till Live-läge	Escape
INSTÄLLNINGAR	
Öppna inställningsmenyn	Ctrl + M eller högerklick
Växla flik i inställningsmenyn	Pil höger / vänster
Navigera i menyn	Pil upp / ned
Välj / spara i menyn	Enter eller vänsterklick
Lämna inställningsmenyn	Escape
SPARA	
Spara OCR eller livebild	Håll spela / paus på fjärrkontrollen nedtryckt >2 sek
AVSLUTA	
Avsluta PC Viewer	Alt + F4

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

Info@polarprint.se
help@polarprint.se

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86

Stockholm

Liljeholmsvägen 28
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70
Fax 08-442 42 79

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 MALMÖ
Tel 040-97 17 00
Fax 040-97 17 71

Umeå

Twistevägen 47C
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72
Fax 090-13 94 83

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING
Tel 076 – 241 69 89

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö
Tel 0470 – 390 30