

Användarmanual




CONNECT 12 G2 KOM IGÅNG


20180326

KOM IGÅNG


1. Använd en plan bordsyta och håll Prodig-stället i en upprätt position och försäkra dig om att panelen med order "Connect" är riktad mot dig. Samtidigt som du håller i handtaget med en hand, vik ut den undre panelen med din andra hand tills den ligger plant mot bordet.

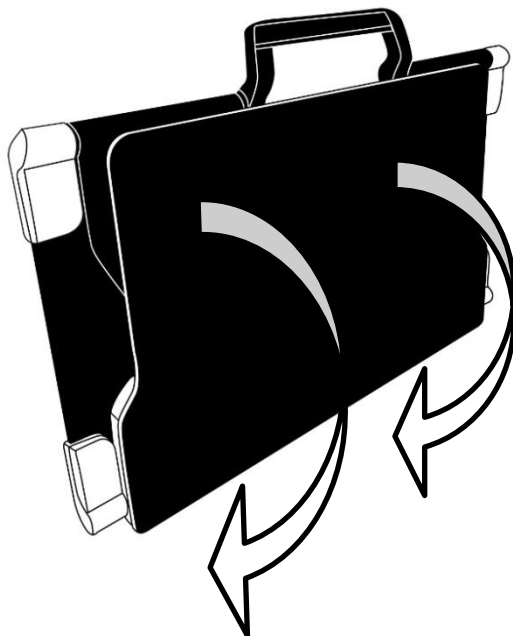


2. Vik sedan den övre panelen tills den är ungefär parallell med den nedre panelen.

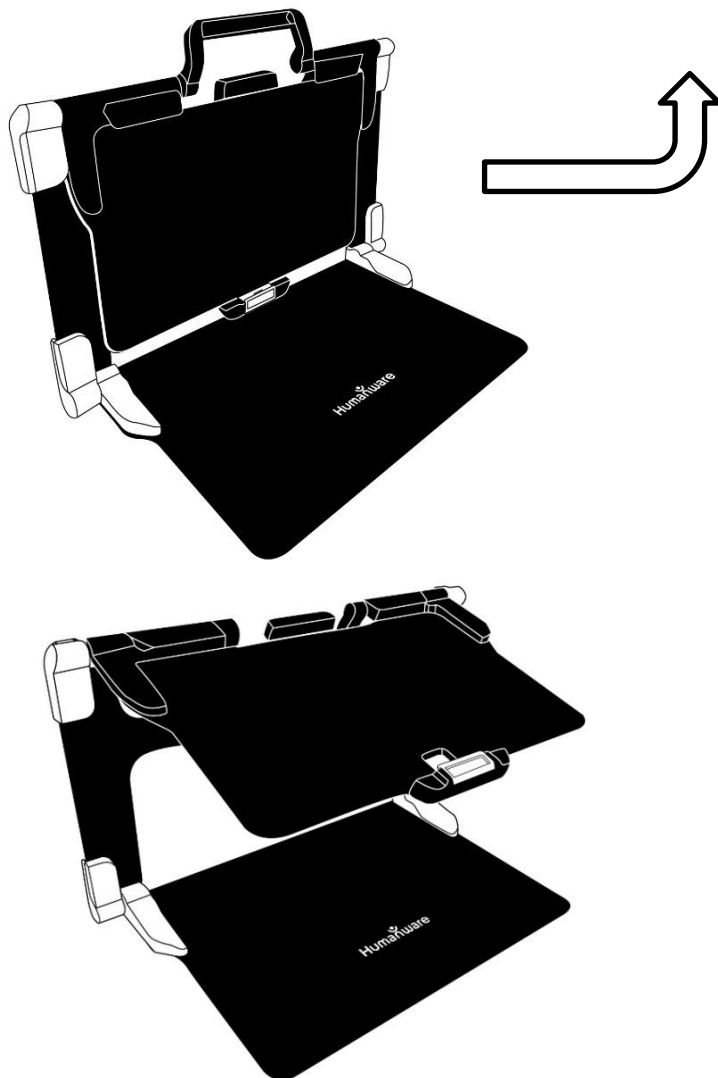

- 3.** Håll surfplattan med skärmen mot dig och försäkra dig om att HumanWare-logotypen är överst. Sätt försiktigt övre delen av surfplattan i skåran och tryck den försiktigt framåt tills den når bakkanten av skåran. Tryck ner den nedre delen av surfplattan tills du hör ett klickljud som indikerar att surfplattan sitter fast.

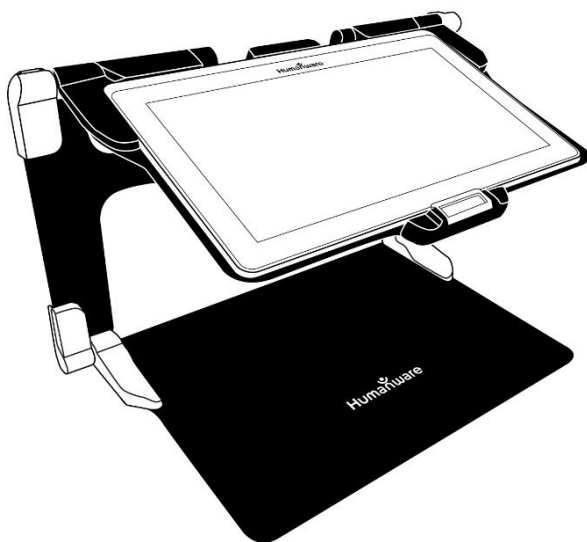

- 4.** Anslut strömkabeln till laddningsporten samt anslut den till ett eluttag. Laddningsporten sitter på högra sidan av surfplattan. Låt surfplattan ladda till batteriet är fullt.

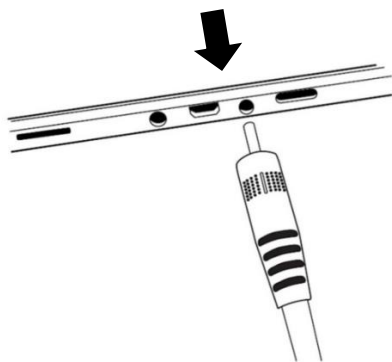

OBSERVERA: Använd försiktighet när kabeln ansluts till laddningsporten.

5. Tryck ner och håll inne strömknappen för att starta surfplattan. HumanWare- och Android-logotyper visas på skärmen. Surfplattan tar ungefär 30 sekunder att starta.



6. Tryck på knappen Öka förstoring för att justera förstoringsgraden. För att öka teckenstorlek, tryck på knappen Öka förstoring (den högra). För att minska teckenstorlek, tryck på knappen Minska förstoring (den vänstra). Du kan också trycka upprepade gånger på knappen **Öka förstoring** för att justera

förstoringen och släppa den när du har nått önskad förstöringsgrad.



För mer information om hur du använder Prodigy Connect, läs användarmanualen.

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Region nord

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30

Umeå

Twistevägen 47 C
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72

Region öst

Stockholm

Rosterigränd 14
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70

Region väst

Falköping

Tel 076-241 69 89

Region syd

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö
Tel 040-97 17 00

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö
Tel 0470-39030