

# Snabbguide för ClearView C

## Grundläggande kontrollpanel



**Överblicks-knapp**

**Förstoringsvred  
& Lägesknapp**

**Ström På / Av**

**Överblicks-knapp:** Tryck en gång för överblicksläge, tryck igen för att zooma in på intressant område.

Tryck ner i 3 sekunder för positionslokator – visar röd punkt där kameran tittar.

**Förstoringsvred & Lägesknapp:** Vrid förstoringsvredet för att öka eller minska förstoring. Tryck på Lägesknappen för att växla mellan olika visningslägen.

Tryck på Lägesknappen i 4 sekunder för att stänga av belysningen.

**Ström På / Av:** Tryck för att starta ClearView C. Tryck igen för att stänga av.



**Höger och vänster bromsreglage:** Dra mot mitten för att öka friktion eller helt låsa läsbordet. Dra mot kanterna för att lösgöra läsbordet. Höger påverkar läsbordet i djupled, vänster påverkar läsbordet i sidled.

## Avancerad kontrollpanel (lösgör & rotera kontrollpanelen)



**Justera bilden**   **Läslinjer & gardiner**   **Meny**   **Växla bild**   **Fokuslås**

**Justera bilden:** Vid otydlig bild, tryck på knappen och vrid sedan på förstoringsvredet för att prova justera bilden.

**Läslinjer & gardiner:** Tryck för att växla mellan olika läslinjer och gardiner.

Tryck ner i 3 sekunder för att justera aktiva läslinjer eller gardiner. Ändra läget med förstoringsvredet. Tryck igen för att ändra andra läslinjen/gardinen och justera med förstoringsvredet.

**Meny:** Aktiverar menyn i ClearView C. Ändra menyval med förstoringsvredet. Bekräfta med Lägesknappen (mitt i förstoringsvredet).

**Växla bild:** Växla bild till annan bildkälla som t ex en dator om en sådan är ansluten till ClearView C.

**Fokuslås:** Tryck på knappen för att låsa fokus så att enheten inte försöker autofokusera hela tiden. Bra när man skriver eller sysslar med handarbete under kameran.