

Användarmanual



Eye Pal

151229

Innehållsförteckning

1	VAD ÄR EYE PAL?	3
2	KOMMA IGÅNG	3
3	LÄSKOMMANDON	3
	LÄS TECKEN FÖR TECKEN.....	3
	LÄS ORD FÖR ORD.....	3
4	FLER LÄSKOMMANDON	4
	LÄS MENING FÖR MENING	4
	LÄS STYCKE FÖR STYCKE	4
5	BOKINSTÄLLNINGAR	4
	ATT SKAPA EN BOK:.....	4
	ATT GÖRA INSTÄLLNINGAR FÖR EN BOK	4
	<i>Sidräknare</i>	4
	<i>Inläsningsinställning</i>	5
	<i>Inläsningssätt</i>	5
6	FLER BOKINSTÄLLNINGAR	5
	LÄSA EN BOK.....	5
	ÖPPNA EN BOK.....	5
	STÄNG BOK.....	6
	RADERA EN SIDA I EN BOK.....	6
	RADERA EN BOK.....	6
7	SPARA	6
	GÖR SÅ HÄR FÖR ATT SPARA:.....	6
	GÖR SÅ HÄR FÖR ATT HÄMTA EN SPARAD BILD:	6
8	TALINSTÄLLNINGAR	6
	ÄNDRA TALSYNTERÖST.....	6
	ÄNDRA TALHASTIGHETEN.....	7
	SIDBESKRIVNING	7
9	KOMMANDOLISTA	7
10	FELSÖKNING	10

1 Vad är Eye Pal?

Eye Pal är ett hjälpmedel för att snabbt och enkelt läsa in text till datorn och sen läsa upp texten med talsyntes inom några sekunder. Eye Pal har en digital kamera placerad på ett stativ och är bärbar och mycket lätt.

- Det L-formade kamerastativet utgör samtidigt en gудie för placering av papperet som skall läsas in.
- Kameran är förinställd för att ta en skarp bild eftersom avståndet är fast.
- Upp till 20 sidor per minut kan läsas in.
- Inläst text kan föras över som ljudfiler till t.ex VictorReader Stream, MP3-spelare eller brännas på CD eller sparas som textfiler på datorn.

2 Komma igång

- **Placera texten som skall läsas in i ramen som det L-formade stativet utgör. Om texten vänds neråt säger Eye Pal "Text hittas ej".**
- **Ta en bild/avbryt** – Insert och Delete
- **Starta uppläsning av et dokument** – Insert och 2 (läser till sidslut)
- **Paus/stopp/fortsätt läsning** – Insert och 1
- **Hopp till sidans början** – Home
Detta gör inte att läsning startas. Tryck E eller Caps Lock och Pil-ner för att starta läsning.
- **Läs över kolumner** – Kontroll-T

3 Läskommandon

Läs tecken för tecken

- Nästa – 6
- Föregående - 4
- Aktuellt tecken – 5

Läs ord för ord

- Nästa – Insert och 6
- Föregående – Insert och 4
- Aktuellt ord – Insert och 5

4 Fler läskommandon

Läs mening för mening

- Nästa – 2
- Föregående - 8
- Aktuell mening – Insert och 5

Läs stycke för stycke

- Nästa – Kontroll 2
- Föregående – Kontroll 8
- Aktuellt stycke – Shift, Insert och 5

5 Bokinställningar

Det går att skapa en “bok” i Eye Pal. Det betyder att man kan läsa in flera olika sidor manuellt eller låta Eye Pal automatiskt läsa in många sidor som sen sparas i en fil.

Att skapa en bok:

- Tryck Alt och B
- Tryck B för att skapa ny bok
- Skriv in bokens titel
- Skriv in bokens författare
- Välj var boken skall sparas. Grundinställningen är Bokfilen i Eye Pal-mappen.
- Ange startsidnummer
- Tryck på knappen ”Skapa”

Att göra inställningar för en bok

På denna går det att göra inställningar för boken.

Sidräknare

Talar om aktuellt sidnummer och talar om vad nästa sidnummer kommer att vara.

Inläsningsinställning

Välj ett av följande alternativ:

- Läs in en sida i taget
- Läs endast in udda eller jämna sidor
- Läs in ett helt uppslag (två sidor i taget)

Inläsningssätt

- Manuell, tryck en knapp när nästa sida skall läsas in
- Automatisk, inläsning sker när en ny sida läggs under kameran

6 Fler bokinställningar

- **Manuellt läge** - tryck "A" för att läsa in en ny sida.
- **Automatisk läge** – för att starta och stoppa automatisk inläsning så fort ett nytt papper lags under kameran – tryck "Avbryt Automatisk inläsning".
- När boken är klar – tryck "Klar"

Läsa en bok

- I fältet "nuvarande sida"
- Gå till nästa sida genom att trycka N
- Gå till föregående sida genom att trycka P
- Gå till ett visst sidnummer genom att trycka sidnumret och sen trycka på knappen "Gå till.."
-

Tryck E eller CapsLock och pil-ner för att starta läsningen.

Lämna boken genom att trycka knappen "Avsluta".

Öppna en bok

- <ALT> B
- O (öppna bok)
- Välj bok i listan eller sök boken
- <ALT> O för att öppna valda bok

Stäng bok

- <ALT> B
- L (stäng bok)

Radera en sida i en bok

- <ALT> D
- T (radera)

Radera en bok

- <ALT> B
- D (radera)

7 Spara

Det går att spara inlästa bilder av sidor för att se dem senare. Det går också att spara textfiler, alltså den text som tolkades vid inläsning av ett papper för att till exempel läsa dem i ett bärbart hjälpmedel som t.ex. Victor Reader Stream.

Gör så här för att spara:

- <ALT> A
- Tryck S för att spara bild. Bilden kommer att sparas i bildfilen i Eye-Pal-mappen.
- Tryck A för att spara en textfil.. Texten kommer att sparas i text-filen i Eye-Pal-mappen.

Gör så här för att hämta en sparad bild:

- <ALT> A
- L (hämtar bildfilen i Eye-Pal-mappen)

8 Talinställningar

Det går att välja talsyntesröst och välja uppläsningens hastighet.

Ändra talsyntesröst

- Tryck <ALT>A
- Tryck T

- Tryck TAB till Voice
- Välj talsyntesröst genom att med pil-ner och pil-upp genom listan med röster och tryck Retur.
- Det finns en TEST-knapp där den valda rösten kan testas.
- Tryck A för att spara ändringen av röst
- Tryck på knappen OK för att avsluta inställningen.

Ändra talhastigheten

- Öka talhastigheten – tryck shift + Q eller F9
- Minska talhastigheten – tryck shift + Z eller F8

Sidbeskrivning

- En sidbeskrivning fås genom att trycka shift + E.

9 Kommandolista

Funktion	Tangenttryckningar PC
Ta en bild	Insert + Delete
Sluta ta bilder och läs upp texten	Insert + 2
Paus/Stopp och försätt uppläsning	Insert + 1
Hopp till sidans början, utan att starta läsningen	Home
Läs tvärs över kolumner	Kontroll + T

Läskommandon	
Läs tecken för tecken: Föregående: Aktuellt: Nästa:	4 5 6
Läs ordvis	Insert + 4 Insert + 5 Insert + 6
Läs meningvis Föregående: Aktuellt: Nästa:	8 Kontroll + Insert + 5 2
Läs styckevis Föregående: Aktuellt: Nästa:	Kontroll + 8 Shift + Insert + 5 Kontroll + 2

Funktion	Tangenttryckningar Apple
Bokmeny	<Alt> B
Skapa en bok	B
Öppna en bok	O
Stänga en bok	L
Radera en sida	T
Radera en bok	D
Läsa en bok	
Hopp till nästa sida	N
Hopp till föregående sida	P

Sparfunktioner	Tangenttryckningar PC
Sparmenyn	<Alt> A
Spara bild (jpeg)	S
Spara som text.	A
Snabbspara	Control, Shift & S

Eye Pal - Instruktionsbok

Talfunktioner	Tangenttryckningar PC
Öka talhastigheten	Shift + Q eller F9
Minska talhastigheten	Shift + Z eller F8
Läs sidbeskrivning	Shift + E

Funktion	Tangenttryckningar Apple
Ta en bild	Mellanslag eller eller CapsLock och punkt
Sluta ta bilder och läs upp texten	E
Paus/Stopp och försätt uppläsning	X
Hopp till sidans början, utan att starta läsningen	Home
Läs tvärs över kolumner	Kontroll + T
Läskommandon	
Läs tecken för tecken: Föregående: Aktuellt: Nästa:	Pil-vänster I Pil-höger
Läs ordvis	Kontroll + Pil-vänster Kontroll + I Kontroll + Pil-höger
Läs meningvis Föregående: Aktuellt: Nästa:	Pil-upp Kontroll + CapsLock + I Pil-ner
Läs styckevis Föregående: Aktuellt: Nästa:	Kontroll + pil-uppCaps, Shift + I Kontroll + pi-ner

Funktion	Tangenttryckningar Apple
Bokmeny	<Alt> B
Skapa en bok	B
Öppna en bok	O
Stänga en bok	L
Radera en sida	T
Radera en bok	D
Läsa en bok	
Hopp till nästa sida	N
Hopp till föregående sida	P

Sparfunktioner	Tangenttryckningar Apple
Sparmenyn	<Alt> A
Spara bild (jpeg)	S
Spara som text.	A
Snabbspara	Shift, Control & W

Talfunktioner	Tangenttryckningar Apple
Öka talhastigheten	Shift + Q eller F9
Minska talhastigheten	Shift + Z eller F8
Läs sidbeskrivning	Shift + E

10 Felsökning

Om det blir mycket feltolkning av texten, se till att belysningen är stark och jämn över pappret som skall läsas.

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

Info@polarprint.se
help@polarprint.se

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86

Stockholm

Liljeholmsvägen 30
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70

Region syd

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 MALMÖ
Tel 040-97 17 00

Umeå

Twistevägen 47
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING
Tel 076-241 69 89

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö
Tel 0470- 390 30