

Eye-Pal snabbstartsguide

Aktivera/inaktivera kameran: mellanslag

Starta läsning: E

Flytta till början av dokumentet: Home

Starta/Pausa/Fortsätt läsning: X

Läs över kolumner: Ctrl-T

Spara som text och öppna sedan filen: Skift-Ctrl-W

Läs nästa ord: Ctrl-pil höger

Läs föregående ord: Ctrl-pil vänster

Läs aktuellt ord: Ctrl-I

Läs nästa tecken: pil höger

Läs föregående tecken: pil vänster

Läs aktuellt tecken: I

Läs nästa mening: Pil ner

Läs föregående mening: Pil upp

Läs aktuell mening: Ctrl-CapsLock-I

Läs nästa avsnitt (stycke): Ctrl-pil ner

Läs föregående avsnitt (stycke): Ctrl-pil upp

Läs aktuellt stycke: CapsLock-Skift-I