



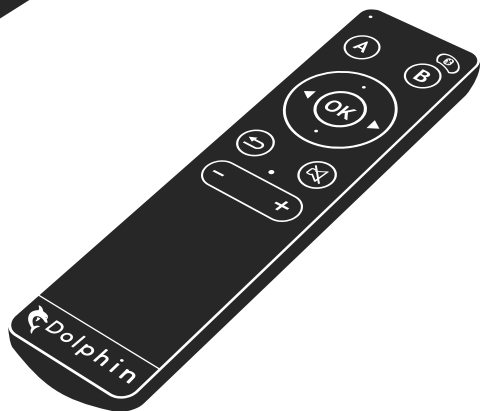

Snabbstartsguide

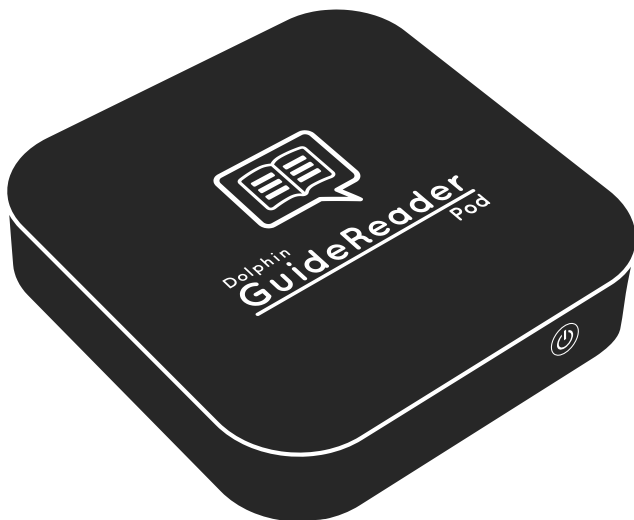

Innehåll

GuideReader Pod	03
Vad ingår i förpackningen?.....	03
Produktöversikt	04
Att använda GuideReader Pod	05
Ansluta GuideReader Pod till din TV	05
Starta GuideReader Pod	07
Visa GuideReader på din TV-skärm.....	07
Stänga av GuideReader Pod	08
Återgå till TV-program	08
Använda Dolphin fjärrkontroll.....	08
Anslut till internet	10
Utöka lagringskapacitet	11
Nödomstart	11
Allmän information	12
Viktig säkerhetsinformation	12
Licens och garanti	13
Notera	13

GuideReader Pod

Denna snabbstartsguide hjälper dig att lära känna och komma igång med din GuideReader Pod.

Vad ingår i förpackningen?

Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Om något saknas kontakta din leverantör omgående.

- GuideReader Pod-enhet
- Strömadapter DC 5V/3A
- HDMI-kabel (1 meter)
- Dolphin fjärrkontroll
- Två AAA batterier (avsedda för Dolphin fjärrkontroll)
- Snabbstartsguide
- 32GB Micro SD card pre-inserted

Produktöversikt



- 1 Strömbrytare
- 2 USB-uttag
- 3 Kortplats för Micro SD (32GB Micro SD-kort är anslutet vid leverans)
- 4 Strömuttag
- 5 Mini USB-uttag
- 6 HDMI-uttag
- 7 Ethernet-uttag
- 8 3.5mm stereo uttag för hörlurar/högtalare

Dolphin fjärrkontroll

Se sidan 8 för en detaljerad översikt och användarguide



Använda GuideReader Pod

Ansluta GuideReader Pod till din TV

GuideReader Pod levereras med en kabel för anslutning till din TV-apparat. Denna HDMI-kabel passar för att anslutas till HDMI-uttag **6** som finns på de allra flesta TV-apparater. För hjälp med att hitta HDMI-uttaget på din TV hänvisas till handboken för din TV eller hjälp från någon du känner.

För att kunna använda medföljande kablage behöver din GuideReader Pod-enhet placeras maximalt en meter från din TV samt i närheten av ett vägguttag.

För att ansluta GuideReader Pod till din TV-apparat:

1. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-uttaget **6** på baksidan av din GuideReader Pod.



2. Anslut den andra änden av HDMI-kabeln till ett ledigt HDMI-uttag på din TV.



3. Anslut medföljande strömadapter till strömuttaget **4** på baksidan av GuideReader Pod.



4. Anslut strömadapterns stickpropp till ett vägguttag och slå på strömmen.

Din GuideReader Pod är nu redo att börja användas.



Starta GuideReader Pod

Tryck på strömbrytaren **1** på din GuideReader Pod. En blåfärgad lampa tänds och GuideReader påbörjar uppstart av enheten. GuideReader tar ca en minut på sig att starta upp.

Visa GuideReader på din TV-skärm

Säkerställ att din GuideReader Pod är korrekt ansluten till din TV-apparat och uppstartad enligt vad som är beskrivet ovan. Du behöver fjärrkontrollen till din TV till hands för att kunna visa GuideReader på din TV-skärm.

För att visa GuideReader på din TV-skärm:

1. Starta din TV. Dina vanliga TV-kanaler visas på skärmen.
2. Växla din TV-utgång (output) till HDMI. På de allra flesta TV-apparater kan du ändra utgång genom att använda "AV"-, "Source"- eller "Input"-knappen på fjärrkontrollen till din TV.

För hjälp, se handboken till din TV eller ta hjälp av någon som du känner.

När din TV-utgång är inställd på HDMI visas innehållet i GuideReader på TV-skärmen och ljudet från GuideReader hörs via TV-apparatens högtalarsystem.

Stänga av GuideReader Pod

Välj ”Avsluta GuideReader” från huvudmenyn i GuideReader, välj därefter ”Stänga av” och bekräfta genom att trycka på ”Ja”. GuideReader avslutas och strömmen till enheten stängs av.

Återgå till TV-program


Växla tillbaka till den TV-utgång som används för att titta på TV-program med hjälp av fjärrkontrollen till din TV. På de allra flesta TV-apparater ändrar du utgång (output) genom att använda ”AV”-, ”Source”- eller ”Input”-knappen på fjärrkontrollen till din TV. För hjälp se handboken för din TV eller ta hjälp av någon som du känner.

Använda Dolphin fjärrkontroll

Dolphin fjärrkontroll används för att navigera och utföra kommandon i GuideReader. Fjärrkontrollen behöver två AAA-batterier (två batterier ingår i leveransen).

- 1 Alternativ:** öppna (och stäng) menyn ”Alternativ” i GuideReader. Alternativmenyn erbjuder dig att öppna en lista av kapitel i din bok eller artiklar i din tidning.
- 2 Föregående/Nästa:** Flytta till föregående/nästa objekt på skärmen.
- 3 Bakåt:** Flytta bakåt till föregående skärm. Håll nedtryckt för att återgå till huvudmenyn i GuideReader.
- 4 Parkoppling av blåtand:** Parkoppla Dolphin fjärrkontroll med din GuideReader Pod. NOTERA: Din fjärrkontroll är redan parkopplad med din GuideReader Pod-enhet och redo att användas vid leverans.

- 5 Hjälp och information:**
Öppna (och stäng) hjälpsystemet i GuideReader. Använd denna knapp för att läsa hjälpavsnitt om den funktion som du just använder, se vad klockan är, kontrollera internetanslutning och för att se om du har några nya meddelanden.
- 6 OK:** Välj ett objekt eller starta/stoppa läsning i böcker, tidningar och tidskrifter.
- 7 Högtalare:** Använd denna knapp för att repetera eller avbryta talet.
- 8 Plus och minus:**
Tryck för att höja/sänka volymen. Håll ned för att öka/minska förstoring.
- 9 Batterifack:** kräver två AAA-batterier krävs (ingår i leveransen).

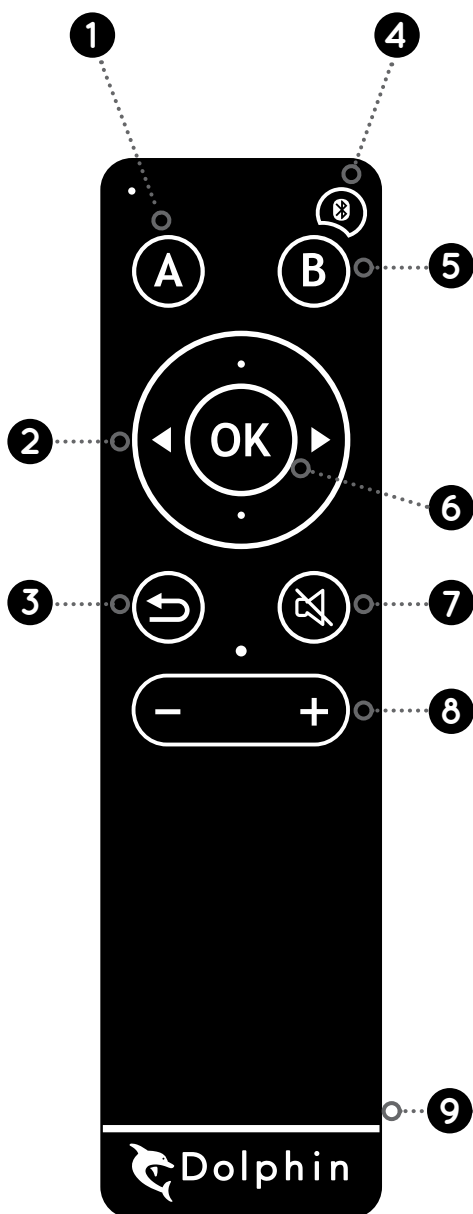

Anslut till internet



Din GuideReader måste anslutas till internet för att du skall kunna logga in till, söka efter samt hämta böcker, tidningar och tidskrifter från online-bibliotek.

Du kan ansluta GuideReader Pod till internet genom att använda en trådlös (WiFi) eller trådbunden anslutning.

För att ansluta till internet via ett trådlöst nätverk från huvudmenyn i GuideReader:

1. Välj "Inställningar".
2. Välj "Internet".
3. Välj "Trådlös anslutning".
4. Välj "Lista tillgängliga anslutningar".
5. Välj den internetanslutning du vill använda.
6. Välj "Anslut".
7. Om det krävs, skriv in lösenordet för den valda internetanslutningen.

För att ansluta till internet via en trådbunden anslutning behövs en Ethernet-kabel (ingår inte i leveransen).

Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till din router och den andra änden till Ethernet-anslutningen **7** placerad på baksidan av din GuideReader Pod-enhet.

Utöka lagringskapacitet



Your GuideReader Pod includes a Micro SD card, providing 32GB of storage for you to save your favourite titles. If you run out of storage space, you can simply replace the SD card **3** and save more titles. The maximum supported size for an SD card is 64GB.

För att installera ett nytt Micro SD-minneskort:

1. Leta rätt på kortplatsen till Micro SD-kort **3** på din GuideReader Pod.
2. Tag ut det befintliga Micro SD-kortet i kortplatsen genom att trycka det inåt med hjälp av fingertoppen för att sedan släppa. Micro SD-kortet hoppar då ut en bit och frigörs så att du kan plocka ut det på ett säkert sätt.

Nödomstart



Om skärmen på din GuideReader inte reagerar på dina kommandon, tryck och håll ned strömbrytaren **1** i cirka 10 sekunder tills dess att skärmen stängs av. Låt GuideReader vara helt avstängd i cirka 15 sekunder innan du påbörjar en uppstart igen.



VIKTIGT: Undvik att stänga ned din GuideReader genom att använda metoden för nödomstart så långt som det är möjligt. Försök alltid först att stänga av din GuideReader genom att använda den sedvanliga metoden för att stänga enheten. Detta för att undvika onödig förlust eller skada av data.

Allmän information

Viktig säkerhetsinformation

- Förvara GuideReader Pod och dess tillbehör utom räckhåll för småbarn.
- Håll enheten torr. Undvik exponering av nederbörd, fukt och vätskor av olika slag som kan påverka produkten negativt.
- Utsätt INTE GuideReader för höga temperaturer eftersom elektroniska komponenter och plastdetaljer kan bli defekta om de utsätts för hetta.
- Lämna INTE GuideReader i låga temperaturer eftersom kondens och fukt då kan bildas inuti produkten, vilket i sin tur kan skada kretskortet.
- Blockera eller täck INTE över enhetens olika öppningar då de är avsedda för funktionalitet och/eller ventilation samt för säker användning av produkten. Detta omfattar även placering av enheten på mjuka möbler som till exempel sängar och soffor samt mjuka mattor.
- Koppla bort enheten från eluttag i samband med åskväder.
- Undvik all form av kraftiga stötar på enheten då detta kan skada GuideReader.
- Använd endast den laddare som levereras tillsammans med GuideReader. Genom att använda en annan laddare upphör produktgarantin att gälla, enheten kan dessutom skadas allvarligt.

- Förvara INTE enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Använd INTE starka kemikalier, lösningsmedel och rengöringsmedel för att rengöra produkten. Torka med en torr, mjuk trasa eller ett torrt rent papper för att rengöra produkten.
- Håll enheten borta från magneter och magnetfält.
- Försök INTE att öppna enheten. Produkten innehåller inga komponenter som kan bytas ut eller underhållas av användaren. Sådan otillåten hantering av enheten kan skada enheten och innebär att garantin ogiltigförklaras.
- Undersidan och kortsidorna av produkten kan bli varma efter en stunds användning. Detta är normalt.

Licens och garanti

Din GuideReader Pod levereras med 12 månaders garanti gällande från inköpsdatum. Mer information om licensavtalet och garanti hittar du på www.YourDolphin.com/GuideReader.

Notera

Copyright ©2003 - 2016 Dolphin Computer Access Ltd.
Alla rättigheter reserverade.

GuideReader är ett varumärke som tillhör Dolphin Computer Access Ltd.

Samtliga varumärken och registrerade varumärken omnämnda i programvaran och tillhörande dokumentation är egendom av deras respektive ägare.

YourDolphin.com

