AbleBaby™ Razer



Bruksanvisning

Innhold

Bruksanvisning – AbleBaby™ Razer	3
Navigering	3
Vinkle kamera ut i rommet	3
Øke og minke lysnivå	3
Forstørrelse	3
Lagre bilde	3
Høykontrast bilde i ulike farge kombinasjoner	3
Dele bildet	3
Full skjerm bilde av/på	4
Rotere bilde	4
Få bildet tilbake til standard	4
OCR – Tekstgjenkjenning	4
OCR – Åpne lagret dokument	4
Skifte mellom kamera og projektor/smartboard bilde	5
Flytte projektor/smartboard	5
Forstørrelse i projektor / smartboard	5
Bytte mellom Ablecenter [®] og andre programmer med forstørrelse og eller skjermleser på	5
Innstillinger og funksjoner	6
Skifte tekst språk i OCR funksjonen	6
Skifte tale språk i OCR funksjonen	6
Skifte skrifttype i OCR funksjonen	6
Skifte meny språk i Ablecenter [®]	6
Skifte fargekombinasjoner på høykontrastvalgene i Ablecenter [®]	6
Endre oppløsning i Ablecenter [®]	7
Aktivere forstørrelse og skjermlesings funksjonalitet i Ablecenter [®]	7

Side 2 av 7 ABLEBABY RAZER service@ablecenter.no

Bruksanvisning – AbleBaby™ Razer

Navigering

Du navigerer i teksten ved å bevege dokumentet/objektet under kameraet som står i stativet sitt.

Vinkle kamera ut i rommet.

AbleBaby[™] Razer har et kamera med mulighet for å vippe kameravinkelen ut i rommet. Det gir en viss mulighet for å fange kamera mål som er lokalisert andre steder enn på bordet.

Øke og minke lysnivå.

AbleBaby[™] Razer er også utstyrt med led belysning som kaster lys ned på objekt/lese- og skrive materiale. Man øker lysstyrken ved å vri på den ytre ringen rundt kameraet. Ved å vri med klokken, så øker man belysningen. Ved å vri mot klokken, så minker man belysningen.

Forstørrelse

Start gjerne med liten forstørrelse, finn ut hvor eller hva du vil forstørre og øk forstørrelsen med tasten Q. Du kan redusere forstørrelse med W.

Lagre bilde

Om du vil ta et bilde, trykk tallet 0. Det kan være lurt å ha et system på hvor man lagrer bildene i forhold til fag og klassetrinn.

Høykontrast bilde i ulike farge kombinasjoner

Du kan endre bildet til svart/hvit høykontrast bilde ved å trykke F3. Et trykk til på F3 vil gi andre farger kombinasjoner. Husk du kan kombinere dette med å invertere fargebilde med bokstaven i.

Dele bildet

Det er mulig å dele bilde slik at du ha kamera bilde i en del og pc bildet i en annen. Trykk Windows-tast og en av pil tastene for å

AbleCon AS
Produkt versjon:
Kontakt info: www.ablecon.no

Side 3 av 7 ABLEBABY RAZER service@ablecenter.no veksle mellom horisontal og vertikal deling. Du kan også holde ALT-tasten nede og samtidig trykke en av piltastene for å få en fast satt deling av et fullt skjermbilde.

Full skjerm bilde av/på

Full skjerm settes ved å trykke Tabulator, et trykk igjen på tabulator slår av full skjerm og setter bilde tilbake til vindu visning.

Rotere bilde

Det er mulig å rotere bildet fast 90 grader mot høyre ved et trykk på bokstaven T. Flere trykk på T vil rotere videre rundt 90 grader. Om du ønsker mindre rotering av gangen kan du holde nede ALT og trykke T for å rotere med klokkens retning, og holde CTRL nede og samtidig trykke T for å rotere mot klokkens retning.

Få bildet tilbake til standard

Har man trykket på litt for mange knapper, kan man få tilbake standard bilde ved å trykke på bokstaven R.

OCR – Tekstgjenkjenning

Det er mulig å behandle aktivt bilde med vår innebygde tekstgjenkjenningsmodul. Prøv å få den teksten du ønsker opplest best mulig sentrert i bildet. Trykk F4. Nå leses teksten opp på valgt språk. Du kan stoppe oppleser med mellomromtasten og starte den igjen med samme mellomrom-tast. Trykk ESC for å avslutte tekstgjenkjenning og velg så om du ønsker å lagre dokumentet.

Med tasten F5 kan du bytte mellom OCR bilde og kamera bilde.

OCR – Åpne lagret dokument.

Det er mulig å hente frem lagret dokument på en enkel måte ved å trykke på F6 tasten og velge hvilket dokument du vil åpne med enter.

Skifte mellom kamera og projektor/smartboard bilde

Det er mulig å bytte mellom kamera og projektor/smartboard ved å trykke på F12 for kamera og F11 for projektor/smartboard.

Flytte projektor/smartboard

Man flytter projektor/smartboard bilde med piltaster. Det er også mulig å holde CTRL-tasten inne samtidig som du beveger på mus.

Forstørrelse i projektor / smartboard

Bildet fra projektor/smartboard kan økes ved å trykke Q og redusere ved å trykke W.

Bytte mellom Ablecenter® og andre programmer med forstørrelse og eller skjermleser på.

Man kan alternere mellom Ablecenter[®] programmet og øvrige Windows programmer med automatisk aktivering av Windows forstørrelses program og eller skjermleser. Dette gjøres enkelt ved å holde ALT-tasten inne mens man trykker på F9 tasten. Ved gjentagelse av denne taste-kombinasjonen, så hopper man tilbake i Ablecenter[®] programmet.

Hvis man ønsker denne funksjonaliteten, så må man først aktivere denne i innstillinger menyen for Ablecenter. Dette står beskrevet under. Hurtigtast kombinasjoner for

forstørrelsesprogrammet og skjermleseren står beskrevet i hurtigtast listen.

Innstillinger og funksjoner

Skifte tekst språk i OCR funksjonen

Høyreklikk i bildet og velg valget OCR. Her klikker du på fanen tekstspråk og velger ønsket språk med venstre-klikk på flagget. Klikk på den grønne haken nede til høyre for å lagre eller på det røde krysset for å avbryte.

Skifte tale språk i OCR funksjonen

Høyreklikk i bildet og velg valget OCR. Her klikker du på fanen talespråk og velger ønsket språk med venstre-klikk på flagget. Klikk på den grønne haken nede til høyre for å lagre eller på det røde krysset for å avbryte.

Skifte skrifttype i OCR funksjonen

Høyreklikk i bildet og velg valget OCR. Her klikker du på fanen skrifttype og velger ønsket skrifttype i kombinasjonsboksen. Venstre-klikk på flagget.

Klikk på den grønne haken nede til høyre for å lagre eller på det røde krysset for å avbryte.

Skifte meny språk i Ablecenter®

Høyreklikk i bildet og velg valget Innstillinger. Her klikker du på fanen språk og velger ønsket språk med venstre-klikk på flagget. Klikk på den grønne haken nede til høyre for å lagre eller på det røde krysset for å avbryte.

Skifte fargekombinasjoner på høykontrastvalgene i Ablecenter®

Høyreklikk i bildet og velg valget Innstillinger. Her klikker du på fanen farger. Her kan man velge helt egne fargekombinasjoner tilordnet F3-Tasten, ordnet etter første, andre og tredje trykk på F3 tasten. Fargene velges ved å vri med musepekeren på farge hjulene. Klikk på den grønne haken nede til høyre for å lagre eller på det røde krysset for å avbryte.

Side 6 av 7 ABLEBABY RAZER service@ablecenter.no

Endre oppløsning i Ablecenter®

Høyreklikk i bildet og velg valget **Innstillinger**. Her klikker du på fanen **Avansert** og velger oppløsning ved å klikke i **Full HD** avkryssingsboksen. Klikk på den grønne haken nede til høyre for å lagre eller på det røde krysset for å avbryte.

Aktivere forstørrelse og skjermlesings funksjonalitet i Ablecenter®

Høyreklikk i bildet og velg valget Innstillinger. Her klikker du på fanen avansert og krysser av for **Skjermforstørrer** dersom du vil aktivere forstørrelsesprogrammet eller **Skjermleser** hvis du vil aktivere talestøtte. Man kan også aktivere begge deler hvis man ønsker forstørrelse med talestøtte.