

Compact 10 HD Snabbguide

Följ dessa steg för att **öppna** Compact 10 HD:

1. Placera Compact 10 HD framför dig så att skärmen är riktad uppåt och Optelec-logotypen är nedanför skärmen.
2. Ta tag och håll enheten i en upprätt position. Dina fingrar håller i fotdelen på det vikbara stället medan tummarna håller på sidan av Compact 10 HD.
3. Medan enheten hålls fast av handflatorna, vik in fingrarna under stödbenen och tryck dem bort från baksidan av enheten. Du kommer att känna hur stödbenen börjar vikas ut tills de är helt raka.



Strömknapp

En kort tryckning på denna knapp i orange färg försätter enheten i viloläge eller väcker enheten från viloläge. En 6 sekunder lång tryckning stänger av eller startar enheten.

Ljudutgång

Använd ljudutgången för att ansluta hörlurar till enheten.

USB-C-port


Använd USB-C-porten för att ladda Compact 10 HD. Den medföljande USB-kabeln ansluts till denna USB-port och nätadaptorn.

Fullsidokamera

Fullsidokameran används när den utfällbara kamera-armen är i utfällt läge. Fullsidokameran kan användas för att titta på foton och objekt mer komfortabelt eller för att skriva text på papper med full rörlighet.



Gränssnittet

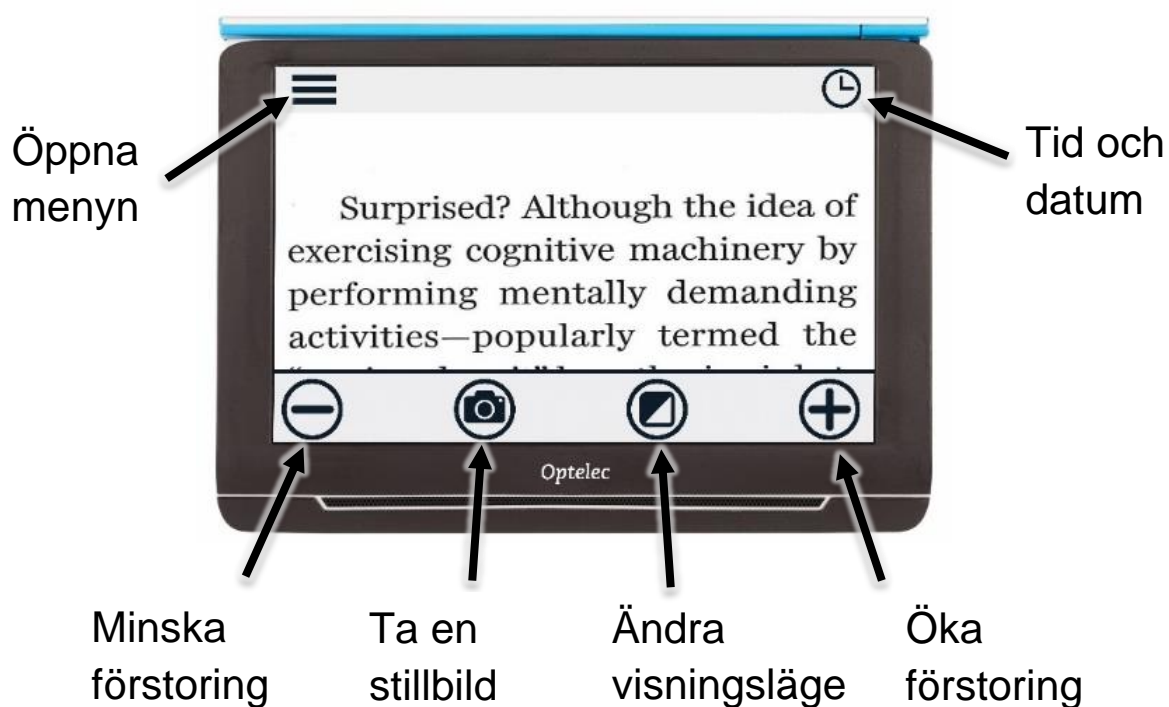

Menyn

