



FJÄRRKONTROLL SNABBGUIDE

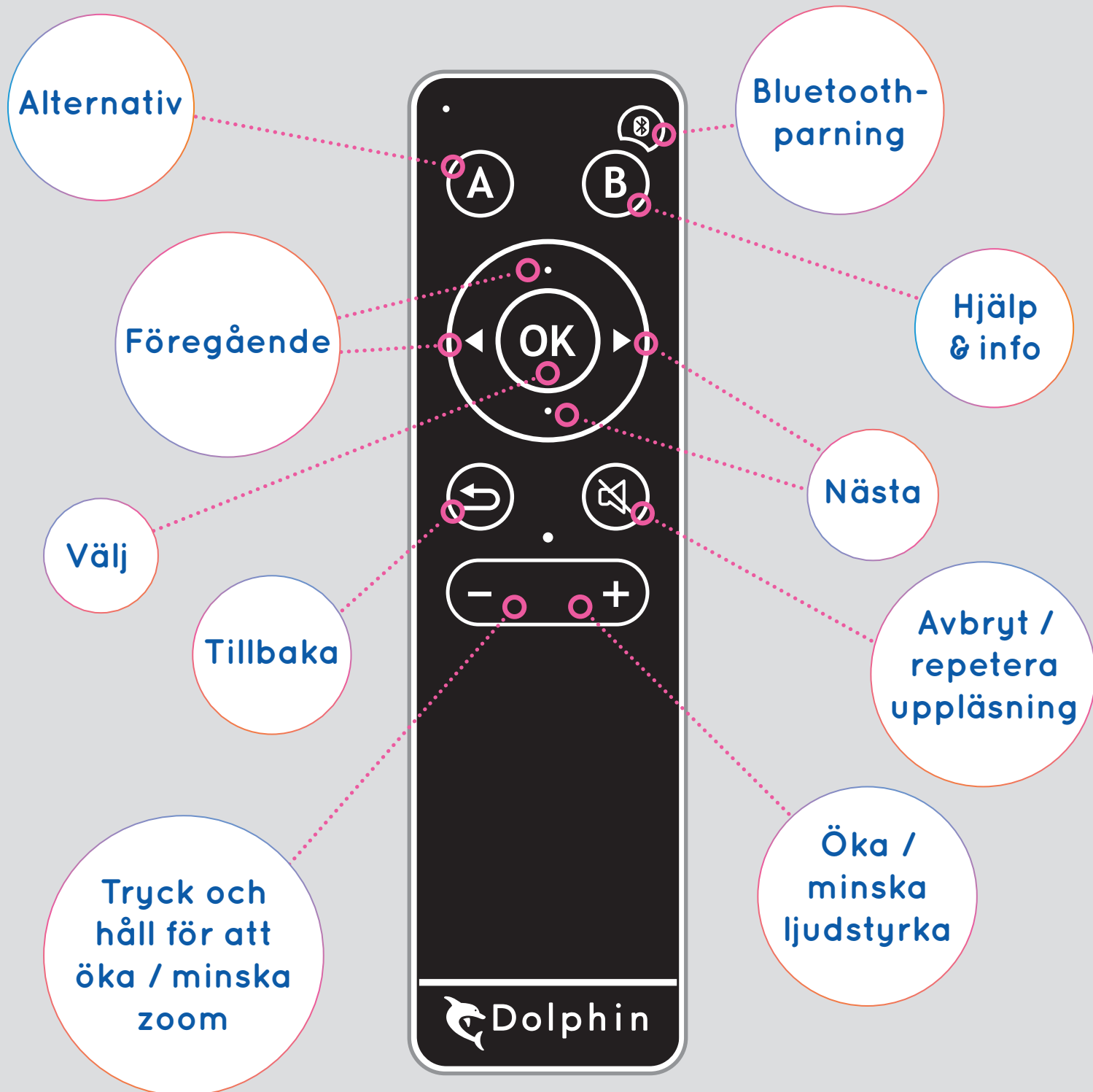

För hjälp och support ring
010 - 470 99 00

Eller e-post info@polarprint.se
www.polarprint.se

PEKSKÄRM SNABBGUIDE

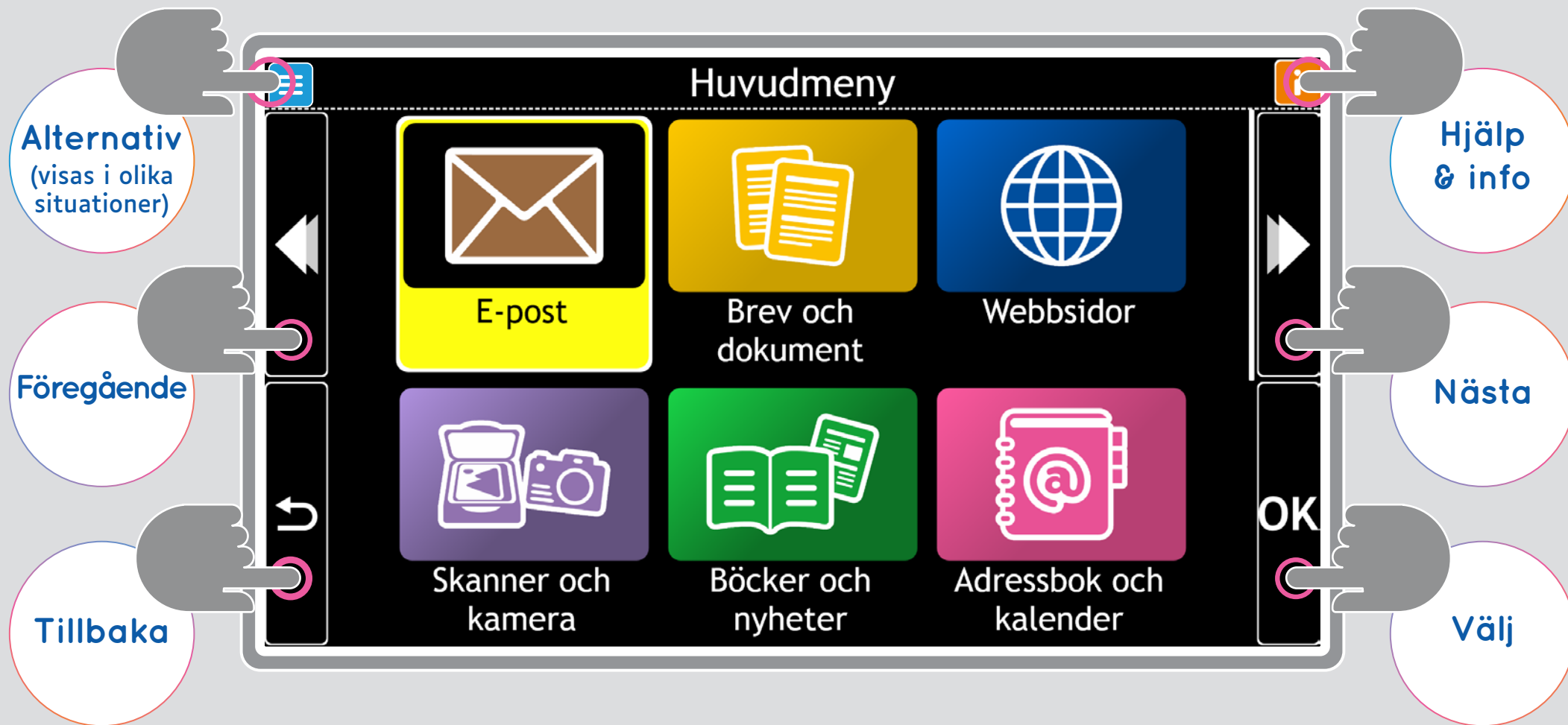

För hjälp och support ring **010 - 470 99 00**

Eller e-post info@polarprint.se

www.polarprint.se



Dolphin

GuideConnect

Ta bort försiktigt



www.polarprint.se

Eller besök vår webbsida på -

010 - 470 99 00

Om du behöver ytterligare hjälp och support med GuideConnect ring oss på -

Vik här och placera dig bakom tangentbordet

TANGENTBORDSKOMMANDON



Ctrl +0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Tal på / av	Hjälp	Alternativmenyn	Hjälp & info	Repetera	Löpande läsning	~	Ljudstyrka: Minska / Öka	Talhastighet: Minska / Öka	Zoom: Minska / Öka			

Ta bort försiktigt



FLER NYTTIGA KORTKOMMANDON

Kortkommandon för menyer

Nästa objekt	NED / PIL HÖGER
Föregående objekt	UPP / PIL VÄNSTER
Välj objekt	ENTER
Tillbaka till föregående skärm	ESCAPE
Hjälp	F1
Alternativ	F2
Hjälp & information	F3
Läs aktuellt objekt	F4
Tysta talet	CTRL

Kortkommandon för att skriva

Nästa / föregående ord	CTRL + PIL HÖGER / VÄNSTER
Markera text	SHIFT + PILTANGENTER
Kopiera markerad text	CTRL + C
Klistra in text	CTRL + V
Nästa / föregående tecken	PIL HÖGER / VÄNSTER

Kortkommandon för uppläsning

Nästa / föregående rad	PIL NED / UPP
Löpande läsning	F5
Tysta tillfälligt	CTRL
Byt röst	SHIFT + F11

Kortkommandon för webbsidor

Nästa / föregående objekt	PIL NED / UPP
Nästa / föregående tecken	PIL HÖGER / VÄNSTER
Nästa / föregående ord	CTRL + PIL HÖGER / VÄNSTER
Visa bilder PÅ / AV	CTRL + I
Ändra visningsläge	CTRL + T
Nästa rubrik	H
Nästa skrivfält	E
Nästa länk	K
Tillbaka en sida	BACKSTEG (BACKSPACE)