

Kom igång – lättläst



VICTOR READER STREAM 3

Komma igång med Victor Reader Stream 3

Victor Reader Stream 3 används för att spela upp talböcker.
Tryck och håll ner **knapp 1** för att lyssna på användarmanualen.



Slå på och av spelaren

Tryck och håll ner Strömknappen tills ett pip hörs. Tryck och håll ner Strömknappen igen för att slå av spelaren



Anslut mikrofon

Anslut hörlurar



Ladda batteriet

Sätt in USB-sladden från nätadaptern här samt sätt nätadaptern i ett vägguttag.

Ändra ljudvolymen

Öka volymen Minska volymen



Minneskort

Ljudböckerna måste finnas på minneskort.
Minneskort sätts in i springan som finns under gummiskyddet.
Gummiskyddet går att vika upp. Tryck på minneskortet för att ta ut det.



Spela upp

Tryck på Start/stopp för att börja lyssna på en bok. Tryck på samma knapp igen för att stoppa uppspelningen.



Hitta rätt bok

1. Tryck på knapp 1 för att växla mellan de bokhyllor som finns på minneskortet. Tryck på knappen flera gånger tills spelaren säger "Talböcker".
2. Tryck på 4 och 6 för att växla mellan de böcker som finns i bokhyllan Talböcker.
3. Välj bok genom att trycka Fyrkant (#).



Hoppa i talboken

1. Tryck på 2 och 8 för att välja hur stora steg spelaren ska hoppa.
2. Tryck sedan på 6 för att hoppa framåt och 4 för att hoppa bakåt



Spela in



Tryck en gång på den röda Inspelningsknappen.

Inspelningen startar.

Tryck en gång till på Inspelningsknappen för att sluta spela in.

Varje inspelning får ett nummer.

Spela upp en inspelning

1. Tryck på knapp 1 för att hoppa mellan de bokhyllor som finns på minneskortet.
Tryck på knappen flera gånger tills spelaren säger "Anteckningar".
2. Tryck på 4 och 6 för att hoppa mellan de anteckningar som finns.
3. Tryck Fyrkant (#) för att spela upp vald inspelning.



Föra över talböcker till Stream

Ofta kommer talböcker på CD. Då måste de först föras över till ett minneskort. För det behövs en dator.

Det kan göras på två olika sätt.

Det enkla sättet:

1. Stäng av Stream.
2. Sätt i en kabel i USB-kontakten.
3. Sätt samma kabel i datorn.
4. Starta Stream.
5. Stoppa CD:n i datorns spelare.
6. Starta programmet "HumanWare Companion".
(Går att ladda ner från Polar Prints hemsida under Manualer & filer på produktsidan.)
7. Välj vilken bok som skall överföras.
8. Tryck på knappen "Överför/ta bort för att börja överföra"
9. Vänta medan överföringen pågår. Korta pip hörs.
10. Stäng av Stream och ta sedan bort kabeln.



Det krångligare men snabbare sättet:

1. Ta ur minneskortet ur Stream.
2. Sätt minneskortet i en minneskortsläsare i datorn.
3. Sätt in CD:n i datorns spelare.
4. Kopiera samtliga filer från CD:n till en ny undermapp i mappen \$VRDTB på minneskortet.

Knappbeskrivning



Lås upp knapplås med siffrorna 1, 2, 3 i följd

Observera: ifall det ej går att byta till böcker på minneskort eller inspelningar genom att trycka på knapp 1 kan enheten befinna sig i online-läge. Tryck då först på Online-knappen högst upp i mitten för att växla till offline-läge.