

Användarmanual



CONNECT 12 G3

20241125

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning.....	3
Avsnitt 1: Introduktion	5
Avsnitt 2: Lär känna Connect 12.....	6
Överblick av Connect 12	7
Ställa i ordning.....	12
Avsnitt 3: Använda mjukvaran Prodigy.....	16
Ställa in Connect 12-surfplattan	16
Ikonfältet.....	17
Förstoringsläge.....	18
Autofokus.....	19
Fotografera bilder och text.....	20
Fotografera helsida	21
Flerbildstagning	22
Läsa ett dokument.....	23
Verktyg för handskrivning	27
Konfigurera och använda snabbväxling	30
Aktivera Blåljusfilter	31
Använda Huvudmenyn	32
Ladda ner böcker.....	33
Gå till sida.....	35
Kommentera i en bok	36
Bokmärken	36
Använda appåtkomst.....	38
Använda Snabbåtkomst	39
Använda kalkylatorn	40
Grafitande kalkylator från Desmos.....	41
Ordbok.....	42
Visa sparade dokument.....	46
Inställningsmenyn i Galleriet	47
Åtgärdsmeny	47
Använda avståndskamera.....	52
Växla mellan avståndskamera och förstoring.....	54

Använda kamera och förstoring samtidigt	54
Visa bilder från avståndskamera	54
Läsa med avståndskamera	55
Ta bort avståndskamera från kamera-arm	55
Visa textfiler i Prodigy	55
Examenläge	56
OCR-språkalternativ	58
Avsnitt 4: Välj kontrast	60
Avsnitt 5: Standard Brickläge	62
Avsnitt 6: Enkelt läge	64
Avsnitt 7: Ändra Inställningar	66
Avsnitt 8: Bluetoothtangentsbord	73
HumanWare-tangentsbordet	73
Ansluta ett bluetoothtangentsbord	74
Avsnitt 9: APH Code Jumper®	75
Anslut Connect 12 till en APH Code Jumper ®	75
Avsnitt 10: Komma åt Android	76
Avsnitt 11: Hjälpmenyn	77
Avsnitt 12: Ladda surfplattan	78
Avsnitt 11: Ladda avståndskameran	80
Avsnitt 14: Uppdatera mjukvara	81
Ställa in trådlöst nätverk (Wi-Fi)	81
Automatisk uppdatering	81
Manuell uppdatering	81
Information om utgåva	82
Avsnitt 15: Felsökning	83
Avsnitt 16: Rengöring och underhåll	86
Bilaga A – Specifikationer	87

AVSNITT 1: INTRODUKTION

Tack för att du har köpt Connect 12 med Prodigy-mjukvara. Enheten är ett pekstyrt system för personlig synassistans från HumanWare, världsledande inom hjälpmedelsteknik för personer med nedsatt syn.

Connect 12 med Prodigy är en intuitiv, intelligent, portabel och anpassningsbar surfplatta/system som syftar till att återställa och upprätthålla självständighet för personer med synnedsättning.

Connect 12 är ett komplett förstoringssystem som gör att du kan förstora och läsa dokument samt ta bilder när du är på språng.

Vi rekommenderar starkt att du läser användar- och säkerhetsinstruktionerna i denna användarmanual innan du använder din Connect 12. Om du har några frågor om systemet, vänligen kontakta Polar Print Försäljning AB.

Observera att programuppdateringar kan ha skett sedan denna användarmanual trycktes. För att få den senaste versionen, vänligen besök supportsidan <https://www.humanware.com/connectsupport>.

Notera: Vissa funktioner som beskrivs i denna användarmanual kanske inte är tillgängliga på ditt språk.

Copyright 2024 HumanWare Technologies Inc., alla rättigheter förbehållna. Ingen del i denna publikation får reproduceras eller distribueras i någon form, lagras i databas eller annat lagringssystem utan skriven tillåtelse från Technologies HumanWare Inc.

AVSNITT 2: LÄR KÄNNA CONNECT 12

Lådans innehåll

- Connect 12 G3 med mjukvaran Prodigy™
- USB till USB-C-kabel
- Nätadapter
- Kom igång-manual
- Snabbstartguide
- Användarmanual
- Penna för pekskärm
- Garantihandling

Skyddande bärväska


- Hopfällbart stativ

Avståndskamera (tillval)

- Avståndskamera
- Nätadapter
- USB-kabel
- Kamera-arm
- Kamera snabbstartsguide
- Kamera användarmanual
- Garantihandling
- Servicekort

ÖVERBLICK AV CONNECT 12

Framsidan (bild 1)

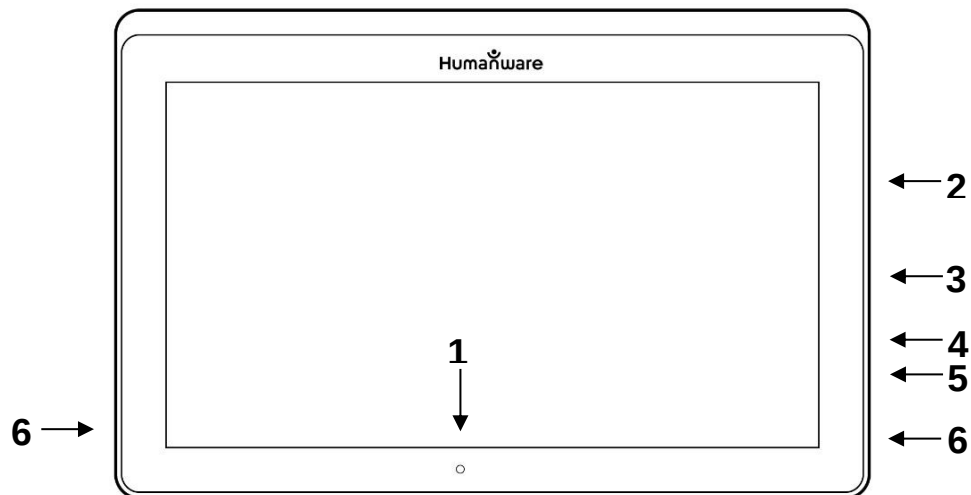


1. Framåtriktad kamera
2. Minneskortsplats, Micro-SD
3. USB-C-kontakt
4. Micro-HDMI-anlutning
5. Hörlursuttag
6. Högtalare

Nedre kanten (bild 2)




1. Volymknapp
2. Strömknapp

Baksidan (bild 3)

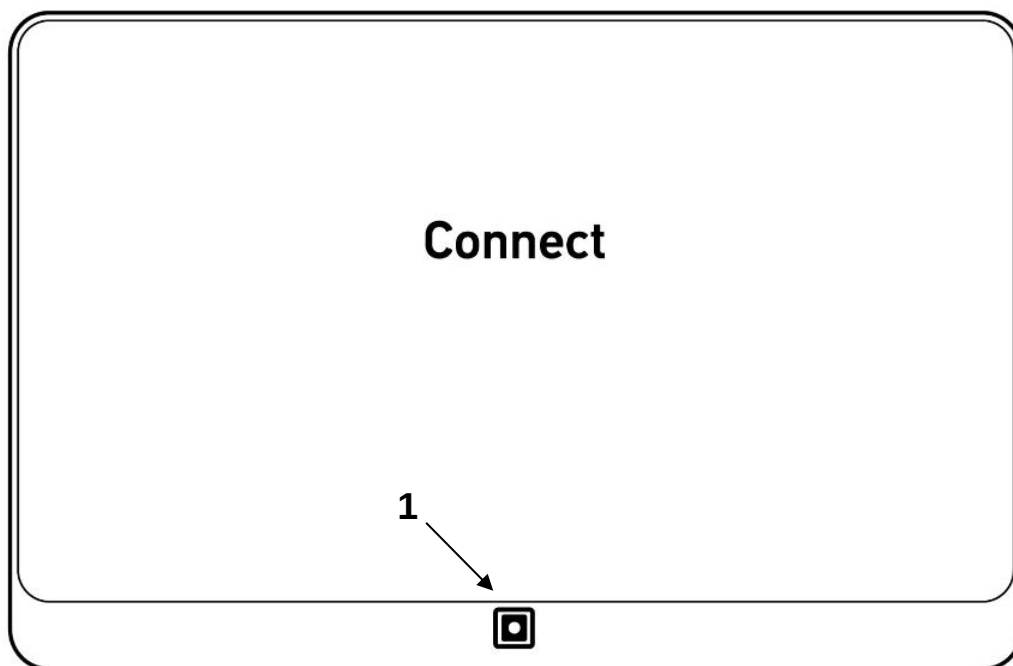


1. Bakåtriktad kamera

Ikonfältet (bild 4)

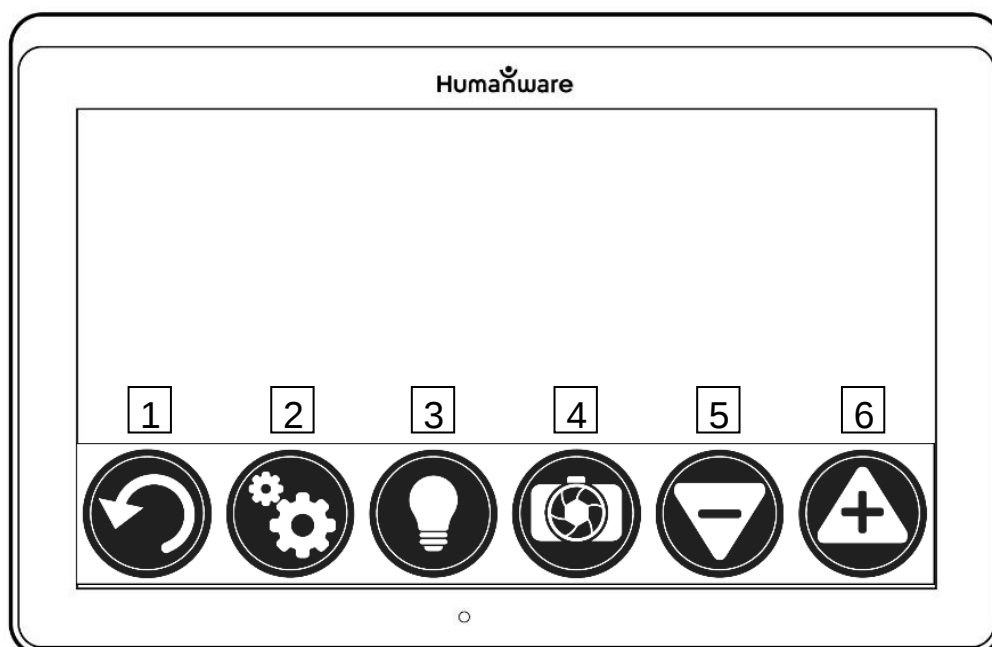


- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Tillbaka | 4. Fota/Läs |
| 2. Inställningar | 5. Minska förstoring |
| 3. Belysning | 6. Öka förstoring |

Ikon för att öppna ikonfältet (bild 5)

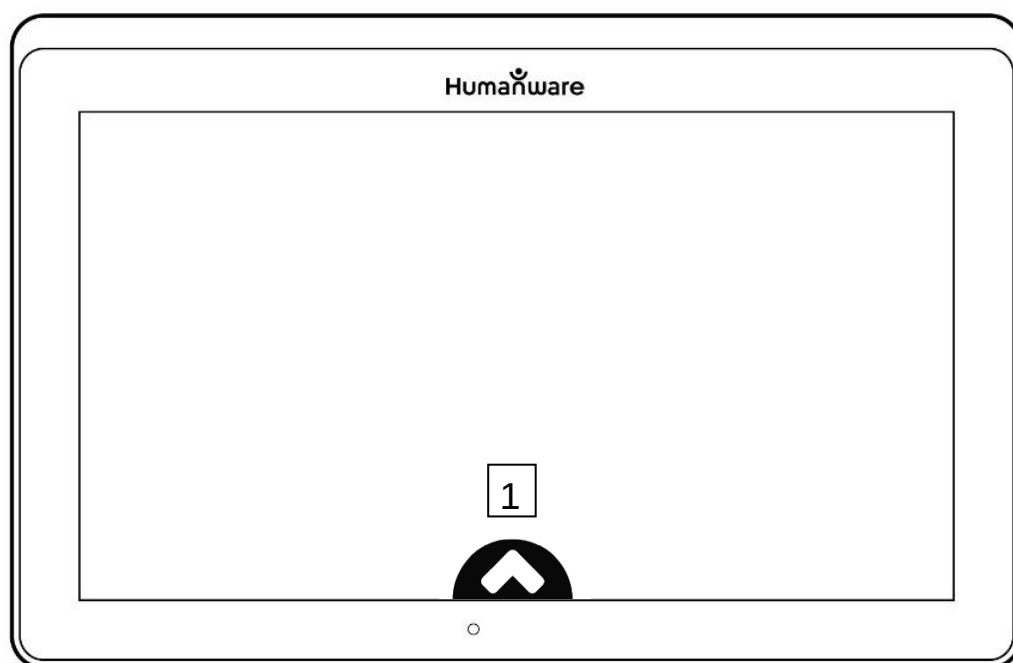


1. Öppnar ikonfältet i gränssnittet

Hopfällbart stativ (bild 6)

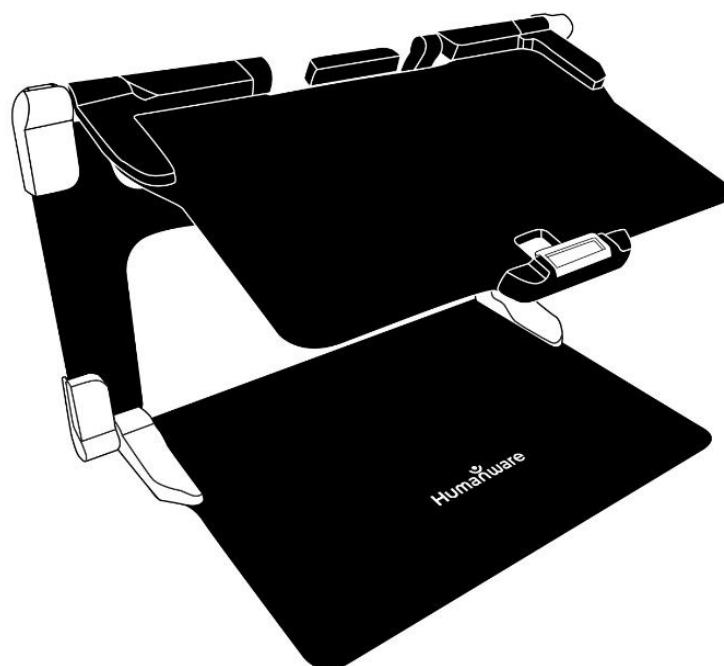


Avståndskamera (bild 7)

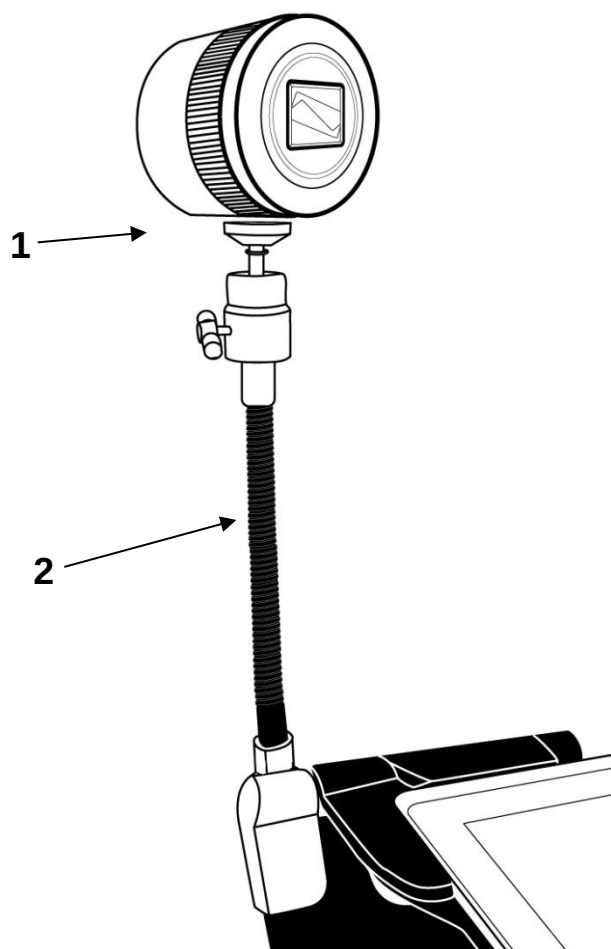


- 1. Avståndskamera
- 2. Kamera-arm för avståndskamera

Avståndskamera, framifrån (bild 8)

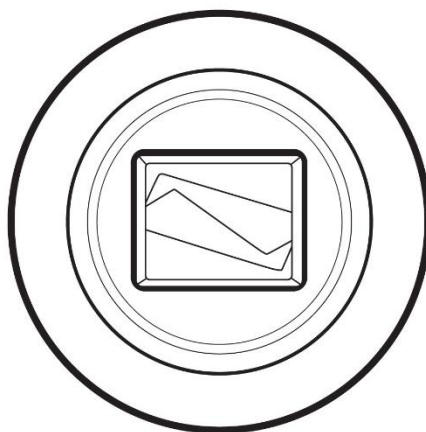


Avståndskamera, ovanifrån (bild 9)

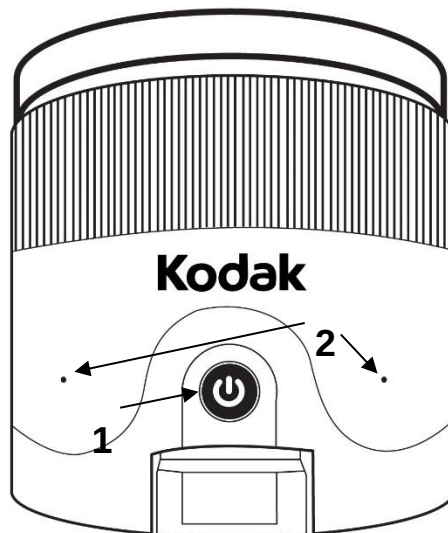

1. Strömknapp
2. Mikrofoner

Avståndskamera, vänster sida (bild 10)

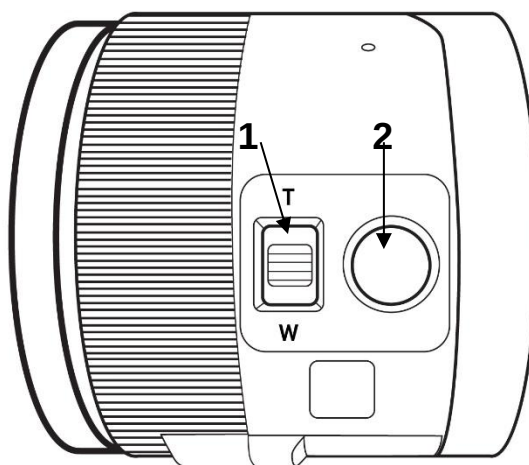


1. Förstoringsreglage
2. Slutarknapp

OBSERVERA: Spara snabbstartsguiden som följer med avståndskameran eftersom den innehåller information om parkoppling.

STÄLLA I ORDNING


Ovanför ett plant, stabilt bord håller du i det hopfällbara stativet i en upprätt position och försäkra dig om att panelen med ordet "Connect" är riktad mot dig. Samtidigt som du håller i handtaget med en hand, vik ut den undre panelen med din andra hand tills den ligger plant mot bordet.

Hopfällbart stativ, hopfälld position (bild 11)

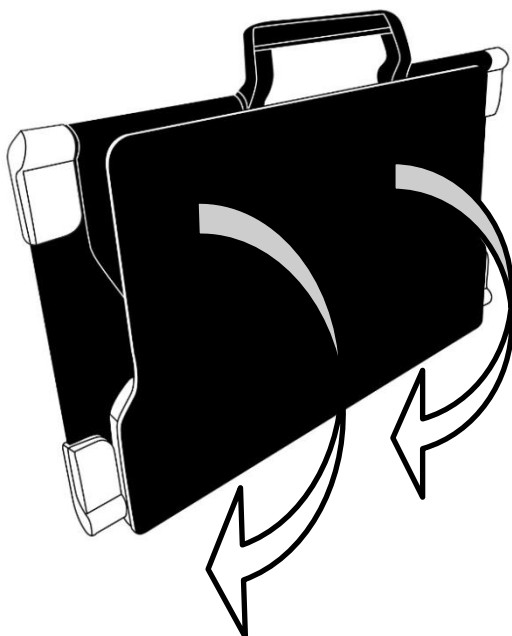


Hopfällbart stativ (bild 12)

Vik sedan den övre panelen tills den är ungefär parallell med den nedre panelen.

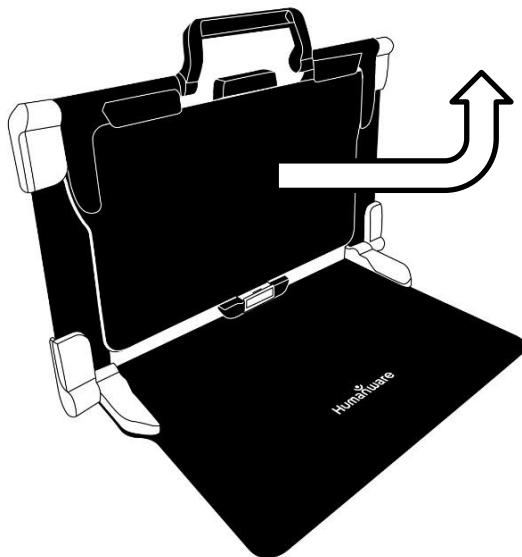


Hopfällbart stativ, uppvikt position (bild 13)

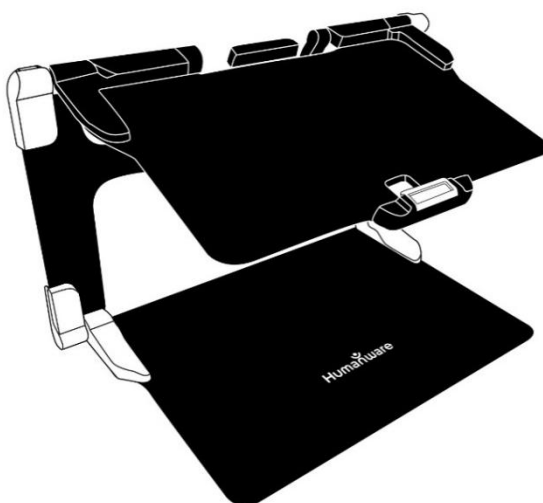

Hopfällbart stativ med surfplatta (bild 14)


Håll din Connect 12-surfplatta med skärmen vänd mot dig (HumanWare-logotypen ska vara högst upp, i mitten av enhetsramen). Justera försiktigt och sätt in plattans övre del vid de tio kontaktstiften som finns högst upp, i mitten av stället. Tryck ner den nedre delen av surfplattan tills du hör ett klick som indikerar att surfplattan är fastsatt. För att lossa surfplattan, placera tummen på den orange klämman och skjut den nedåt, mot dig.

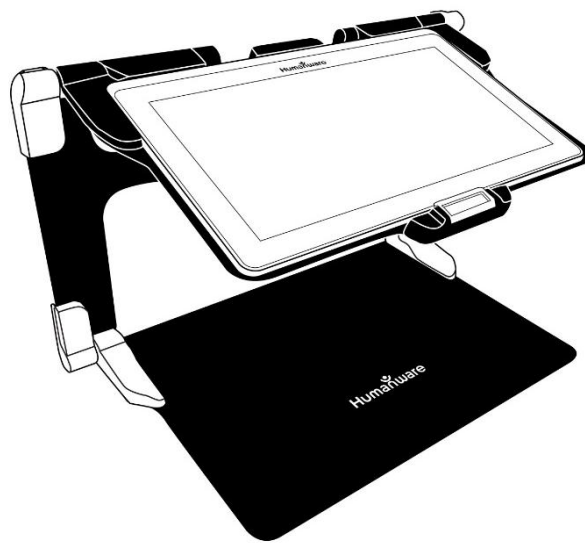

USB-C-porten är placerad på högra sidan av surfplattan. Anslut USB-kabeln till USB-C-porten och anslut den till ett eluttag med hjälp av nätadaptern. Ladda batteriet till full kapacitet (en full laddning tar cirka 4 timmar).

USB-C-kabel och USB-C-port (bild 15)

Sätt försiktigt in kabeln i USB-C-porten.

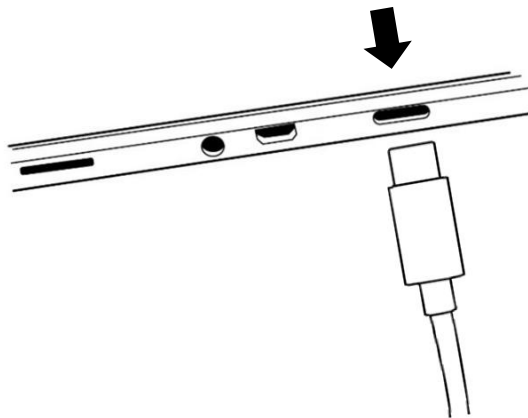

VIKTIGT: Använd endast den nätadapter och kabel som medföljer. Var försiktig när du sätter in kabeln i USB-C-porten.

Starta enheten

Tryck ner och håll inne strömknappen i två till tre sekunder för att starta surfplattan. HumanWare- och Android-logotyper visas på skärmen. Surfplattan tar ungefär 45 sekunder att starta.



AVSNITT 3: ANVÄNDA MJUKVARAN PRODIGI

STÄLLA IN CONNECT 12-SURFPLATTAN

För att se detaljerade videor om surfplattans första inställningsprocess, besök HumanWares supportsidan för Connect 12 (www.humanware.com/connectsupport) eller HumanWares YouTube-kanal.

Notera: Surfplattan måste genomgå Androids installationsguide innan Prodigy-mjukvaran kan användas. Processen liknar inställningen av en ny telefon. Se till att ha inloggningsuppgifter för Wi-Fi samt Google-kontoinformation redo. Det är rekommenderat att ställa in både Wi-Fi och Google-konton under denna process.

Vissa steg i processen kommer att ta några minuter.

När Android-guiden är slutförd kommer du att bli ombedd att installera Prodigy-mjukvaran, följ bara anvisningarna på skärmen.

När Prodigy-mjukvaran är installerad kommer systemet att söka efter uppdateringar och sedan blir du ombedd att välja och installera en eller flera röster (maximalt fyra röster).


Slutligen kommer du att bli ombedd att välja din standardapp för hemknappen. I de flesta fall rekommenderar vi Prodigy-mjukvaran.

IKONFÄLTET

De flesta funktionerna i Prodigy-mjukvaran utförs via ikonfältet längst ner på skärmen.


Tryck på pilknappen nederst eller **svep uppåt** för att öppna ikonfältet.

Ikon för att öppna ikonfältet (bild 16)

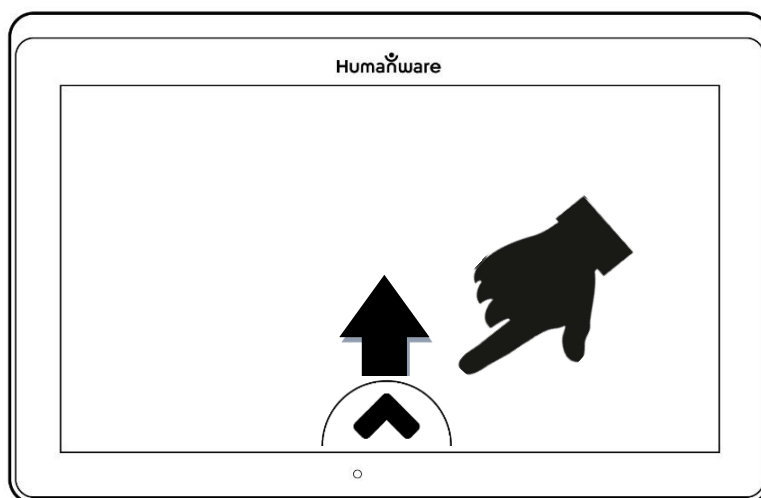

För att dölja ikonfältet (för att kunna se hela skärmen), svep nedåt på ikonen. Ikonfältet kommer att ersättas av ikonen "Öppna ikonfält" längst ner på skärmen.

Ikonfältet (bild 17)

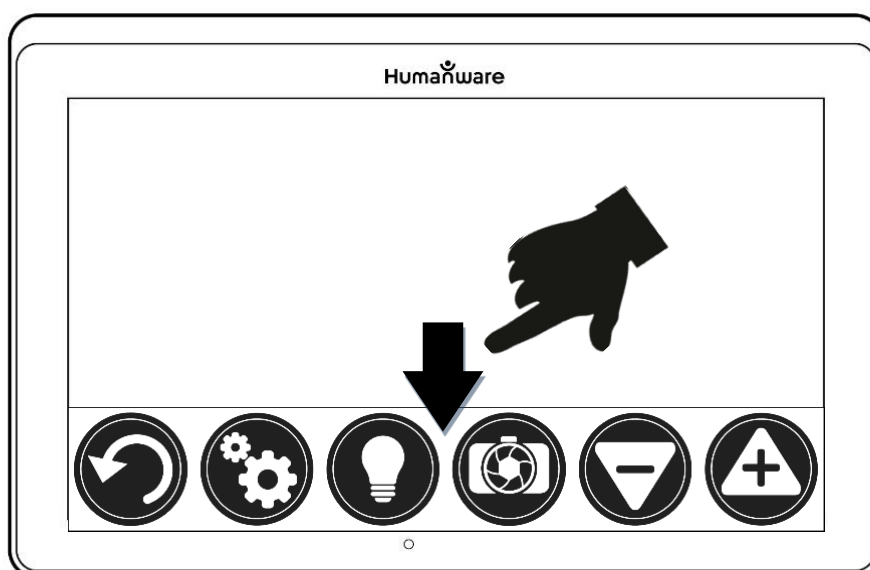

FÖRSTORINGSLÄGE

Steg 1: Tryck på Förstoringsglasikonen



Steg 2: Tryck på Inställningsikonen (se bild 4)



Steg 3: Svep till Kamera i Inställningar och växla mellan Kamera: Bakre och Kamera: Främre

När du använder den bakre kameran (bild 3) placeras surfplattan ovanför dokumentet eller objektet du vill titta på.

När du använder den främre kameran (bild 1) kan du placera dig själv framför surfplattan för en spegelvy.

Notera: OCR-funktionen (Optical Character Recognition) inaktiveras automatiskt när den främre kameran används.

Du kan också komma åt alternativet för främre/bakre kamera med ett långt tryck (3 sekunder) på Kameraikonen.



Flytta objektet eller dokumentet under din surfplatta för att lokalisera text eller visuella detaljer.

Tryck på ikonerna **Öka förstoring** eller **Minska förstoring** för att justera förstoringnivån. Ikonen Öka förstoring (+) ökar bild-/teckenstorleken, medan ikonen Minska förstoring (-) minskar bild-

/teckenstorleken. Du kan också trycka och hålla in ikonerna för att gradvis och stegvis justera förstöringsnivån. Släpp när du har nått önskad förstöringsnivå.



Utöver ikonerna för att ändra förstoring kan du använda nypgester för att justera förstoringen. Minska avståndet mellan två fingrar för att minska förstoring och öka avståndet för att öka förstoringen.

Nypgester (bild 18)



AUTOFOKUS

Prodigi-mjukvaran låter dig låsa eller låsa upp autofokus. Detta är användbart när ett dokument är korrekt fokuserat och du vill låsa dess position eller när du vill utföra en syssla såsom skriva på ett papper och förhindra att surfplattan försöker omfokusera på din hand eller penna till exempel.

För att låsa autofokus genomför du en dubbeltryckning (tryck två gånger i snabb följd) var som helst på skärmen. Följande ikon kommer att visas i övre högra hörnet på skärmen när autofokus är inaktiverat.



- Dubbeltryck igen var som helst på skärmen för att låsa upp autofokus. Ikonen för inaktiverat autofokus kommer att försvinna.

FOTOGRAFERA BILDER OCH TEXT

Placera surfplattan med hjälp av stativet ovanför ett dokument eller objekt som du vill fotografera.

Notera: Surfplattan behöver inte vara perfekt inriktad ovanför dokumentet. Som standard kommer Prodigy automatiskt att korrigera för vinkeln på din surfplatta.


På skärmen visas två mörka triangelformade former på vardera sida om dokumentet som indikation på vinkelkorrigering. Du kan inaktivera denna funktion genom att trycka på Inställningsikonen, svepa upp för att välja Vinkelkorrigering och välj Aktivera eller Inaktivera. Tryck på Tillbaka för att avsluta.

Tryck på ikonen Fota/läs för att ta en bild av ditt dokument eller tryck och håll fingret på skärmen i 2 sekunder. Du kommer att höra ett slutarljud följt av ett klickande ljud, vilket indikerar att dokumentet har fotats.




Så snart bilden har tagits kommer ikonen med glödlampa att ersättas av en ikon med symbolen spara.

- Tryck på denna ikon för att spara fotot i galleriet för framtida användning.

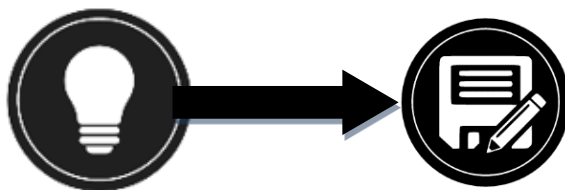

- Tryck på ikonen Tillbaka om du vill återvända till förstoringläget.

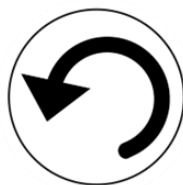

FOTOGRAFERA HELSIDA

Fotografera en helsida

- Lägg ditt papper horisontellt (landskapsläge) istället för vertikalt, så att sidans överkant ligger vid surfplattans vänstra kant och textens nederkant vid surfplattans högra kant.
- Tryck en gång på ikonen Minska förstoring i Förstoringläget. Detta aktiverar helsidesvyn och minskar ikonfältet.
- Justera pappret under stativet så att all text visas.
- Tryck på Kameraikonen eller håll fingret på skärmen för att ta ett foto.


Tips: För att kunna få med mer text, höj surfplattan från dokumentet för att få en bredare vy.

För att återgå till Live-läget och titta på mindre objekt eller dokument trycker du på ikonen för att öppna Ikonfältet och trycker sedan på ikonen Öka förstoring en gång.

FLERBILDSTAGNING

För att fota av och spara ett flersidigt dokument, växla till läget Flerbildstagning genom att svepa på vänstra kanten på pekskärmen:

Flerbildtagningsläge (bild 19)

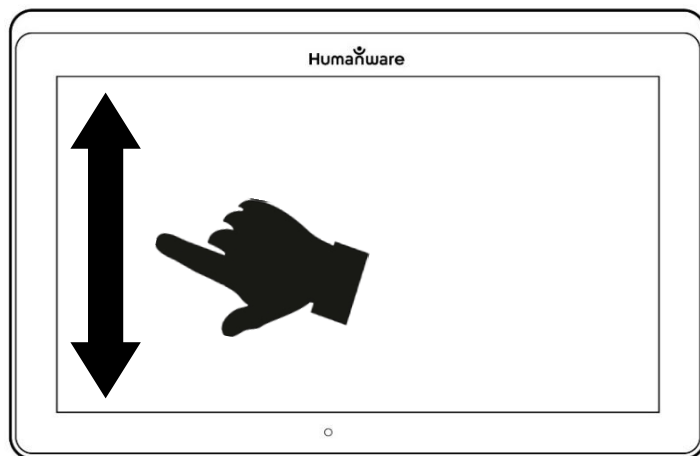

Notera: Du kan också växla till läge Flerbildstagning via Inställningarna. Tryck på ikonen Inställningar, svep uppåt för att välja Läge, tryck på det för att välja Flerbildstagning. Tryck Tillbaka för att avsluta Inställningar.


- Du kan nu fota av flersidiga dokument. Placera surfplattan ovanför den första sidan i dokumentet som du vill fota av samt tryck på Fotoikonen eller håll fingret nedtryckt på skärmen. Fortsätt på samma sätt med varje sida du önskar fota av. Ditt flersidiga dokument kommer att sparas i Galleriet.
- Tryck på Galleriikonen för att visa fotade bilder.



- Tryck på första sidan i dokumentet för att öppna det.

LÄSA ETT DOKUMENT

När du har tagit en bild kommer Fotoikonen att ändras från kamerabild till en uppspelningssymbol. Detta är nu Läsikonen.

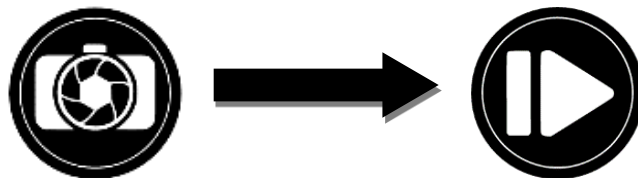

- Tryck på Läsikonen för att påbörja uppläsning.



- Tryck på Läs eller utför en lång tryckning var som helst på skärmen i 2 sekunder för få texten att börja rulla samt läsas upp utifrån dina läsinställningar. Du kan också göra en lång tryckning på ett specifikt ord i dokumentet för att börja läsa därifrån.

Notera: När du trycker på Läsikonen kommer ikonfältet att döljas för att ge en bättre vy av bilden. Ikonfältet kan aktiveras när som helst genom att trycka på ikonen Öppna ikonfält eller svepa uppåt på den nedre delen av skärmen.

- Använd knapparna Volym upp och ner för att justera volymen.
- För att pausa, tryck på Läsikonen igen eller utför en lång tryckning var som helst på skärmen.
- När enheten är pausad, tryck Tillbaka för att avsluta läsvyn och Tillbaka igen för att återvända till kameravyn.




- För att återuppta, tryck på Läsikonen igen eller utför en lång tryckning.

I Förstoringsläget låter Läsläget dig öka och minska förstoringen i fotade dokument.

Öka och minska förstoring i fotade dokument

- Tryck på ikonerna **Öka** eller **Minska förstoring** för att justera förstoringsgraden. För att öka teckenstorlek, tryck på ikonen **Öka förstoring (+)**. För att minska teckenstorlek, tryck på ikonen **Minska förstoring (-)**. Du kan också trycka ner och hålla inne ikonerna Öka eller Minska förstoring för att gradvis justera förstoringen och släppa när du har nått önskad förstoringsgrad.
- Förutom Förstoringsikonererna kan du också använda nypgester för att justera förstoringsgraden.
- För att direkt zooma in på en intressant del, tryck en gång på området du är intresserad av och bilden kommer att zoomas in till din önskade förstoringsnivå.
- Om du har en förstoringsgrad över 1X kan du flytta runt i det förstorade dokumentet genom att utföra en **Panoreringsgest** (drag sakta ditt finger över skärmen utan att lyfta det).


Panoreringsgest (bild 20)

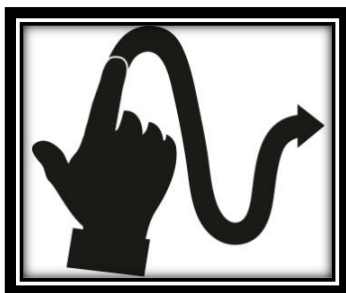

- Du kan också panorera för att nå andra delar av en förstorad bild.

- För att växla mellan olika kontraster, svep på högra sidan av skärmen eller aktivera inställningarna.

Gest för inställningar (bild 21)

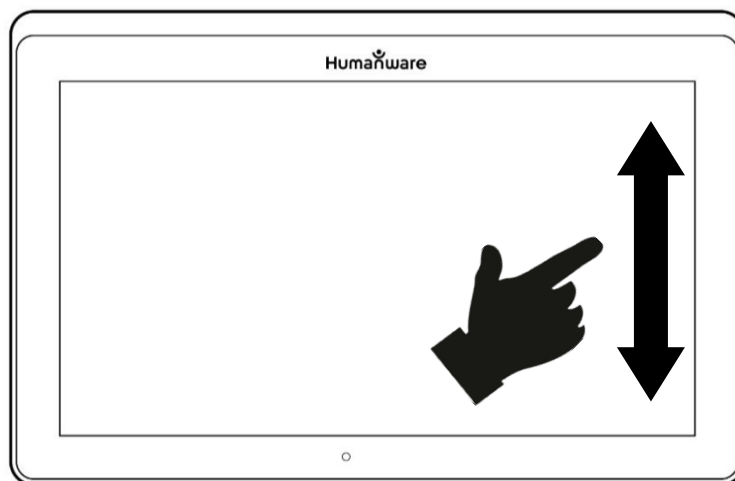

Notera: Text kan visas på tre olika sätt (Läslägen): Aktivera Inställningarna för att välja en enda rad i Radläget, en kolumn i Kolumnläget (standardläget) eller så kan du läsa text utan att ändra dess placering i Sidläget. Två "större än"-tecken visar slutet på ett stycke i Rad- och Kolumnlägena (>>).

Prodigi piper och meddelar "Slutet av dokumentet" när du når slutet av ditt dokument, tryck Läs för att läsa från början igen.


- För att ställa in ett annat Läsläge, tryck på Inställningsikonen, svep upp till alternativet Läsläge och välj detta.



- Tryck på Läsläge för att ändra värde. Tryck Tillbaka för att avsluta Inställningarna.
- Du kan öka talhastigheten temporärt vid läsning genom att svepa till vänster och lyfta upp fingret på pekskärmen samt minska talhastigheten genom att svepa till höger.

Notera att talhastigheten kommer att ändra läsningshastigheten (textens rullningshastighet) på motsvarande sätt.

Gest för rullningshastighet (bild 22)

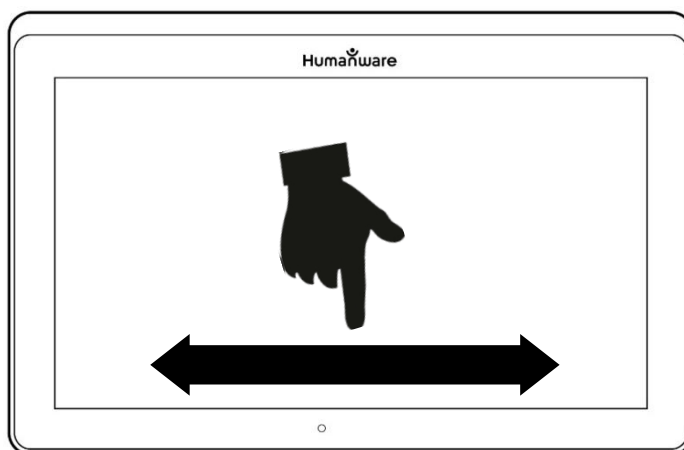

Du kan också öka eller minska talhastigheten permanent under Inställningarna. Tryck på Inställningsikonen, välj Talhastighet och ställ in ett värde. Tryck Tillbaka två gånger för att stänga Inställningarna.

Du kan ändra läshastigheten (textens rullningshastighet) genom att svepa till vänster eller höger eller via Inställningar även när talet är inaktiverat.

- Växla mellan Tal På och Av genom att dubbeltrycka på skärmen vid läsning. Alternativt kan du trycka på Inställningsikonen, välja Tal samt välja Endast dokument eller Av.
- Prodigy-mjukvaran låter dig ha upp till 4 olika röster som kan användas för att läsa upp textdokument. Tryck på Inställningsikonen för att välja en annan röst, välj Röst och tryck för att växla mellan de 4 röstalternativen.
- Tryck Tillbaka för att återvända till ditt dokument.
- Tryck Tillbaka för att stoppa läsningen och återvända till kameravyn.


Notera: Försäkra dig om att språket på den valda rösten är detsamma som i dokumentet du vill läsa.

VERKTYG FÖR HANDSKRIVNING

Connect 12 har ett handskrivningsverktyg som är användbart för överstrykning, frihandsritning samt skrivning av text på fotade bilder.

Öppna handskrivningsverktyg

- Öppna en sparad bild från Galleriet eller spara en fotad bild i Förstoringsläget.
- Tryck på ikonen med en Penna i ikonfältet.

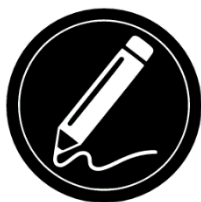


Så snart handskrivningsverktyget är aktivt visas 4 nya ikoner (tillsammans med Tillbakaikonen) i ikonfältet.

Med ikonen Verktogsval kan du kan välja mellan Penna, Överstrykning eller Textverktyg. Tryck på ikonen för att växla till önskat verktyg.

Pennan, Överstryknings- och Textverktygets ikoner visas nedan.




Suddverktyget används för att sudda bort det som har ritats med pennan/överstrykning samt inskriven text.

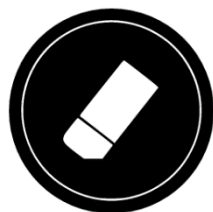

Ikonen för Färgval öppna färgmenyn. Tryck på den för att välja önskad färg på det valda verktyget.



Ikonen för Storlek öppnar storleksmenyn. Tryck på den och välj storlek för text eller bredd på strecken för pennan/överstrykning.

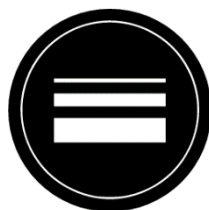

Använda penna eller överstrykningsverktyg

- Välj antingen pennan eller överstrykning genom att trycka på ikonen Verktysval i ikonfältet. Dra fingret på skärmen för att rita streck med pennan eller överstrykningsverktyget.

Sudda text eller streck från penna/överstrykningsverktyg

- Trycka på ikonen för Suddverktyget.
- Dra fingret över det som ska suddas.
- När det är klart avmarkerar du Suddverktyget genom att trycka på ikonen igen.

Notera: Suddverktyget tar endast bort streck gjorda av det valda verktyget.

Skriva text

- Välj Textverktyget genom att trycka på ikonen Verktygsval i ikonfältet.
- Tryck ner och håll ner fingret på skärmen där du vill skriva text.
- Ett virtuellt tangentbord visas på skärmen, använd det för att skriva in din text. Det går också att använda ett fysiskt Bluetooth-tangentbord om ett sådant är parkopplat med enheten.
- När du skrivit klart trycker du på ikonen med ett pappersplan uppe till höger på skärmen för att bekräfta inmatningen. Alternativt kan du trycka Ctrl + Enter för att bekräfta inmatningen om du använder ett Bluetooth-tangentbord.

Flytta text

- Tryck på ikonen Verktygsval i ikonfältet.
- Tryck en gång på den skrivna texten för att markera den. En röd ruta visas runt texten vilket betyder att den nu är markerad.
- Dra texten till sin nya plats.
- Tryck var som helst på skärmen för att avmarkera texten.

Ändra textstorlek

- Tryck på ikonen Verktygsval i ikonfältet.
- Tryck en gång på den skrivna texten för att markera den. En röd ruta visas runt texten vilket betyder att den nu är markerad.
- Ändra textstorleken genom att använda knipgester: minska avståndet mellan två fingrar för att minska textstorleken eller öka avståndet för att öka textstorleken.
- Tryck var som helst på skärmen för att avmarkera din text.

Panorerar i en bild vid redigering

- Placera två fingrar på bilden.

- Dra fingrarna uppåt, nedåt, höger eller vänster.
- Lyft fingrarna från bilden när det är klart.

Notera att om avståndet mellan fingrarna förändras vid panorering kommer bilden att förstöras eller förminskas istället.

KONFIGURERA OCH ANVÄNDA SNABBVÄXLING

Snabbväxling gör att du snabbt kan komma åt dina favoritappar genom att svepa över skärmen.

Funktionen snabbväxling

- Tryck på Inställningsikonen i Huvudmenyn och sedan Appar.




- Tryck på Snabbväxling.

För att aktivera snabbväxling måste du välja minst en applikation. Du kan använda Sök för att manuellt skriva in den applikation du vill lägga till eller välja Applikation för att sedan välja så många appar du vill från listan.

Placera två fingrar mitt på skärmens vänstra sida (se bild 23) och dra dem mot skärmens högra sida. Prodigy kommer att känna av ditt svep och växla till nästa app som du valt från listan.

Gest för Snabbväxling (bild 23)

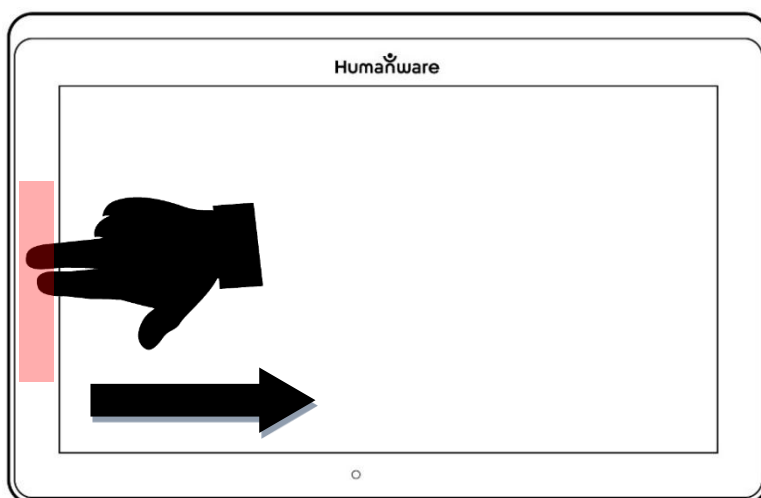

- Du måste svepa varje gång du vill växla. Snabbväxling växlar till nästa app i samma ordning som du valde dem.


Snabbväxling kan användas från vilken applikation som helst.

AKTIVERA BLÅLJUSFILTER

Blått ljus är känt för att minska produktionen av melatonin (ett sömnhormon), så att filtrera bort blått ljus kan hjälpa till att förebygga sömnproblem.

Prodigi är utrustad med ett intelligent blåljusfilter som gör att du kan minska mängden blått ljus som visas på skärmen.

- Välj Inställningsikonen i Huvudmenyn.
- Tryck på Användargränssnitt i Inställningsmenyn.
- Tryck på Blåljusfilter.
- Välj en av de fem filterinställningarna: Av, Låg, Medel, Hög och Max.

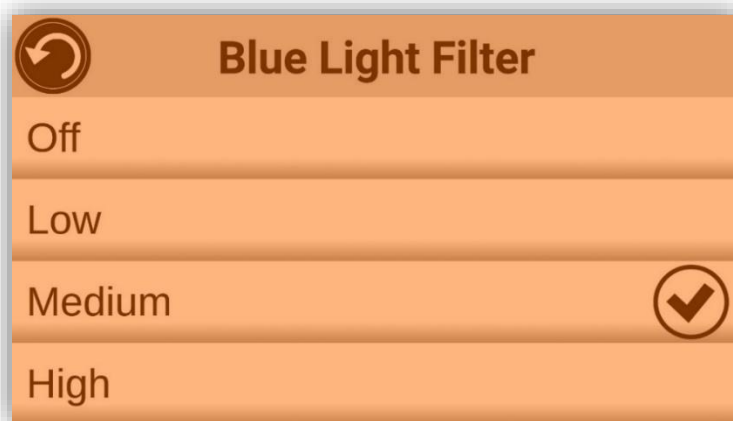

ANVÄNDA HUVUDMENYN

Prodigi-mjukvaran har 10 applikationer:

1. Appåtkomst
2. Snabbväxling
3. Kalkylator
4. Ordbok
5. Böcker
6. Avståndskamera (tillbehör)
7. Förstoring
8. Galleri
9. Inställningar
10. Hjälp

Applikationsikonerna visas här i samma följd som ovan:



Gå till den cirkulära huvudmenyn från Förstoringsläget

- Tryck Tillbakaikonen för att avsluta Förstoringsläget och gå till huvudmenyn.

Prodigi meddelar "Huvudmeny" följt av den för tillfället valda applikationen.

- Den för tillfället valda applikationen visas i mitten av skärmen.
- Slep vänster eller höger i huvudmenyn för att välja applikation.
- Tryck på vald applikation för att starta den.
- Tryck Tillbakaikonen för att återvända till huvudmenyn.

Tips: Du kommer åt huvudmenyn när som helst i systemet genom att dubbeltrycka med två fingrar var som helst på skärmen.

LADDA NER BÖCKER

Bokapplikationen i Prodigi låter dig ladda ner eBöcker, tidskrifter och andra utgåvor från olika bibliotek.

- Välj och tryck på ikonen Böcker i huvudmenyn.



- När du öppnar Böcker måste du välja en av bok- eller prenumerationstjänsterna från en lista. För att göra detta, välj Hantera bibliotek och sedan Bokleverantörer eller Tidningsleverantörer.
- Tryck på ett bibliotek och logga in med det användarnamn och lösenord som organisationen har tillhandahållit. Ange först ditt användarnamn och tryck på den blå knappen på höger sida av tangentbordet. Ange sedan ditt lösenord och tryck på den blå knappen igen. Din inloggningsinformation sparas.

Notera: Ditt lösenord kommer att vara dolt som standard. Tryck på Ögonikonen till höger om lösenordsfältet för att visa lösenordet i klartext. Tryck igen för att dölja lösenordet.


Efter att inloggningsuppgifterna har godkänts trycker du på Tillbakaikonen två gånger tills du återvänder till Bokmenyn. Varje bibliotek för vilket du har loggat in kommer att visas i listan.

Notera: Varje bibliotek har olika sökfält; de kan erbjuda sökningar via Titel, Nya utgåvor, Författare, Nyckelord, Kategori, Innehåll, ISBN-nummer, etc.

- Tryck på ikonen Hämta för att ladda ner en bok. Boken kommer att läggas till i undermenyn Mina böcker.
- För att läsa en nedladdad bok, välj undermenyn Mina böcker och tryck på boktiteln från listan över nedladdade böcker.

För att ladda ner en tidning eller tidskrift måste du prenumerera på den via undermenyn Tidskrifter, välj en kategori, tryck på den publikation du vill prenumerera på. En bockmarkering visas till höger, och ett popup-fönster informerar dig om att publikationen har lagts till i ditt bibliotek.

- Tryck på Tillbakaikonen två gånger för att återgå till Bokmenyn.
- För att läsa en nedladdad tidning eller tidskrift, välj Mina prenumerationer, välj tidningen eller tidskriften och tryck på det nummer som har en pil till höger om sitt datum.
- När nedladdningen är klar, tryck på Läs för att börja läsa.
- Tryck på Läs igen för att pausa. Du kan sedan svepa åt vänster eller höger för att navigera mellan sidorna i boken.
- Du kan också navigera per kapitel genom att trycka på Navigeringsikonen i ikonfältet.

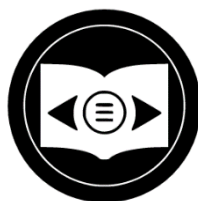

- Bokkapitel kommer att visas. Svep upp eller ner för att välja ett kapitel.
- Tryck på Tillbakaikonen för att avsluta och återgå till din boklista.

GÅ TILL SIDA

Bokapplikationen i Prodigy har en Gå till sida-funktion som möjliggör snabb och enkel navigering till vilken sida som helst i en bok. Notera: Denna funktion fungerar endast för böcker som har sidnumrering och/eller en innehållsförteckning.

Navigera i innehållsförteckningen

- När en bok är öppen, tryck på Navigationsknappen och välj Innehållsförteckning.
- Tryck på avsnittet eller kapitlet som du vill komma åt.

Gå till sida

- Tryck på Boknavigeringsikonen. En meny öppnas.



- Tryck på Gå till sida. Ett textfält visas.
- Ange numret eller namnet på den sida du vill komma åt och tryck på bokmarkeringen på tangentbordet. Prodigy kommer att visa boken på den valda sidan.

 Book navigation	
Table of contents	➤
Go to page	➤

Sidlistnavigering

- Tryck på Boknavigeringsikonen. En meny öppnas.
- Tryck på Sidlista.
- Välj den sida du vill komma åt från listan. Prodigy kommer att visa boken på den valda sidan.

KOMMENTERA I EN BOK

Du kan lägga till tre olika typer av markeringar i nedladdade böcker: handskrivna anteckningar med hjälp av pekskärmen, överstrykning samt textanteckningar.

BOKMÄRKEN

Använd bokmärken för att märka ut specifika platser i en bok. När ett bokmärke har lagts till kan du när som helst komma åt det, byta namn på det eller ta bort det.

Lägg till bokmärke


- Tryck på Bokmärkesikonen, som finns uppe till höger på skärmen. Bokmärkesmenyn öppnas.

- Om du navigerar i sidläge visas bokmärkesikonen till vänster på skärmen.



- Tryck på Lägg till.
- Ange bokmärkesnamnet i textfältet som visas. Tryck på Pappersflygsikonen (uppe till höger på skärmen) för att spara bokmärkesnamnet.

Notera: Bokmärkesnamn är begränsade till 40 tecken.

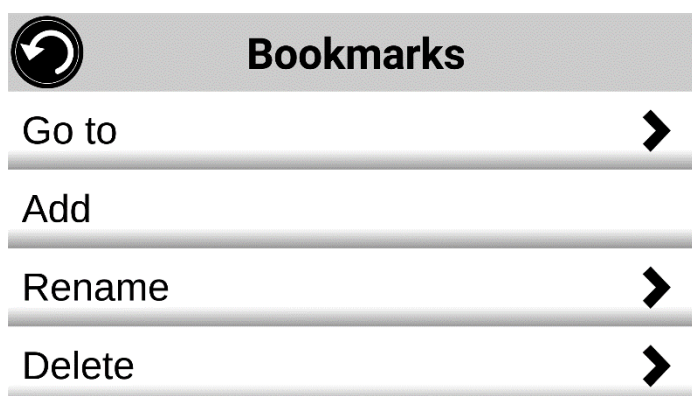

Gå till bokmärke

- När en bok är öppen, tryck på Bokmärkesikonen.
- I bokmärkesmenyn, tryck på Gå till. En undermeny öppnas med en lista över bokmärken.
- Välj ett bokmärke från listan. Prodigy öppnar boken vid bokmärkesplatsen.

Byt namn på bokmärke

- När en bok är öppen, tryck på Bokmärkesikonen.
- I bokmärkesmenyn, tryck på Byt namn. En undermeny öppnas som listar alla bokmärken.

- Välj det bokmärke du vill byta namn på.
- Ange det nya bokmärkesnamnet i textfältet. Tryck på Pappersflygsikonen för att bekräfta det nya namnet.

Ta bort bokmärke

- När en bok är öppen, tryck på Bokmärkesikonen.
- I bokmärkesmenyn, tryck på Ta bort. En undermeny öppnas som listar alla bokmärken.
- Välj det bokmärke du vill ta bort.
- Prodigy frågar: "Är du säker på att du vill ta bort detta bokmärke?". Tryck på Ja för att bekräfta.
- Alternativt kan du bläddra ned och välja alternativet Ta bort alla bokmärken för att ta bort alla bokmärken i boken.

ANVÄNDA APPÅTKOMST

Prodigi ger dig tillgång till alla applikationer som normalt finns på en Android-smartphone eller surfplatta.

Åtkomst till applikationer

- Tryck på Applikationsikonen i Huvudmenyn.



- En ny meny visas med två olika alternativ för att komma åt en applikation: Sök och Visa alla.
 - Sök: Gör det möjligt att hitta den applikation du söker genom att skriva dess namn.
 - Visa alla: Visar en lista över alla installerade appar på din Connect 12.

- Välj en applikation och tryck på dess ikon.

Om en applikation du söker inte finns med på listan kan du ladda ner den från Play Store. När nedladdningen och installationen är klar läggs applikationen till i listan.

- Tryck på Bakåtikonen för att återgå till Huvudmenyn.

ANVÄNDA SNABBÅTKOMST

Snabbåtkomst ger enkel tillgång till ofta använda applikationer. Lägga till en applikation i snabbåtkomstmenyn

- Tryck på Snabbåtkomstikonen i Huvudmenyn.



- Tryck på ikonen Lägg till.



En ny meny visas med två olika alternativ: Sök och Visa.

- Sök: Gör det möjligt att hitta den applikation du söker genom att skriva dess namn.
- Visa alla: Visar en lista över alla installerade appar på din Connect 12.
- Välj en applikation och lägg till den i snabbåtkomstmenyn genom att trycka på dess ikon.
- För att ta bort en applikation från snabbåtkomsten, tryck och håll på applikationsikonen och tryck sedan på Ta bort.

- För att flytta eller radera applikationen, tryck och håll på applikationen och välj sedan Byt plats eller Radera.


ANVÄNDA KALKYLATORN

Prodigi-mjukvaran har en Kalkylator-applikation.

- Välj och tryck på Kalkylatorikonen i Huvudmenyn.



- Tryck på siffrorna och tecknen. Din beräkning visas längst upp till höger på skärmen.
- Tryck på DEL för att göra korrigeringar (en siffra i taget).
- Tryck på CLR för att rensa totala summan.

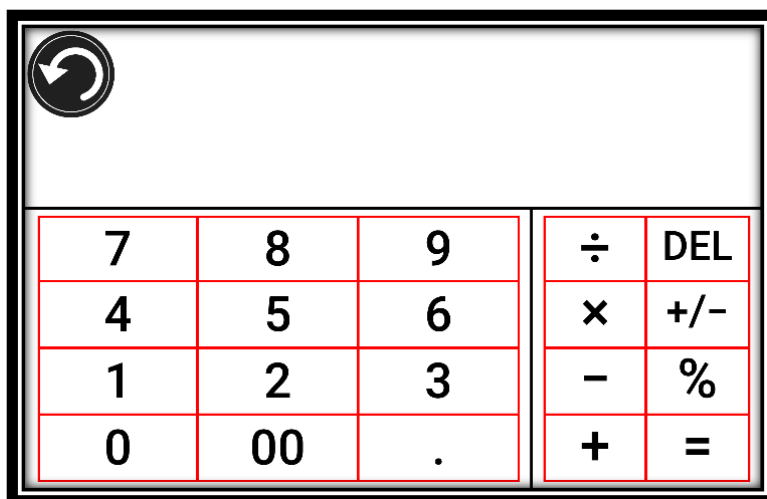


Som standard är kalkylatorn inställd på standardläge. Tryck på Inställningar, sedan Läge, och välj mellan Standard, Vetenskaplig eller Grafitande kalkylatorläge. Tryck på Bakåtikonen två gånger för att återgå till kalkylatorn.

GRAFRITANDE KALKYLATOR FRÅN DESMOS


Med integrationen av Desmos grafitande kalkylator i Connect 12 kan du rita grafer direkt på surfplattan eller genom att mata in dina ekvationer.

Notera: När du använder vetenskapligt eller grafitande läge, tryck på knappen med motsatta pilar längst ner på tangentbordet för att få tillgång till vetenskapliga eller matematiska funktioner.

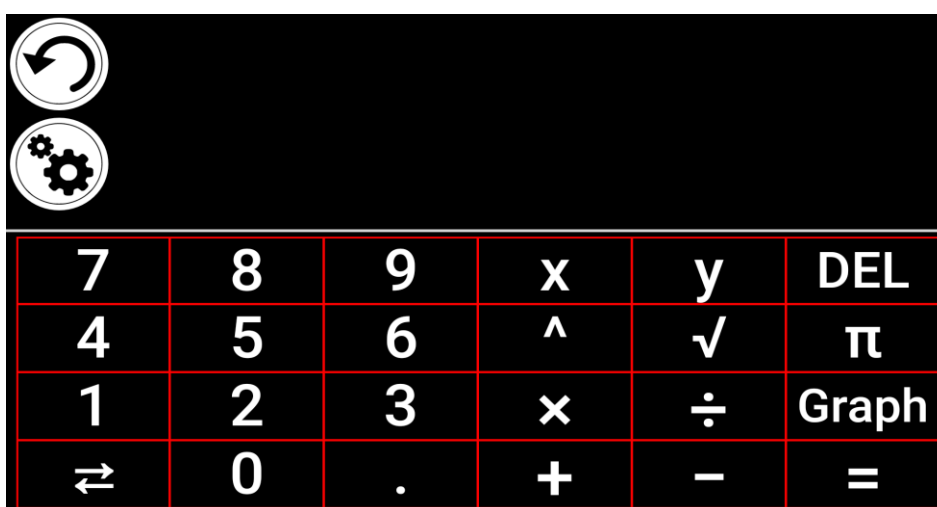

Rita graf

Skriv en giltig ekvation (exempel: $3x+2=y$) och tryck på Graf. Resultatet visas på följande sätt:

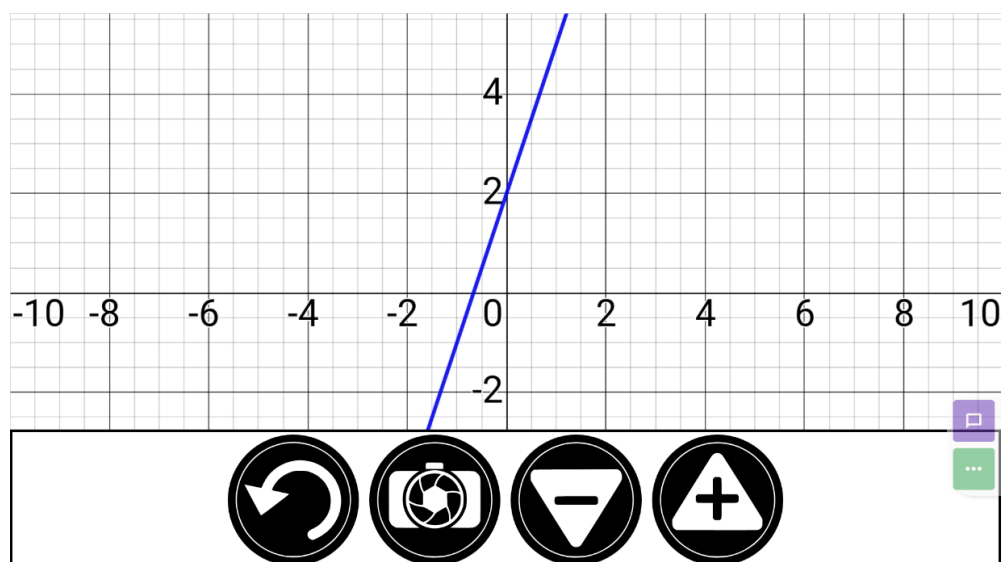

- Tryck på Plus- och Minusikonerna för att zooma in och ut i grafen.
- Svep med fingret över skärmen för att panorera grafen.

Ytterligare matematiska funktioner finns tillgängliga genom att trycka på knappen med motsatta pilar längst ner på tangentbordet.

Spara graf


När en graf visas på skärmen kan den fotas av och sparas i Galleriet under mappen Skärmbilder.

ORDBOK

Ordboken, utvecklad i samarbete med Accessbyte och Oxford Languages, är en praktisk och tidsbesparande funktion som kan nås via Huvudmenyn och användas som vilken annan digital eller onlineordbok som helst.

Söka efter ord

- Tryck på "Sök efter ett ord" (eller förstöringsglasikonen längst upp till vänster på skärmen). Ange ett ord på tangentbordet som visas samt tryck på Sök.

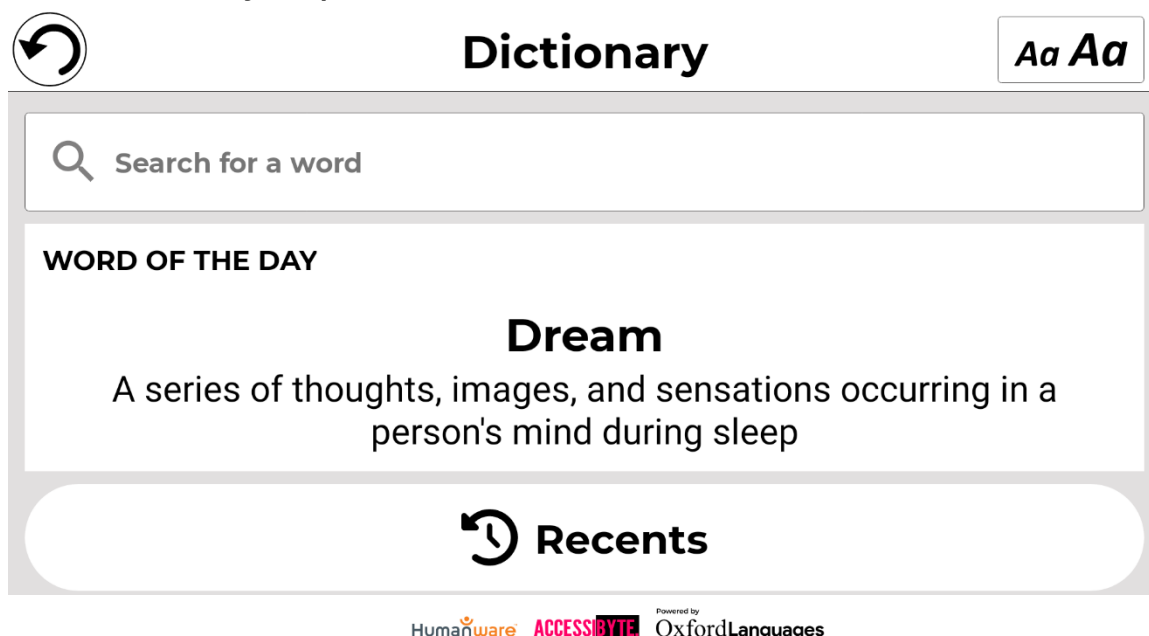

En lista med förslag visas, inklusive ordet du skrev in i sökfältet (det visas högst upp i listan) samt andra liknande ord. Notera att förslagslistan kan variera i längd beroende på hur många varianter som hittas i ordboken.

- Tryck på ett ord i förslagslistan, så visas definitionen automatiskt.



Accessibility

noun

1. The quality of being able to be reached or entered.

Examples

The restoration project involved repairing the roof and improving accessibility.

2. The quality of being easy to obtain or use.

Examples

Students were concerned about the accessibility of quality academic counseling.

3. The quality of being easily understood or appreciated.

Examples

Du kan spara orddefinitioner i en ordlista via Bokmärkesikonen längst upp till höger på sidan.

- Tryck på Bokmärkesikonen (uppe till höger på sidan).
- I popup-rutan "Lägg till i vilken lista?" trycker du på Skapa ny lista.
- Ange listnamnet i popup-rutan "Spara ord i lista".
- Tryck på Spara.

Ordet sparas i listan och kan nås genom att trycka på Bokmärket.

Flera listor kan skapas och sparas, till exempel specifika ämnesområden, tekniska termer, köksredskap eller sjötermer. Genom att trycka på förstöringsglasikonen (bredvid bokmärkesikonen) kommer du tillbaka till sidan "Sök efter ett ord" så att du kan söka efter ytterligare ord.

Justera teckenstorlek i ordboken

Huvudsidan innehåller en ikon för teckenstorlek längst upp till höger på sidan.

- Tryck på ikonen upprepade gånger för att växla mellan tre tillgängliga storlekar (liten, medium och stor). Stanna vid den storlek som passar dina behov.

Huvudsidan innehåller också funktionen Dagens ord. Det är ett slumpmässigt valt ord med tillhörande definition som uppdateras dagligen.

På samma sida visas ikonen Ordlistor under Dagens ord. Genom att trycka på den visas alla ordlistor som har skapats.

Ikonen Senaste visas under Ordlistor. Genom att trycka på den visas dina senaste sökningar efter ord.

Byta språk (standard: amerikansk engelska)

- På ordbokens huvudsida, tryck på "Sök efter ett ord".
- Tryck på den ovala ikonen längst upp till höger för att öppna sidan för språkinställningar.
- Välj ett av de fyra språkvalen.
- Tryck på bakåtpilen (längst upp till vänster) för att återgå till "Sök efter ett ord".

Visa / Dölj Ordbok

Som standard ingår ordboksikonen i Prodigis Huvudmeny men den kan döljas för att förenkla gränssnittet.

- Tryck på Inställningar i Huvudmenyn. Scrolla ner och tryck på Applikationer.
- Tryck på Visa (tillgängliga alternativ: Böcker, Kalkylator, Ordbok).
- Avmarkera Ordbok.

- Tryck tre gånger på Bakåtikonen för att återgå till karusellmenyn (ikonen för ordboken visas inte längre).
- För att återställa ikonen till Huvudmenyn följer du samma process men markerar istället Ordbok.

VISA SPARADE DOKUMENT

Alla sparade dokument finns i Galleriet.

- Tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Sveg åt vänster eller höger i Galleriet för att bläddra bland sparade dokument. Notera att skärmbilder som tas på enheten sparas i mappen Skärmbilder.
- Det aktuellt valda dokumentet visas i mitten av skärmen. Prodigy visar det första ordet i det valda dokumentet. Om dokumentet inte innehåller ord, taggas det som en bild.

En anteckningsboksikon indikerar ett flersidigt dokument.



- Tryck för att öppna ett valt dokument.
- Tryck någonstans på dokumentet för att visa den delen i din förinställda förstoringsnivå.
- Du kan växla mellan lägena färg, positiv, negativ och Diamond Edge™ (om bilden innehåller text) samt justera ljusstyrkan på samma sätt som i Förstoringsläget (se Förstoringsavsnittet för mer information).
- När du är förstoringsnivån är 1X eller mer kan du flytta dokumentet med en panoreringsgest.
- Tryck på Tillbaka för att återgå till helbildsvy.

- När du är i helbildsvyn trycker du två gånger på Tillbaka för att stänga ett dokument och återvända till Galleriet.

INSTÄLLNINGSMENYN I GALLERIET

För att komma åt inställningarna i Galleri trycker du på Inställningsikonen uppe till höger på skärmen medan du är i Galleriet.

Inställningsmenyn låter dig:

- Skapa kategorier och underkategorier (mappar)
- Skapa en ny sida
- Skapa ett nytt dokument
- Importera
- Radera innehåll i galleriet

ÅTGÄRDSMENY

Galleriet har en åtgärdsmeny som innehåller många användbara funktioner för dina sparade dokument. För att komma åt åtgärdsmenyn, håll länge på en fotad bild, ett dokument eller en kategoriikon i Galleriet. Du kommer till en meny som listar tillgängliga åtgärder för den valda filen.

I Åtgärdsmenyn kan du:

- Dela en bild via andra Android-applikationer.
- Numrera om den första sidan i ett dokument med flera sidor.
- Byta namn på ett dokument eller en kategori.
- Radera ett dokument, en kategori eller specifikt innehåll i en kategori.
- Flytta ett dokument till en kategori.
- Exportera ett dokument till en JPG-, text- eller PDF-fil i Androids filsystem eller till en extern enhet.

- Flytta en bild fotad med distanskamera till Galleriet för Diamond Edge-bearbetning.
- Radera, ersätta eller infoga sidor i ett dokument med flera sidor.
- Köra OCR på ett PDF-dokument (användbart när delar av ett PDF-dokument inte renderas korrekt, vanligtvis i tabeller).
- Dela en bild via andra Android-appar

Dela bild via andra Android-appar

- Tryck länge på bilden du vill dela.
- Tryck på Dela.
- Välj PDF- eller JPG-format.
- Välj appen genom vilken du vill dela din bild (exempel: Gmail, Maps, Google Drive) och fortsätt som vanligt med den valda appen.

Radera dokument, kategori eller innehållet i en kategori

- Tryck länge på dokumentet eller kategorin du vill radera.
- Tryck på Radera.
- Tryck på Ja för att bekräfta borttagningen.

Byt namn på dokument

- Tryck länge på dokumentet eller kategorin du vill byta namn på.
- Tryck på Byt namn.
- Ange det nya namnet för ditt dokument eller din kategori.
- Tryck på Enter.

Flytta dokument till kategori

- Tryck länge på dokumentet du vill flytta.
- Tryck på Flytta.
- Välj och tryck på den nya kategori dit du vill flytta dokumentet.

Importera JPG-, text- eller PDF-fil från extern enhet till Connect 12

För att systemet ska kunna upptäcka ditt USB-minne måste du ändra USB-inställningarna i Android-systemet.

- Tryck och håll med fyra eller fem fingrar på skärmen. En sida med alla Android-appar kommer att visas.
- På app-sidan, välj Inställningar.
- I inställningsmenyn under Enheter, välj USB.
- Högst upp på skärmen visas meddelandet: "USB är ansluten till datorn". En växlingsknapp till höger på skärmen låter dig ändra detta till "USB är inte ansluten till datorn".
- Tryck på cirkeln längst ner på surfplattan för att återgå till Prodigy.
- Sätt in ditt USB-minne i USB-C-porten till höger på surfplattan. Om ditt USB-minne inte är kompatibelt med en USB-C-port, använd en USB-till-USB-C-adapter.
- Välj och tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Tryck på Inställningsikonen längst upp till höger på skärmen och välj Importera.



- Två lagringsalternativ visas: Intern lagring och Store N Go, vilket motsvarar ditt USB-minne. Tryck på alternativet Store N Go.
- Ditt USB-minne kommer att visas. Tryck på dess namn och tryck sedan på Välj för att öppna det. Alla mappar och filer som finns lagrade på ditt USB-minne blir nu tillgängliga.
- Välj och tryck på filer för att importera dem till Galleri. De laddas automatiskt ner till din Connect 12.

Exportera dokument till JPG-, text- eller PDF-fil i Androids filsystem eller till extern enhet

- I Galleriet, tryck och håll på dokumentet du vill exportera.
- Tryck på Exportera.
- Välj filtypen du vill exportera dokumentet som. Du kan ändra vissa JPG- och PDF-inställningar genom att trycka och hålla på antingen PDF- eller JPG-alternativet (avancerade användare).
- Välj Intern lagring för att exportera till en specifik mapp på enheten. Du kan också välja USB-enhet om ett USB-minne är anslutet till surfplattans USB-port.

Flytta en bild från distanskamera till Galleriet

- I mappen Distans, håll fingret på bilden du vill flytta.
- Tryck på Flytta till Galleri.

Bilden analyseras för att hitta text och visar Diamond Edge om text hittas. Filen döps om till det första ordet som hittas i dokumentet, om text hittas; annars identifieras bilden numeriskt.

Filen kan även flyttas till en annan kategori om det behövs.

Ta bort, ersätta eller infoga sida i ett dokument med flera sidor

- Öppna det dokument med flera sidor som du vill ändra.
- För att ta bort en sida: Håll länge på sidan och tryck på Ja för att bekräfta borttagningen.
- För att ersätta en sida: Håll länge på sidan du vill ersätta. Tryck på Ersätt, tryck på Ja och fota en ny sida.
- För att infoga en sida: Håll länge på sidan där du vill infoga en ny sida. Tryck på Infoga och välj Ny sida, Nytt foto eller Ny funktionsgraf.

Lägga till funktionsgraf i dokument

- Tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Öppna ett dokument.



- Håll länge på ett objekt i dokumentet.
- En undermeny för inställningar visas. Välj Infoga.
- Infogningsalternativ visas. Välj Ny funktionsgraf.
- Prodigy öppnar kalkylatorappen i grafläge. Skriv in en formel och tryck på grafknappen.
- Prodigy öppnar grafvyn med den angivna funktionen plottad. Tryck på Spara.



- Prodigy återgår till dokumentet med grafbilden infogad på den valda positionen.

Alternativt, om du vill lägga till en funktion i slutet av ett dokument:

- Tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Öppna ett dokument.



- Tryck på Inställningar.
- Tryck på Lägg till.
- Välj Ny funktionsgraf

- Prodigy öppnar kalkylatorappen i grafläge. Skriv in en formel och tryck på Graf-knappen.

Prodigi öppnar grafvyn med den angivna funktion plottad.

- Tryck på Spara.



Grafen kommer att visas i slutet av dokumentet.


ANVÄNDA AVSTÅNSKAMERA

Connect 12 har en avståndskamera som är användbar när du behöver bättre sikt på något på avstånd, som en bildpresentation under en föreläsning. Avståndskameran ansluts trådlöst, har en batteritid på 4 timmar och kan placeras upp till 10 meter från Connect 12.

VIKTIGT: avståndskameran är ett tillbehör och säljs separat. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dess funktioner genom att noggrant läsa användarmanualen som följer med enheten.

- Användarmanualen ger detaljerad information om hur du laddar kamerans batteri innan användning.
- Avståndskameran måste även kopplas ihop med Connect 12 via Wi-Fi. För detaljerade instruktioner om parkoppling, besök Connect 12:s supportsida på HumanWares webbplats: www.humanware.com/connectsupport

Inställning av avståndskamera (bild 24)

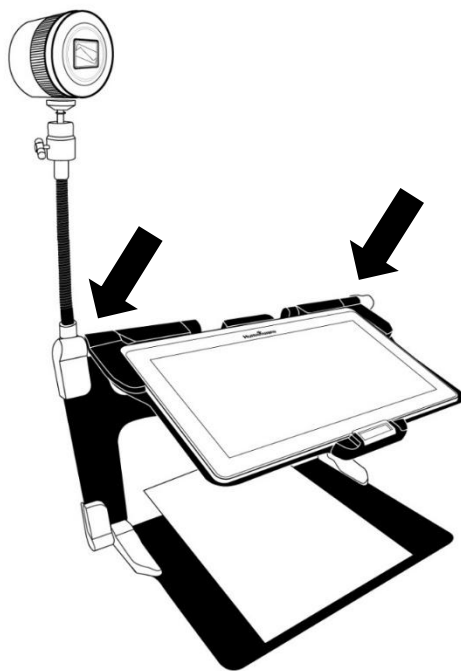

- Se bild 7: Skruva fast kameran på den flexibla kamera-armen och sätt in basen av kameraarmen i en av de vikbara stativflikarna (som finns på vänster- och höger sida av det vikbara stativet).
- Välj och tryck på ikonen för avståndskamera i Huvudmenyn.



- Starta avståndskameran.
- Rikta kameran mot ett objekt som du vill titta på.

Nu är du i kamerans livevy.

- Se bild 10: Zooma in eller ut genom att justera zoomkontrollen.
- Tryck på Slutarknappen på kameran för att ta en bild (du kommer att höra ett ljud från slutaren).

Du kan även ta en bild genom att trycka på Kameraikonen som visas på Connect 12-skärmen.

VÄXLA MELLAN AVSTÅNDSKAMERA OCH FÖRSTORING

Under en föreläsning kan du vilja växla mellan avståndskameran och förstoringsläget för att anteckna vad läraren skriver på tavlan. För att göra detta, svep med fingret från vänster till höger på skärmen (upprepa för att återgå till föregående vy).

ANVÄNDA KAMERA OCH FÖRSTORING SAMTIDIGT

För att använda avståndskamera och förstoringsläget samtidigt, tryck på pilen på höger sida av skärmen och skärmen delas horisontellt i två sektioner med avståndskameran i den övre sektionen och förstoringsläget i den nedre sektionen.

Du kommer att se en röd ram runt den övre eller nedre vyn, vilket indikerar vilken sektion som är vald. För att återgå till fullskärmsläge i någon av vyerna, välj en vy genom att trycka på den två gånger för att återgå till fullskärmsläge.

För att ta en bild utan att lämna delad skärm, välj den vy du vill fota genom att trycka på den och håll sedan ned för att ta bilden (du kommer att höra ett ljud från slutaren).

VISA BILDER FRÅN AVSTÅNDSKAMERA

Bilder tagna med avståndskameran kan ses i Galleriet.

- Tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Svep för att och tryck på avståndskamera-ikonen.



- Svep för att bläddra igenom tillgängliga bilder.
- Välj en bild och tryck på den för att få en utökad vy.

LÄSA MED AVSTÅNDSKAMERA

För att läsa en bild tagen med avståndskameran, behöver du överföra bilden från avståndskategorin till rotkatalogen i Galleriet.

- I avstånds-kategorin i ditt Galleri (mapp med förstoringsglaset), håll fingret på den bild du vill flytta.
- Tryck på Flytta till Galleri.
- Din bild kommer nu att finnas i rotkatalogen i Galleriet där den kan läsas som vilket annat dokument som helst.

TA BORT AVSTÅNDSKAMERA FRÅN KAMERA-ARM

Om du vill ta bort kameran från den flexibla kamera-armen, se till att kameran är avstängd, håll sedan kameran stadigt med ena handen. Med den andra handen, lokalisera tumskruven under kameran och lossa den tills kameran är fränkopplad från kamera-armen.

Viktigt: Kameran är mycket ömtålig, se till att du håller i den ordentligt innan du tar bort den från kamera-armen.

VISA TEXTFILER I PRODIGI

Prodigi låter dig klistra in textfiler i Galleriet och sedan öppna dem via Prodigi-gränssnittet. Notera att detta kan göras utanför Prodigi i

Android-appar som tillåter dig att kopiera text (exempel: internetwebbläsare, Dropbox eller din e-post).

- Tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Svep och tryck på Text-mappikonen.



- Svep och tryck på Klistra in-ikonen, tryck sedan på Klistra in för att infoga tidigare kopierad text.



- Din text kommer att visas i Diamond Edge i kolumnläsarläge (ursprunglig layout och bilder är inte tillgängliga).
- Tryck på Tillbaka för att återgå till Text-sektionen i Galleriet.
- Texten du klistrade in sparas i Text-sektionen i Galleri och namnges enligt det första ordet i din text.

EXAMENLÄGE

Examenläge används för att blockera vissa funktioner och applikationer från Connect 12 under en viss tid. När examenläge är aktiverat kan de blockerade funktionerna och applikationerna endast nås genom att ange en förutbestämd PIN-kod eller genom att vänta på en förutbestämd tid.

Aktivera examenläge

- Från Huvudmenyn, tryck på ikonen för Inställningar.
- I inställningsmenyn, välj Examenläge. En undermeny visas.
- Justera parametrarna genom att trycka på dem och ändra deras värde. Justerbara parametrar inkluderar:
 - Examenläge: På, Av.
 - Starttid.
 - Varaktighet: Välj ett värde mellan 30 minuter och 8 timmar.
 - Avsluta till Android: Tryck för att aktivera/inaktivera åtkomst till Android medan examenläge är på.
 - Foto & Galleri: Tryck för att aktivera/inaktivera åtkomst till Galleri och användning av fotografering medan examenläge är på.
 - Kalkylator: Tryck för att aktivera/inaktivera åtkomst till kalkylatorn medan examenläge är på.
- Tryck på Tillbaka-ikonen.
- Du kommer att uppmanas att ange en PIN-kod för att aktivera examenläge.

Examenläge är nu redo att användas.

Om du vill ändra parametrarna eller inaktivera examenläge, följ dessa steg:

- Tryck på ikonen Inställningar i Huvudmenyn.
- I inställningsmenyn, tryck på Examenläge.
- Du kommer att uppmanas att ange den PIN-kod som du skapade när examenläge aktiverades.
- Du har nu tillgång till undermenyn för Examenläge, där du kan ändra parametrarna eller inaktivera Examenläge.

OCR-SPRÅKALTERNATIV


Prodigi tillåter användning av optisk teckenigenkänning (OCR) för olika språk när du använder förstoringsläget eller kameran.

Aktivera/inaktivera OCR


- Tryck på ikonen Inställningar i knappraden i Förstoringsappen.




- Bläddra ner och tryck på OCR, tryck sedan på Inaktivera.

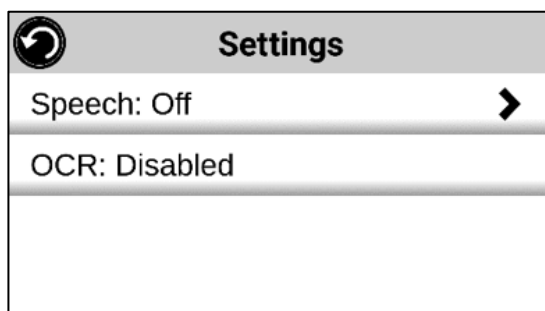

- Prodigi kommer att visa i inställningsmenyn: OCR-språk: Installerade röster.

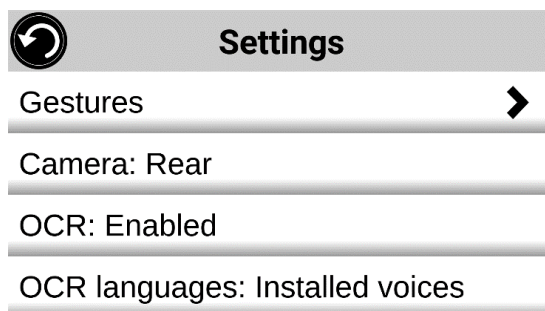

- Tryck på "OCR-språk: Installerade röster" för att välja mellan Installerade röster eller Anpassade. OCR-språk kommer att visas. Tryck för att visa en lista över tillgängliga språk.

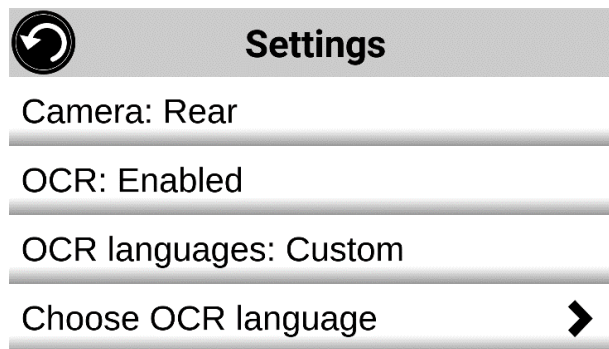

- Välj ett språk från listan.
- Tryck på Tillbaka-ikonen två gånger för att återgå till Förstoringsappen.

AVSNITT 4: VÄLJ KONTRAST

Prodigi låter dig visa dokument, bilder och objekt i 4 olika typer av kontraster: **färg**, **positiv**, **negativ**. För dokument som innehåller text kan en fjärde typ av kontrast användas: **Diamond Edge™**.

Kontrastlägena positiv, negativ och Diamond Edge™ är tänkta att förbättra originalfärgerna på ett dokument eller objekt för att bättre passa din syn.

Kontrastläget **Färg** är användbart när du vill titta på dokument, objekt och fotografier med sina originalfärger.


Kontrastläget **Positiv** visar text och bilder i de två färger du valt som färgschema, standard är svart på vitt. Detta läge är praktiskt för att visa text i den färgkombination som är bäst lämpad för din syn.

Kontrastläget **Negativ** visar text och bilder i omvänd kontrast till den som du har valt som färgschema. Till exempel om ditt färgschema är svart på vitt så kommer negativ kontrast att visa text och bilder som vitt på svart. Detta är användbart när du vill omvända kontrasten på en text som innehåller en annorlunda kontrast.

Kontrastläget **Diamond Edge™** kombinerar det bästa av två världar, det visar Diamond Edge Text™ i din valda färgkombination och bilder i sina originalfärger. Det låter dig förstora text obegränsat utan kvalitetsförsämring i den bästa färgkombinationen för din syn medan bilder visas i sina originalfärger på samma sida.

För att växla mellan de olika kontrasterna, svep på högra kanten av pekskärmen när du förstorar eller tittar på en bild eller ett dokument.

Svep för val av kontrast (bild 25)

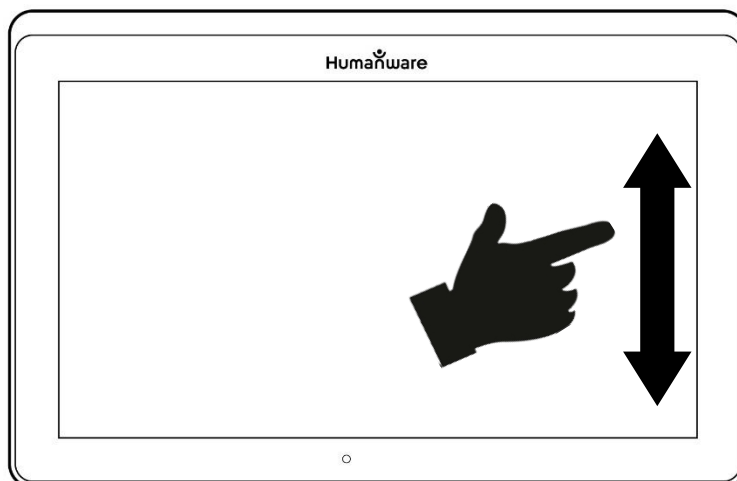


AVSNITT 5: STANDARD BRICKLÄGE

Tillsammans med standardläget Karusell och Enkelt läge är Brickläget ett av de tre typerna av användargränssnitt som kan användas för att navigera i Connect 12. Prodigis meny i Brickläget låter dig anpassa åtkomsten till de applikationer du använder mest.

Aktivera Standard Brickläge

- Svep och tryck på ikonen för Inställningar i Karusellmenyn (Huvudmenyn).
- Tryck på Användargränssnitt.
- Välj Standard (Brickor).
- Tryck på Tillbaka-ikonen tre gånger för att komma till Brickmenyn.

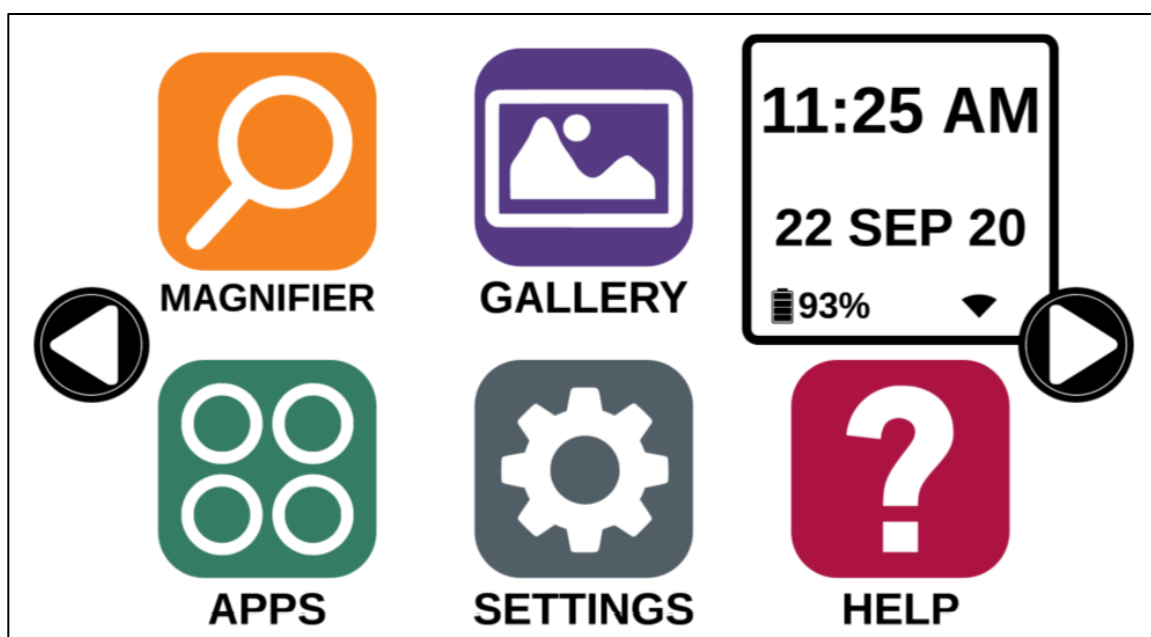

Prodigi-applikationer är nu tillgängliga via en serie roterande skärmar som visar sex applikationer per skärm istället för en i taget. De 9 huvudsakliga Prodigis-applikationerna är som standard tillgängliga i Brickmenyn. Tid och datum visas också längst upp till höger på skärmen.

- Slep åt vänster eller höger i Brickmenyn eller tryck på pilarna till höger eller vänster på skärmen för att komma åt nästa applikationsskärm.
- Tryck på valfri applikation för att starta den.

Om du vill lägga till en applikation i Brickmenyn trycker du på ikonen Lägg till:



En ny meny visas som erbjuder två alternativ för att lägga till den applikation du vill ha i Brickmenyn: Sök och Välj applikationer.

Alternativet Sök låter dig hitta en applikation genom att ange dess namn via tangentbordet som visas.

Välj applikationer visar alla installerade appar på Connect 12.


- Bläddra igenom listan för att hitta en applikation och lägg till den i Brickmenyn genom att trycka på dess ikon.
- Ta bort en applikation från Brickmenyn genom att trycka och hålla på applikationens ikon och sedan trycka på Ta bort när du uppmanas till det. Du kan också använda alternativet Byt för att byta till en annan applikation.

AVSNITT 6: ENKELT LÄGE

I det enkla läget kommer du åt Prodigis huvudapplikationer från samma skärm.

Aktivera enkelt läge

- Sveg till ikonen Inställningar i Karusellmenyn (Huvudmenyn) och tryck.
- Tryck på Användargränssnitt.
- Välj Enkelt.
- Tryck på ikonen Tillbaka två gånger för att komma till huvudmenyn i det Enkla läget.

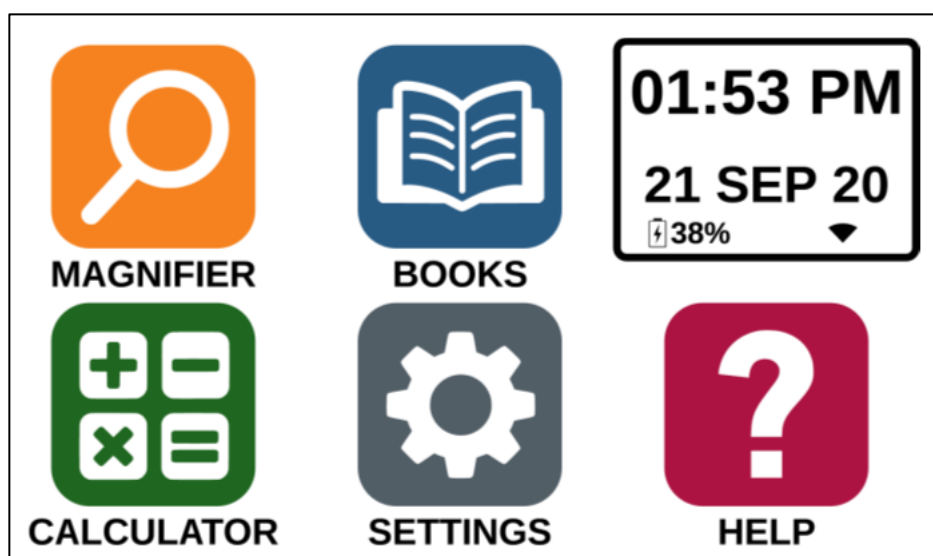

Prodigis applikationer är nu tillgängliga från en enda skärm. Tid och datum visas också längst upp till höger på skärmen.

- Tryck på valfri applikation för att starta den.

Återgå till Karusell-läge (standard)



- Sveg och tryck på ikonen för Inställningar i Huvudmenyn.
- Tryck på Användargränssnitt.
- Välj Standard (Karusell).
- Tryck på ikonen Tillbaka tre gånger för att återgå till Huvudmenyn i Karusell-läge.

AVSNITT 7: ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

Prodigis inställningsmeny är sammanhangsstyrd, olika inställningar visas beroende på vad du gör eller var du befinner dig i systemet.

- Tryck på ikonen Inställningar i Huvudmenyn.



- Välj och tryck på en inställning.
- Tryck på ikonen Tillbaka (överst i vänstra hörnet) för att återgå till Inställningsikonen.

Viktigt: Din navigeringsmetod kommer att vara annorlunda om Talinställningen är avstängd. Det kommer inte längre att finnas en ram, och varje menyobjekt kommer att ha en skugga under sig. I detta navigeringsläge kan du trycka på ett objekt för att välja det istället för att använda ramen för att göra valet.

Lista över Prodigis sammanhangsstyrda inställningar:
(Värden markerade med en stjärna (*) är standardinställningar.)

- **Skärmens ljusstyrka:** 0 till 100% (50%*)
- **Kontrast:** Diamond Edge (om den fotade bilden innehåller text), Färg*, Positiv, Negativ
- **Färger:** Svart på Vitt*, Vitt på Svart, Svart på Grått, Grått på Svart, Svart på Gult, Gult på Svart, Svart på Orange, Orange på Svart, Svart på Turkos, Turkos på Svart, Svart på Lila, Lila på Svart, Svart på Grönt, Grönt på Svart, Blått på Gult, Gult på Blått, Vitt på Blått, Blått på Svart, Beige på Svart, Svart på Beige
- **Läge** (Endast standardläge): Live*, Flerbildstagnering
- **Autofokus** (Endast liveläge): Låst, Upplåst*

- **Vinkelkorrigering:** Aktiverad*, Inaktiverad
- **Tal:** På*, Endast dokument, Av
- **Röst:** Röst 1*, Röst 2, Röst 3, Röst 4
- **Rösthastighet:** Väldigt långsam, Långsam, Normal*, Snabb, Väldigt snabb
- **Läsläge:** Sida, Kolumn*, Rad
- **Läshastighet:** Väldigt långsam, Långsam, Normal*, Snabb, Väldigt snabb
- **Diamond Edge:** Alltid*, Vid behov
- **Teckensnittstyp:** Normal, Fet*
- **Förinställd Förstoring:** 2x till 35x (4x*)
- **Teckenstorlek:** Minimal, Liten, Medel, Standard*, Stor, Väldigt stor, Extra stor, Maximal
- **Markering** (endast Kolumn- och Radläge. Markera ord som läses): Visa*, Dölj
- **Radera Innehåll i Galleri** (i Galleriet): Raderar permanent alla filer i Galleriet. Tryck på Inställningsknappen i Galleriet för att komma åt detta alternativ.
- **Wi-Fi-inställningar:** Tryck på ikonen Inställningar för att komma åt.
 - **Wi-Fi:** Slå På eller Av Wi-Fi
 - **Trådlösa nätverk:** Visar en list med tillgängliga nätverk. När du är ansluten visas nätverket som för tillfället är anslutet. Notera att proxynätverksanslutningar måste ställas in via Androidinställningarna. Ett mer avancerat alternativ finns tillgängligt vid val av nätverk:
 - **Avancerade alternativ/IP-inställningar:** Visar host-konfigurationsprotokoll för valt nätverk.
 - **Sparade nätverk:** Konfiguration av sparade nätverk. För att glömma en nätverkskonfiguration, tryck på Glöm bort och sedan Ja.
- **Läge** (i Kalkylatorappen, tryck på Inställningsknappen för att komma åt denna inställning): Standard*, Vetenskaplig eller Grafitande
- **Rutnät** (Kalkylatorappen, tryck på Inställningsknappen för att komma åt denna inställning): Lokatorfärg*, Röd, Orange, Gul, Lila, Turkos, Grön, Blå

- **Användardata:** På*, Av, Detaljer om mätvärden; du kan välja att avstå när som helst.
- **Gester** (Vid förstoring, visning av bilder eller läsning av dokument kan du aktivera/inaktivera gester. Som standard är de aktiverade.):
 - **Svep på vänstra kanten / Läge:** Växla mellan lägena Live och Flerbildstagnning.
 - **Svep på högra kanten / Kontrast:** Växla mellan kontrasterna Färg, Positiv, Negativ och Diamond Edge™ (Det senaste valet kommer att sparas i Prodigy).
 - **Nyp-gest för förstoring:** Justera förstorningsnivån genom att minska eller öka avståndet mellan 2 fingertoppar.
 - **Dubbeltryck:** Aktivera huvudmenyn eller växla mellan tal på och av vid läsning genom att snabbt trycka med ett finger.
 - **Tryck / Zooma:** Tryck snabbt med ett finger för att ändra förstoring till din förinställda förstorningsgrad.

Du kommer också åt andra allmänna Inställningar genom trycka på ikonen Inställningar i Huvudmenyn:



Sex menyer är tillgängliga: Användargränssnitt, Ljud, System, Applikationer, Examensläge, Avsluta till Android och "Om". Bläddra igenom Inställningar för att välja en meny eller Om. Prodigy visar automatiskt undermenyer om sådana finns och visar en pil på skärmens högra kant. Tryck på pilen för att komma åt det alternativet i undermenyn.

- Tryck på ikonen Tillbaka för att gå till en föregående skärm.
- Håll ned ikonen Tillbaka för att komma åt inställningsmenyn.

Prodigys allmänna inställningar är:
(Värden markerade med en asterisk (*) är standardinställningar.)

Användargränssnittet:

- **Gränssnitt:** Standard (Karusell)*, Standard (Brickor) och Enkelt
- **Systemspråk:** Språk 1*, Språk 2, Konfiguration (ansluter till Internet för att söka efter tillgängliga språkpaket)
- **Färger:** Svart på Vitt*, Vitt på Svart, Svart på Grått, Grått på Svart, Svart på Gult, Gult på Svart, Svart på Orange, Orange på Svart, Svart på Turkos, Turkos på Svart, Svart på Lila, Lila på Svart, Svart på Grönt, Grönt på Svart, Blått på Gult, Gult på Blått, Vitt på Blått, Blått på Svart, Beige på Svart, Svart på Beige
- **Lokatorfärger:** Röd*, Orange, Gul, Lila, Turkos, Grön, Blå
- **Blåljusfilter:** Av, Låg, Medel, Hög, Max
- **Ljusstyrka för skärm** (Ändra nivån för skärmens ljusstyrka): 1 till 100% (60%*)
- **Ikonfält:** Automatiskt*, Dold, Alltid synlig
- **Läsplatta vibrationer:** På*, Av

Ljud:

- **Tal:** På*, Endast dokument, Av
- **Talhastighet:** Väldigt långsam, Långsam, Normal*, Snabb, Väldigt snabb
- **Ljud:** På*, Av
- **Läsplatta/basenhet volym:** 0 till 15 (9*)
- **OCR-ljud:** På, Av*

System:

- **Wi-Fi-inställningar:**
 - **Wi-Fi:** Slå På eller Av Wi-Fi
 - **Trådlösa nätverk:** Visar en list med tillgängliga nätverk. När enheten är ansluten visas anslutet nätverk.
 - **Sparade nätverk:** Konfiguration av sparade nätverk. För att glömma en nätverkskonfiguration, tryck på Glöm bort och sedan Ja.
- **Bluetooth-inställningar:**

- **Bluetooth:** Växla Bluetooth på eller av. När den är på kommer Connect att söka andra Bluetoothenheter samt kunna upptäckas av andra enheter.
 - **Parkopplade Enheter:** Enheter som för tillfället är anslutna till Connect samt närliggande Bluetoothenheter upptäckta av Prodigy.
- **Uppdatera mjukvara:** Avbryt, Installera
 - **Läsplatta autoavstängning:** 3 min*, 5 min, 10 min, 30 min
 - **Återställ fabriksinställningar:** Ja, Nej

Applikationer:

- **Snabbväxling:**
 - Sök
 - Välj applikationer
- **Böcker:** Markerad*, Inte markerad
- **Kalkylator:** Markerad*, Inte markerad
- **Avstånd:** Markerad*, Inte markerad (endast i Enkelt läge)

Avsluta till Android:

Avslutar Prodigy-mjukvaran. Du kan återvända till Prodigy genom att trycka på Hemknappen.

Om:

- **Mjukvara** (version)
- **Röster** (version)
- **OCR** (teckenigenkänning, version)
- **Böcker** (version)
- **Kalkylator** (version)
- **Avståndskamera** (version)
- **Prodigy uppdaterare** (version)
- **Serienummer**
- **Modell**
- **Android** (version)

- **Android-build** (version)
- **Användardata**
 - Anonym dataanvändning PÅ
 - Ändra

Tal På

När Tal är inställt på På, kommer navigeringen att förändras avsevärt. Prodigy läser upp alla alternativ som visas på skärmen för att ge fullständig vägledning.

I menyer

Talfunktionen läser upp antalet alternativ i den valda menyn och/eller undermenyn och läser sedan upp det första markerade alternativet på skärmen. Om alternativet leder till en annan undermeny, kommer det också att läsa "undermeny".

Exempel: Inställningsmeny > 7 alternativ > Användargränssnitt > Undermeny

Notera att tryck på ett menyobjekt inte kommer att välja det. Du måste svepa uppåt eller nedåt för att isolera det menyalternativ du vill välja inom den färgade ramen.

Ett långt tryck med två fingrar var som helst på skärmen i en meny kommer att isolera och markera navigeringsknappen Tillbaka. När Tillbaka är markerad, tryck en gång var som helst på skärmen för att återgå till föregående skärm.

I Brickmenyn/Huvudmenyn

Talfunktionen läser upp den applikation som för närvarande är markerad inom den färgade ramen.

Exempel: Om du öppnar din Connect 12 på inställningsikonen kommer Talet att meddela: Huvudmeny > Inställningar.

För att navigera till andra applikationer, svep vänster eller höger var som helst på skärmen. Tryck var som helst för att starta applikationen inom den färgade ramen.

För att sluta använda talfunktionen och återgå till vanlig navigering:

- Tryck på Inställningar.
- Välj och tryck på Ljud. En undermeny öppnas.
- Välj Tal.
- Välj Av om du vill stänga av talfunktionen helt, eller Endast dokument om du bara vill använda funktionen i dokument.


AVSNITT 8: BLUETOOTH TANGENTBORD

Med Connect 12 kan du skriva och navigera med ett externt Bluetooth tangentbord.

HUMANWARE-TANGENTBORDET

Även om vilket Bluetooth-tangentbord som helst fungerar, rekommenderar vi HumanWare-tangentbordet som visas nedan. En av fördelarna med att använda HumanWare-tangentbordet är att alla tangenter är tryckta med stora, lättlästa tecken. Dessutom är ikoner för ofta använda kommandon i Prodigy-mjukvaran tryckta på tangentbordet som en snabb påminnelse om tangentens funktion.

HumanWare-tangentbord (bild 26)

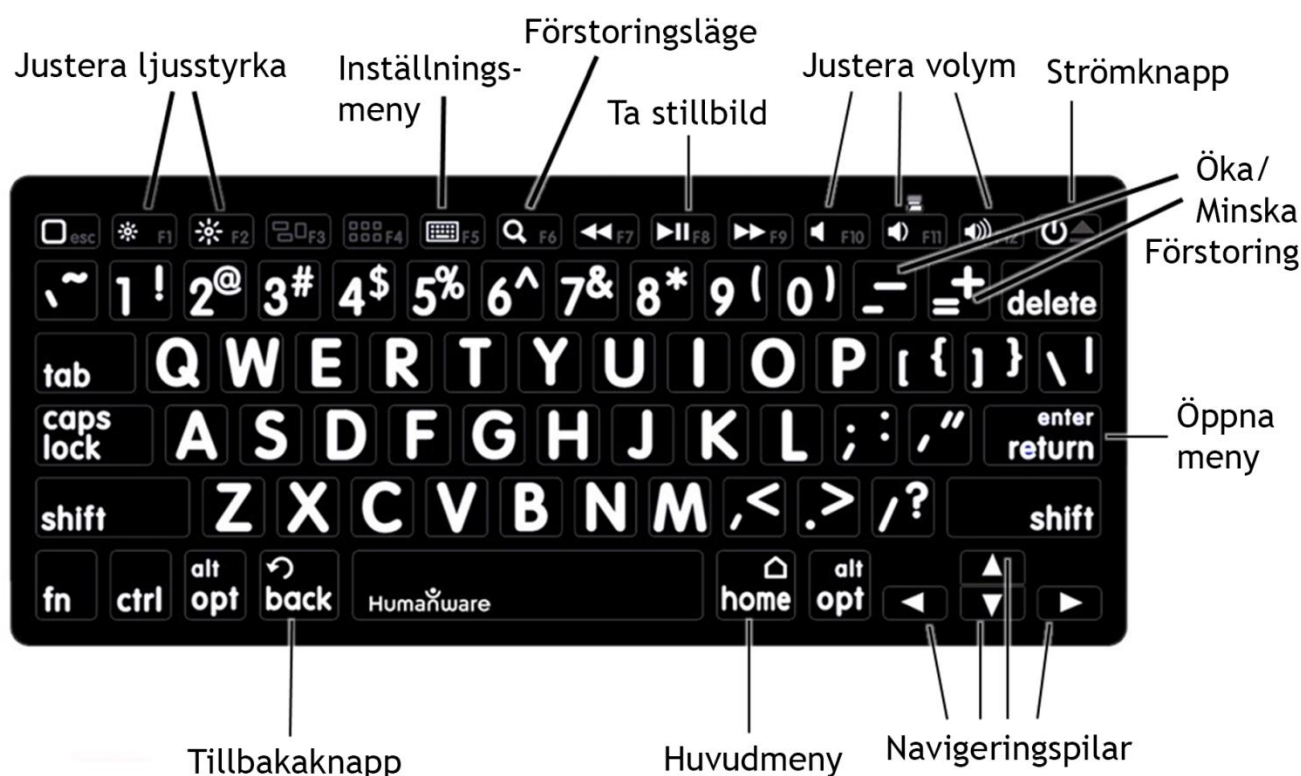

ANSLUTA ETT BLUETOOTHTANGENTBORD

Ansluta Bluetoothtangentbord till Prodigy:

- Försäkra dig om att Bluetoothtangentbordet är igång.
- Gå till allmänna inställningar genom att trycka på Inställningsikonen i huvudmenyn.
- Välj och öppna undermenyn System.
- Välj och öppna Bluetoothinställningar.
- Bluetooth kommer att vara inaktiverat som standard. Aktivera det genom att trycka på menyalternativet Bluetooth. Efter några sekunder visas ytterligare menyalternativ och enheten kommer att kunna upptäckas av andra enheter.
- Välj och öppna undermenyn Enheter.
- Välj Bluetoothtangentbordet och tryck på skärmen.
- Tryck på Anslut.
- Prodigy kommer att visa ett PIN-nummer. Skriv in detta nummer på Bluetoothtangentbordet och avsluta med Enter.
- Bluetoothtangentbordet är nu parkopplat med Connect 12 och redo för användning.

AVSNITT 9: APH CODE JUMPER®

ANSLUT CONNECT 12 TILL EN APH CODE JUMPER ®

Ansluta en APH Code Jumper®-enhet till Connect 12:

- Se till att Code Jumper® är påslagen innan du etablerar anslutningen.
- Gå till Prodigis inställningar genom att trycka på Inställningsikonen i Huvudmenyn.
- Välj och öppna undermenyn System.
- Välj och öppna Bluetooth-inställningar.
- Bluetooth är som standard avstängt. Tryck på På. Inom några sekunder kommer ytterligare menyalternativ att visas och surfplattan blir synlig för andra enheter.
- Välj och öppna undermenyn Enheter.
- Välj din APH Code Jumper®-enhet.
- Tryck på Anslut.
- Din Code Jumper® är nu parkopplad med din Connect 12 och redo att användas.

AVSNITT 10: KOMMA ÅT ANDROID

Prodigi Connect låter dig komma åt Android-applikationer. Notera att HumanWare tillhandahåller begränsad support för Android och Android-applikationer.

Android kommer du åt via Inställningar i Huvudmenyn. Tryck på ikonerna för inställningar och svep ner till samt tryck på Avsluta till Android. Du kan också avsluta till Android genom att placera och hålla ner 4 eller 5 fingrar på skärmen samtidigt. Denna gest är tillgänglig överallt i Prodigi. För att återgå till Prodigi från Androidsystemet trycker du på ikonerna för Prodigi.



Skapa en ny Användarprofil

Connect 12 tillåter att flera användarprofiler skapas.

För att lägga till en ny användarprofil:

- Tryck och håll fyra eller fem fingrar på skärmen. En sida med alla Android-appar visas.
- Välj Inställningar från appsidan.
- Skriv Användare i sökfältet i Inställningar.
- På följande skärm, välj Lägg till användare eller profil.
- Välj Användare eller Begränsad profil i popup-rutan.
- Följ Androids instruktioner för att slutföra skapandet av användarprofilen.

AVSNITT 11: HJÄLPMENYN

Alternativet längst till höger i Huvudmenyn är hjälpmenyn (ikon med frågetecken). Här finns många användbara videos som visar hur man använder Connect.



Hjälpmenyn består av följande alternativ:

Youtube instruktionsvideos: Här kommer du åt webinar och många användbara instruktioner om hur man använder Connect 12.

Återkoppling: Berätta vad du tycker om din Connect 12, vad du gillar samt vad du tycker att vi kan förbättra i enheten i framtiden.

AVSNITT 12: LADDA SURFPLATTAN

Max effektivitet vid användning:

- I en arbetssituation där du behöver Surfplattan med jämna mellanrum kan du aktivera Viloläget när du inte använder Surfplattan genom ett snabbt tryck på Strömknappen. Skärmen kommer att stängas av.
- Väck surfplattan genom att trycka på Strömknappen.
- Om du inte använder surfplattan under några dagar är det rekommenderat att du stänger av den genom att hålla ner Strömknappen och välja Stäng av.

Tryck på ikonen Inställningar för att visa batteriets laddningsnivå.

Notear att om Tal är aktiverat i Inställningar, kommer en svepning uppåt från den första menyn i Inställningar att visa laddningsnivån.

VIKTIGT: Använd alltid nätadaptern och kabeln som medföljer din Connect 12. Andra laddningstillbehör kanske inte fungerar korrekt, laddar inte eller kan skada surfplattan.

VIKTIGT: Surfplattan blir varm under laddning. Ladda inte surfplattan nära en värmekälla.

VIKTIGT: Stäng inte ditt vikbara stativ under laddning. **Detta kan skada kabeln och/eller surfplattan.**

Ladda batteriet

- Använd endast nätadaptern och kabeln som medföljer Connect 12.
- Anslut USB till USB-C-kabeln till USB-C-porten och koppla den till ett eluttag med hjälp av strömadaptern.
- En full laddning tar 4 timmar.

Säkerhetsföreskrifter för batteriet

- Demontera eller modifiera inte batteriet.
- Det finns risk för överhettning, brand eller explosion om batteriet sätts i eld, värms upp, utsätts för stötar, kommer i kontakt med vatten eller om dess terminaler kortsluts.

AVSNITT 11: LADDA AVSTÅNDSKAMERAN

Avståndskameran har en batteritid på ungefär 4 timmar och behöver därefter laddas upp.

Notera: Hjälp av seende person kan krävas vid uppladdning av kameran.

Ladda avståndskameran

- Anslut försiktigt mikro-USB-kontakten i uttaget under locket.
- Anslut försiktigt USB-kontakten i surfplattans nätadapter.
- Laddningsindikatorn blir orange när kameran laddas och växlar till grönt när batteriet är fulladdat.

AVSNITT 14: UPPDATERA MJUKVARA

STÄLLA IN TRÅDLÖST NÄTVERK (WI-FI)

Innan du påbörjar uppdatering av mjukvaran måste trådlöst nätverk på surfplattan konfigureras.

- Tryck på Inställningsknappen i Huvudmenyn.
- Tryck på System.
- Tryck på konfigurera trådlösa nätverk.
- Välj trådlösa nätverk och välj nätverket som du vill ansluta till.
- Tryck Anslut. Ett tangentbord visas på skärmen. Ange lösenordet och tryck på den blå knappen. Tryck sedan på Anslut.

AUTOMATISK UPPDATERING

När trådlöst nätverk är konfigurerat kommer Prodigy automatiskt att söka efter uppdateringar en gång i veckan.

Om en uppdatering finns tillgänglig kommer Prodigy att meddela detta samt fråga om du vill uppdatera surfplattan.

Uppdatera surfplattan

- Tryck på Installera för att installera den senaste uppdateringen. Prodigy visar nedladdningsprocessen.
- Ett nytt fönster visas och meddelar att mjukvaran nu är uppdaterad.
- Tryck OK för att återgå till Prodigy.

MANUELL UPPDATERING

Ibland kan du vilja uppdatera Prodigy i Connect 12-surfplattan manuellt.

- Aktivera Inställningarna i huvudmenyn.
- Tryck på System.
- För att påbörja en mjukvaru-uppdatering, välj Uppdatera mjukvara och tryck.

Prodigi kontrollerar om mjukvaran är den senaste eller om en uppdatering är tillgänglig. Om en uppdatering är tillgänglig och du vill installera den:

- Tryck Installera.

Om du väljer att installera uppdateringen kommer Prodigi att ladda ner uppdateringen och visa nedladdningsprocessen.

Ett nytt fönster visas och meddelar att mjukvaran nu är uppdaterad.

- Tryck OK för att återgå till Prodigi.

INFORMATION OM UTGÅVA

För att se information om utgåvan av mjukvaran i Prodigi:

- Aktivera inställningarna i Huvudmenyn.
- Tryck System.
- Välj uppdatera mjukvara.
- Välj Information om utgåva om det finns tillgängligt.

AVSNITT 15: FELSÖKNING

Om skärmen är tom:

- Minska förstoringen till minimum.
- Surfplattan kan vara avstängd eller i Viloläget. Tryck på Strömknappen för att starta den eller för att avbryta Viloläget.

Om färgerna är svåra att upptäcka:

- Se till att du har tillräckligt med omgivande ljus.
- Välj en annan kontrast eller färgkombination via Inställningarna.
- Justera ljusstyrkan i Inställningarna.

Det blänker väldigt mycket:

- Vinkla objekt i en annan vinkel för att minska blänket.
- Minska ljusstyrkan i Inställningarna.
- Dämpa de yttre ljuskällorna.
- Om en fotat bild är för ljus eller ojämn, stäng av ljuset via ikonfältet och ta en ny bild.

Om bilden/texten är ur fokus eller suddig:

- Använd Förstoringsknapparna för att öka och minska förstoringen så att kameran fokuserar om. Om det behövs, ta en ny bild av dokumentet.
- Försäkra dig om att kameran är still vid bildtagning.
- Försäkra dig om att Surfplattan är avslagen och rengör LED-ljusen samt kameraytan på baksidan med en rengöringsduk.

Om läsrösten verkar orimlig:

- Försäkra dig om att röstens språk är det samma som dokumentets språk. Ändra det via Inställningarna om det behövs.

Om Surfplattan inte svarar:

- Försäkra dig om att batteriet inte är tomt. Ladda upp det igen om det behövs.

Andra problem:

- Återställ Prodiggi till standardinställningarna i Prodiggi-menyn. Observera att denna procedur kommer att radera dina inställningar i Prodiggi.
- Återställ Android-systemet helt.

VARNING: Denna procedur raderar dina inställningar och personliga data.

VIKTIGT: Det rekommenderas starkt att du tar bort eventuella sparade Gmail-konton från din surfplatta innan du återställer Android-inställningarna. Efter en systemåterställning kommer du inte att kunna ta bort dem. Avgifter kan tillkomma om du behöver skicka din surfplatta till HumanWare för att ta bort ett sparat e-postkonto.

Ta bort ett sparat Gmail-konto

- Öppna Android-inställningar.
- Tryck på Lösenord och konton.
- Tryck på kontot/kontona som ska tas bort.
- Tryck på Ta bort konto.
- Bekräfta genom att trycka på Bekräfta.

Återställa Android-systemet

- Öppna Android-inställningar.
- Tryck på System.
- Tryck på Återställ alternativ.
- Tryck på Radera all data (fabriksåterställning).
- Bekräfta genom att trycka på Bekräfta.

Om tekniska problem kvarstår, vänligen kontakta din återförsäljare eller teknisk support.

AVSNITT 16: RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöra LCD-skärmen:

Försäkra dig om att enheten är avstängd samt ej ansluten till ett strömuttag. Använd endast mikrofiberdukar av typen som följer med enheten för att rengöra LCD-skärmen.

Rengör försiktigt skärmen med en mikrofiberduk. Om man väljer att rengöra skärmen med rengöringsmedel måste man försäkra sig om att den är ok att använda på LCD-skärmen. Destillerat vatten, isopropyl-alkohol samt lösningar med vinäger och vatten (inte mer än 10% vinäger) är ok att använda som rengöringsmedel för LCD-skärmen.

Använd endast en minimal mängd vätska för att undvika fukt i enheten. Om vätska kommer in i enheten kan den skadas. Försäkra dig om att ingen vätska finns kvar på skärmen. Repetera tidigare steg för fläckar som är svåra att få bort.

Använd aldrig hushållsrengöringsmedel för att rengöra Connect 12. Spreja aldrig vätska direkt på LCD-skärmen. Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller etanol, etylsyra, ammoniak, aceton eller metylklorid. Använd aldrig pappersservetter för att rengöra Connect 12.

Rengöra utsidan på enheten:

Försäkra dig om att enheten är avstängd samt ej ansluten till ett eluttag.

Om det är nödvändigt kan du använda en fuktig tygbit för att rengöra enhetens utsida.

Försäkra dig om att ingen vätska finns kvar på enheten. Repetera tidigare steg för fläckar som är svåra att få bort.

Använd aldrig slipande material, sprej, alkohol eller lösningsmedel för att rengöra utsidan på Connect 12.

Funktionella specifikationer

- Förstoring: 1x – 40x i live-läge, 1x – 80x för fotade bilder
- Skärm: Full HD 12-tums pekskärm med stöd för gester
- Kamera: 13MP ultra-högupplöst kamera
- LED-belysning: I stativet
- Bildfunktioner: Bildfångst med automatisk rotation
- Importera: JPEG, PDF
- Exportera: JPEG, TXT eller PDF
- Textvisning: Diamond Edge™
- Optisk teckenigenkänning (OCR): 58 språk
- Röster: 20 språk tillgängliga (upp till 4 installerade samtidigt)
- Läsningsslagen: Full sida, kolumn, och rad
- Anpassningar: Läsningsslagen, färgscheman (20), kontrast, system- och texttypsnitt
- Kalkylatorer: Standard, vetenskaplig, grafisk
- Appar: Dropbox, Google Docs och fler förinstallerade appar
- Anslutningar: Wi-Fi och Bluetooth
- Video: HDMI-videoutgång
- Lagring: 32GB intern, upp till 64GB löstagbar (*medföljer ej)
- Batteritid:
 - 7 timmar kontinuerlig användning (endast surfplatta)
 - 4,5 timmar kontinuerlig användning (med stativ och LED-belysning)

Fysiska specifikationer

- Hopfällda mått (b x d x h): 240 x 400 x 29 mm
- Surfplatta (b x d x h): 301 x 186 x 10
- Vikt:
 - Enhet: 1940 g
 - Endast surfplatta: 840 g

Tekniska specifikationer

- Förstoring:
 - Live-läge: 1x – 40x
 - Fotade bilder: 1x – 80x
- Visningsavstånd från stativ: 22,5 cm
- Skärm:
 - Typ: 11,6-tums LED TFT-LCD
 - Upplösning: 1920 x 1080 (Full HD)
 - Bildförhållande: 16:9
- Kamera: 13MP ultra-HD
- Videoutgång: Kompatibel med högupplöst video
- Operativsystem: Android 12 "Snow Cone"
- Trådlösa anslutningar:
 - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; SISO-standard
 - Bluetooth 5.0 och GPS
- Ljud: 3,5 mm hörlurs-/högtalaruttag (stereo)
- Processor: Quad Core
- Lagring:
 - Intern: 32GB (eMMC)
 - Extern: MicroSDHC upp till 64GB
- USB-anslutning: Typ-C (ström och data)
- Batteritid:
 - Endast surfplatta: 7+ timmar
 - Surfplatta och stativ med LED: 4,5 timmar
- Laddningstid: Mindre än 4 timmar

Polar Print

Växel, teknisk hjälp och support
Tel 010-470 99 00

info@polarprint.se

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHOV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ