

Användarmanual



CONNECT 12 G3 (del 1 av 2)

20241125

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning.....	2
Avsnitt 1: Introduktion	4
Avsnitt 2: Lär känna Connect 12.....	5
Överblick av Connect 12	6
Ställa i ordning.....	11
Avsnitt 3: Använda mjukvaran Prodigy.....	15
Ställa in Connect 12-surfplattan	15
Ikonfältet.....	16
Förstoringsläge.....	17
Autofokus.....	18
Fotografera bilder och text.....	19
Fotografera helsida	20
Flerbildstagning	21
Läsa ett dokument.....	22
Verktyg för handskrivning	26
Konfigurera och använda snabbväxling	29
Aktivera Blåljusfilter	30
Använda Huvudmenyn	31
Ladda ner böcker.....	32
Gå till sida.....	34

Kommentera i en bok	35
Bokmärken	35
Använda appåtkomst.....	37
Använda Snabbåtkomst	38
Använda kalkylatorn	39
Grafitande kalkylator från Desmos.....	40
Ordbok.....	41
Visa sparade dokument.....	45
Inställningsmenyn i Galleriet	46
Åtgärdsmeny	46

AVSNITT 1: INTRODUKTION

Tack för att du har köpt Connect 12 med Prodigy-mjukvara. Enheten är ett pekstyrt system för personlig synassistans från HumanWare, världsledande inom hjälpmedelsteknik för personer med nedsatt syn.

Connect 12 med Prodigy är en intuitiv, intelligent, portabel och anpassningsbar surfplatta/system som syftar till att återställa och upprätthålla självständighet för personer med synnedsättning.

Connect 12 är ett komplett förstoringssystem som gör att du kan förstora och läsa dokument samt ta bilder när du är på språng.

Vi rekommenderar starkt att du läser användar- och säkerhetsinstruktionerna i denna användarmanual innan du använder din Connect 12. Om du har några frågor om systemet, vänligen kontakta Polar Print Försäljning AB.

Observera att programuppdateringar kan ha skett sedan denna användarmanual trycktes. För att få den senaste versionen, vänligen besök supportsidan <https://www.humanware.com/connectsupport>.

Notera: Vissa funktioner som beskrivs i denna användarmanual kanske inte är tillgängliga på ditt språk.

Copyright 2024 HumanWare Technologies Inc., alla rättigheter förbehållna. Ingen del i denna publikation får reproduceras eller distribueras i någon form, lagras i databas eller annat lagringssystem utan skriven tillåtelse från Technologies HumanWare Inc.

AVSNITT 2: LÄR KÄNNA CONNECT 12

Lådans innehåll

- Connect 12 G3 med mjukvaran Prodigy™
- USB till USB-C-kabel
- Nätadapter
- Kom igång-manual
- Snabbstartguide
- Användarmanual
- Penna för pekskärm
- Garantihandling

Skyddande bärväska


- Hopfällbart stativ

Avståndskamera (tillval)

- Avståndskamera
- Nätadapter
- USB-kabel
- Kamera-arm
- Kamera snabbstartsguide
- Kamera användarmanual
- Garantihandling
- Servicekort

ÖVERBLICK AV CONNECT 12

Framsidan (bild 1)

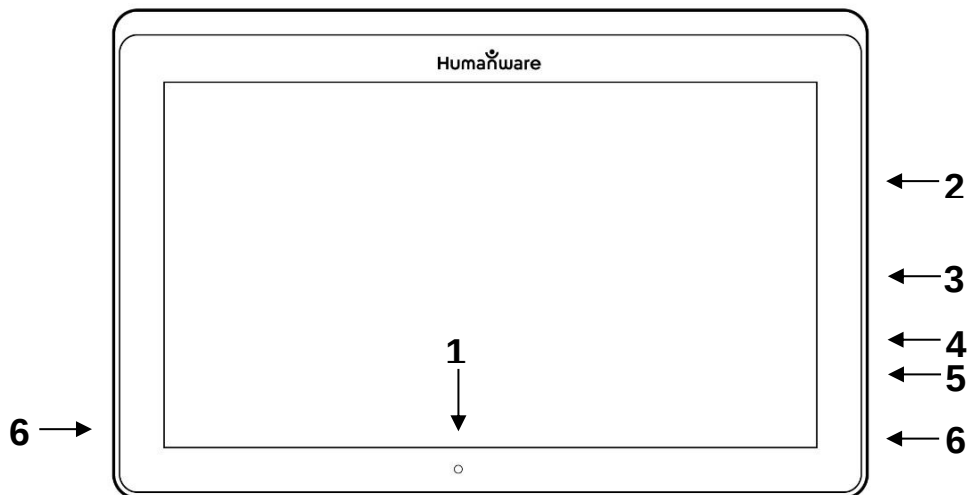


1. Framåtriktad kamera
2. Minneskortsplats, Micro-SD
3. USB-C-kontakt
4. Micro-HDMI-anlutning
5. Hörlursuttag
6. Högtalare

Nedre kanten (bild 2)




1. Volymknapp
2. Strömknapp

Baksidan (bild 3)

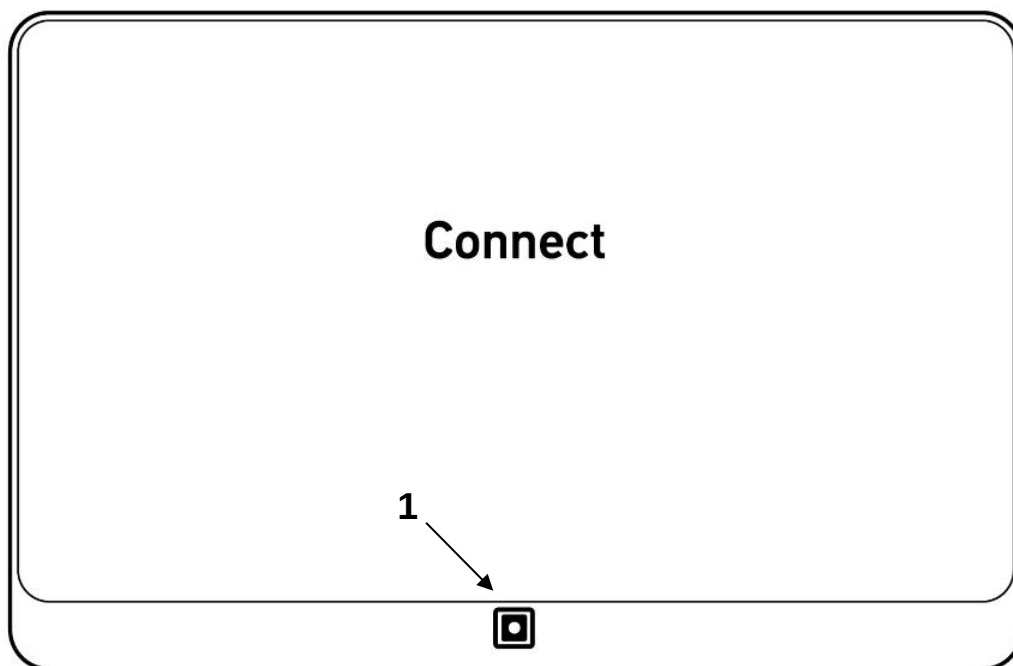


1. Bakåtriktad kamera

Ikonfältet (bild 4)

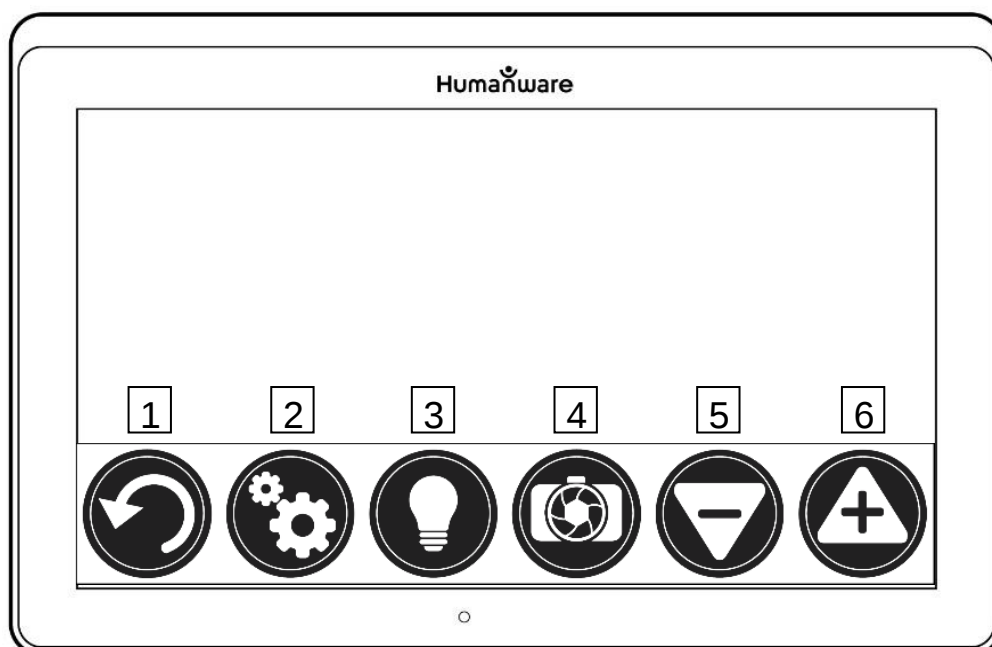


- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Tillbaka | 4. Fota/Läs |
| 2. Inställningar | 5. Minska förstoring |
| 3. Belysning | 6. Öka förstoring |

Ikon för att öppna ikonfältet (bild 5)

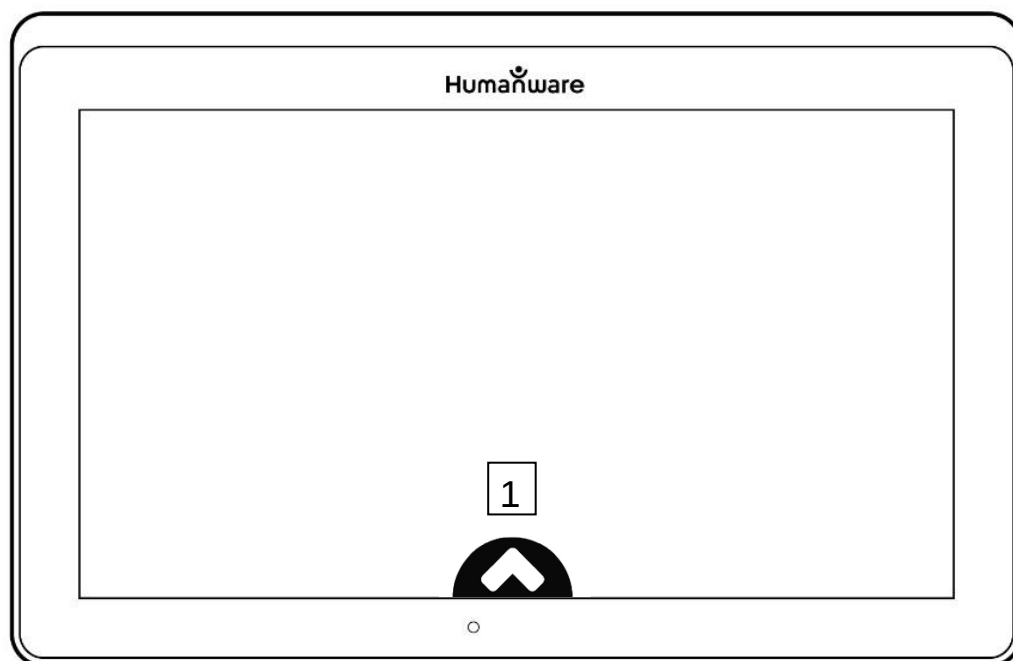


1. Öppnar ikonfältet i gränssnittet

Hopfällbart stativ (bild 6)

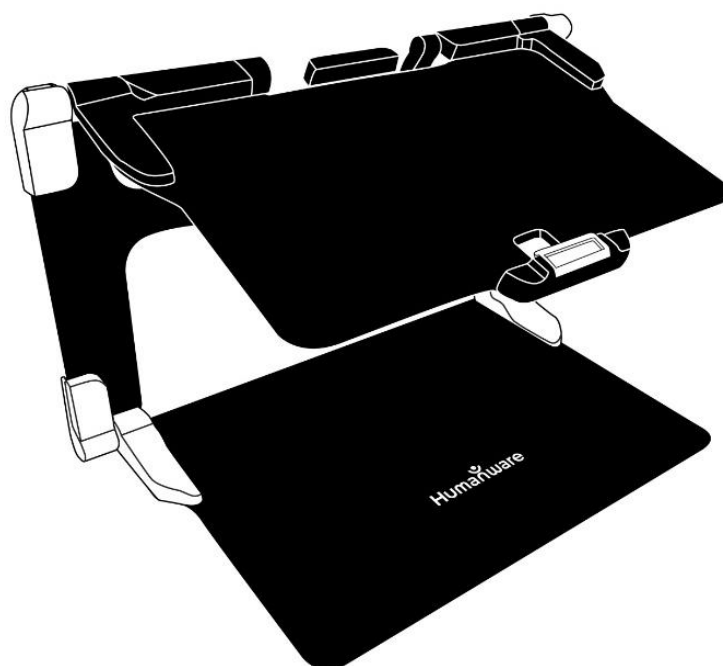


Avståndskamera (bild 7)

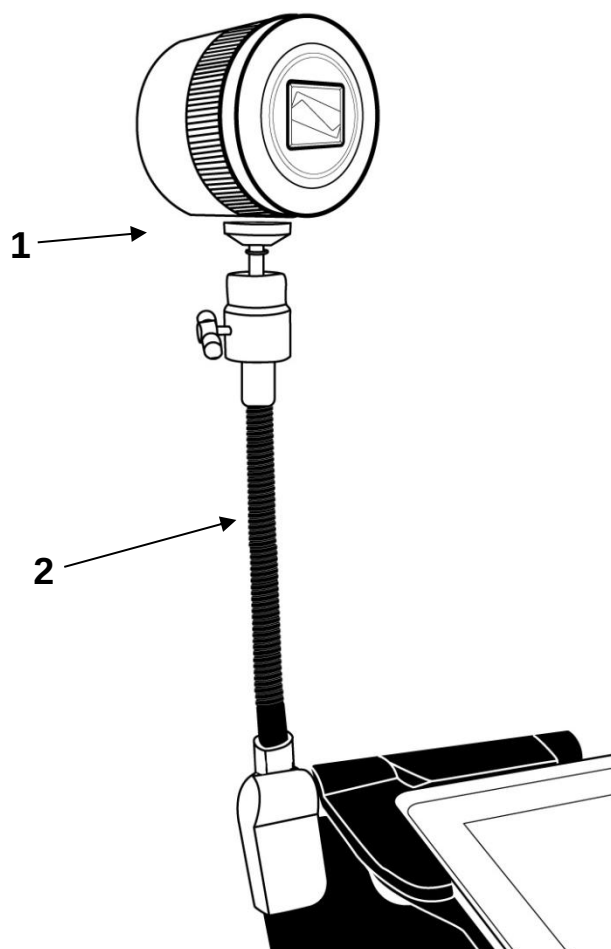


- 1. Avståndskamera
- 2. Kamera-arm för avståndskamera

Avståndskamera, framifrån (bild 8)

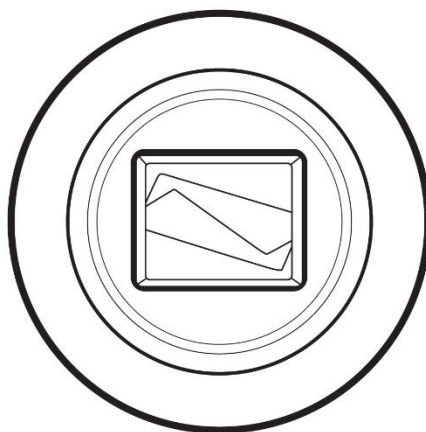


Avståndskamera, ovanifrån (bild 9)

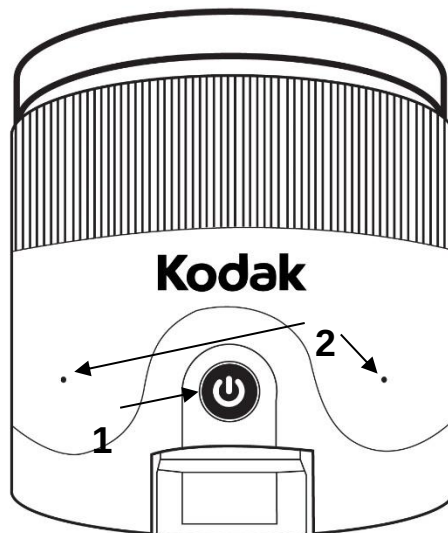

1. Strömknapp
2. Mikrofoner

Avståndskamera, vänster sida (bild 10)

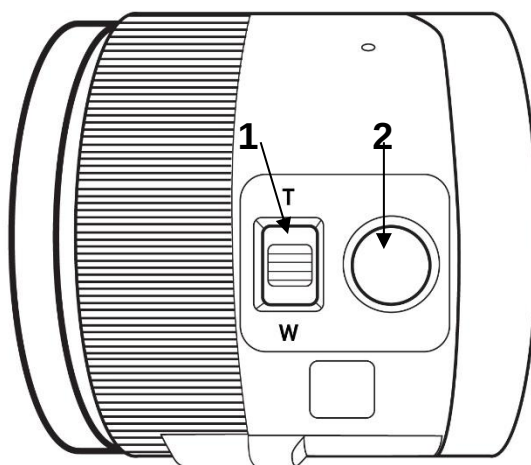


1. Förstoringsreglage
2. Slutarknapp

OBSERVERA: Spara snabbstartsguiden som följer med avståndskameran eftersom den innehåller information om parkoppling.

STÄLLA I ORDNING


Ovanför ett plant, stabilt bord håller du i det hopfällbara stativet i en upprätt position och försäkra dig om att panelen med ordet "Connect" är riktad mot dig. Samtidigt som du håller i handtaget med en hand, vik ut den undre panelen med din andra hand tills den ligger plant mot bordet.

Hopfällbart stativ, hopfälld position (bild 11)

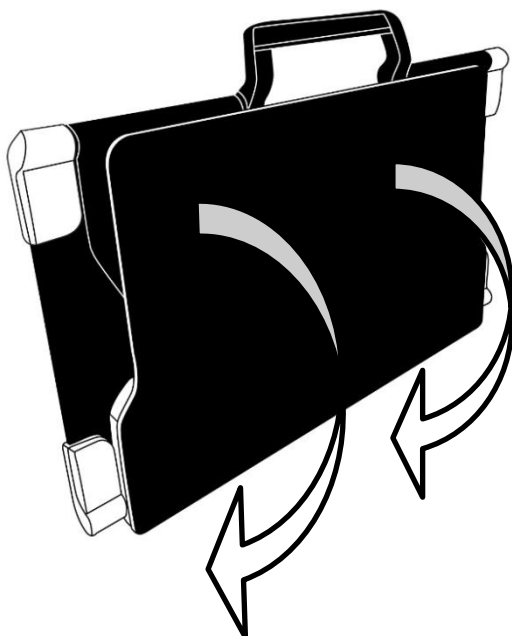


Hopfällbart stativ (bild 12)

Vik sedan den övre panelen tills den är ungefär parallell med den nedre panelen.

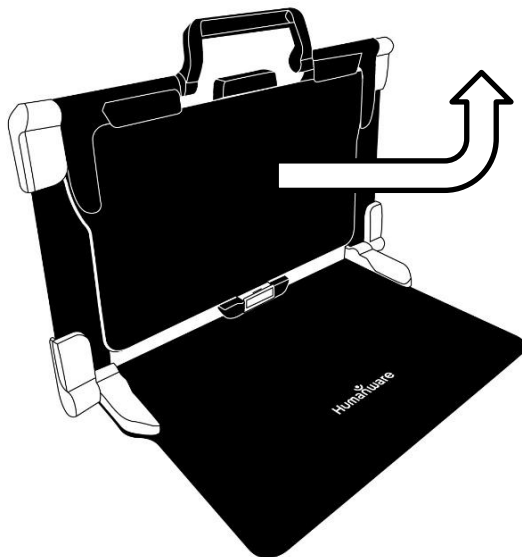


Hopfällbart stativ, uppvikt position (bild 13)

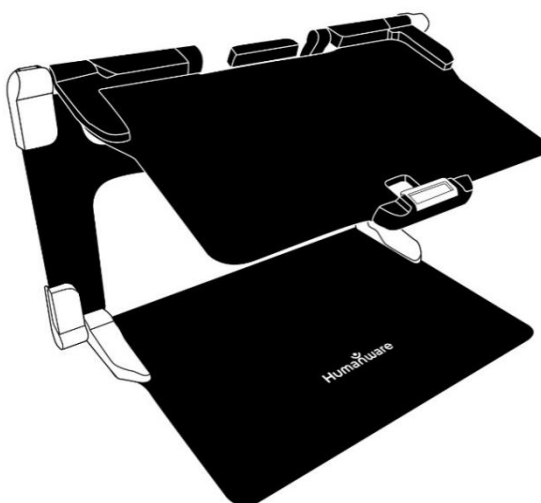

Hopfällbart stativ med surfplatta (bild 14)


Håll din Connect 12-surfplatta med skärmen vänd mot dig (HumanWare-logotypen ska vara högst upp, i mitten av enhetsramen). Justera försiktigt och sätt in plattans övre del vid de tio kontaktstiften som finns högst upp, i mitten av stället. Tryck ner den nedre delen av surfplattan tills du hör ett klick som indikerar att surfplattan är fastsatt. För att lossa surfplattan, placera tummen på den orange klämman och skjut den nedåt, mot dig.

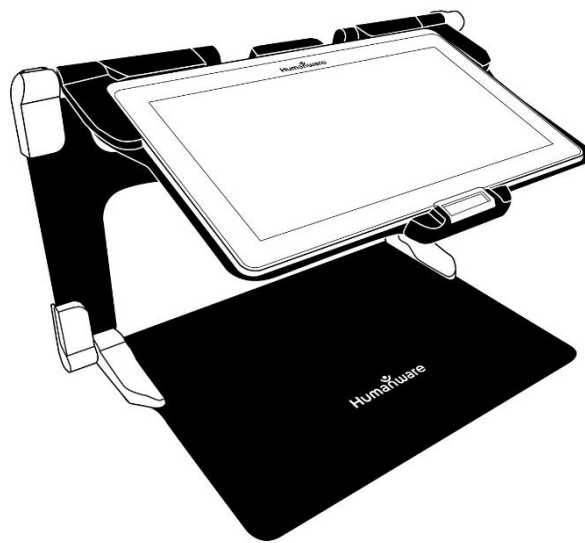

USB-C-porten är placerad på högra sidan av surfplattan. Anslut USB-kabeln till USB-C-porten och anslut den till ett eluttag med hjälp av nätadaptern. Ladda batteriet till full kapacitet (en full laddning tar cirka 4 timmar).

USB-C-kabel och USB-C-port (bild 15)

Sätt försiktigt in kabeln i USB-C-porten.

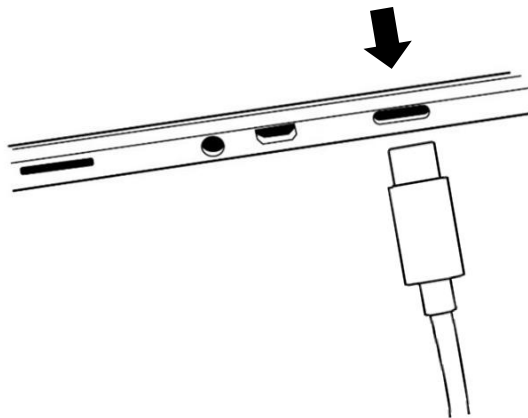

VIKTIGT: Använd endast den nätadapter och kabel som medföljer. Var försiktig när du sätter in kabeln i USB-C-porten.

Starta enheten

Tryck ner och håll inne strömknappen i två till tre sekunder för att starta surfplattan. HumanWare- och Android-logotyper visas på skärmen. Surfplattan tar ungefär 45 sekunder att starta.



AVSNITT 3: ANVÄNDA MJUKVARAN PRODIGI

STÄLLA IN CONNECT 12-SURFPLATTAN

För att se detaljerade videor om surfplattans första inställningsprocess, besök HumanWares supportsidan för Connect 12 (www.humanware.com/connectsupport) eller HumanWares YouTube-kanal.

Notera: Surfplattan måste genomgå Androids installationsguide innan Prodigy-mjukvaran kan användas. Processen liknar inställningen av en ny telefon. Se till att ha inloggningsuppgifter för Wi-Fi samt Google-kontoinformation redo. Det är rekommenderat att ställa in både Wi-Fi och Google-konton under denna process.

Vissa steg i processen kommer att ta några minuter.

När Android-guiden är slutförd kommer du att bli ombedd att installera Prodigy-mjukvaran, följ bara anvisningarna på skärmen.

När Prodigy-mjukvaran är installerad kommer systemet att söka efter uppdateringar och sedan blir du ombedd att välja och installera en eller flera röster (maximalt fyra röster).


Slutligen kommer du att bli ombedd att välja din standardapp för hemknappen. I de flesta fall rekommenderar vi Prodigy-mjukvaran.

IKONFÄLTET

De flesta funktionerna i Prodigy-mjukvaran utförs via ikonfältet längst ner på skärmen.


Tryck på pilknappen nederst eller **svep uppåt** för att öppna ikonfältet.

Ikon för att öppna ikonfältet (bild 16)

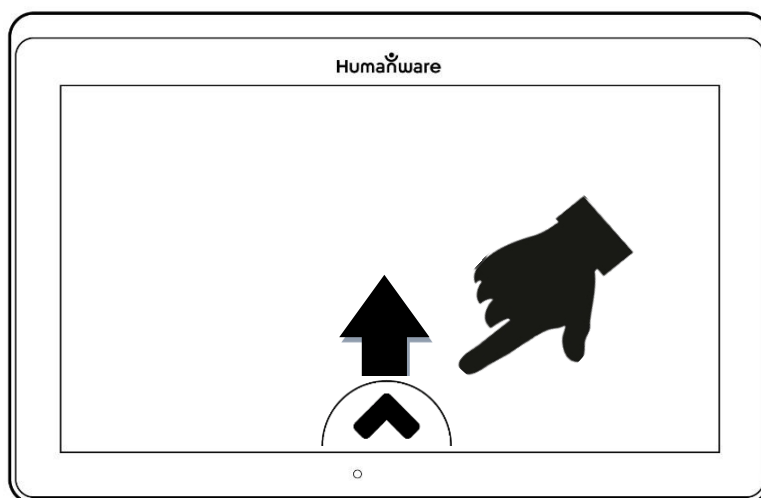

För att dölja ikonfältet (för att kunna se hela skärmen), svep nedåt på ikonen. Ikonfältet kommer att ersättas av ikonen "Öppna ikonfält" längst ner på skärmen.

Ikonfältet (bild 17)

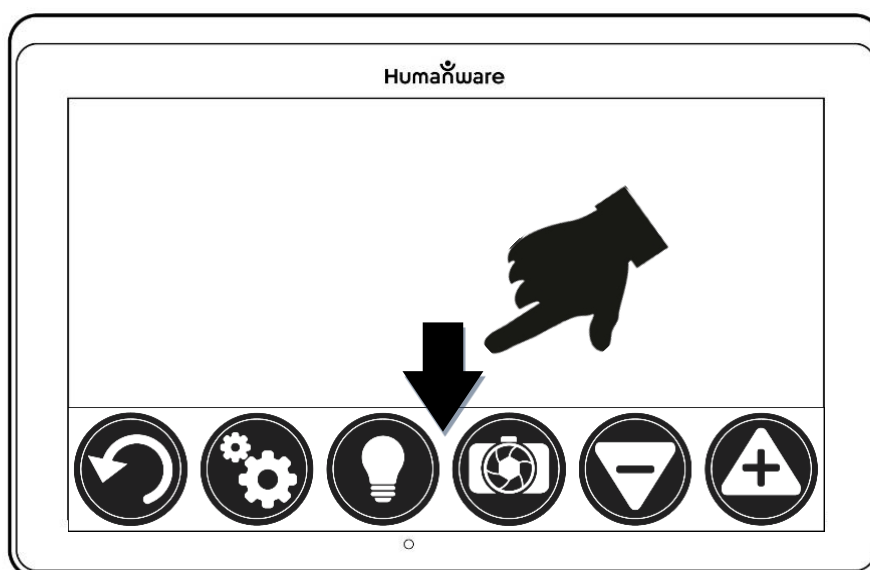

FÖRSTORINGSLÄGE

Steg 1: Tryck på Förstoringsglasikonen



Steg 2: Tryck på Inställningsikonen (se bild 4)



Steg 3: Svep till Kamera i Inställningar och växla mellan Kamera: Bakre och Kamera: Främre

När du använder den bakre kameran (bild 3) placeras surfplattan ovanför dokumentet eller objektet du vill titta på.

När du använder den främre kameran (bild 1) kan du placera dig själv framför surfplattan för en spegelvy.

Notera: OCR-funktionen (Optical Character Recognition) inaktiveras automatiskt när den främre kameran används.

Du kan också komma åt alternativet för främre/bakre kamera med ett långt tryck (3 sekunder) på Kameraikonen.



Flytta objektet eller dokumentet under din surfplatta för att lokalisera text eller visuella detaljer.

Tryck på ikonerna **Öka förstoring** eller **Minska förstoring** för att justera förstoringnivån. Ikonen Öka förstoring (+) ökar bild-/teckenstorleken, medan ikonen Minska förstoring (-) minskar bild-

/teckenstorleken. Du kan också trycka och hålla in ikonerna för att gradvis och stegvis justera förstöringsnivån. Släpp när du har nått önskad förstöringsnivå.



Utöver ikonerna för att ändra förstoring kan du använda nypgester för att justera förstoringen. Minska avståndet mellan två fingrar för att minska förstoring och öka avståndet för att öka förstoringen.

Nypgester (bild 18)



AUTOFOKUS

Prodigi-mjukvaran låter dig låsa eller låsa upp autofokus. Detta är användbart när ett dokument är korrekt fokuserat och du vill låsa dess position eller när du vill utföra en syssla såsom skriva på ett papper och förhindra att surfplattan försöker omfokusera på din hand eller penna till exempel.

För att låsa autofokus genomför du en dubbeltryckning (tryck två gånger i snabb följd) var som helst på skärmen. Följande ikon kommer att visas i övre högra hörnet på skärmen när autofokus är inaktiverat.



- Dubbeltryck igen var som helst på skärmen för att låsa upp autofokus. Ikonen för inaktiverat autofokus kommer att försvinna.

FOTOGRAFERA BILDER OCH TEXT

Placera surfplattan med hjälp av stativet ovanför ett dokument eller objekt som du vill fotografera.

Notera: Surfplattan behöver inte vara perfekt inriktad ovanför dokumentet. Som standard kommer Prodigy automatiskt att korrigera för vinkeln på din surfplatta.


På skärmen visas två mörka triangelformade former på vardera sida om dokumentet som indikation på vinkelkorrigering. Du kan inaktivera denna funktion genom att trycka på Inställningsikonen, svepa upp för att välja Vinkelkorrigering och välj Aktivera eller Inaktivera. Tryck på Tillbaka för att avsluta.

Tryck på ikonen Fota/läs för att ta en bild av ditt dokument eller tryck och håll fingret på skärmen i 2 sekunder. Du kommer att höra ett slutarljud följt av ett klickande ljud, vilket indikerar att dokumentet har fotats.




Så snart bilden har tagits kommer ikonen med glödlampa att ersättas av en ikon med symbolen spara.

- Tryck på denna ikon för att spara fotot i galleriet för framtida användning.

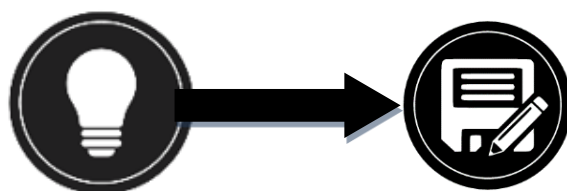

- Tryck på ikonen Tillbaka om du vill återvända till förstoringläget.

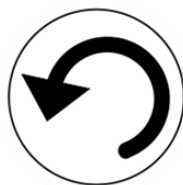

FOTOGRAFERA HELSIDA

Fotografera en helsida

- Lägg ditt papper horisontellt (landskapsläge) istället för vertikalt, så att sidans överkant ligger vid surfplattans vänstra kant och textens nederkant vid surfplattans högra kant.
- Tryck en gång på ikonen Minska förstoring i Förstoringläget. Detta aktiverar helsidesvyn och minskar ikonfältet.
- Justera pappret under stativet så att all text visas.
- Tryck på Kameraikonen eller håll fingret på skärmen för att ta ett foto.


Tips: För att kunna få med mer text, höj surfplattan från dokumentet för att få en bredare vy.

För att återgå till Live-läget och titta på mindre objekt eller dokument trycker du på ikonen för att öppna Ikonfältet och trycker sedan på ikonen Öka förstoring en gång.

FLERBILDSTAGNING

För att fota av och spara ett flersidigt dokument, växla till läget Flerbildstagning genom att svepa på vänstra kanten på pekskärmen:

Flerbildtagningsläge (bild 19)

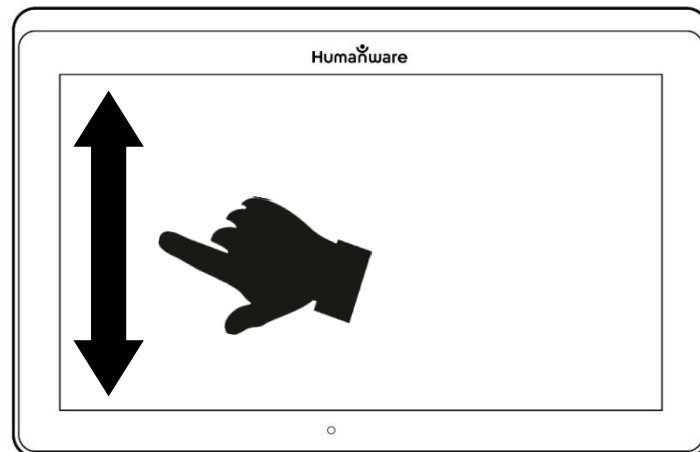

Notera: Du kan också växla till läge Flerbildstagning via Inställningarna. Tryck på ikonen Inställningar, svep uppåt för att välja Läge, tryck på det för att välja Flerbildstagning. Tryck Tillbaka för att avsluta Inställningar.


- Du kan nu fota av flersidiga dokument. Placera surfplattan ovanför den första sidan i dokumentet som du vill fota av samt tryck på Fotoikonen eller håll fingret nedtryckt på skärmen. Fortsätt på samma sätt med varje sida du önskar fota av. Ditt flersidiga dokument kommer att sparas i Galleriet.
- Tryck på Galleriikonen för att visa fotade bilder.



- Tryck på första sidan i dokumentet för att öppna det.

LÄSA ETT DOKUMENT

När du har tagit en bild kommer Fotoikonen att ändras från kamerabild till en uppspelningssymbol. Detta är nu Läsikonen.

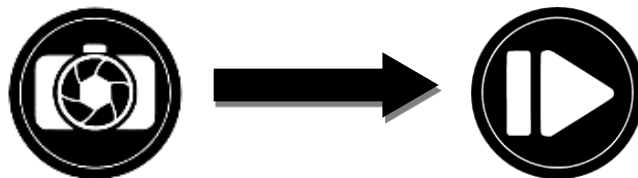

- Tryck på Läsikonen för att påbörja uppläsning.



- Tryck på Läs eller utför en lång tryckning var som helst på skärmen i 2 sekunder för få texten att börja rulla samt läsas upp utifrån dina läsinställningar. Du kan också göra en lång tryckning på ett specifikt ord i dokumentet för att börja läsa därifrån.

Notera: När du trycker på Läsikonen kommer ikonfältet att döljas för att ge en bättre vy av bilden. Ikonfältet kan aktiveras när som helst genom att trycka på ikonen Öppna ikonfält eller svepa uppåt på den nedre delen av skärmen.

- Använd knapparna Volym upp och ner för att justera volymen.
- För att pausa, tryck på Läsikonen igen eller utför en lång tryckning var som helst på skärmen.
- När enheten är pausad, tryck Tillbaka för att avsluta läsvyn och Tillbaka igen för att återvända till kameravyn.




- För att återuppta, tryck på Läsikonen igen eller utför en lång tryckning.

I Förstoringsläget låter Läsläget dig öka och minska förstoringen i fotade dokument.

Öka och minska förstoring i fotade dokument

- Tryck på ikonerna **Öka** eller **Minska förstoring** för att justera förstoringsgraden. För att öka teckenstorlek, tryck på ikonen **Öka förstoring (+)**. För att minska teckenstorlek, tryck på ikonen **Minska förstoring (-)**. Du kan också trycka ner och hålla inne ikonerna Öka eller Minska förstoring för att gradvis justera förstoringen och släppa när du har nått önskad förstoringsgrad.
- Förutom Förstoringsikonererna kan du också använda nypgester för att justera förstoringsgraden.
- För att direkt zooma in på en intressant del, tryck en gång på området du är intresserad av och bilden kommer att zoomas in till din önskade förstoringsnivå.
- Om du har en förstoringsgrad över 1X kan du flytta runt i det förstorade dokumentet genom att utföra en **Panoreringsgest** (drag sakta ditt finger över skärmen utan att lyfta det).


Panoreringsgest (bild 20)

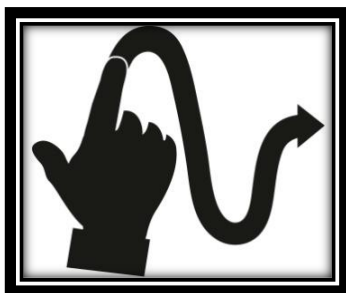

- Du kan också panorera för att nå andra delar av en förstorad bild.

- För att växla mellan olika kontraster, svep på högra sidan av skärmen eller aktivera inställningarna.

Gest för inställningar (bild 21)

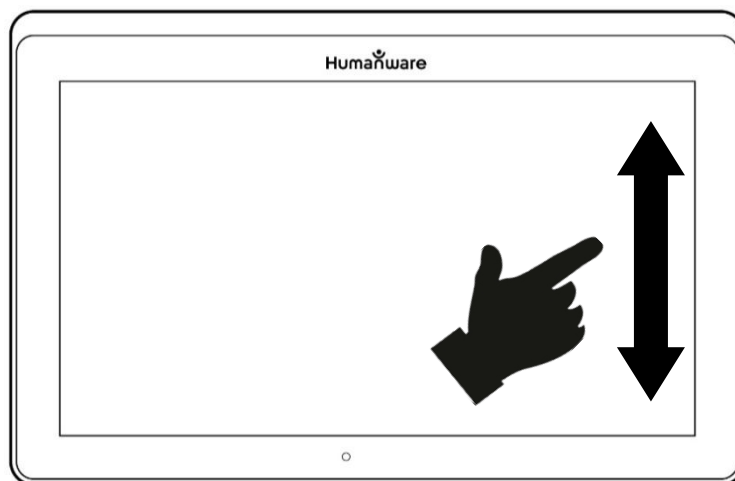

Notera: Text kan visas på tre olika sätt (Läslägen): Aktivera Inställningarna för att välja en enda rad i Radläget, en kolumn i Kolumnläget (standardläget) eller så kan du läsa text utan att ändra dess placering i Sidläget. Två "större än"-tecken visar slutet på ett stycke i Rad- och Kolumnlägena (>>).

Prodigi piper och meddelar "Slutet av dokumentet" när du når slutet av ditt dokument, tryck Läs för att läsa från början igen.


- För att ställa in ett annat Läsläge, tryck på Inställningsikonen, svep upp till alternativet Läsläge och välj detta.



- Tryck på Läsläge för att ändra värde. Tryck Tillbaka för att avsluta Inställningarna.
- Du kan öka talhastigheten temporärt vid läsning genom att svepa till vänster och lyfta upp fingret på pekskärmen samt minska talhastigheten genom att svepa till höger.

Notera att talhastigheten kommer att ändra läsningshastigheten (textens rullningshastighet) på motsvarande sätt.

Gest för rullningshastighet (bild 22)

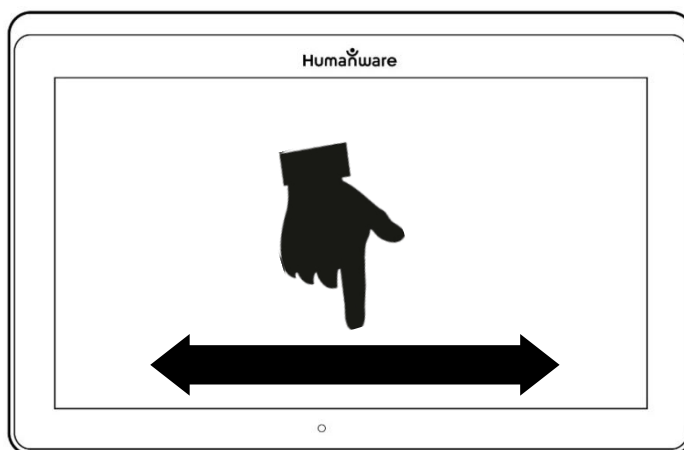

Du kan också öka eller minska talhastigheten permanent under Inställningarna. Tryck på Inställningsikonen, välj Talhastighet och ställ in ett värde. Tryck Tillbaka två gånger för att stänga Inställningarna.

Du kan ändra läshastigheten (textens rullningshastighet) genom att svepa till vänster eller höger eller via Inställningar även när talet är inaktiverat.

- Växla mellan Tal På och Av genom att dubbeltrycka på skärmen vid läsning. Alternativt kan du trycka på Inställningsikonen, välja Tal samt välja Endast dokument eller Av.
- Prodigy-mjukvaran låter dig ha upp till 4 olika röster som kan användas för att läsa upp textdokument. Tryck på Inställningsikonen för att välja en annan röst, välj Röst och tryck för att växla mellan de 4 röstalternativen.
- Tryck Tillbaka för att återvända till ditt dokument.
- Tryck Tillbaka för att stoppa läsningen och återvända till kameravyn.


Notera: Försäkra dig om att språket på den valda rösten är detsamma som i dokumentet du vill läsa.

VERKTYG FÖR HANDSKRIVNING

Connect 12 har ett handskrivningsverktyg som är användbart för överstrykning, frihandsritning samt skrivning av text på fotade bilder.

Öppna handskrivningsverktyg

- Öppna en sparad bild från Galleriet eller spara en fotad bild i Förstoringsläget.
- Tryck på ikonen med en Penna i ikonfältet.

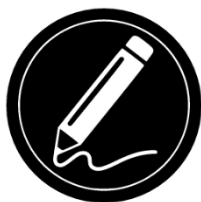

Så snart handskrivningsverktyget är aktivt visas 4 nya ikoner (tillsammans med Tillbakaikonen) i ikonfältet.

Med ikonen Verktysval kan du kan välja mellan Penna, Överstrykning eller Textverktyg. Tryck på ikonen för att växla till önskat verktyg.

Pennan, Överstryknings- och Textverktygets ikoner visas nedan.




Suddverktyget används för att sudda bort det som har ritats med pennan/överstrykning samt inskriven text.



Ikonen för Färgval öppna färgmenyn. Tryck på den för att välja önskad färg på det valda verktyget.



Ikonen för Storlek öppnar storleksmenyn. Tryck på den och välj storlek för text eller bredd på strecken för pennan/överstrykning.

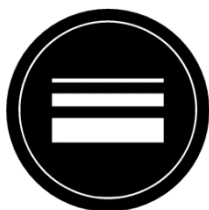

Använda penna eller överstrykningsverktyg

- Välj antingen pennan eller överstrykning genom att trycka på ikonen Verktysval i ikonfältet. Dra fingret på skärmen för att rita streck med pennan eller överstrykningsverktyget.

Sudda text eller streck från penna/överstrykningsverktyg

- Trycka på ikonen för Suddverktyget.
- Dra fingret över det som ska suddas.
- När det är klart avmarkerar du Suddverktyget genom att trycka på ikonen igen.

Notera: Suddverktyget tar endast bort streck gjorda av det valda verktyget.

Skriva text

- Välj Textverktyget genom att trycka på ikonen Verktysval i ikonfältet.
- Tryck ner och håll ner fingret på skärmen där du vill skriva text.
- Ett virtuellt tangentbord visas på skärmen, använd det för att skriva in din text. Det går också att använda ett fysiskt Bluetooth-tangentbord om ett sådant är parkopplat med enheten.
- När du skrivit klart trycker du på ikonen med ett pappersplan uppe till höger på skärmen för att bekräfta inmatningen. Alternativt kan du trycka Ctrl + Enter för att bekräfta inmatningen om du använder ett Bluetooth-tangentbord.

Flytta text

- Tryck på ikonen Verktysval i ikonfältet.
- Tryck en gång på den skrivna texten för att markera den. En röd ruta visas runt texten vilket betyder att den nu är markerad.
- Dra texten till sin nya plats.
- Tryck var som helst på skärmen för att avmarkera texten.

Ändra textstorlek

- Tryck på ikonen Verktysval i ikonfältet.
- Tryck en gång på den skrivna texten för att markera den. En röd ruta visas runt texten vilket betyder att den nu är markerad.
- Ändra textstorleken genom att använda knipgester: minska avståndet mellan två fingrar för att minska textstorleken eller öka avståndet för att öka textstorleken.
- Tryck var som helst på skärmen för att avmarkera din text.

Panorerar i en bild vid redigering

- Placera två fingrar på bilden.

- Dra fingrarna uppåt, nedåt, höger eller vänster.
- Lyft fingrarna från bilden när det är klart.

Notera att om avståndet mellan fingrarna förändras vid panorering kommer bilden att förstöras eller förminskas istället.

KONFIGURERA OCH ANVÄNDA SNABBVÄXLING

Snabbväxling gör att du snabbt kan komma åt dina favoritappar genom att svepa över skärmen.

Funktionen snabbväxling

- Tryck på Inställningsikonen i Huvudmenyn och sedan Appar.




- Tryck på Snabbväxling.

För att aktivera snabbväxling måste du välja minst en applikation. Du kan använda Sök för att manuellt skriva in den applikation du vill lägga till eller välja Applikation för att sedan välja så många appar du vill från listan.

Placera två fingrar mitt på skärmens vänstra sida (se bild 23) och dra dem mot skärmens högra sida. Prodigy kommer att känna av ditt svep och växla till nästa app som du valt från listan.

Gest för Snabbväxling (bild 23)

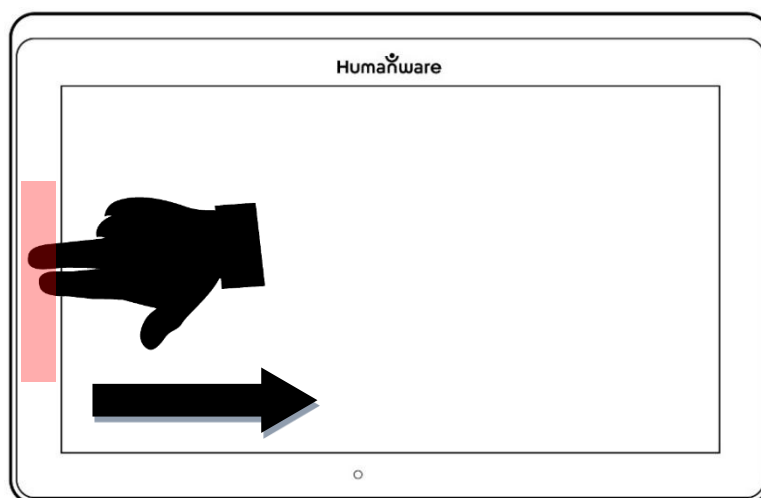

- Du måste svepa varje gång du vill växla. Snabbväxling växlar till nästa app i samma ordning som du valde dem.


Snabbväxling kan användas från vilken applikation som helst.

AKTIVERA BLÅLJUSFILTER

Blått ljus är känt för att minska produktionen av melatonin (ett sömnhormon), så att filtrera bort blått ljus kan hjälpa till att förebygga sömnproblem.

Prodigi är utrustad med ett intelligent blåljusfilter som gör att du kan minska mängden blått ljus som visas på skärmen.

- Välj Inställningsikonen i Huvudmenyn.
- Tryck på Användargränssnitt i Inställningsmenyn.
- Tryck på Blåljusfilter.
- Välj en av de fem filterinställningarna: Av, Låg, Medel, Hög och Max.

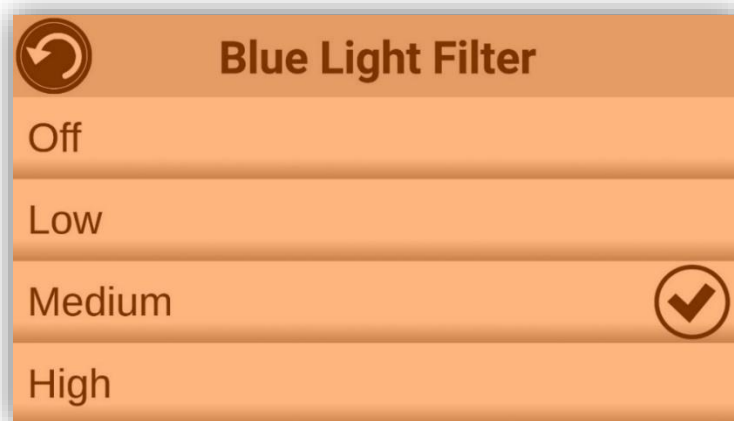

ANVÄNDA HUVUDMENYN

Prodigi-mjukvaran har 10 applikationer:

1. Appåtkomst
2. Snabbväxling
3. Kalkylator
4. Ordbok
5. Böcker
6. Avståndskamera (tillbehör)
7. Förstoring
8. Galleri
9. Inställningar
10. Hjälp

Applikationsikonerna visas här i samma följd som ovan:



Gå till den cirkulära huvudmenyn från Förstoringsläget

- Tryck Tillbakaikonen för att avsluta Förstoringsläget och gå till huvudmenyn.

Prodigi meddelar "Huvudmeny" följt av den för tillfället valda applikationen.

- Den för tillfället valda applikationen visas i mitten av skärmen.
- Slep vänster eller höger i huvudmenyn för att välja applikation.
- Tryck på vald applikation för att starta den.
- Tryck Tillbakaikonen för att återvända till huvudmenyn.

Tips: Du kommer åt huvudmenyn när som helst i systemet genom att dubbeltrycka med två fingrar var som helst på skärmen.

LADDA NER BÖCKER

Bokapplikationen i Prodigi låter dig ladda ner eBöcker, tidskrifter och andra utgåvor från olika bibliotek.

- Välj och tryck på ikonen Böcker i huvudmenyn.



- När du öppnar Böcker måste du välja en av bok- eller prenumerationstjänsterna från en lista. För att göra detta, välj Hantera bibliotek och sedan Bokleverantörer eller Tidningsleverantörer.
- Tryck på ett bibliotek och logga in med det användarnamn och lösenord som organisationen har tillhandahållit. Ange först ditt användarnamn och tryck på den blå knappen på höger sida av tangentbordet. Ange sedan ditt lösenord och tryck på den blå knappen igen. Din inloggningsinformation sparas.

Notera: Ditt lösenord kommer att vara dolt som standard. Tryck på Ögonikonen till höger om lösenordsfältet för att visa lösenordet i klartext. Tryck igen för att dölja lösenordet.

Efter att inloggningsuppgifterna har godkänts trycker du på Tillbakaikonen två gånger tills du återvänder till Bokmenyn. Varje bibliotek för vilket du har loggat in kommer att visas i listan.

Notera: Varje bibliotek har olika sökfält; de kan erbjuda sökningar via Titel, Nya utgåvor, Författare, Nyckelord, Kategori, Innehåll, ISBN-nummer, etc.

- Tryck på ikonen Hämta för att ladda ner en bok. Boken kommer att läggas till i undermenyn Mina böcker.
- För att läsa en nedladdad bok, välj undermenyn Mina böcker och tryck på boktiteln från listan över nedladdade böcker.

För att ladda ner en tidning eller tidskrift måste du prenumerera på den via undermenyn Tidskrifter, välj en kategori, tryck på den publikation du vill prenumerera på. En bockmarkering visas till höger, och ett popup-fönster informerar dig om att publikationen har lagts till i ditt bibliotek.

- Tryck på Tillbakaikonen två gånger för att återgå till Bokmenyn.
- För att läsa en nedladdad tidning eller tidskrift, välj Mina prenumerationer, välj tidningen eller tidskriften och tryck på det nummer som har en pil till höger om sitt datum.
- När nedladdningen är klar, tryck på Läs för att börja läsa.
- Tryck på Läs igen för att pausa. Du kan sedan svepa åt vänster eller höger för att navigera mellan sidorna i boken.
- Du kan också navigera per kapitel genom att trycka på Navigeringsikonen i ikonfältet.



- Bokkapitel kommer att visas. Svep upp eller ner för att välja ett kapitel.
- Tryck på Tillbakaikonen för att avsluta och återgå till din boklista.

GÅ TILL SIDA

Bokapplikationen i Prodigy har en Gå till sida-funktion som möjliggör snabb och enkel navigering till vilken sida som helst i en bok. Notera: Denna funktion fungerar endast för böcker som har sidnumrering och/eller en innehållsförteckning.

Navigera i innehållsförteckningen

- När en bok är öppen, tryck på Navigationsknappen och välj Innehållsförteckning.
- Tryck på avsnittet eller kapitlet som du vill komma åt.

Gå till sida

- Tryck på Boknavigeringsikonen. En meny öppnas.



- Tryck på Gå till sida. Ett textfält visas.
- Ange numret eller namnet på den sida du vill komma åt och tryck på bokmarkeringen på tangentbordet. Prodigy kommer att visa boken på den valda sidan.

 Book navigation	
Table of contents	➤
Go to page	➤

Sidlistnavigering

- Tryck på Boknavigeringsikonen. En meny öppnas.
- Tryck på Sidlista.
- Välj den sida du vill komma åt från listan. Prodigy kommer att visa boken på den valda sidan.

KOMMENTERA I EN BOK

Du kan lägga till tre olika typer av markeringar i nedladdade böcker: handskrivna anteckningar med hjälp av pekskärmen, överstrykning samt textanteckningar.

BOKMÄRKEN

Använd bokmärken för att märka ut specifika platser i en bok. När ett bokmärke har lagts till kan du när som helst komma åt det, byta namn på det eller ta bort det.

Lägg till bokmärke


- Tryck på Bokmärkesikonen, som finns uppe till höger på skärmen. Bokmärkesmenyn öppnas.

- Om du navigerar i sidläge visas bokmärkesikonen till vänster på skärmen.



- Tryck på Lägg till.
- Ange bokmärkesnamnet i textfältet som visas. Tryck på Pappersflygsikonen (uppe till höger på skärmen) för att spara bokmärkesnamnet.

Notera: Bokmärkesnamn är begränsade till 40 tecken.

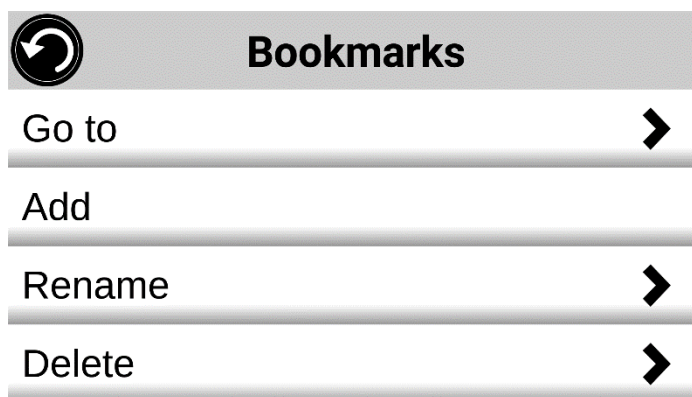

Gå till bokmärke

- När en bok är öppen, tryck på Bokmärkesikonen.
- I bokmärkesmenyn, tryck på Gå till. En undermeny öppnas med en lista över bokmärken.
- Välj ett bokmärke från listan. Prodigy öppnar boken vid bokmärkesplatsen.

Byt namn på bokmärke

- När en bok är öppen, tryck på Bokmärkesikonen.
- I bokmärkesmenyn, tryck på Byt namn. En undermeny öppnas som listar alla bokmärken.

- Välj det bokmärke du vill byta namn på.
- Ange det nya bokmärkesnamnet i textfältet. Tryck på Pappersflygsikonen för att bekräfta det nya namnet.

Ta bort bokmärke

- När en bok är öppen, tryck på Bokmärkesikonen.
- I bokmärkesmenyn, tryck på Ta bort. En undermeny öppnas som listar alla bokmärken.
- Välj det bokmärke du vill ta bort.
- Prodigy frågar: "Är du säker på att du vill ta bort detta bokmärke?". Tryck på Ja för att bekräfta.
- Alternativt kan du bläddra ned och välja alternativet Ta bort alla bokmärken för att ta bort alla bokmärken i boken.

ANVÄNDA APPÅTKOMST

Prodigi ger dig tillgång till alla applikationer som normalt finns på en Android-smartphone eller surfplatta.

Åtkomst till applikationer

- Tryck på Applikationsikonen i Huvudmenyn.



- En ny meny visas med två olika alternativ för att komma åt en applikation: Sök och Visa alla.
 - Sök: Gör det möjligt att hitta den applikation du söker genom att skriva dess namn.
 - Visa alla: Visar en lista över alla installerade appar på din Connect 12.

- Välj en applikation och tryck på dess ikon.

Om en applikation du söker inte finns med på listan kan du ladda ner den från Play Store. När nedladdningen och installationen är klar läggs applikationen till i listan.

- Tryck på Bakåtikonen för att återgå till Huvudmenyn.

ANVÄNDA SNABBÅTKOMST

Snabbåtkomst ger enkel tillgång till ofta använda applikationer. Lägga till en applikation i snabbåtkomstmenyn

- Tryck på Snabbåtkomstikonen i Huvudmenyn.



- Tryck på ikonen Lägg till.



En ny meny visas med två olika alternativ: Sök och Visa.

- Sök: Gör det möjligt att hitta den applikation du söker genom att skriva dess namn.
- Visa alla: Visar en lista över alla installerade appar på din Connect 12.
- Välj en applikation och lägg till den i snabbåtkomstmenyn genom att trycka på dess ikon.
- För att ta bort en applikation från snabbåtkomsten, tryck och håll på applikationsikonen och tryck sedan på Ta bort.

- För att flytta eller radera applikationen, tryck och håll på applikationen och välj sedan Byt plats eller Radera.


ANVÄNDA KALKYLATORN

Prodigi-mjukvaran har en Kalkylator-applikation.

- Välj och tryck på Kalkylatorikonen i Huvudmenyn.



- Tryck på siffrorna och tecknen. Din beräkning visas längst upp till höger på skärmen.
- Tryck på DEL för att göra korrigeringar (en siffra i taget).
- Tryck på CLR för att rensa totala summan.

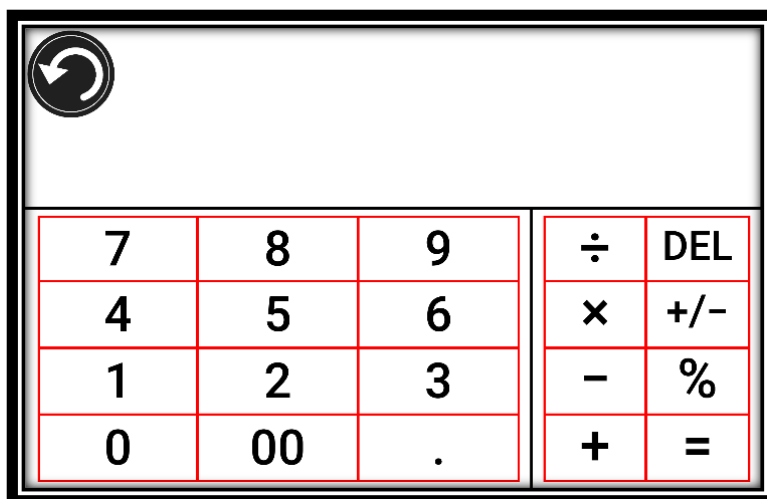


Som standard är kalkylatorn inställd på standardläge. Tryck på Inställningar, sedan Läge, och välj mellan Standard, Vetenskaplig eller Grafitande kalkylatorläge. Tryck på Bakåtikonen två gånger för att återgå till kalkylatorn.

GRAFRITANDE KALKYLATOR FRÅN DESMOS


Med integrationen av Desmos grafitande kalkylator i Connect 12 kan du rita grafer direkt på surfplattan eller genom att mata in dina ekvationer.

Notera: När du använder vetenskapligt eller grafitande läge, tryck på knappen med motsatta pilar längst ner på tangentbordet för att få tillgång till vetenskapliga eller matematiska funktioner.

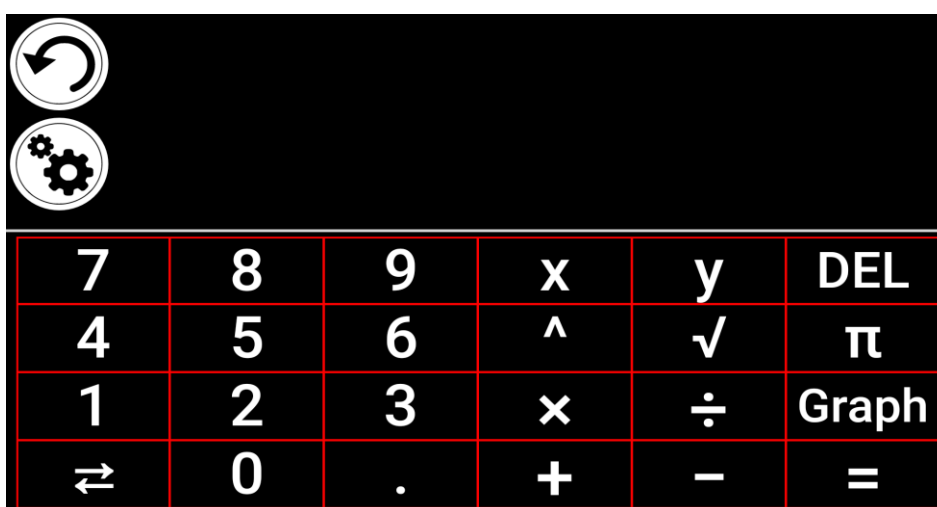

Rita graf

Skriv en giltig ekvation (exempel: $3x+2=y$) och tryck på Graf. Resultatet visas på följande sätt:

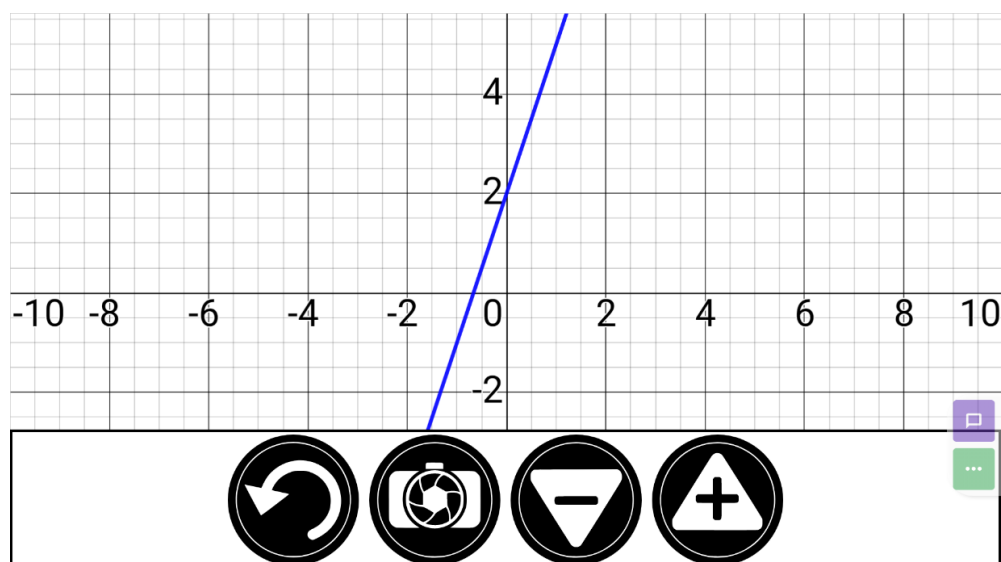

- Tryck på Plus- och Minusikonerna för att zooma in och ut i grafen.
- Svep med fingret över skärmen för att panorera grafen.

Ytterligare matematiska funktioner finns tillgängliga genom att trycka på knappen med motsatta pilar längst ner på tangentbordet.

Spara graf


När en graf visas på skärmen kan den fotas av och sparas i Galleriet under mappen Skärmbilder.

ORDBOK

Ordboken, utvecklad i samarbete med Accessbyte och Oxford Languages, är en praktisk och tidsbesparande funktion som kan nås via Huvudmenyn och användas som vilken annan digital eller onlineordbok som helst.

Söka efter ord

- Tryck på "Sök efter ett ord" (eller förstöringsglasikonen längst upp till vänster på skärmen). Ange ett ord på tangentbordet som visas samt tryck på Sök.

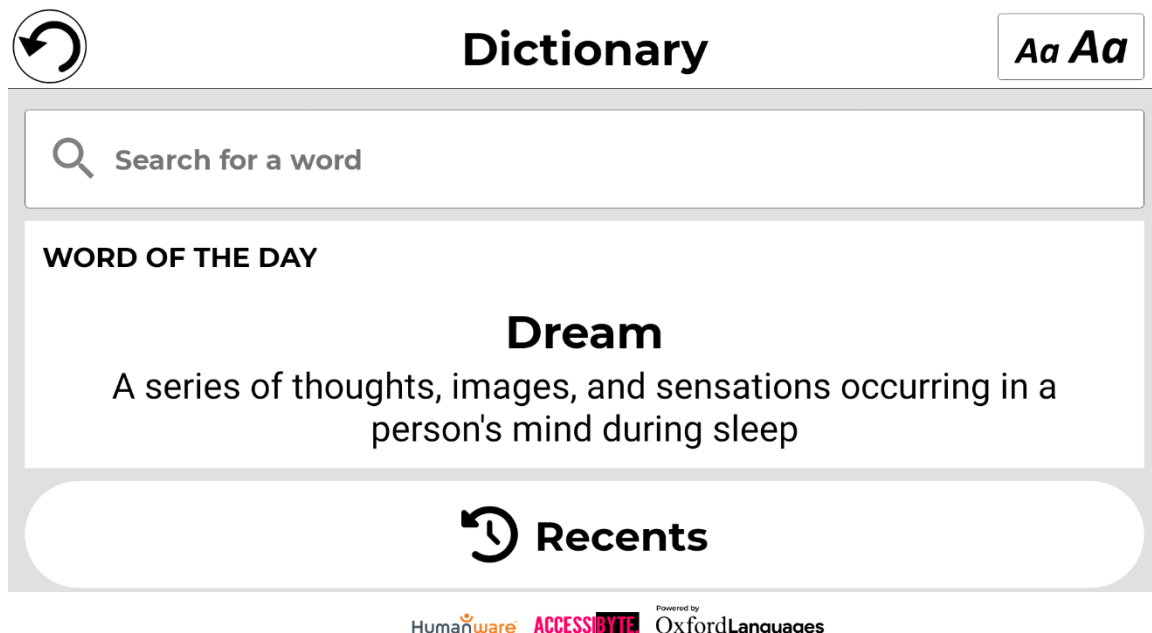

En lista med förslag visas, inklusive ordet du skrev in i sökfältet (det visas högst upp i listan) samt andra liknande ord. Notera att förslagslistan kan variera i längd beroende på hur många varianter som hittas i ordboken.

- Tryck på ett ord i förslagslistan, så visas definitionen automatiskt.



Definition



Accessibility

noun

1. The quality of being able to be reached or entered.

Examples

The restoration project involved repairing the roof and improving accessibility.

2. The quality of being easy to obtain or use.

Examples

Students were concerned about the accessibility of quality academic counseling.

3. The quality of being easily understood or appreciated.

Examples

Du kan spara orddefinitioner i en ordlista via Bokmärkesikonen längst upp till höger på sidan.

- Tryck på Bokmärkesikonen (uppe till höger på sidan).
- I popup-rutan "Lägg till i vilken lista?" trycker du på Skapa ny lista.
- Ange listnamnet i popup-rutan "Spara ord i lista".
- Tryck på Spara.

Ordet sparas i listan och kan nås genom att trycka på Bokmärket.

Flera listor kan skapas och sparas, till exempel specifika ämnesområden, tekniska termer, köksredskap eller sjötermer. Genom att trycka på förstöringsglasikonen (bredvid bokmärkesikonen) kommer du tillbaka till sidan "Sök efter ett ord" så att du kan söka efter ytterligare ord.

Justera teckenstorlek i ordboken

Huvudsidan innehåller en ikon för teckenstorlek längst upp till höger på sidan.

- Tryck på ikonen upprepade gånger för att växla mellan tre tillgängliga storlekar (liten, medium och stor). Stanna vid den storlek som passar dina behov.

Huvudsidan innehåller också funktionen Dagens ord. Det är ett slumpmässigt valt ord med tillhörande definition som uppdateras dagligen.

På samma sida visas ikonen Ordlistor under Dagens ord. Genom att trycka på den visas alla ordlistor som har skapats.

Ikonen Senaste visas under Ordlistor. Genom att trycka på den visas dina senaste sökningar efter ord.

Byta språk (standard: amerikansk engelska)

- På ordbokens huvudsida, tryck på "Sök efter ett ord".
- Tryck på den ovala ikonen längst upp till höger för att öppna sidan för språkinställningar.
- Välj ett av de fyra språkvalen.
- Tryck på bakåtpilen (längst upp till vänster) för att återgå till "Sök efter ett ord".

Visa / Dölj Ordbok

Som standard ingår ordboksikonen i Prodigis Huvudmeny men den kan döljas för att förenkla gränssnittet.

- Tryck på Inställningar i Huvudmenyn. Scrolla ner och tryck på Applikationer.
- Tryck på Visa (tillgängliga alternativ: Böcker, Kalkylator, Ordbok).
- Avmarkera Ordbok.

- Tryck tre gånger på Bakåtikonen för att återgå till karusellmenyn (ikonen för ordboken visas inte längre).
- För att återställa ikonen till Huvudmenyn följer du samma process men markerar istället Ordbok.

VISA SPARADE DOKUMENT

Alla sparade dokument finns i Galleriet.

- Tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Sveg åt vänster eller höger i Galleriet för att bläddra bland sparade dokument. Notera att skärmbilder som tas på enheten sparas i mappen Skärmbilder.
- Det aktuellt valda dokumentet visas i mitten av skärmen. Prodigy visar det första ordet i det valda dokumentet. Om dokumentet inte innehåller ord, taggas det som en bild.

En anteckningsboksikon indikerar ett flersidigt dokument.



- Tryck för att öppna ett valt dokument.
- Tryck någonstans på dokumentet för att visa den delen i din förinställda förstoringsnivå.
- Du kan växla mellan lägena färg, positiv, negativ och Diamond Edge™ (om bilden innehåller text) samt justera ljusstyrkan på samma sätt som i Förstoringsläget (se Förstoringsavsnittet för mer information).
- När du är förstoringsnivån är 1X eller mer kan du flytta dokumentet med en panoreringsgest.
- Tryck på Tillbaka för att återgå till helbildsvy.

- När du är i helbildsvyn trycker du två gånger på Tillbaka för att stänga ett dokument och återvända till Galleriet.

INSTÄLLNINGSMENYN I GALLERIET

För att komma åt inställningarna i Galleri trycker du på Inställningsikonen uppe till höger på skärmen medan du är i Galleriet.

Inställningsmenyn låter dig:

- Skapa kategorier och underkategorier (mappar)
- Skapa en ny sida
- Skapa ett nytt dokument
- Importera
- Radera innehåll i galleriet

ÅTGÄRDSMENY

Galleriet har en åtgärdsmeny som innehåller många användbara funktioner för dina sparade dokument. För att komma åt åtgärdsmenyn, håll länge på en fotad bild, ett dokument eller en kategoriikon i Galleriet. Du kommer till en meny som listar tillgängliga åtgärder för den valda filen.

I Åtgärdsmenyn kan du:

- Dela en bild via andra Android-applikationer.
- Numrera om den första sidan i ett dokument med flera sidor.
- Byta namn på ett dokument eller en kategori.
- Radera ett dokument, en kategori eller specifikt innehåll i en kategori.
- Flytta ett dokument till en kategori.
- Exportera ett dokument till en JPG-, text- eller PDF-fil i Androids filsystem eller till en extern enhet.

- Flytta en bild fotad med distanskamera till Galleriet för Diamond Edge-bearbetning.
- Radera, ersätta eller infoga sidor i ett dokument med flera sidor.
- Köra OCR på ett PDF-dokument (användbart när delar av ett PDF-dokument inte renderas korrekt, vanligtvis i tabeller).
- Dela en bild via andra Android-appar

Dela bild via andra Android-appar

- Tryck länge på bilden du vill dela.
- Tryck på Dela.
- Välj PDF- eller JPG-format.
- Välj appen genom vilken du vill dela din bild (exempel: Gmail, Maps, Google Drive) och fortsätt som vanligt med den valda appen.

Radera dokument, kategori eller innehållet i en kategori

- Tryck länge på dokumentet eller kategorin du vill radera.
- Tryck på Radera.
- Tryck på Ja för att bekräfta borttagningen.

Byt namn på dokument

- Tryck länge på dokumentet eller kategorin du vill byta namn på.
- Tryck på Byt namn.
- Ange det nya namnet för ditt dokument eller din kategori.
- Tryck på Enter.

Flytta dokument till kategori

- Tryck länge på dokumentet du vill flytta.
- Tryck på Flytta.
- Välj och tryck på den nya kategori dit du vill flytta dokumentet.

Importera JPG-, text- eller PDF-fil från extern enhet till Connect 12

För att systemet ska kunna upptäcka ditt USB-minne måste du ändra USB-inställningarna i Android-systemet.

- Tryck och håll med fyra eller fem fingrar på skärmen. En sida med alla Android-appar kommer att visas.
- På app-sidan, välj Inställningar.
- I inställningsmenyn under Enheter, välj USB.
- Högst upp på skärmen visas meddelandet: "USB är ansluten till datorn". En växlingsknapp till höger på skärmen låter dig ändra detta till "USB är inte ansluten till datorn".
- Tryck på cirkeln längst ner på surfplattan för att återgå till Prodigy.
- Sätt in ditt USB-minne i USB-C-porten till höger på surfplattan. Om ditt USB-minne inte är kompatibelt med en USB-C-port, använd en USB-till-USB-C-adapter.
- Välj och tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Tryck på Inställningsikonen längst upp till höger på skärmen och välj Importera.



- Två lagringsalternativ visas: Intern lagring och Store N Go, vilket motsvarar ditt USB-minne. Tryck på alternativet Store N Go.
- Ditt USB-minne kommer att visas. Tryck på dess namn och tryck sedan på Välj för att öppna det. Alla mappar och filer som finns lagrade på ditt USB-minne blir nu tillgängliga.
- Välj och tryck på filer för att importera dem till Galleri. De laddas automatiskt ner till din Connect 12.

Exportera dokument till JPG-, text- eller PDF-fil i Androids filsystem eller till extern enhet

- I Galleriet, tryck och håll på dokumentet du vill exportera.
- Tryck på Exportera.
- Välj filtypen du vill exportera dokumentet som. Du kan ändra vissa JPG- och PDF-inställningar genom att trycka och hålla på antingen PDF- eller JPG-alternativet (avancerade användare).
- Välj Intern lagring för att exportera till en specifik mapp på enheten. Du kan också välja USB-enhet om ett USB-minne är anslutet till surfplattans USB-port.

Flytta en bild från distanskamera till Galleriet

- I mappen Distans, håll fingret på bilden du vill flytta.
- Tryck på Flytta till Galleri.

Bilden analyseras för att hitta text och visar Diamond Edge om text hittas. Filen döps om till det första ordet som hittas i dokumentet, om text hittas; annars identifieras bilden numeriskt.

Filen kan även flyttas till en annan kategori om det behövs.

Ta bort, ersätta eller infoga sida i ett dokument med flera sidor

- Öppna det dokument med flera sidor som du vill ändra.
- För att ta bort en sida: Håll länge på sidan och tryck på Ja för att bekräfta borttagningen.
- För att ersätta en sida: Håll länge på sidan du vill ersätta. Tryck på Ersätt, tryck på Ja och fota en ny sida.
- För att infoga en sida: Håll länge på sidan där du vill infoga en ny sida. Tryck på Infoga och välj Ny sida, Nytt foto eller Ny funktionsgraf.

Lägga till funktionsgraf i dokument

- Tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Öppna ett dokument.



- Håll länge på ett objekt i dokumentet.
- En undermeny för inställningar visas. Välj Infoga.
- Infogningsalternativ visas. Välj Ny funktionsgraf.
- Prodigy öppnar kalkylatorappen i grafläge. Skriv in en formel och tryck på grafknappen.
- Prodigy öppnar grafvyn med den angivna funktionen plottad. Tryck på Spara.



- Prodigy återgår till dokumentet med grafbilden infogad på den valda positionen.

Alternativt, om du vill lägga till en funktion i slutet av ett dokument:

- Tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Öppna ett dokument.



- Tryck på Inställningar.
- Tryck på Lägg till.
- Välj Ny funktionsgraf

- Prodigy öppnar kalkylatorappen i grafläge. Skriv in en formel och tryck på Graf-knappen.

Prodigi öppnar grafvyn med den angivna funktion plottad.

- Tryck på Spara.



Grafen kommer att visas i slutet av dokumentet.

Polar Print

Växel, teknisk hjälp och support
Tel 010-470 99 00

info@polarprint.se

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Twistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHOV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ