

Användarmanual



CONNECT 12 G3 (del 2 av 2)

20241125

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning.....	3
Använda avståndskamera	5
Växla mellan avståndskamera och förstoring.....	7
Använda kamera och förstoring samtidigt	7
Visa bilder från avståndskamera	7
Läsa med avståndskamera	8
Ta bort avståndskamera från kamera-arm	8
Visa textfiler i Prodigy	8
Examenläge.....	9
OCR-språkalternativ	11
Avsnitt 4: Välj kontrast.....	13
Avsnitt 5: Standard Brickläge	14
Avsnitt 6: Enkelt läge	16
Avsnitt 7: Ändra Inställningar	18
Avsnitt 8: Bluetoothtangenterbord.....	25
HumanWare-tangenterbordet	25
Ansluta ett bluetoothtangenterbord.....	26
Avsnitt 9: APH Code Jumper®	27
Anslut Connect 12 till en APH Code Jumper ®	27
Avsnitt 10: Komma åt Android	28
Avsnitt 11: Hjälpmenyn	29

Avsnitt 12: Ladda surfplattan	30
Avsnitt 11: Ladda avståndskameran	32
Avsnitt 14: Uppdatera mjukvara.....	33
Ställa in trådlöst nätverk (Wi-Fi)	33
Automatisk uppdatering	33
Manuell uppdatering	33
Information om utgåva.....	34
Avsnitt 15: Felsökning	35
Avsnitt 16: Rengöring och underhåll.....	37
Bilaga A – Specifikationer.....	38


ANVÄNDA AVSTÅNDSKAMERA

Connect 12 har en avståndskamera som är användbar när du behöver bättre sikt på något på avstånd, som en bildpresentation under en föreläsning. Avståndskameran ansluts trådlöst, har en batteritid på 4 timmar och kan placeras upp till 10 meter från Connect 12.

VIKTIGT: avståndskameran är ett tillbehör och säljs separat. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dess funktioner genom att noggrant läsa användarmanualen som följer med enheten.

- Användarmanualen ger detaljerad information om hur du laddar kamerans batteri innan användning.
- Avståndskameran måste även kopplas ihop med Connect 12 via Wi-Fi. För detaljerade instruktioner om parkoppling, besök Connect 12:s supportsida på HumanWares webbplats: www.humanware.com/connectsupport

Inställning av avståndskamera (bild 24)

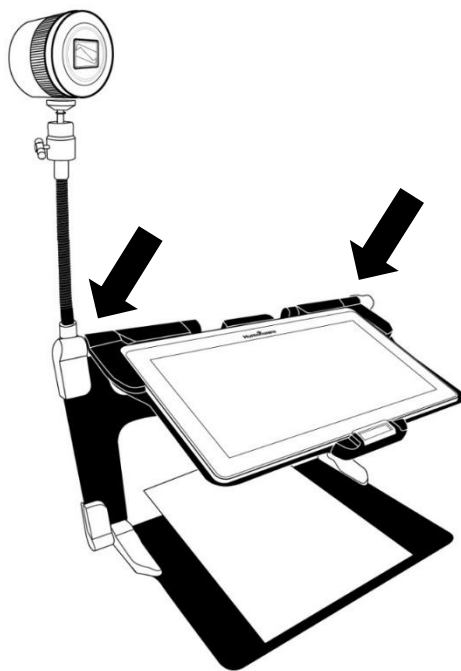

- Se bild 7: Skruva fast kameran på den flexibla kamera-armen och sätt in basen av kameraarmen i en av de vikbara stativflikarna (som finns på vänster- och höger sida av det vikbara stativet).
- Välj och tryck på ikonen för avståndskamera i Huvudmenyn.



- Starta avståndskameran.
- Rikta kameran mot ett objekt som du vill titta på.

Nu är du i kamerans livevy.

- Se bild 10: Zooma in eller ut genom att justera zoomkontrollen.
- Tryck på Slutarknappen på kameran för att ta en bild (du kommer att höra ett ljud från slutaren).

Du kan även ta en bild genom att trycka på Kameraikonen som visas på Connect 12-skärmen.

VÄXLA MELLAN AVSTÅNDSKAMERA OCH FÖRSTORING

Under en föreläsning kan du vilja växla mellan avståndskameran och förstoringsläget för att anteckna vad läraren skriver på tavlan. För att göra detta, svep med fingret från vänster till höger på skärmen (upprepa för att återgå till föregående vy).

ANVÄNDA KAMERA OCH FÖRSTORING SAMTIDIGT

För att använda avståndskamera och förstoringsläget samtidigt, tryck på pilen på höger sida av skärmen och skärmen delas horisontellt i två sektioner med avståndskameran i den övre sektionen och förstoringsläget i den nedre sektionen.

Du kommer att se en röd ram runt den övre eller nedre vyn, vilket indikerar vilken sektion som är vald. För att återgå till fullskärmsläge i någon av vyerna, välj en vy genom att trycka på den två gånger för att återgå till fullskärmsläge.

För att ta en bild utan att lämna delad skärm, välj den vy du vill fota genom att trycka på den och håll sedan ned för att ta bilden (du kommer att höra ett ljud från slutaren).

VISA BILDER FRÅN AVSTÅNDSKAMERA

Bilder tagna med avståndskameran kan ses i Galleriet.

- Tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Svep för att och tryck på avståndskamera-ikonen.



- Svep för att bläddra igenom tillgängliga bilder.
- Välj en bild och tryck på den för att få en utökad vy.

LÄSA MED AVSTÅNSKAMERA

För att läsa en bild tagen med avståndskameran, behöver du överföra bilden från avståndskategorin till rotkatalogen i Galleriet.

- I avstånds-kategorin i ditt Galleri (mapp med förstoringsglaset), håll fingret på den bild du vill flytta.
- Tryck på Flytta till Galleri.
- Din bild kommer nu att finnas i rotkatalogen i Galleriet där den kan läsas som vilket annat dokument som helst.

TA BORT AVSTÅNSKAMERA FRÅN KAMERA-ARM

Om du vill ta bort kameran från den flexibla kamera-armen, se till att kameran är avstängd, håll sedan kameran stadigt med ena handen. Med den andra handen, lokalisera tumskruven under kameran och lossa den tills kameran är fränkopplad från kamera-armen.

Viktigt: Kameran är mycket ömtålig, se till att du håller i den ordentligt innan du tar bort den från kamera-armen.

VISA TEXTFILER I PRODIGI

Prodigi låter dig klistra in textfiler i Galleriet och sedan öppna dem via Prodigi-gränssnittet. Notera att detta kan göras utanför Prodigi i

Android-appar som tillåter dig att kopiera text (exempel: internetwebbläsare, Dropbox eller din e-post).

- Tryck på Galleri-ikonen i Huvudmenyn.



- Svep och tryck på Text-mappikonen.



- Svep och tryck på Klistra in-ikonen, tryck sedan på Klistra in för att infoga tidigare kopierad text.



- Din text kommer att visas i Diamond Edge i kolumnläsarläge (ursprunglig layout och bilder är inte tillgängliga).
- Tryck på Tillbaka för att återgå till Text-sektionen i Galleriet.
- Texten du klistrade in sparas i Text-sektionen i Galleri och namnges enligt det första ordet i din text.

EXAMENLÄGE

Examenläge används för att blockera vissa funktioner och applikationer från Connect 12 under en viss tid. När examenläge är aktiverat kan de blockerade funktionerna och applikationerna endast nås genom att ange en förutbestämd PIN-kod eller genom att vänta på en förutbestämd tid.

Aktivera examenläge

- Från Huvudmenyn, tryck på ikonen för Inställningar.
- I inställningsmenyn, välj Examenläge. En undermeny visas.
- Justera parametrarna genom att trycka på dem och ändra deras värde. Justerbara parametrar inkluderar:
 - Examenläge: På, Av.
 - Starttid.
 - Varaktighet: Välj ett värde mellan 30 minuter och 8 timmar.
 - Avsluta till Android: Tryck för att aktivera/inaktivera åtkomst till Android medan examenläge är på.
 - Foto & Galleri: Tryck för att aktivera/inaktivera åtkomst till Galleri och användning av fotografering medan examenläge är på.
 - Kalkylator: Tryck för att aktivera/inaktivera åtkomst till kalkylatorn medan examenläge är på.
- Tryck på Tillbaka-ikonen.
- Du kommer att uppmanas att ange en PIN-kod för att aktivera examenläge.

Examenläge är nu redo att användas.

Om du vill ändra parametrarna eller inaktivera examenläge, följ dessa steg:

- Tryck på ikonen Inställningar i Huvudmenyn.
- I inställningsmenyn, tryck på Examenläge.
- Du kommer att uppmanas att ange den PIN-kod som du skapade när examenläge aktiverades.
- Du har nu tillgång till undermenyn för Examenläge, där du kan ändra parametrarna eller inaktivera Examenläge.

OCR-SPRÅKALTERNATIV


Prodigi tillåter användning av optisk teckenigenkänning (OCR) för olika språk när du använder förstoringsläget eller kameran.

Aktivera/inaktivera OCR


- Tryck på ikonen Inställningar i knappraden i Förstoringsappen.




- Bläddra ner och tryck på OCR, tryck sedan på Inaktivera.

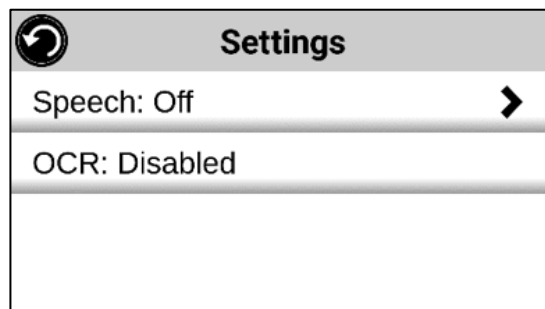

- Prodigi kommer att visa i inställningsmenyn: OCR-språk: Installerade röster.

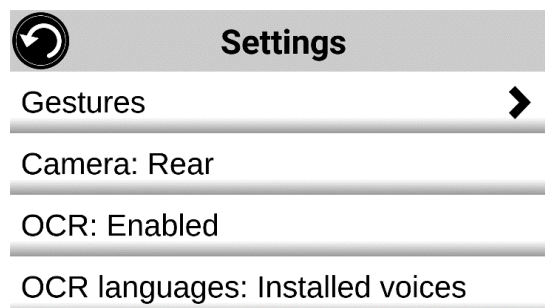

- Tryck på "OCR-språk: Installerade röster" för att välja mellan Installerade röster eller Anpassade. OCR-språk kommer att visas. Tryck för att visa en lista över tillgängliga språk.

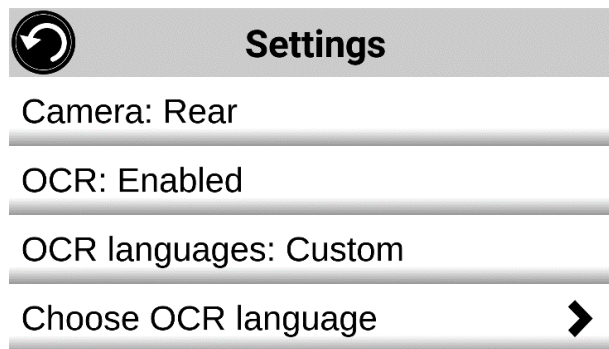

- Välj ett språk från listan.
- Tryck på Tillbaka-ikonen två gånger för att återgå till Förstoringsappen.

AVSNITT 4: VÄLJ KONTRAST

Prodigi låter dig visa dokument, bilder och objekt i 4 olika typer av kontraster: **färg**, **positiv**, **negativ**. För dokument som innehåller text kan en fjärde typ av kontrast användas: **Diamond Edge™**.

Kontraslägena positiv, negativ och Diamond Edge™ är tänkta att förbättra originalfärgerna på ett dokument eller objekt för att bättre passa din syn.

Kontrastläget **Färg** är användbart när du vill titta på dokument, objekt och fotografier med sina originalfärger.


Kontrastläget **Positiv** visar text och bilder i de två färger du valt som färgschema, standard är svart på vitt. Detta läge är praktiskt för att visa text i den färgkombination som är bäst lämpad för din syn.

Kontrastläget **Negativ** visar text och bilder i omvänd kontrast till den som du har valt som färgschema. Till exempel om ditt färgschema är svart på vitt så kommer negativ kontrast att visa text och bilder som vitt på svart. Detta är användbart när du vill omvända kontrasten på en text som innehåller en annorlunda kontrast.

Kontrastläget **Diamond Edge™** kombinerar det bästa av två världar, det visar Diamond Edge Text™ i din valda färgkombination och bilder i sina originalfärger. Det låter dig förstora text obegränsat utan kvalitetsförsämring i den bästa färgkombinationen för din syn medan bilder visas i sina originalfärger på samma sida.

För att växla mellan de olika kontrasterna, svep på högra kanten av pekskärmen när du förstorar eller tittar på en bild eller ett dokument.

Svep för val av kontrast (bild 25)

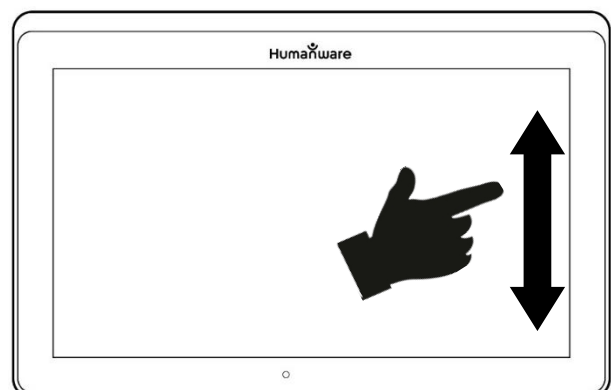


AVSNITT 5: STANDARD BRICKLÄGE

Tillsammans med standardläget Karusell och Enkelt läge är Brickläget ett av de tre typerna av användargränssnitt som kan användas för att navigera i Connect 12. Prodigis meny i Brickläget låter dig anpassa åtkomsten till de applikationer du använder mest.

Aktivera Standard Brickläge

- Svep och tryck på ikonen för Inställningar i Karusellmenyn (Huvudmenyn).
- Tryck på Användargränssnitt.
- Välj Standard (Brickor).
- Tryck på Tillbaka-ikonen tre gånger för att komma till Brickmenyn.

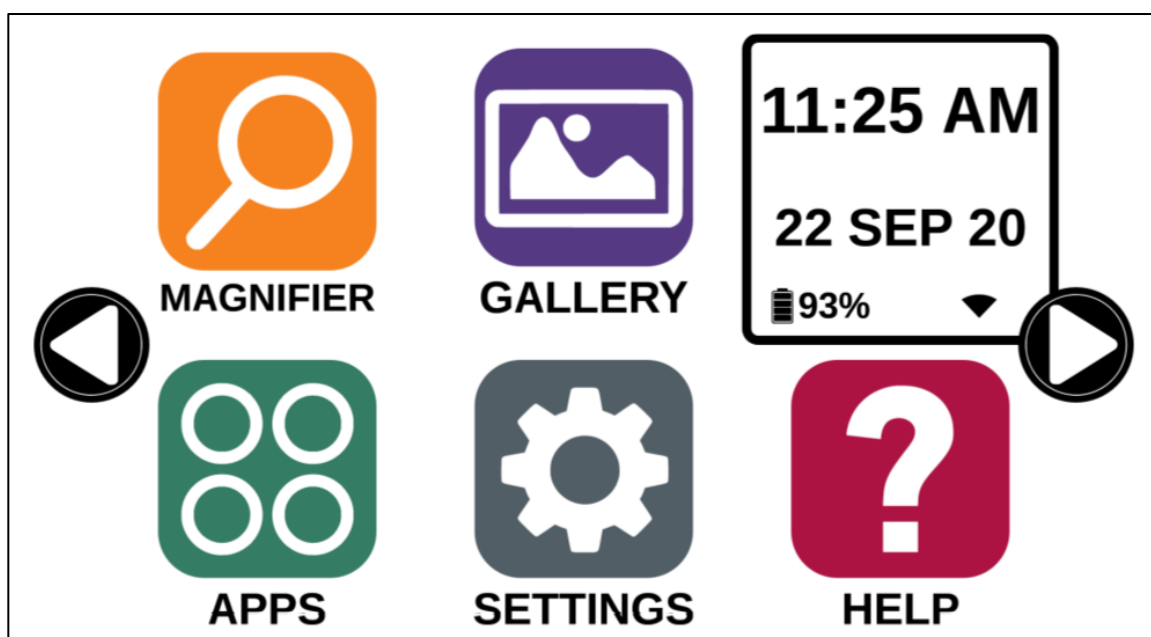

Prodigi-applikationer är nu tillgängliga via en serie roterande skärmar som visar sex applikationer per skärm istället för en i taget. De 9 huvudsakliga Prodigis-applikationerna är som standard tillgängliga i Brickmenyn. Tid och datum visas också längst upp till höger på skärmen.

- Slep åt vänster eller höger i Brickmenyn eller tryck på pilarna till höger eller vänster på skärmen för att komma åt nästa applikationsskärm.
- Tryck på valfri applikation för att starta den.

Om du vill lägga till en applikation i Brickmenyn trycker du på ikonen Lägg till:



En ny meny visas som erbjuder två alternativ för att lägga till den applikation du vill ha i Brickmenyn: Sök och Välj applikationer.

Alternativet Sök låter dig hitta en applikation genom att ange dess namn via tangentbordet som visas.

Välj applikationer visar alla installerade appar på Connect 12.


- Bläddra igenom listan för att hitta en applikation och lägg till den i Brickmenyn genom att trycka på dess ikon.
- Ta bort en applikation från Brickmenyn genom att trycka och hålla på applikationens ikon och sedan trycka på Ta bort när du uppmanas till det. Du kan också använda alternativet Byt för att byta till en annan applikation.

AVSNITT 6: ENKELT LÄGE

I det enkla läget kommer du åt Prodigis huvudapplikationer från samma skärm.

Aktivera enkelt läge

- Svep till ikonen Inställningar i Karusellmenyn (Huvudmenyn) och tryck.
- Tryck på Användargränssnitt.
- Välj Enkelt.
- Tryck på ikonen Tillbaka två gånger för att komma till huvudmenyn i det Enkla läget.

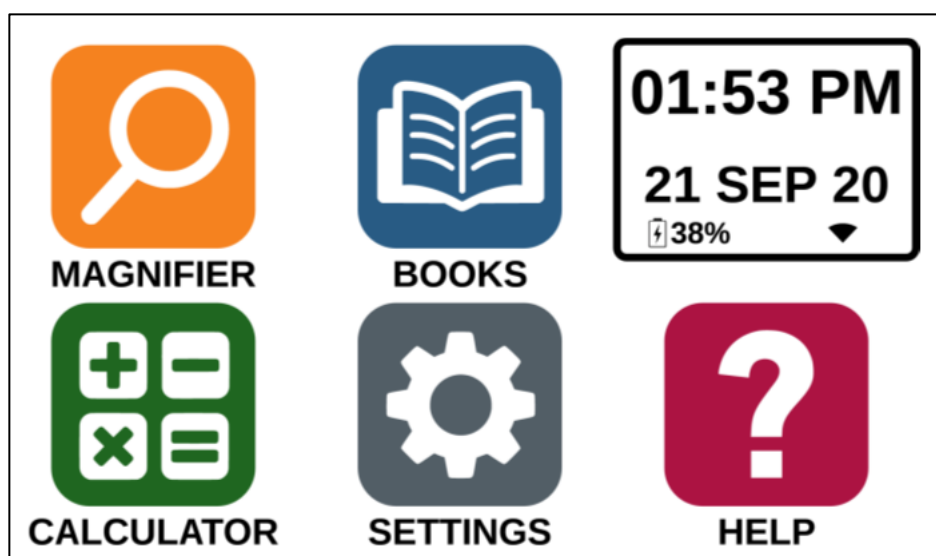

Prodigis applikationer är nu tillgängliga från en enda skärm. Tid och datum visas också längst upp till höger på skärmen.

- Tryck på valfri applikation för att starta den.

Återgå till Karusell-läge (standard)



- Svep och tryck på ikonen för Inställningar i Huvudmenyn.
- Tryck på Användargränssnitt.
- Välj Standard (Karusell).
- Tryck på ikonen Tillbaka tre gånger för att återgå till Huvudmenyn i Karusell-läge.

AVSNITT 7: ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

Prodigis inställningsmeny är sammanhangsstyrd, olika inställningar visas beroende på vad du gör eller var du befinner dig i systemet.

- Tryck på ikonen Inställningar i Huvudmenyn.



- Välj och tryck på en inställning.
- Tryck på ikonen Tillbaka (överst i vänstra hörnet) för att återgå till Inställningsikonen.

Viktigt: Din navigeringsmetod kommer att vara annorlunda om Talinställningen är avstängd. Det kommer inte längre att finnas en ram, och varje menyobjekt kommer att ha en skugga under sig. I detta navigeringsläge kan du trycka på ett objekt för att välja det istället för att använda ramen för att göra valet.

Lista över Prodigis sammanhangsstyrda inställningar:
(Värden markerade med en stjärna (*) är standardinställningar.)

- **Skärmens ljusstyrka:** 0 till 100% (50%*)
- **Kontrast:** Diamond Edge (om den fotade bilden innehåller text), Färg*, Positiv, Negativ
- **Färger:** Svart på Vitt*, Vitt på Svart, Svart på Grått, Grått på Svart, Svart på Gult, Gult på Svart, Svart på Orange, Orange på Svart, Svart på Turkos, Turkos på Svart, Svart på Lila, Lila på Svart, Svart på Grönt, Grönt på Svart, Blått på Gult, Gult på Blått, Vitt på Blått, Blått på Svart, Beige på Svart, Svart på Beige
- **Läge** (Endast standardläge): Live*, Flerbildstagnering
- **Autofokus** (Endast liveläge): Låst, Upplåst*

- **Vinkelkorrigering:** Aktiverad*, Inaktiverad
- **Tal:** På*, Endast dokument, Av
- **Röst:** Röst 1*, Röst 2, Röst 3, Röst 4
- **Rösthastighet:** Väldigt långsam, Långsam, Normal*, Snabb, Väldigt snabb
- **Läsläge:** Sida, Kolumn*, Rad
- **Läshastighet:** Väldigt långsam, Långsam, Normal*, Snabb, Väldigt snabb
- **Diamond Edge:** Alltid*, Vid behov
- **Teckensnittstyp:** Normal, Fet*
- **Förinställd Förstoring:** 2x till 35x (4x*)
- **Teckenstorlek:** Minimal, Liten, Medel, Standard*, Stor, Väldigt stor, Extra stor, Maximal
- **Markering** (endast Kolumn- och Radläge. Markera ord som läses): Visa*, Dölj
- **Radera Innehåll i Galleri** (i Galleriet): Raderar permanent alla filer i Galleriet. Tryck på Inställningsknappen i Galleriet för att komma åt detta alternativ.
- **Wi-Fi-inställningar:** Tryck på ikonen Inställningar för att komma åt.
 - **Wi-Fi:** Slå På eller Av Wi-Fi
 - **Trådlösa nätverk:** Visar en list med tillgängliga nätverk. När du är ansluten visas nätverket som för tillfället är anslutet. Notera att proxynätverksanslutningar måste ställas in via Androidinställningarna. Ett mer avancerat alternativ finns tillgängligt vid val av nätverk:
 - **Avancerade alternativ/IP-inställningar:** Visar host-konfigurationsprotokoll för valt nätverk.
 - **Sparade nätverk:** Konfiguration av sparade nätverk. För att glömma en nätverkskonfiguration, tryck på Glöm bort och sedan Ja.
- **Läge** (i Kalkylatorappen, tryck på Inställningsknappen för att komma åt denna inställning): Standard*, Vetenskaplig eller Grafitande
- **Rutnät** (Kalkylatorappen, tryck på Inställningsknappen för att komma åt denna inställning): Lokatorfärg*, Röd, Orange, Gul, Lila, Turkos, Grön, Blå

- **Användardata:** På*, Av, Detaljer om mätvärden; du kan välja att avstå när som helst.
- **Gester** (Vid förstoring, visning av bilder eller läsning av dokument kan du aktivera/inaktivera gester. Som standard är de aktiverade.):
 - **Svep på vänstra kanten / Läge:** Växla mellan lägena Live och Flerbildstagnning.
 - **Svep på högra kanten / Kontrast:** Växla mellan kontrasterna Färg, Positiv, Negativ och Diamond Edge™ (Det senaste valet kommer att sparas i Prodiggi).
 - **Nyp-gest för förstoring:** Justera förstorningsnivån genom att minska eller öka avståndet mellan 2 fingertoppar.
 - **Dubbeltryck:** Aktivera huvudmenyn eller växla mellan tal på och av vid läsning genom att snabbt trycka med ett finger.
 - **Tryck / Zooma:** Tryck snabbt med ett finger för att ändra förstoring till din förinställda förstorningsgrad.

Du kommer också åt andra allmänna Inställningar genom trycka på ikonen Inställningar i Huvudmenyn:



Sex menyer är tillgängliga: Användargränssnitt, Ljud, System, Applikationer, Examensläge, Avsluta till Android och "Om". Bläddra igenom Inställningar för att välja en meny eller Om. Prodiggi visar automatiskt undermenyer om sådana finns och visar en pil på skärmens högra kant. Tryck på pilen för att komma åt det alternativet i undermenyn.

- Tryck på ikonen Tillbaka för att gå till en föregående skärm.
- Håll ned ikonen Tillbaka för att komma åt inställningsmenyn.

Prodigis allmänna inställningar är:
(Värden markerade med en asterisk (*) är standardinställningar.)

Användargränssnittet:

- **Gränssnitt:** Standard (Karusell)*, Standard (Brickor) och Enkelt
- **Systemspråk:** Språk 1*, Språk 2, Konfiguration (ansluter till Internet för att söka efter tillgängliga språkpaket)
- **Färger:** Svart på Vitt*, Vitt på Svart, Svart på Grått, Grått på Svart, Svart på Gult, Gult på Svart, Svart på Orange, Orange på Svart, Svart på Turkos, Turkos på Svart, Svart på Lila, Lila på Svart, Svart på Grönt, Grönt på Svart, Blått på Gult, Gult på Blått, Vitt på Blått, Blått på Svart, Beige på Svart, Svart på Beige
- **Lokatorfärger:** Röd*, Orange, Gul, Lila, Turkos, Grön, Blå
- **Blåljusfilter:** Av, Låg, Medel, Hög, Max
- **Ljusstyrka för skärm** (Ändra nivån för skärmens ljusstyrka): 1 till 100% (60%*)
- **Ikonfält:** Automatiskt*, Dold, Alltid synlig
- **Läsplatta vibrationer:** På*, Av

Ljud:

- **Tal:** På*, Endast dokument, Av
- **Talhastighet:** Väldigt långsam, Långsam, Normal*, Snabb, Väldigt snabb
- **Ljud:** På*, Av
- **Läsplatta/basenhet volym:** 0 till 15 (9*)
- **OCR-ljud:** På, Av*

System:

- **Wi-Fi-inställningar:**
 - **Wi-Fi:** Slå På eller Av Wi-Fi
 - **Trådlösa nätverk:** Visar en list med tillgängliga nätverk. När enheten är ansluten visas anslutet nätverk.
 - **Sparade nätverk:** Konfiguration av sparade nätverk. För att glömma en nätverkskonfiguration, tryck på Glöm bort och sedan Ja.
- **Bluetooth-inställningar:**

- **Bluetooth:** Växla Bluetooth på eller av. När den är på kommer Connect att söka andra Bluetoothenheter samt kunna upptäckas av andra enheter.
 - **Parkopplade Enheter:** Enheter som för tillfället är anslutna till Connect samt närliggande Bluetoothenheter upptäckta av Prodigy.
- **Uppdatera mjukvara:** Avbryt, Installera
 - **Läsplatta autoavstängning:** 3 min*, 5 min, 10 min, 30 min
 - **Återställ fabriksinställningar:** Ja, Nej

Applikationer:

- **Snabbväxling:**
 - Sök
 - Välj applikationer
- **Böcker:** Markerad*, Inte markerad
- **Kalkylator:** Markerad*, Inte markerad
- **Avstånd:** Markerad*, Inte markerad (endast i Enkelt läge)

Avsluta till Android:

Avslutar Prodigy-mjukvaran. Du kan återvända till Prodigy genom att trycka på Hemknappen.

Om:

- **Mjukvara** (version)
- **Röster** (version)
- **OCR** (teckenigenkänning, version)
- **Böcker** (version)
- **Kalkylator** (version)
- **Avståndskamera** (version)
- **Prodigy uppdaterare** (version)
- **Serienummer**
- **Modell**
- **Android** (version)

- **Android-build** (version)
- **Användardata**
 - Anonym dataanvändning PÅ
 - Ändra

Tal På

När Tal är inställt på PÅ, kommer navigeringen att förändras avsevärt. Prodigy läser upp alla alternativ som visas på skärmen för att ge fullständig vägledning.

I menyer

Talfunktionen läser upp antalet alternativ i den valda menyn och/eller undermenyn och läser sedan upp det första markerade alternativet på skärmen. Om alternativet leder till en annan undermeny, kommer det också att läsa "undermeny".

Exempel: Inställningsmeny > 7 alternativ > Användargränssnitt > Undermeny

Notera att tryck på ett menyobjekt inte kommer att välja det. Du måste svepa uppåt eller nedåt för att isolera det menyalternativ du vill välja inom den färgade ramen.

Ett långt tryck med två fingrar var som helst på skärmen i en meny kommer att isolera och markera navigeringsknappen Tillbaka. När Tillbaka är markerad, tryck en gång var som helst på skärmen för att återgå till föregående skärm.

I Brickmenyn/Huvudmenyn

Talfunktionen läser upp den applikation som för närvarande är markerad inom den färgade ramen.

Exempel: Om du öppnar din Connect 12 på inställningsikonen kommer Talet att meddela: Huvudmeny > Inställningar.

För att navigera till andra applikationer, svep vänster eller höger var som helst på skärmen. Tryck var som helst för att starta applikationen inom den färgade ramen.

För att sluta använda talfunktionen och återgå till vanlig navigering:

- Tryck på Inställningar.
- Välj och tryck på Ljud. En undermeny öppnas.
- Välj Tal.
- Välj Av om du vill stänga av talfunktionen helt, eller Endast dokument om du bara vill använda funktionen i dokument.


AVSNITT 8: BLUETOOTH TANGENTBORD

Med Connect 12 kan du skriva och navigera med ett externt Bluetooth tangentbord.

HUMANWARE-TANGENTBORDET

Även om vilket Bluetooth-tangentbord som helst fungerar, rekommenderar vi HumanWare-tangentbordet som visas nedan. En av fördelarna med att använda HumanWare-tangentbordet är att alla tangenter är tryckta med stora, lättlästa tecken. Dessutom är ikoner för ofta använda kommandon i Prodigy-mjukvaran tryckta på tangentbordet som en snabb påminnelse om tangentens funktion.

HumanWare-tangentbord (bild 26)

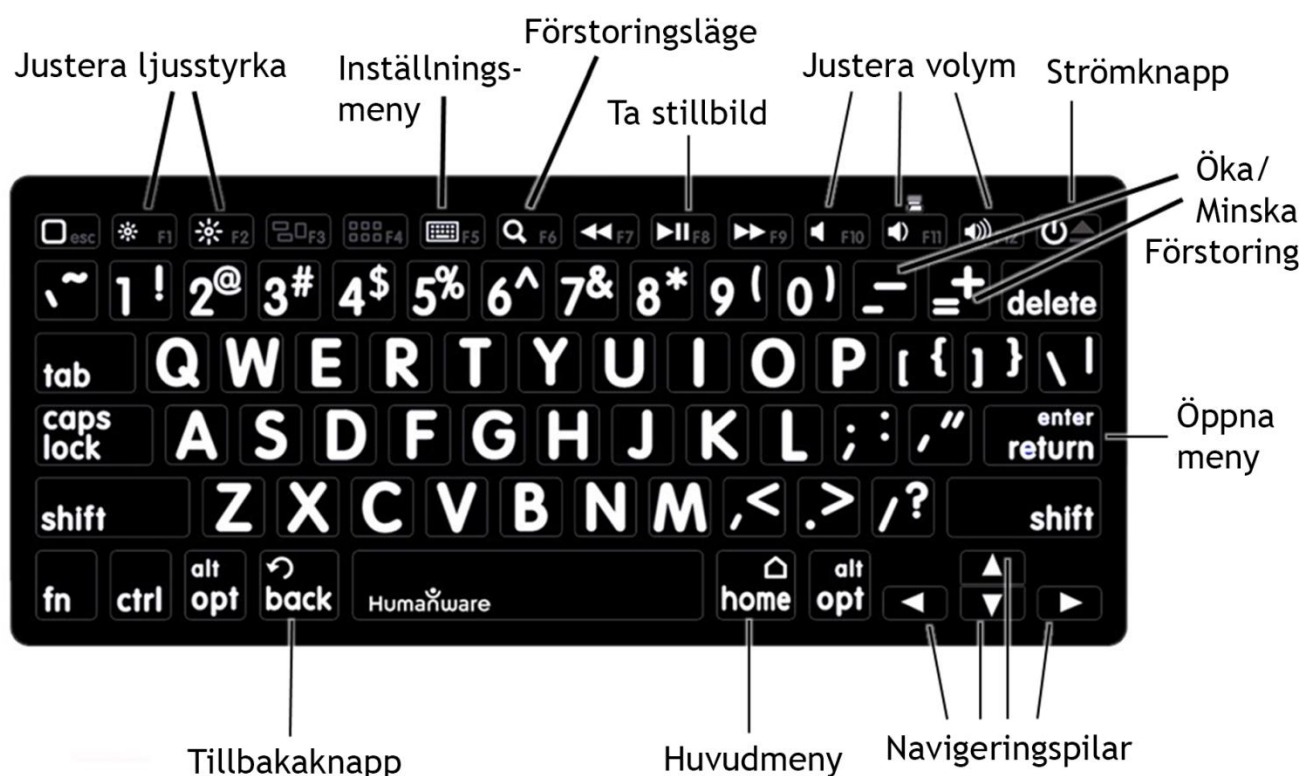

ANSLUTA ETT BLUETOOTHTANGENTBORD

Ansluta Bluetoothtangentbord till Prodigy:

- Försäkra dig om att Bluetoothtangentbordet är igång.
- Gå till allmänna inställningar genom att trycka på Inställningsikonen i huvudmenyn.
- Välj och öppna undermenyn System.
- Välj och öppna Bluetoothinställningar.
- Bluetooth kommer att vara inaktiverat som standard. Aktivera det genom att trycka på menyalternativet Bluetooth. Efter några sekunder visas ytterligare menyalternativ och enheten kommer att kunna upptäckas av andra enheter.
- Välj och öppna undermenyn Enheter.
- Välj Bluetoothtangentbordet och tryck på skärmen.
- Tryck på Anslut.
- Prodigy kommer att visa ett PIN-nummer. Skriv in detta nummer på Bluetoothtangentbordet och avsluta med Enter.
- Bluetoothtangentbordet är nu parkopplat med Connect 12 och redo för användning.

AVSNITT 9: APH CODE JUMPER®

ANSLUT CONNECT 12 TILL EN APH CODE JUMPER ®

Ansluta en APH Code Jumper®-enhet till Connect 12:

- Se till att Code Jumper® är påslagen innan du etablerar anslutningen.
- Gå till Prodigis inställningar genom att trycka på Inställningsikonen i Huvudmenyn.
- Välj och öppna undermenyn System.
- Välj och öppna Bluetooth-inställningar.
- Bluetooth är som standard avstängt. Tryck på På. Inom några sekunder kommer ytterligare menyalternativ att visas och surfplattan blir synlig för andra enheter.
- Välj och öppna undermenyn Enheter.
- Välj din APH Code Jumper®-enhet.
- Tryck på Anslut.
- Din Code Jumper® är nu parkopplad med din Connect 12 och redo att användas.

AVSNITT 10: KOMMA ÅT ANDROID

Prodigi Connect låter dig komma åt Android-applikationer. Notera att HumanWare tillhandahåller begränsad support för Android och Android-applikationer.

Android kommer du åt via Inställningar i Huvudmenyn. Tryck på ikonerna för inställningar och svep ner till samt tryck på Avsluta till Android. Du kan också avsluta till Android genom att placera och hålla ner 4 eller 5 fingrar på skärmen samtidigt. Denna gest är tillgänglig överallt i Prodigi. För att återgå till Prodigi från Androidsystemet trycker du på ikonerna för Prodigi.



Skapa en ny Användarprofil

Connect 12 tillåter att flera användarprofiler skapas.

För att lägga till en ny användarprofil:

- Tryck och håll fyra eller fem fingrar på skärmen. En sida med alla Android-appar visas.
- Välj Inställningar från appsidan.
- Skriv Användare i sökfältet i Inställningar.
- På följande skärm, välj Lägg till användare eller profil.
- Välj Användare eller Begränsad profil i popup-rutan.
- Följ Androids instruktioner för att slutföra skapandet av användarprofilen.

AVSNITT 11: HJÄLPMENYN

Alternativet längst till höger i Huvudmenyn är hjälpmenyn (ikon med frågetecken). Här finns många användbara videos som visar hur man använder Connect.



Hjälpmenyn består av följande alternativ:

Youtube instruktionsvideos: Här kommer du åt webinar och många användbara instruktioner om hur man använder Connect 12.

Återkoppling: Berätta vad du tycker om din Connect 12, vad du gillar samt vad du tycker att vi kan förbättra i enheten i framtiden.

AVSNITT 12: LADDA SURFPLATTAN

Max effektivitet vid användning:

- I en arbetssituation där du behöver Surfplattan med jämna mellanrum kan du aktivera Viloläget när du inte använder Surfplattan genom ett snabbt tryck på Strömknappen. Skärmen kommer att stängas av.
- Väck surfplattan genom att trycka på Strömknappen.
- Om du inte använder surfplattan under några dagar är det rekommenderat att du stänger av den genom att hålla ner Strömknappen och välja Stäng av.

Tryck på ikonen Inställningar för att visa batteriets laddningsnivå.

Notear att om Tal är aktiverat i Inställningar, kommer en svepning uppåt från den första menyn i Inställningar att visa laddningsnivån.

VIKTIGT: Använd alltid nätadaptern och kabeln som medföljer din Connect 12. Andra laddningstillbehör kanske inte fungerar korrekt, laddar inte eller kan skada surfplattan.

VIKTIGT: Surfplattan blir varm under laddning. Ladda inte surfplattan nära en värmekälla.

VIKTIGT: Stäng inte ditt vikbara stativ under laddning. **Detta kan skada kabeln och/eller surfplattan.**

Ladda batteriet

- Använd endast nätadaptern och kabeln som medföljer Connect 12.
- Anslut USB till USB-C-kabeln till USB-C-porten och koppla den till ett eluttag med hjälp av strömadaptern.
- En full laddning tar 4 timmar.

Säkerhetsföreskrifter för batteriet

- Demontera eller modifiera inte batteriet.
- Det finns risk för överhettning, brand eller explosion om batteriet sätts i eld, värms upp, utsätts för stötar, kommer i kontakt med vatten eller om dess terminaler kortsluts.

AVSNITT 11: LADDA AVSTÅNDSKAMERAN

Avståndskameran har en batteritid på ungefär 4 timmar och behöver därefter laddas upp.

Notera: Hjälp av seende person kan krävas vid uppladdning av kameran.

Ladda avståndskameran

- Anslut försiktigt mikro-USB-kontakten i uttaget under locket.
- Anslut försiktigt USB-kontakten i surfplattans nätadapter.
- Laddningsindikatorn blir orange när kameran laddas och växlar till grönt när batteriet är fulladdat.

AVSNITT 14: UPPDATERA MJUKVARA

STÄLLA IN TRÅDLÖST NÄTVERK (WI-FI)

Innan du påbörjar uppdatering av mjukvaran måste trådlöst nätverk på surfplattan konfigureras.

- Tryck på Inställningsknappen i Huvudmenyn.
- Tryck på System.
- Tryck på konfigurera trådlösa nätverk.
- Välj trådlösa nätverk och välj nätverket som du vill ansluta till.
- Tryck Anslut. Ett tangentbord visas på skärmen. Ange lösenordet och tryck på den blå knappen. Tryck sedan på Anslut.

AUTOMATISK UPPDATERING

När trådlöst nätverk är konfigurerat kommer Prodigy automatiskt att söka efter uppdateringar en gång i veckan.

Om en uppdatering finns tillgänglig kommer Prodigy att meddela detta samt fråga om du vill uppdatera surfplattan.

Uppdatera surfplattan

- Tryck på Installera för att installera den senaste uppdateringen. Prodigy visar nedladdningsprocessen.
- Ett nytt fönster visas och meddelar att mjukvaran nu är uppdaterad.
- Tryck OK för att återgå till Prodigy.

MANUELL UPPDATERING

Ibland kan du vilja uppdatera Prodigy i Connect 12-surfplattan manuellt.

- Aktivera Inställningarna i huvudmenyn.
- Tryck på System.
- För att påbörja en mjukvaru-uppdatering, välj Uppdatera mjukvara och tryck.

Prodigi kontrollerar om mjukvaran är den senaste eller om en uppdatering är tillgänglig. Om en uppdatering är tillgänglig och du vill installera den:

- Tryck Installera.

Om du väljer att installera uppdateringen kommer Prodigi att ladda ner uppdateringen och visa nedladdningsprocessen.

Ett nytt fönster visas och meddelar att mjukvaran nu är uppdaterad.

- Tryck OK för att återgå till Prodigi.

INFORMATION OM UTGÅVA

För att se information om utgåvan av mjukvaran i Prodigi:

- Aktivera inställningarna i Huvudmenyn.
- Tryck System.
- Välj uppdatera mjukvara.
- Välj Information om utgåva om det finns tillgängligt.

AVSNITT 15: FELSÖKNING

Om skärmen är tom:

- Minska förstoringen till minimum.
- Surfplattan kan vara avstängd eller i Viloläget. Tryck på Strömknappen för att starta den eller för att avbryta Viloläget.

Om färgerna är svåra att upptäcka:

- Se till att du har tillräckligt med omgivande ljus.
- Välj en annan kontrast eller färgkombination via Inställningarna.
- Justera ljusstyrkan i Inställningarna.

Det blänker väldigt mycket:

- Vinkla objekt i en annan vinkel för att minska blänket.
- Minska ljusstyrkan i Inställningarna.
- Dämpa de yttre ljuskällorna.
- Om en fotat bild är för ljus eller ojämn, stäng av ljuset via ikonfältet och ta en ny bild.

Om bilden/texten är ur fokus eller suddig:

- Använd Förstoringsknapparna för att öka och minska förstoringen så att kameran fokuserar om. Om det behövs, ta en ny bild av dokumentet.
- Försäkra dig om att kameran är still vid bildtagning.
- Försäkra dig om att Surfplattan är avslagen och rengör LED-ljusen samt kameraytan på baksidan med en rengöringsduk.

Om läsrösten verkar orimlig:

- Försäkra dig om att röstens språk är det samma som dokumentets språk. Ändra det via Inställningarna om det behövs.

Om Surfplattan inte svarar:

- Försäkra dig om att batteriet inte är tomt. Ladda upp det igen om det behövs.

Andra problem:

- Återställ Prodiggi till standardinställningarna i Prodiggi-menyn. Observera att denna procedur kommer att radera dina inställningar i Prodiggi.
- Återställ Android-systemet helt.

WARNING: Denna procedur raderar dina inställningar och personliga data.

VIKTIGT: Det rekommenderas starkt att du tar bort eventuella sparade Gmail-konton från din surfplatta innan du återställer Android-inställningarna. Efter en systemåterställning kommer du inte att kunna ta bort dem. Avgifter kan tillkomma om du behöver skicka din surfplatta till HumanWare för att ta bort ett sparat e-postkonto.

Ta bort ett sparat Gmail-konto

- Öppna Android-inställningar.
- Tryck på Lösenord och konton.
- Tryck på kontot/kontona som ska tas bort.
- Tryck på Ta bort konto.
- Bekräfta genom att trycka på Bekräfta.

Återställa Android-systemet

- Öppna Android-inställningar.
- Tryck på System.
- Tryck på Återställ alternativ.
- Tryck på Radera all data (fabriksåterställning).
- Bekräfta genom att trycka på Bekräfta.

Om tekniska problem kvarstår, vänligen kontakta din återförsäljare eller teknisk support.

AVSNITT 16: RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöra LCD-skärmen:

Försäkra dig om att enheten är avstängd samt ej ansluten till ett strömuttag. Använd endast mikrofiberdukar av typen som följer med enheten för att rengöra LCD-skärmen.

Rengör försiktigt skärmen med en mikrofiberduk. Om man väljer att rengöra skärmen med rengöringsmedel måste man försäkra sig om att den är ok att använda på LCD-skärmen. Destillerat vatten, isopropyl-alkohol samt lösningar med vinäger och vatten (inte mer än 10% vinäger) är ok att använda som rengöringsmedel för LCD-skärmen.

Använd endast en minimal mängd vätska för att undvika fukt i enheten. Om vätska kommer in i enheten kan den skadas. Försäkra dig om att ingen vätska finns kvar på skärmen. Repetera tidigare steg för fläckar som är svåra att få bort.

Använd aldrig hushållsrengöringsmedel för att rengöra Connect 12. Spreja aldrig vätska direkt på LCD-skärmen. Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller etanol, etylsyra, ammoniak, aceton eller metylklorid. Använd aldrig pappersservetter för att rengöra Connect 12.

Rengöra utsidan på enheten:

Försäkra dig om att enheten är avstängd samt ej ansluten till ett eluttag.

Om det är nödvändigt kan du använda en fuktig tygbit för att rengöra enhetens utsida.

Försäkra dig om att ingen vätska finns kvar på enheten. Repetera tidigare steg för fläckar som är svåra att få bort.

Använd aldrig slipande material, sprej, alkohol eller lösningsmedel för att rengöra utsidan på Connect 12.

Funktionella specifikationer

- Förstoring: 1x – 40x i live-läge, 1x – 80x för fotade bilder
- Skärm: Full HD 12-tums pekskärm med stöd för gester
- Kamera: 13MP ultra-högupplöst kamera
- LED-belysning: I stativet
- Bildfunktioner: Bildfångst med automatisk rotation
- Importera: JPEG, PDF
- Exportera: JPEG, TXT eller PDF
- Textvisning: Diamond Edge™
- Optisk teckenigenkänning (OCR): 58 språk
- Röster: 20 språk tillgängliga (upp till 4 installerade samtidigt)
- Läsningsslagen: Full sida, kolumn, och rad
- Anpassningar: Läsningsslagen, färgscheman (20), kontrast, system- och texttypsnitt
- Kalkylatorer: Standard, vetenskaplig, grafisk
- Appar: Dropbox, Google Docs och fler förinstallerade appar
- Anslutningar: Wi-Fi och Bluetooth
- Video: HDMI-videoutgång
- Lagring: 32GB intern, upp till 64GB löstagbar (*medföljer ej)
- Batteritid:
 - 7 timmar kontinuerlig användning (endast surfplatta)
 - 4,5 timmar kontinuerlig användning (med stativ och LED-belysning)

Fysiska specifikationer

- Hopfällda mått (b x d x h): 240 x 400 x 29 mm
- Surfplatta (b x d x h): 301 x 186 x 10
- Vikt:
 - Enhet: 1940 g
 - Endast surfplatta: 840 g

Tekniska specifikationer

- Förstoring:
 - Live-läge: 1x – 40x
 - Fotade bilder: 1x – 80x
- Visningsavstånd från stativ: 22,5 cm
- Skärm:
 - Typ: 11,6-tums LED TFT-LCD
 - Upplösning: 1920 x 1080 (Full HD)
 - Bildförhållande: 16:9
- Kamera: 13MP ultra-HD
- Videoutgång: Kompatibel med högupplöst video
- Operativsystem: Android 12 "Snow Cone"
- Trådlösa anslutningar:
 - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; SISO-standard
 - Bluetooth 5.0 och GPS
- Ljud: 3,5 mm hörlurs-/högtalaruttag (stereo)
- Processor: Quad Core
- Lagring:
 - Intern: 32GB (eMMC)
 - Extern: MicroSDHC upp till 64GB
- USB-anslutning: Typ-C (ström och data)
- Batteritid:
 - Endast surfplatta: 7+ timmar
 - Surfplatta och stativ med LED: 4,5 timmar
- Laddningstid: Mindre än 4 timmar

Polar Print

Växel, teknisk hjälp och support
Tel 010-470 99 00

info@polarprint.se

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHOV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ