

Compact 8 HD




Kortmanual



Ställ in och starta Compact 8 HD


1. Skjut in lämpligt kontaktstift i nätadaptern tills det klickar.
2. Anslut USB-C-änden av kabeln till Compact 8 HD.
3. Anslut USB-A-änden av kabeln till nätadaptern.
4. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.
5. Ladda enheten tills du ser en fast grön statusdiod på vänster sida av Compact 8 HD, vilket betyder att den är fulladdad.
6. Tryck och håll ned den orangea Startknappen på enhetens ovansida i 4 sekunder. När du ser en startskärm betyder det att Compact 8 HD startar.
7. Välj önskat språk och börja använda Compact 8 HD i Livevyn!

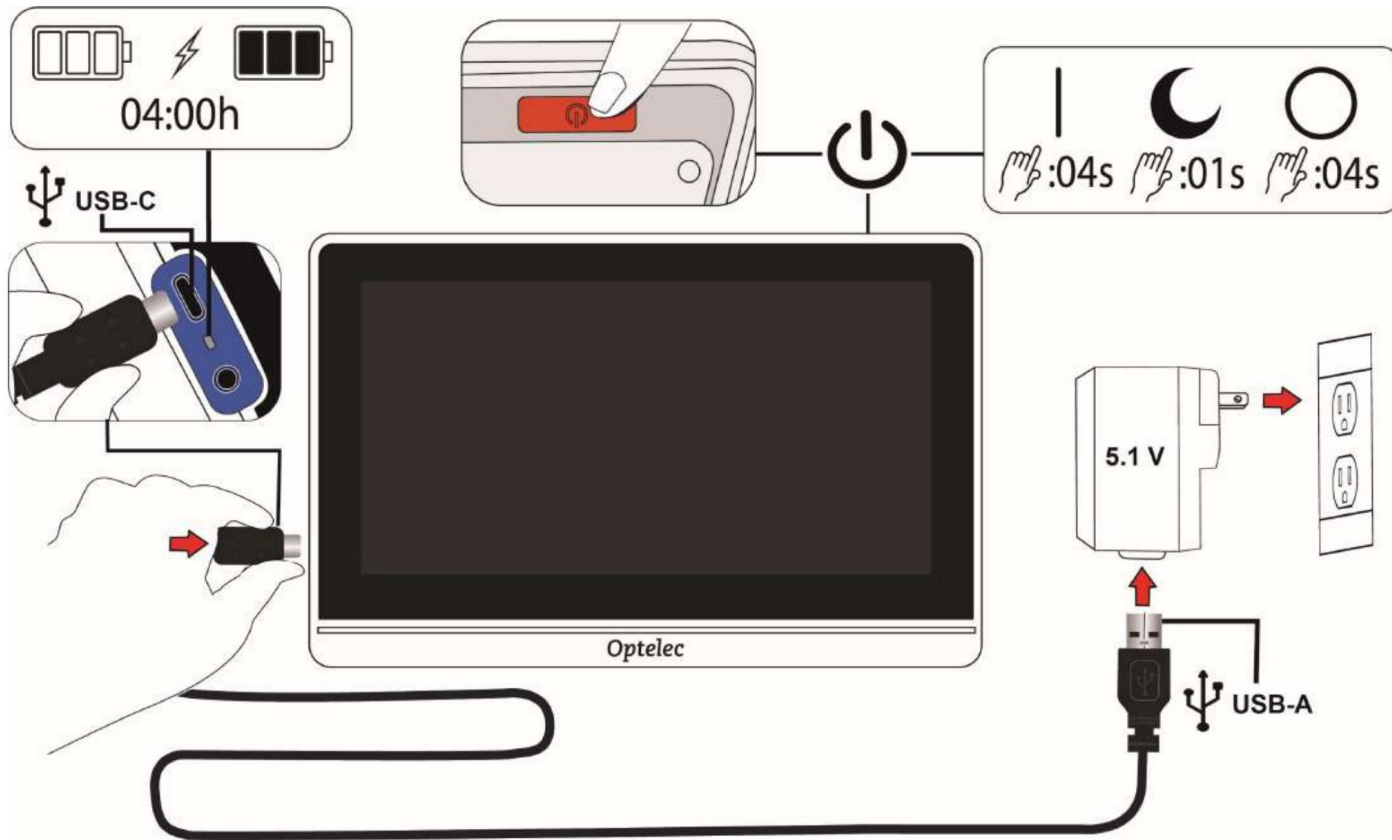

Compact 8 HD


Öppna stativet för att läsa med närbildskameran


Placera enheten på en plan yta. Använd en hand för att stabilisera enheten och den andra handen för att trycka på den blå fliken överst på stativet. Tryck ut tills stativet är helt utfällt.

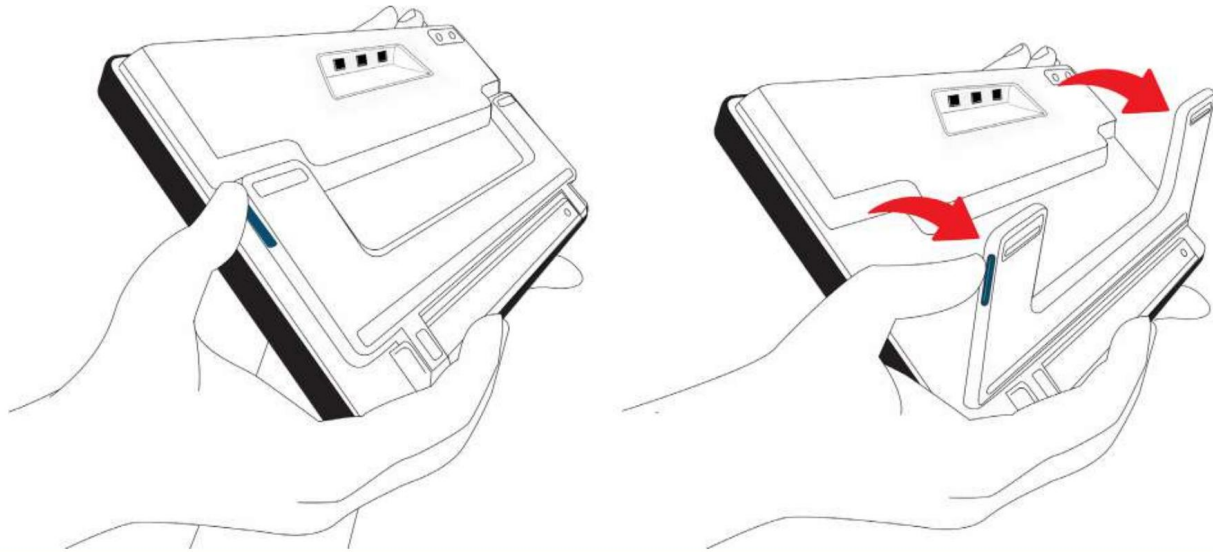

Stäng stativet för att se föremål en bit bort

Avståndskameran är idealisk för att visa etiketter, kvitton eller menyer.

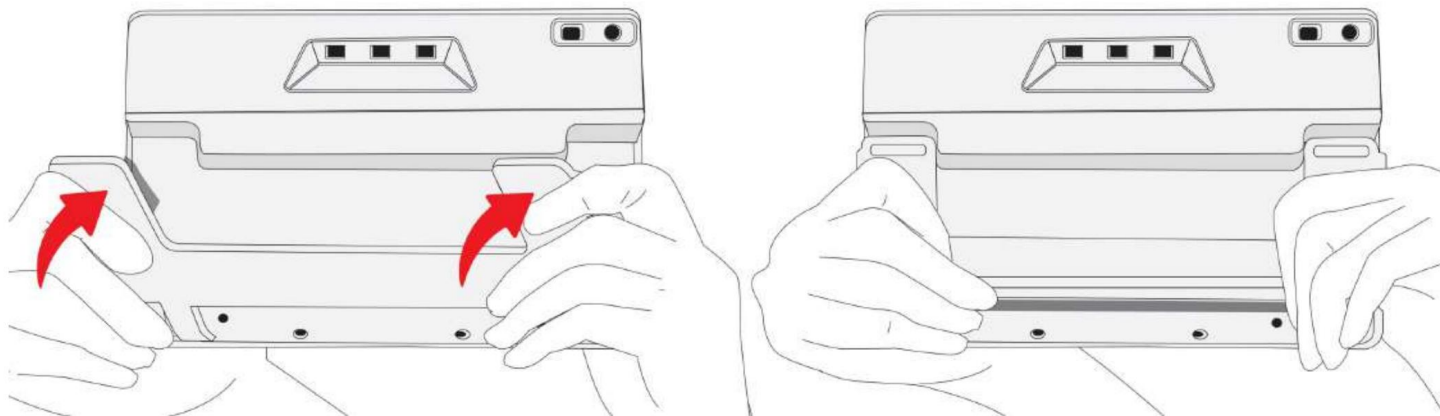

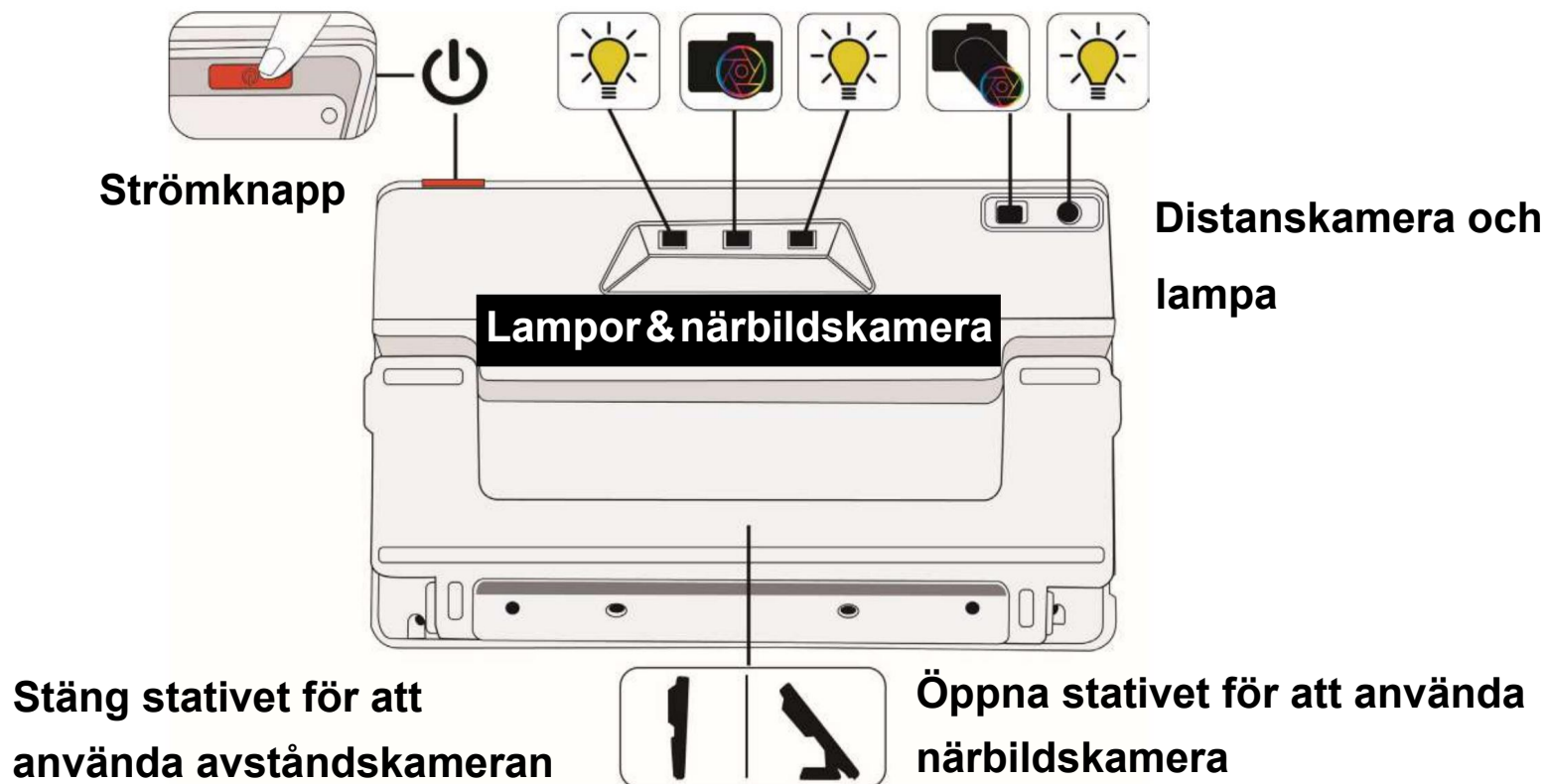







Närbildskamera



Avståndskamera

Enkelt läge

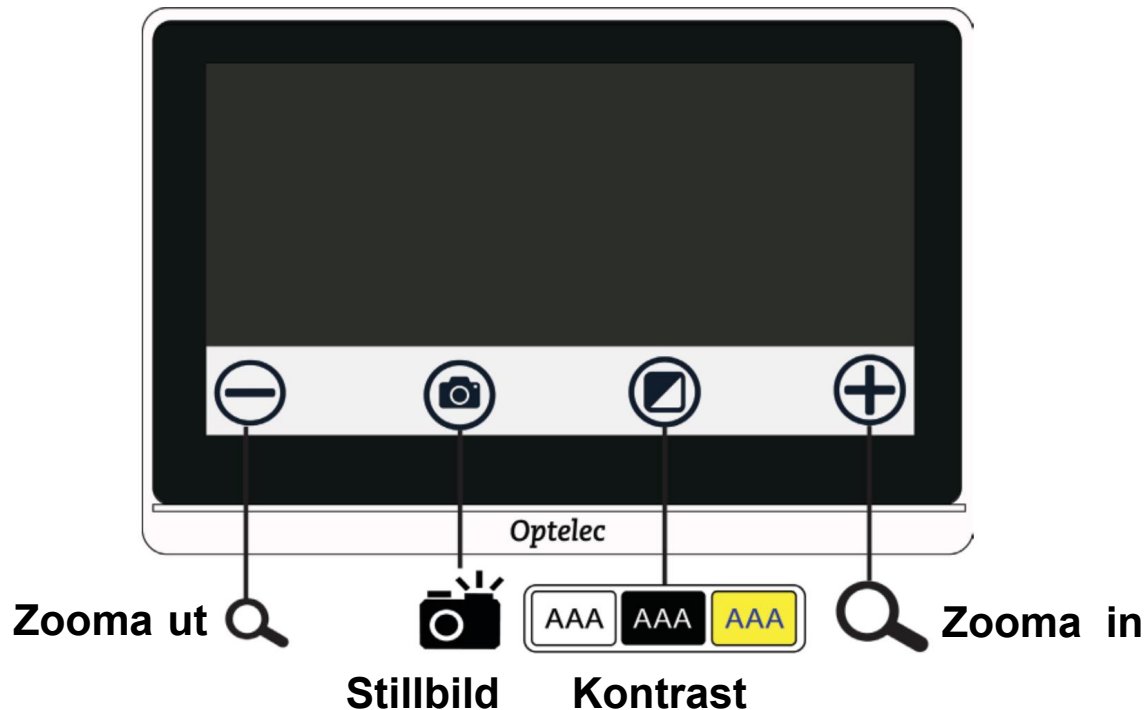

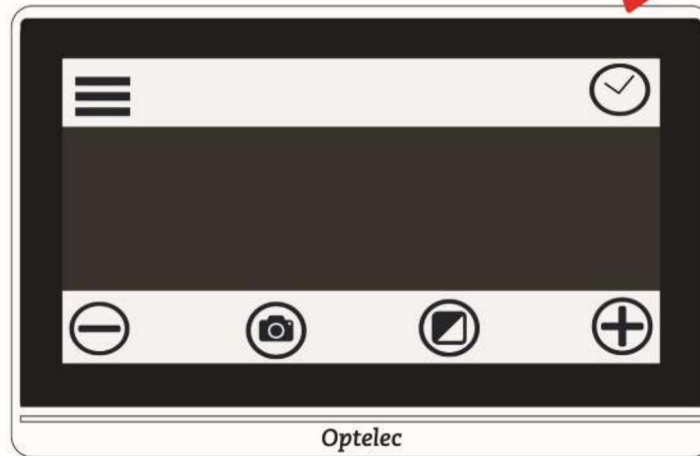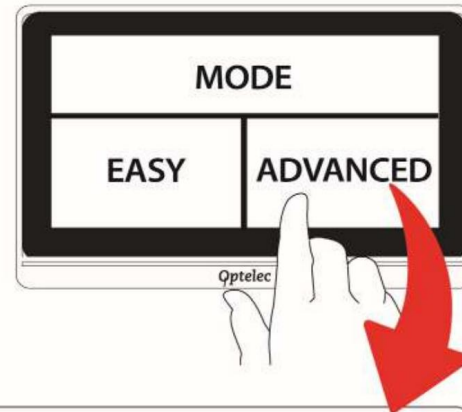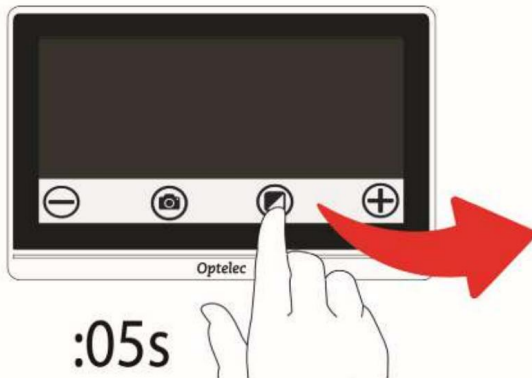


Ändra läge

För att visa Avancerat läge, tryck på Kontrastknappen i 5 sekunder och tryck sedan på Avancerat.

Avancerat läge

Visar den övre knappraden

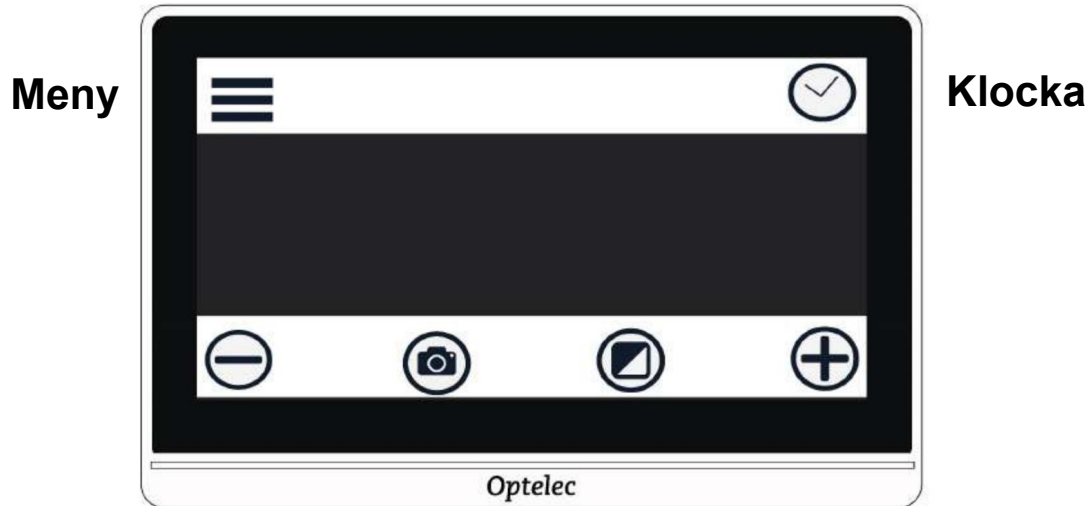

Har samma nedre knappfält som enkelt läge



Huvudmeny


Läslinjer och gardiner

Meny
Utseende

Batterinivå


Skärmens
ljusstyrka

Meny
Inställningar

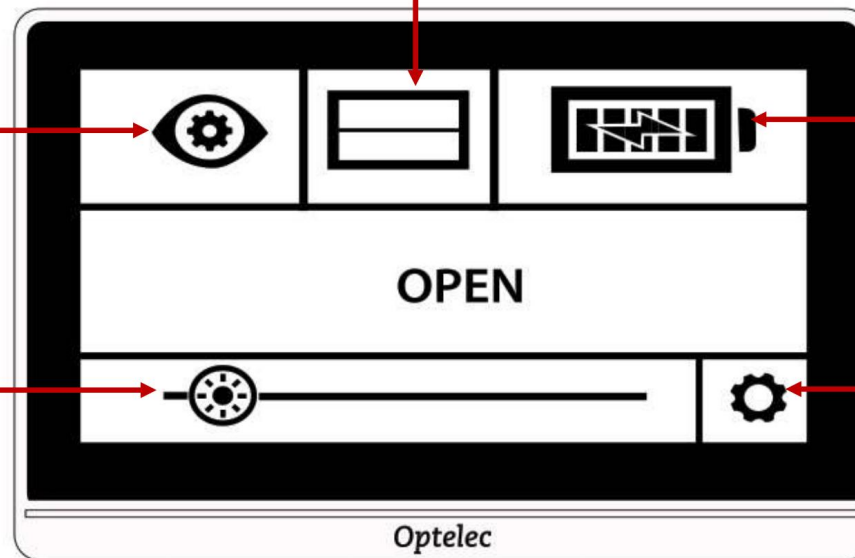

Ta en stillbild


Tryck på skärmen för att visa knappfälten/knapparna i enkelt läge eller avancerat läge.

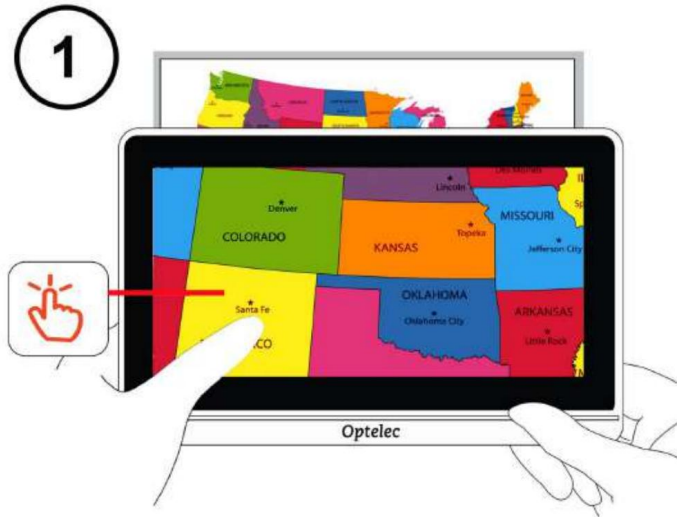


Tryck på Kameraknappen för att ta en stillbild av den aktuella vyn.



Håll enheten orörlig medan kameraikonen visas och tills du hör ett klickljud.

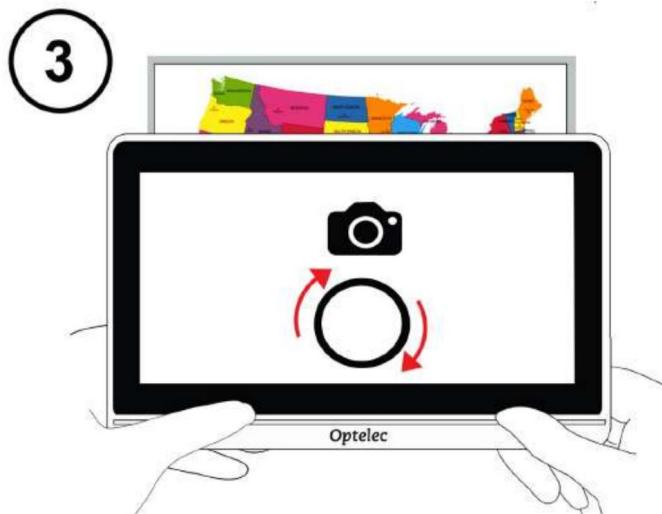


För att lämna stillbilden och återgå till Livevyn, tryck på X uppe i höger hörn.

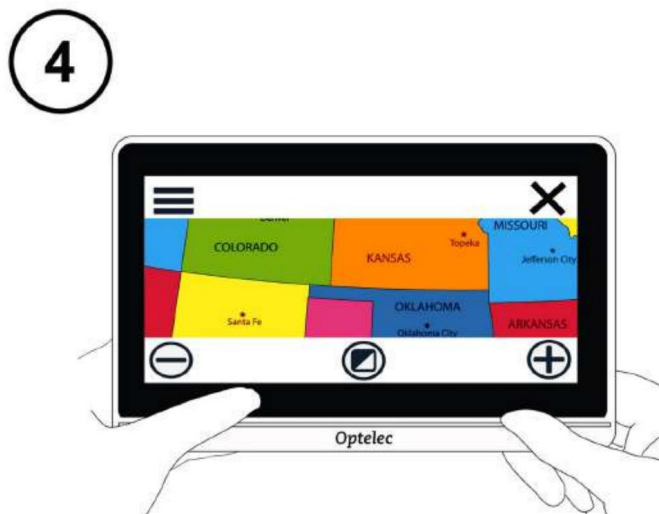

Spara en stillbild


Tryck på menyknappen
för att visa huvudmenyn
(endast avancerat läge).

1

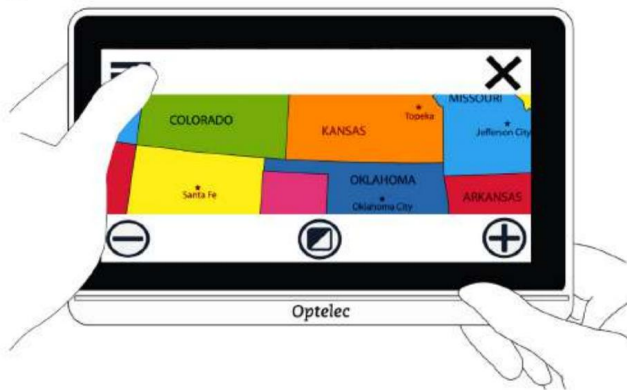


Tryck på Spara-ikonen för att
spara stillbilden.
Meddelandet SPARA visas.

2

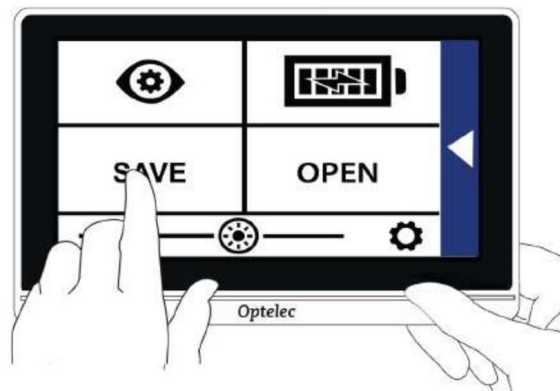

När den väl har sparats finns
stillbilden kvar på skärmen
tills du trycker på X för att
stänga den.

3




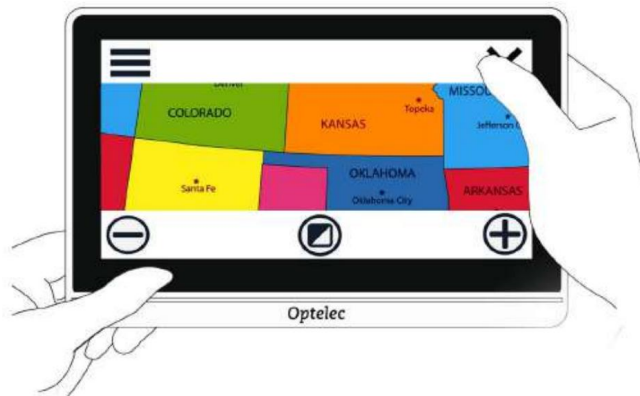


Efter stillbilden stängts
återgår enheten till Livevyn.

4




Ändra förstoring via nypgester

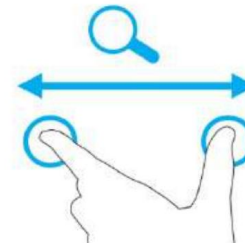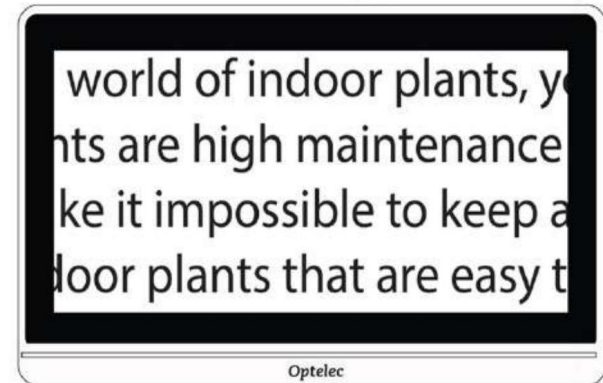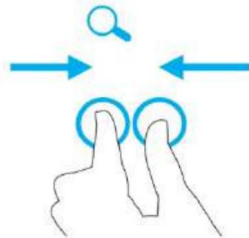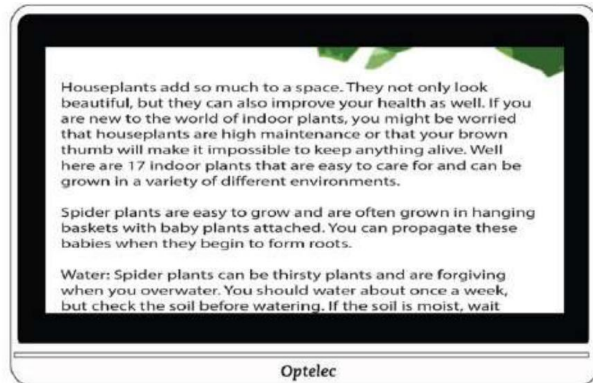

Nypgester för att zooma fungerar i både livevyn och stillbilder.

Panorera i en förstorad bild genom att svepa

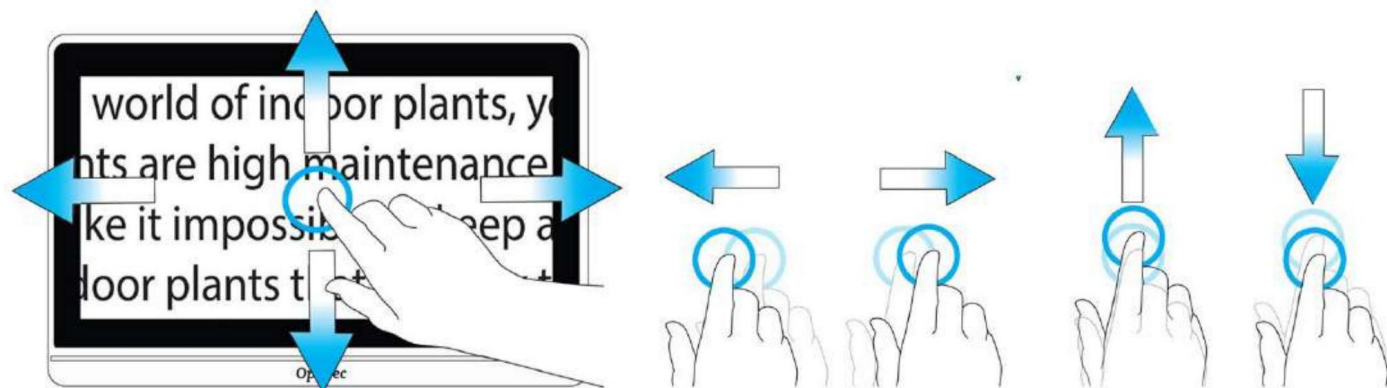

Panorering är möjlig i både livevyn och stillbilder.

Kontaktuppgifter

Polar Print

Växel, teknisk hjälp och support
Tel 010-470 99 00

info@polarprint.se

polar print
Hjälpmedel och tjänster

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Twistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHOV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ