

Användarmanual



COMPACT 8 HD

20250411

Innehållsförteckning

1	Introduktion.....	3
1.1	Om detta dokument	3
1.2	Lådans innehåll.....	4
1.3	Översikt över enheten.....	4
2	Konfigurera Compact 8 HD	8
2.1	Ansluta kablarna	8
2.2	Ladda batteriet.....	9
2.3	Starta Compact 8 HD.....	11
2.4	Instruktioner för installation av programvara	11
3.	Använda pekskärmen	12
3.1	Enkelt och Avancerat läge	13
3.2	Grundläggande funktioner	14
3.3	Knappfält.....	17
3.4	Huvudmeny.....	18
4.	Använda Compact 8 HD.....	21
4.1	Läs med närbildskameran	21
4.2	Se objekt på kort avstånd	22
4.3	Förstora kamerabilden.....	22
4.4	Panorera för att se mer av bilden	23
4.5	Ändra kontrastläge.....	23
5.	Ta stillbilder	25
5.1	Stäng en stillbild.....	26
5.2	Ändra en stillbild	26

5.3 Spara en stillbild	26
5.4 Öppna en sparad stillbild	27
5.5 Ta bort stillbilder	28
5.6 Kopiera stillbilder till en annan enhet.....	30
6. Anpassa utseende.....	31
6.1 Färger	33
6.2 linje	35
6.3 Ljuskänslighet.....	36
6.4 Kanteffekter	36
6.5 Färgblindhet.....	43
7. Ändra systeminställningar	44
7.1 Tema.....	46
7.2 LAMPOR.....	47
7.3 Ljud	47
7.4 Miracast	48
7.5 Viloläge	50
7.6 Språk	50
7.7 UppdaterA.....	50
7.8 Återställ.....	52
8. Felsökning	53
9. Rengöring och rekond	55
10. Information	57
11. Teknisk specifikation	58

1 INTRODUKTION

Grattis till din nya Compact 8 HD från Optelec. Det här handhållna förstöringskameran har ett stativ för bordsläsning, eller så kan den hållas för att titta på närliggande föremål. Compact 8 HD är liten nog att enkelt bära med sig och är idealisk för förstoring när du är på språng. En praktisk väska medföljer för att skydda enheten under transport.

Compact 8 HD har en inbyggd 8-tums LED- skärm och låter dig förstora bilder upp till 30 gånger. Du kan justera visningen av livebilder och bildtagningar baserat på dina personliga preferenser, inklusive förstoring, ljusstyrka och färgfilter, färgkombinationer, läslinjer och gardiner samt kanteffekter.

Du kan panorera i bilder medan kameran är livevyn eller efter att du har tagit en bild. Du kan spara bilder på Compact 8 HD, senare ändra färgläge eller förstoring för bättre visning.

Wi-Fi kan aktiveras genom att ansluta Compact 8 HD till en smart-tv eller monitor med Miracast.

1.1 OM DETTA DOKUMENT

På Optelec förbättrar vi ständigt våra produkter och deras funktionalitet. Nya versioner av detta dokument finns ofta tillgängliga på Optelecs webbplats.

Dessa instruktioner kommer att göra dig bekant med funktionerna och användningen av Compact 8 HD. Kapitlen är ordnade från grundläggande till avancerade. Dessutom ges informationen i den ordning som du behöver läsa den. Du kommer till exempel att lära dig att du måste ställa in och ladda din enhet innan du startar den. Instruktionerna tillhandahålls i ett tillgängligt format som är lätt att söka i.


1.2 LÅDANS INNEHÅLL

Compact 8 HD-lådan innehåller följande:


1. Kompakt 8-enhet
2. Skyddsväska
3. Rengöringsduk
4. Nätadapter
5. USB-C till USB-A strömkabel
6. Användarmanual

1.3 ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN

Framsidan av Compact 8 HD är sidan med skärmen. Eftersom enheten har en pekskärm behövs inga andra knappar än strömknappen.

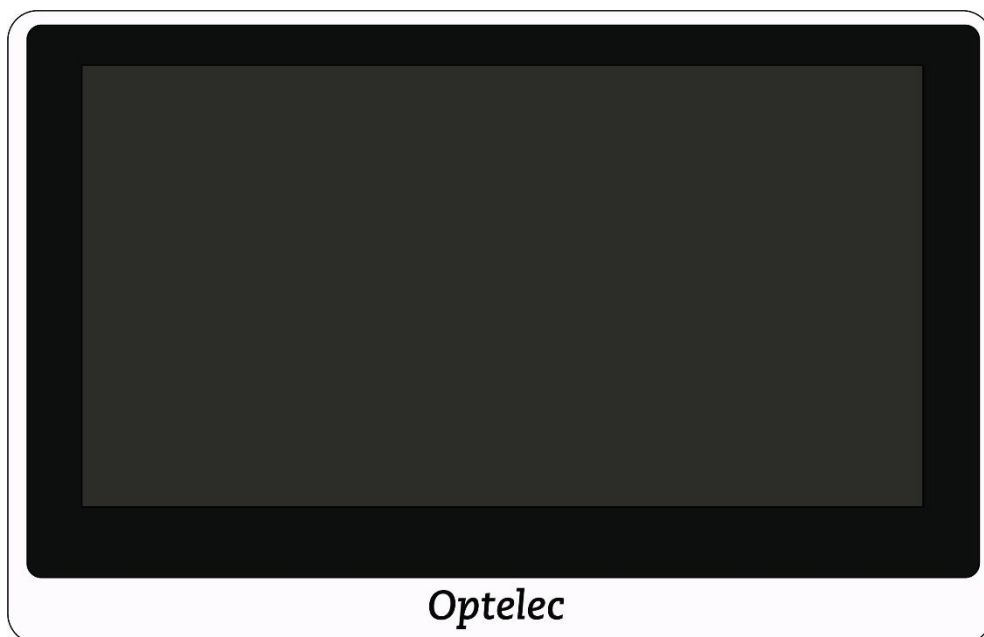

Följande bild visar baksidan av Compact 8 HD, där du hittar kameror, lampor och inbyggt stativ. Strömknappen sitter överst.

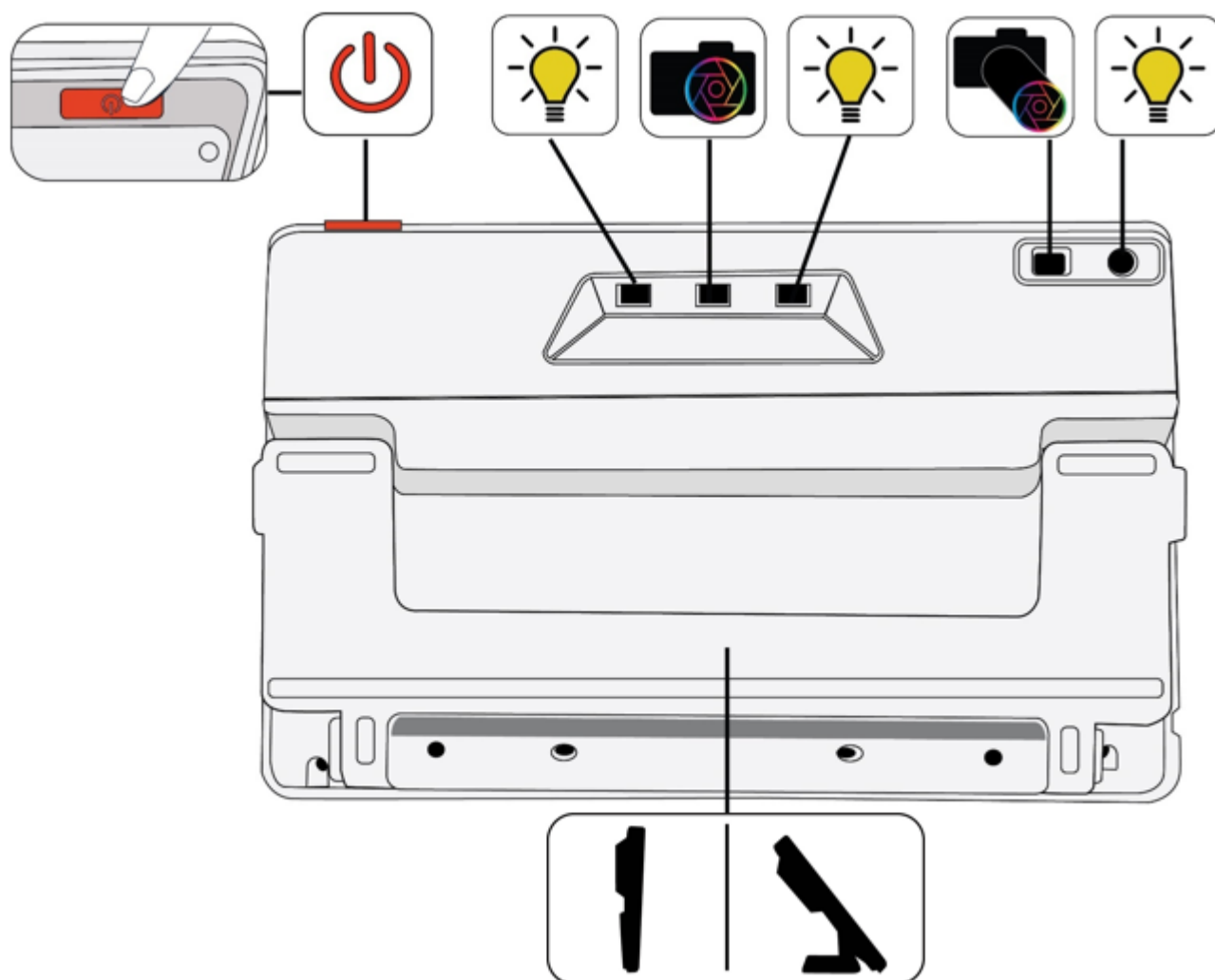

På baksidan av Compact 8 HD är komponenterna uppifrån och ned, från vänster till höger följande:

- Strömknapp (på/viloläge/ström av)
- Ljus 1 för närbildskamera
- Närbildskamera
- Ljus 2 för närbildskamera
- Avståndskamera
- Ljus för avståndskamera
- Inbyggt stativ


Ljud avges när du startar Compact 8 HD, och ett ljud från kameran hörs när du tar en stillbild. Ett knackande ljud kan höras när du aktiverar en funktion eller justerar volymnivån.

Notera: Ljudutgången på enhetens vänstra sida har för närvarande ingen funktionalitet.

Compact 8 HD har ingen vibration (även kallad haptisk återkoppling).

Öppna stativet

Stativet måste öppnas för att använda Compact 8 HD för att läsa med närbildskameran.

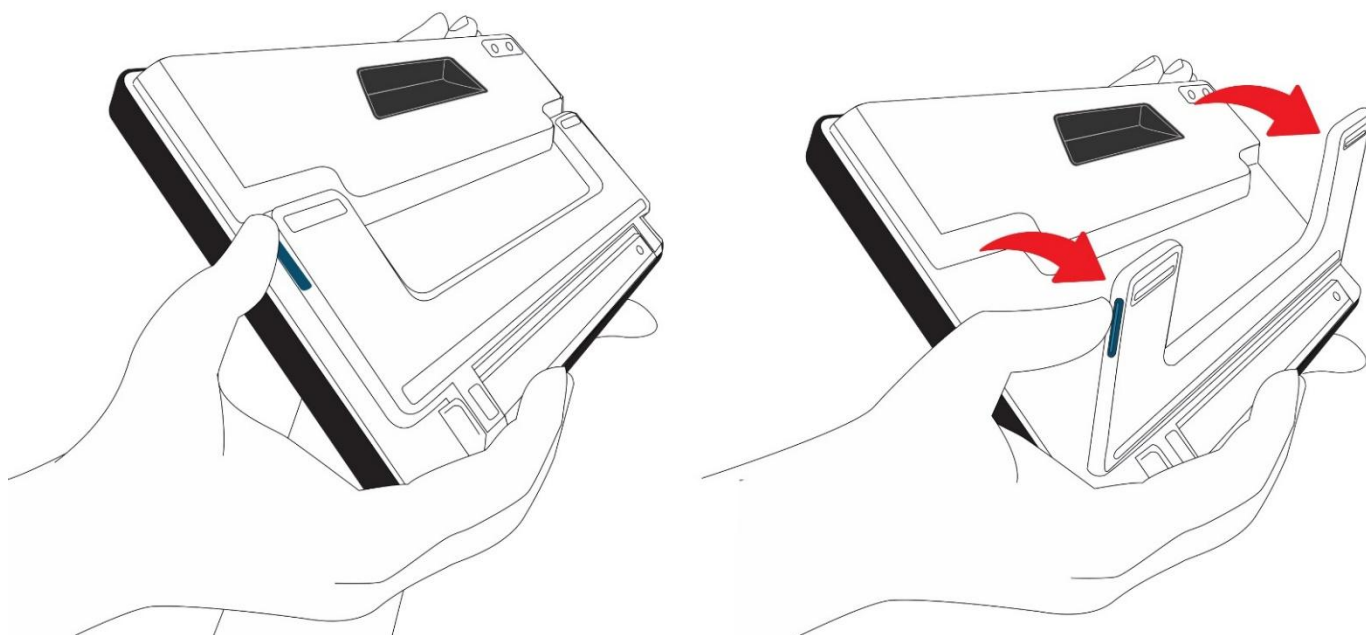


Så här öppnar du stativet:

1. Håll upp Compact 8 HD på en plan yta med skärmen vänd mot dig.
2. Använd en hand för att hålla enheten uppfifrån.
3. Med den andra handen, använd tummen för att trycka på den blå fliken på sidan av stativet medan du trycker ut. När det är helt utdraget öppnas stativet.

Stänga stativet

För att använda Compact 8 HD för att se objekt på kort avstånd måste stativet vara stängt för att kunna använda avståndskameran. Till exempel måste du stänga stativet och hålla i enheten för att titta på etiketter eller skyltar.

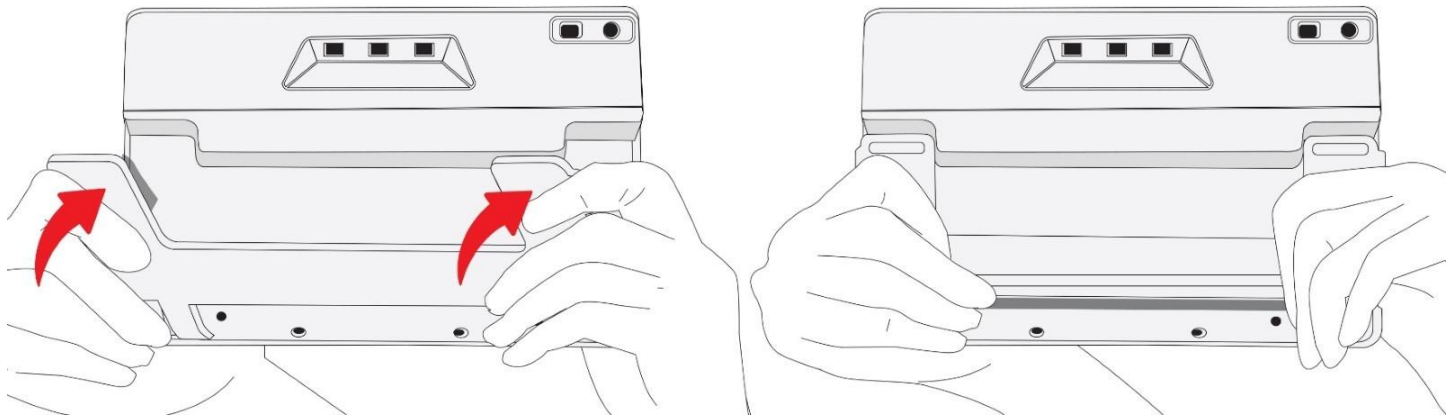

Så här stänger du stativet:


1. Håll Compact 8 HD från botten med skärmen vänd mot dig.
2. Håll stadigt i sidorna av enheten med handflatorna samtidigt som du trycker baksidan av benen mot enheten tills de snäpper ihop sig.

Varning: När du stänger stativet, se till att fingrarna är utanför det försänkta området på baksidan av enheten för att minska risken för att fingrarna kläms.

2 KONFIGURERA COMPACT 8 HD

Packa försiktigt upp allt och bekanta dig med komponenterna i Compact 8 HD. Följ sedan dessa anvisningar för att ansluta nätadaptern och ladda batteriet helt innan du startar.


Se följande bild för en översikt av installationsprocessen.

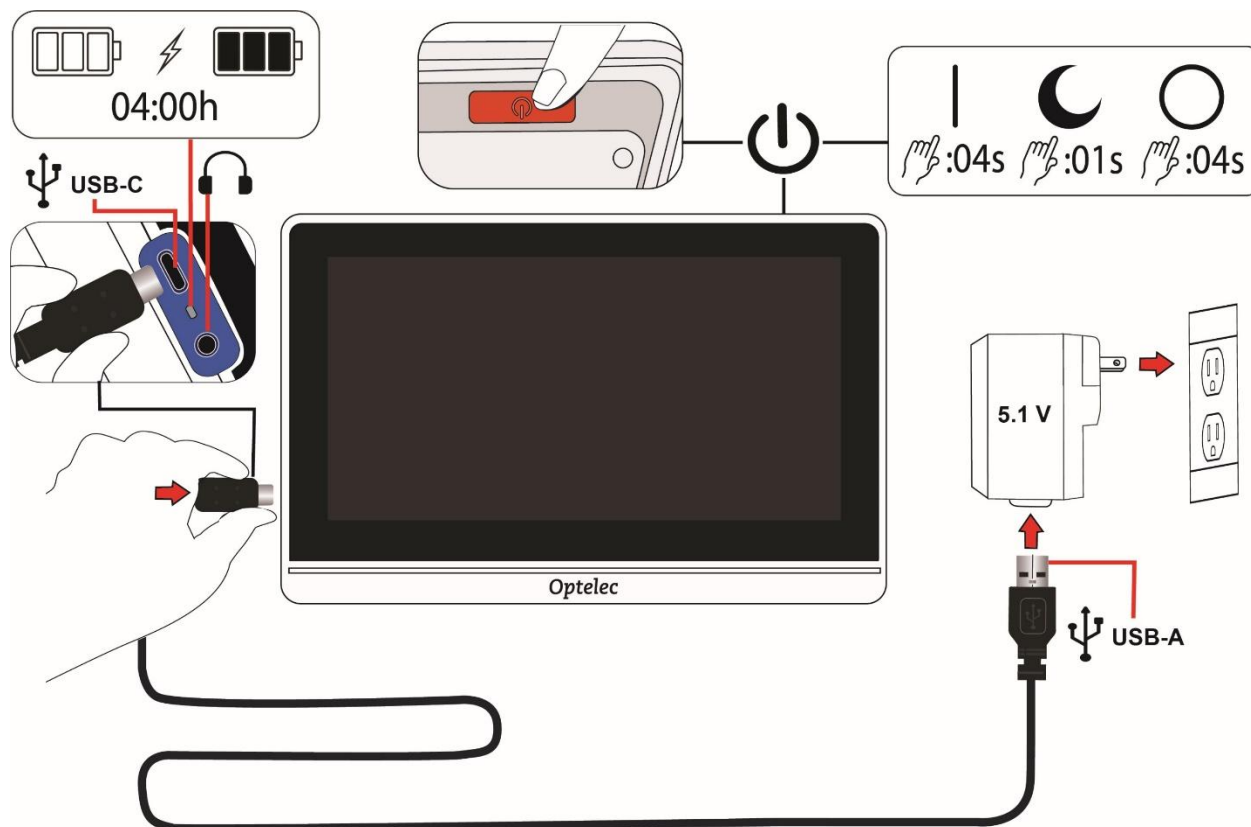

2.1 ANSLUTA KABLARNA

Så här ansluter du Compact 8 HD till nätadaptern/strömförsörjningen:

1. Compact 8 HD levereras med strömförsörjning och fyra landsspecifika strömkontakter i EU-, USA-, Storbritannien- och AU-typer. Skjut in lämplig kontakt för din region i nätadaptern tills det klickar.
2. Anslut USB-C-änden på den medföljande USB-kabeln till USB-C-kontakten på Compact 8 HD.

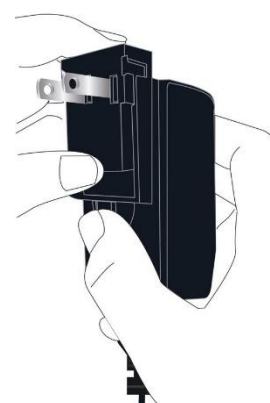



När skärmen på Compact 8 HD är mot dig sitter USB-C-kontakten på vänster sida av enheten. Där finns även en statusdiod samt en icke aktiverad ljudutgång.

3. Anslut USB-A-änden av kabeln till nätadaptern/strömförsörjningen.


Varning: Av säkerhetsskäl, använd endast nätadaptern och USB-kabeln som levererades med Compact 8 HD för att ladda enhetens batteri.

4. Anslut nätadaptern/strömförsörjningen till ett vägguttag.

Tips: Ett överspänningsskydd rekommenderas för skydd under åskväder eller andra händelser som kan orsaka en elektrisk överspänning.

2.2 LADDA BATTERIET

Ladda batteriet helt före första användningen. Att ladda Compact 8 HD tar upp till 4 timmar. Vänta tills dioden för batteristatus på vänster sida av Compact 8 HD lyser grönt innan du startar enheten.

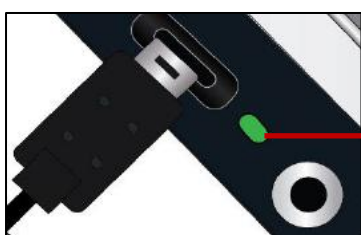

Diod för batteristatus

Kontinuerlig laddning

Batteriet kan laddas kontinuerligt, även när enheten är i drift. Du kan lämna batteriet anslutet till nätadaptern eftersom batteriet inte kan överladdas.

Batteritid

Batteritiden för din Compact 8 HD är upp till 3,2 timmar och beror på användning och inställningar.

Batterinivå

En batterisymbol visas när enheten är avstängd och laddas. Den visas också på huvudmenyn, som är tillgänglig genom att trycka på skärmen för att visa knappfälten och sedan trycka på knappen längst upp till vänster på skärmen.



I följande bild är det vänstra batteriet fulladdat, det mellersta batteriet laddas med 60 % och det högra batteriet är nästan tomt vid 20 %.



Det rekommenderas att du laddar enheten när dess batteriladdningsnivå sjunker under 40 %.


Diod för batteristatus

En liten diod bredvid USB-kontakt indikerar enhetens laddningsstatus.

- En blinkande grön lampa betyder att batteriet laddas.
- Ett fast grönt sken betyder att batteriet är fulladdat och att nätadaptern är ansluten.
- En blinkande gul diod indikerar ett urladdat batteri eller ett laddningsfel. Om detta inträffar, se till att du använder nätadapter som medföljer enheten och att alla kablar är ordentligt anslutna. Om dioden inte ändras till att blinka grönt inom 30 minuter, kontakta teknisk support för hjälp.

2.3 STARTA COMPACT 8 HD

För att starta enheten, tryck och håll ned den orangea knappen på enhetens ovansida i 4 sekunder. Knappen sitter på höger sida bakom framkanten när skärmen vrids mot dig.

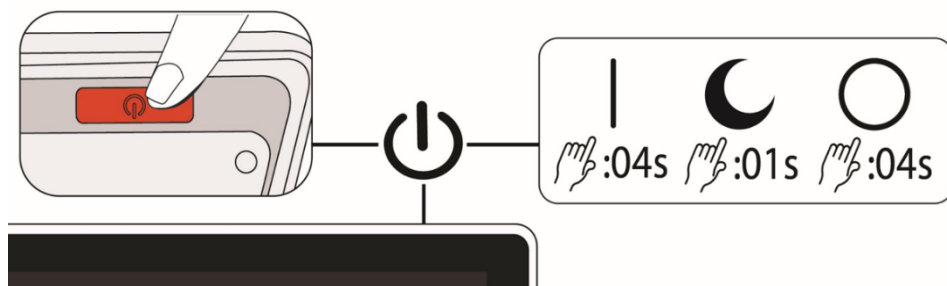

Strömknappen används också för att sätta enheten i viloläge eller stänga av den. När du vill lämna enheten på men inte kommer att använda den under en kort stund sparar den batteriström genom att trycka på **strömknappen** i 1 sekund för att sätta den i viloläge.

För att stänga av enheten, tryck och håll in **strömknappen** i 4 sekunder.

Se följande tabell för en snabbreferens om hur du använder **strömknappen**.

Läge	Handling	Resultat
På	Tryck 1 sekund	Aktiverar viloläge
På	Tryck 4 sekunder	Stänger av enheten
Av	Tryck 1 sekund	Visar batteriinformation under laddning
Av	Tryck 4 sekunder	Startar enheten
Viloläge	Tryck 1 sekund	Väcker enheten

2.4 INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV PROGRAMVARA


Första gången du slår på din Compact 8 HD blir du ombedd att välja ett språk. Standardläget är Enkelt läge.

Du kan växla till avancerat läge när som helst. Det är enkelt att växla mellan lägena. Se avsnittet Enkelt och avancerat läge för detaljer.

Om du också vill ställa in klockan med rätt tid och datum, följ instruktionerna som beskrivs längre fram under Ställ in tid och datum.

3. ANVÄNDA PEKSKÄRMEN

Compact 8 HD har en pekskärm, så alla funktioner är tillgängliga via knappar och menyer som visas när du trycker på skärmen. Du kan dölja dem genom att trycka på skärmen igen. Knappfälten döljs automatiskt efter cirka 10 sekunder. Följande ritning visar var och en av de tillgängliga knapparna.

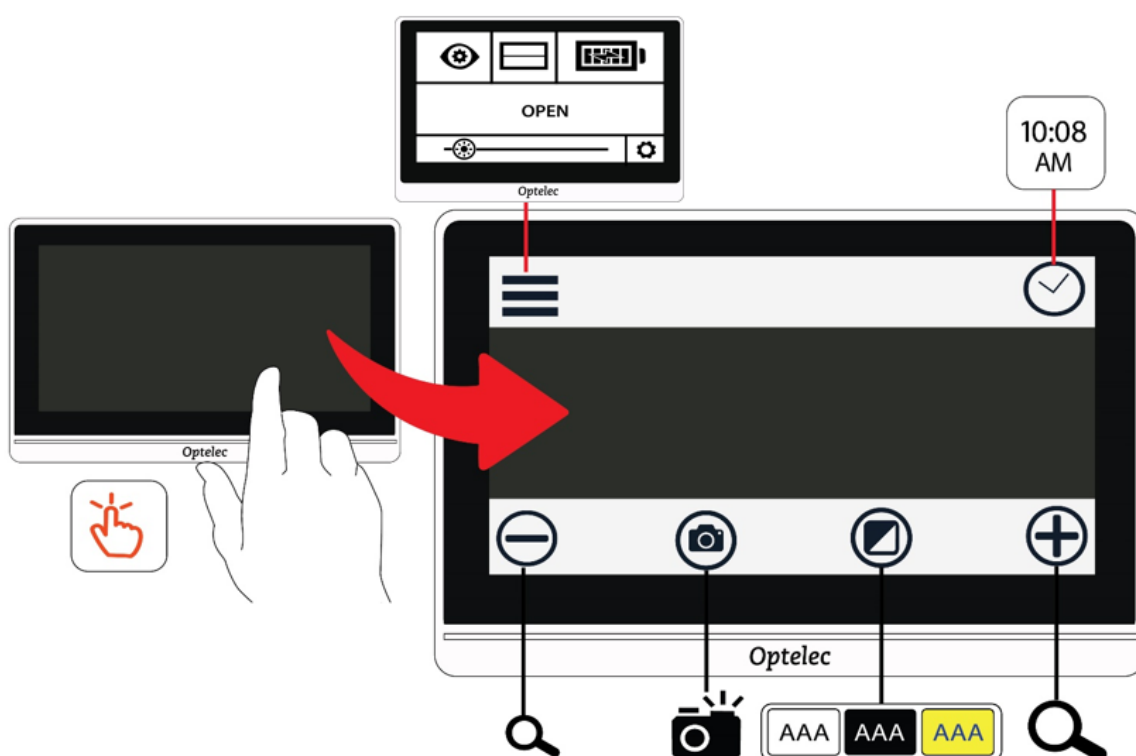


Det här kapitlet beskriver grunderna för pekskärmen i dessa avsnitt:

- Avsnittet Enkelt och Avancerat läge, som beskriver skillnaderna mellan de två och hur man byter från det ena till det andra.
- Sektion för grundläggande funktioner, som identifierar vanliga delar av skärmarna och låter dig ställa in tid och datum.
- Knappradssektion, som definierar knapparna som finns på de övre och nedre knappfälten.
- Huvudmenystruktursektion, som definierar ikonerna på huvudmenyn.

3.1 ENKELT OCH AVANCERAT LÄGE

Du kan använda Compact 8 HD med eller utan menyerna. I enkelt läge döljs menyknappen och klockan när du trycker på skärmen. Endast de nedre knapparna visas. Dessa knappar används för att kontrollera förstoringen, ändra färgkombinationen och ta en stillbild.

I följande bild visas Enkelt läge till vänster och Avancerat läge till höger.

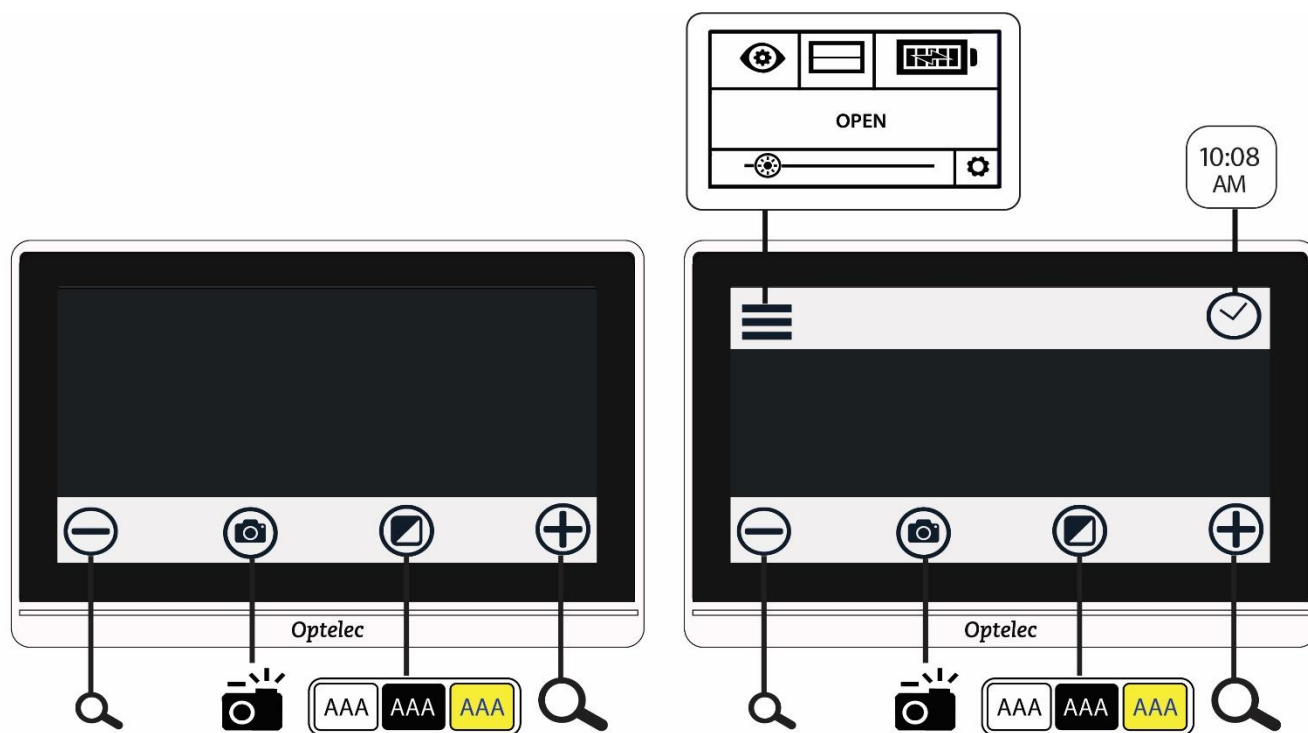


För att ändra läge:

1. Tryck och håll ner kontrastknappen i 5 sekunder.
2. På Lägesmenyn som visas trycker du Enkelt eller Avancerat. Enkelt läge visar endast den nedre knappraden. Avancerat läge inkluderar en övre knapprad.
3. I Livevyn, tryck på menyknappen längst upp till vänster på skärmen. Huvudmenyn visas.

Standardläget är Enkelt (såvida du inte ändrade det till Avancerat läge första gången enheten startades). För att anpassa dina inställningar måste du vara i avancerat läge. Ingen av menyerna som används för att anpassa Compact 8 HD är tillgängliga i Enkelt läge.

I följande bild trycker användaren på kontrasknappen i Enkelt läge. Efter att ha valt Avancerat i lägesmenyn är den resulterande skärmen i Avancerat läge.

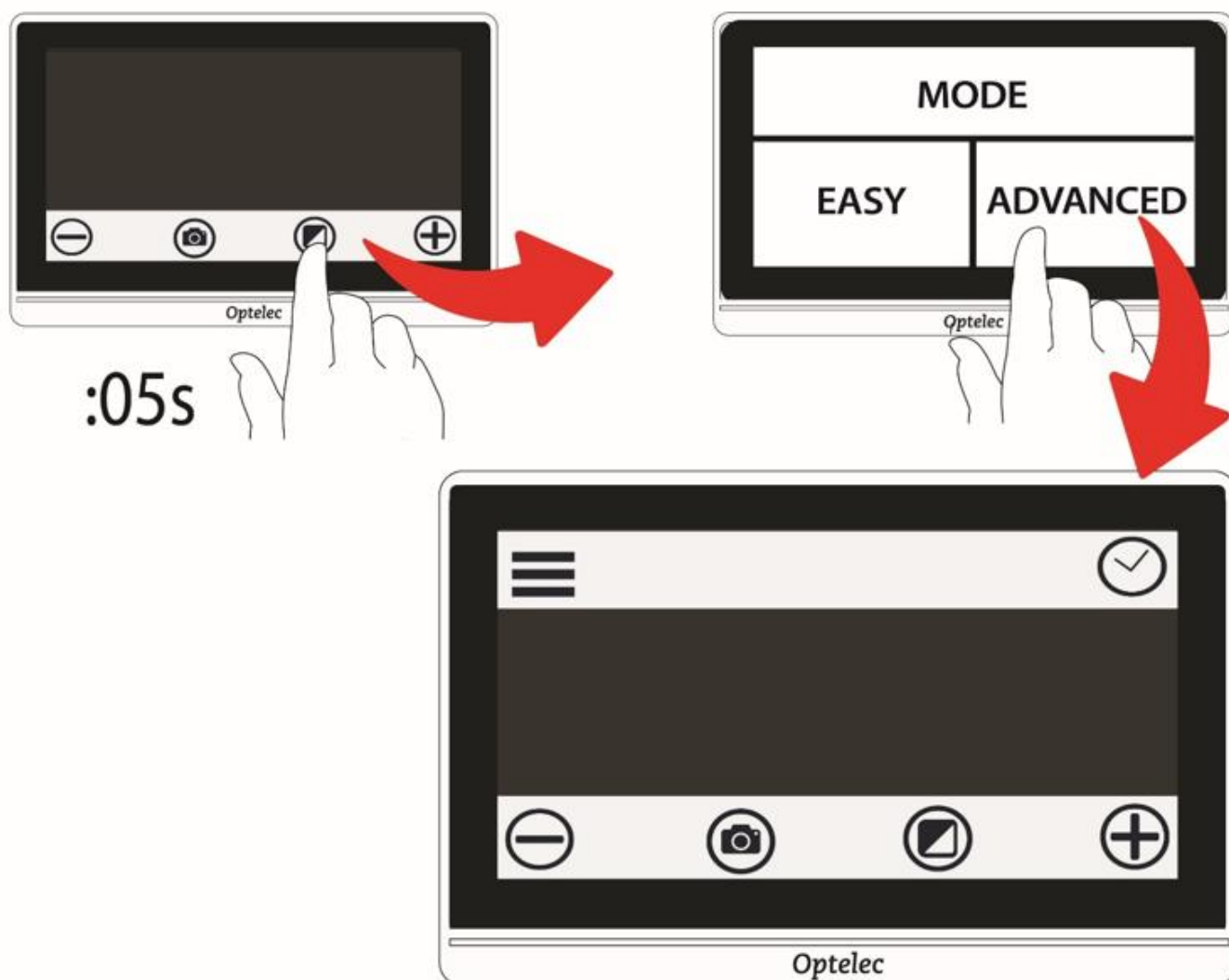

3.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER


När du startar Compact 8 HD är Livevyn som standard. Du förblir i Livevyn tills du tar en stillbild. Du är i stillbildsvyn tills du stänger stillbilden genom att trycka på **X** i det övre högra hörnet på skärmen.

Tips: Om du är osäker på om du är i Livevyn, tryck på skärmen för att visa knappfälten. Om en **X**-knapp finns uppe till höger är du i en stillbild. För att återgå till livevyn, tryck på **X**.


Ställ in tid och datum

Följande instruktioner visar några vanliga funktioner och gör att du kan ställa in aktuell tid och datum.

1. Tryck på skärmen i livevyn för att visa knappfälten.
2. Tryck på klockan uppe till höger för att visa tid och datum.

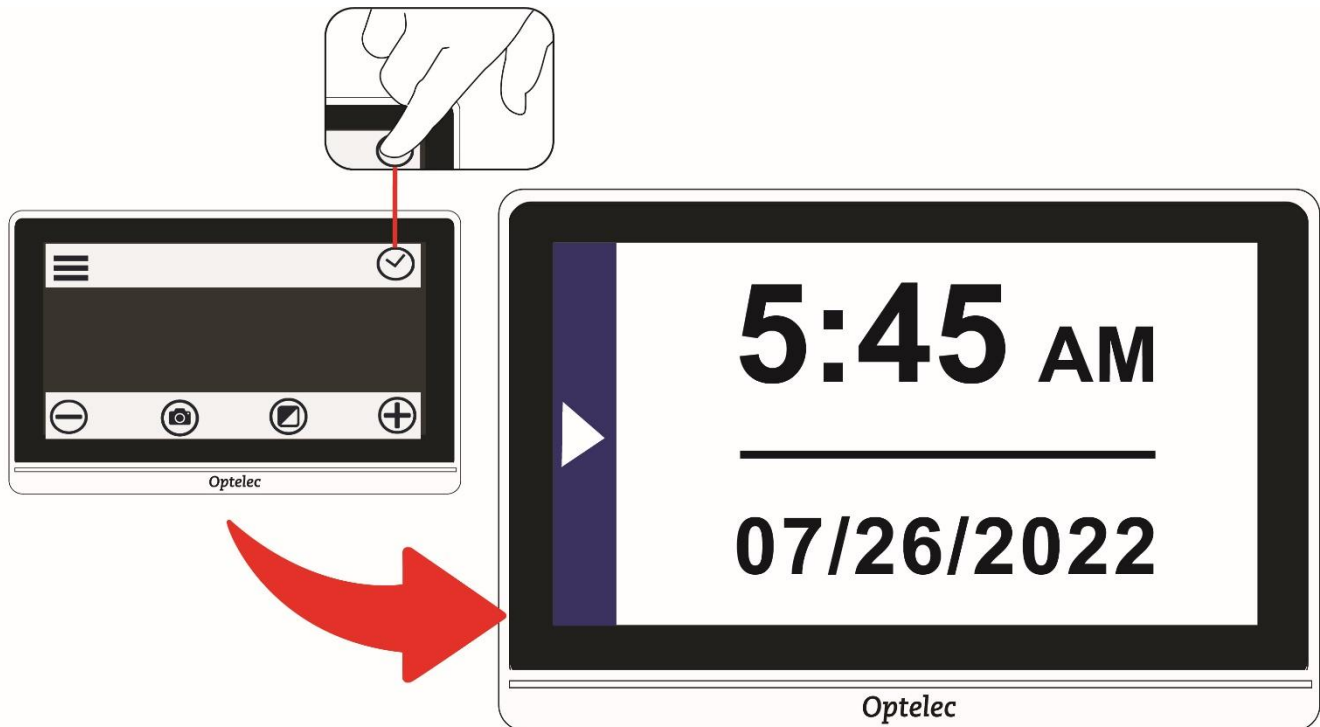

3. Tryck var som helst på skärmen Tid och datum för att visa en skärm där du väljer tid- och datumvärden.
4. Allt valt (markerat) är aktivt. Tryck på rutan Datum för att välja den och visa fälten där du ställer in månad, dag och år.

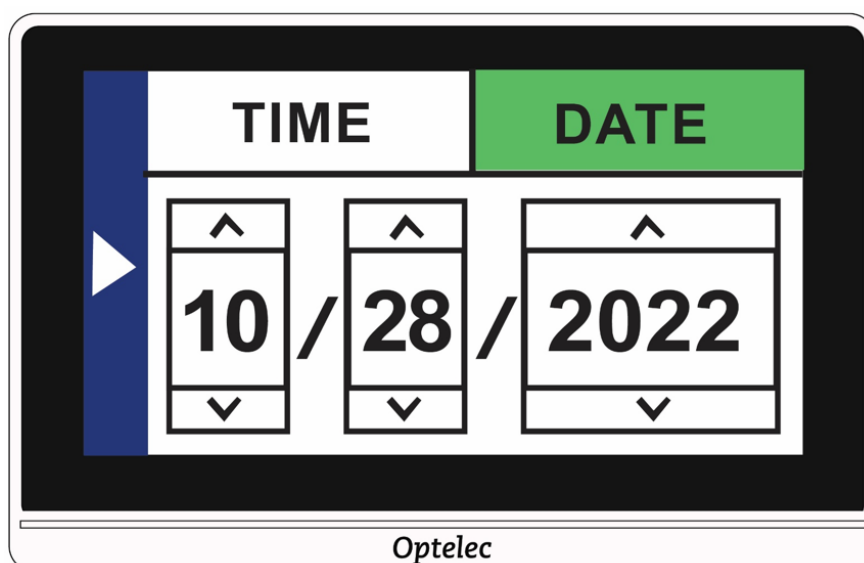

5.  Tryck på upp- och nedpilarna för att ändra värdet mellan dem. Tryck på pilarna för att ställa in rätt datum.
6. Tryck på rutan Tid för att markera den och visa fälten där du ställer in timmar och minuter.
7. Tryck på 12 eller 24 för att ställa in om du vill använda en 12-timmarsklocka med AM och PM eller en 24-timmars klocka.
8. Ställ in rätt tid.
9.  För att automatiskt ställa in värdena och återgå till föregående skärm, tryck var som helst i den vänstra delen av skärmen med en pil.
10. Upprepa föregående steg för att återgå till livevyn. Klockan visar nu uppdaterad tid och datum.

Varning: Lita inte på tid- eller datumfunktionen i denna enhet för medicinska beslut, till exempel när du ska ta din medicin. Funktionen är till för din bekvämlighet och ställs inte in automatiskt.

Navigera i menyerna

När du trycker på menyknappen för att visa huvudmenyn är du i menyn. När du navigerar genom menyskärmarna hittar du vanliga inställningar.




Gå tillbaka till föregående skärm i huvudmenyn eller någon relaterad skärm genom att trycka på den triangulära vänsterpilen på skärmens högra sida. Du kan fortsätta trycka på pilen tills du återgår till livevyn.



Om du visar en stillbild och vill stänga den och återgå till livevyn, tryck på **X** i det övre högra hörnet.

Vissa ikoner representerar funktioner som kan aktiveras eller inaktiveras genom att trycka på dem. Ikonen väljs när den är aktiverad.

Om du till exempel trycker på ikonen för läslinjer aktiveras det (vänster).
Om du trycker på den igen inaktiveras det (höger).

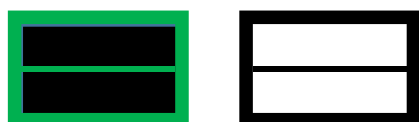

3.3 KNAPPFÄLT

När du trycker på skärmen visas knappfält längst upp och längst ner på skärmen. En grafisk översikt och knappdefinitioner följer:

Knapparna definieras i följande tabell.

Knapp	Namn	Beskrivning
	Menyknapp	Visar huvudmenyn, där du kan komma åt funktioner och ändra hur bilden visas.
	Tidsknapp	Visar aktuell tid och datum. Tryck var som helst på den här skärmen för att visa skärmen Tid och datum där du ställer in värdena.
	Zooma ut	Minskar förstoringen och visar mer av bilden på skärmen.
	Stillbild	Tar en stillbild av innehållet som närvarande visas på skärmen.
	Kontrastläge	Ändrar färgkombinationen som används för att visa den aktuella bilden på skärmen.

Knapp	Namn	Beskrivning
	Zooma in	Ökar förstoringen och visar mindre av bilden på skärmen.



3.4 HUVUDMENY



Du måste vara i avancerat läge för att anpassa dina inställningar. Den övre knappraden visas i avancerat läge. Om bara den nedre knappraden visas är du i Enkelt läge. För att ändra läget, se avsnittet Enkelt och avancerat läge.

Så här visar du menyerna:

1. Tryck på skärmen för att visa knappfälten.
2. Tryck på menyknappen i det övre vänstra hörnet av skärmen. Huvudmenyn visas.

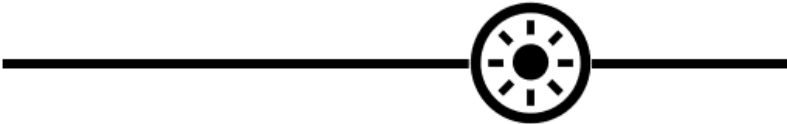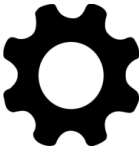Rad 1	 UTSEENDE	 LÄSLINJE	 BATTERI
Rad 2	ÖPPNA		
Rad 3	 LJUSSTYRKA		 INSTÄLLNING AR

Strukturen för huvudmenyn beskrivs i följande tabell. Ikonerna som representerar menyerna visas i den vänstra kolumnen. Alternativen på menyn Utseende och menyn Inställningar beskrivs i de följande två kapitlen.

Meny	Beskrivning
 Utseende	Används för att anpassa skärmens utseende så att den är rätt för din syn – färger, läslinje eller gardiner, ljuskänslighet, kanteffekter och inställningar för färgblindhet. Förändringar av visuella egenskaper är omedelbara. Se avsnittet Anpassa utseende.
 Läslinje på/av	Aktiverar eller inaktiverar visningen av en läslinje eller gardiner på skärmen, vilket kan hjälpa dig att följa med i texten när du läser eller utför andra uppgifter.
 Batteri	Visar procentandelen av batteriladdningen som för närvarande är tillgänglig. Se avsnittet Ladda batteriet för mer information.
SPARA	Sparar stillbilden som för närvarande visas på skärmen. När den väl har sparats visas samma stillbild och knappfälten. Se avsnittet Spara en stillbild. Ej tillgängligt i Livevyn. Notera: Det här alternativet är endast tillgängligt efter att du har tagit en stillbild.
ÖPPNA	Visar en liten representation av varje sparad stillbild i ett rutnät. Gör det också möjligt för dig att öppna en fil genom att trycka på dess bild. Se avsnittet Öppna ett sparad dokument. Med knappen Ta bort

Meny	Beskrivning
	längst ner kan du ta bort en eller flera filer. Se avsnittet Radera stillbilder.
 Ljusstyrka	Skjut cirkeln åt höger för att öka ljusstyrkan på Compact 8 HD-skärmen. Dra åt vänster för att minska den. Du kan också trycka på en lägre eller högre nivå för att ändra den. Ändringen är omedelbar, så du kan se förändringen i ljusstyrka när du är i huvudmenyn.
 Inställningar	Visar alternativ som gör att du kan hantera viktiga systeminställningar. Se avsnittet Ändra systeminställningar.


4. ANVÄNDA COMPACT 8 HD

Compact 8 HD kan användas när du behöver förstora en bild. Du kan hålla den för att kontrollera butiksetiketter, läsa restaurangmenyer eller förstora allt i närheten med avståndskameran.

När du fäller ut stativet kan du läsa material direkt under Compact 8 HD med hjälp av närbildskameran. Det här avsnittet ger exempel på användningsområden och beskriver hur man öppnar och stänger stativet.

4.1 LÄS MED NÄRBILDSKAMERAN

Välj en stabil, jämn yta för läsning. Fäll ut stativet och placera enheten ovanpå ditt läsmaterial.

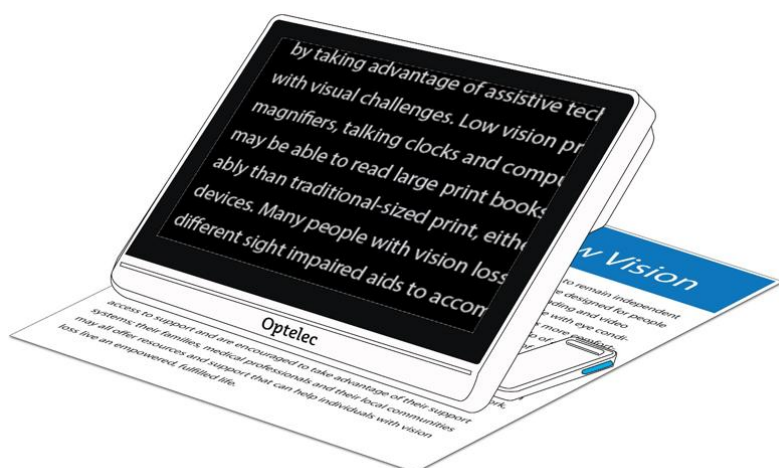

Som standard lyser en lampa på baksidan av Compact 8 HD på visningsområdet. Ljuset kan stängas av eller återaktiveras via huvudmenyn. Se avsnittet Lampor för instruktioner.

Du kan förbättra synligheten för texten som visas genom att ändra kontrastläge och förstoringsnivå.

4.2 SE OBJEKT PÅ KORT AVSTÅND

Du kan hålla i Compact 8 HD för att titta på objekt en bit bort. Avståndskameran är idealisk för att titta på etiketter, prislappar eller kvitton. Stativet måste vara stängt för att använda avståndskameran.

Du kan också se skyltar i butiker eller på gatan när du bär Compact 8 HD med dig.




4.3 FÖRSTORA KAMERABILDEN

Du kan ändra förstoringen i Livevyn eller i stillbilder. Du har tre sätt att ändra det.



- Tryck på knappen Zooma ut för att minska förstoringen och knappen Zooma in för att öka förstoringen. Varje gång du trycker sker en mindre ökning eller minskning av förstoringen.
- Tryck och håll ner knapparna Zooma in eller Zooma ut för att kontinuerligt justera förstoringen.
- Använd nypgester för att zooma på pekskärmen.
 - Zooma ut: Placera två fingrar isär och dra ihop dem för att minska förstoringen och se mer av bilden.

- Zooma in: Placera två fingrar tillsammans på skärmen och dra isär dem för att öka förstoringen och se mindre av bilden.

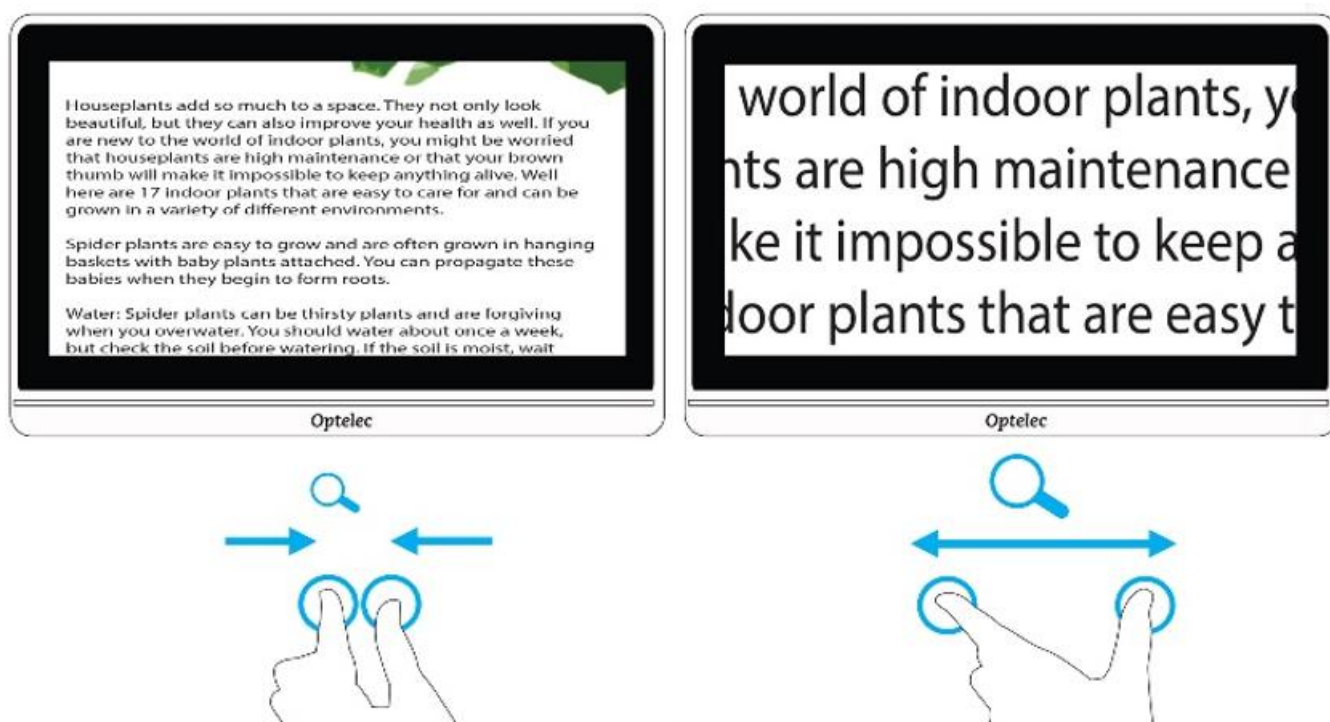


4.4 PANORERA FÖR ATT SE MER AV BILDEN

Du kan svepa skärmen uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att se mer av en bild än vad som visas på skärmen.






Panorering är tillgängligt i Livevyn, i stillbilder samt när du granskar en sparad bildfil. Mer av displayen kan panoreras när förstoringen ökar.

4.5 ÄNDRA KONTRASTLÄGE

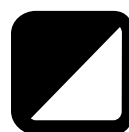


Tryck på Kontrastknappen för att bläddra genom naturliga färger och fyra andra färgkombinationer. Naturlig färg är alltid tillgänglig. Fabriksinställda färglägen är vitt på svart, svart på vitt, gult på svart och gult på blått. För att ändra de fyra standardfärgerna, se avsnittet Färger för information.

Följande bild visar standardfärgkombinationerna. Det första exemplet visar att användaren trycker på kontrastknappen för att rotera genom de olika färgkombinationerna.

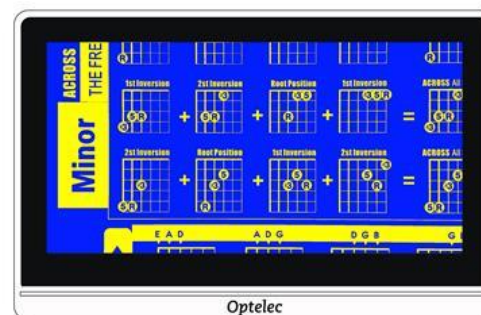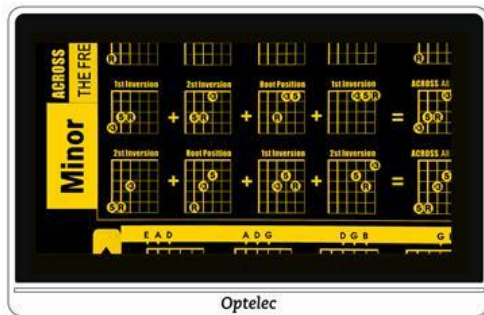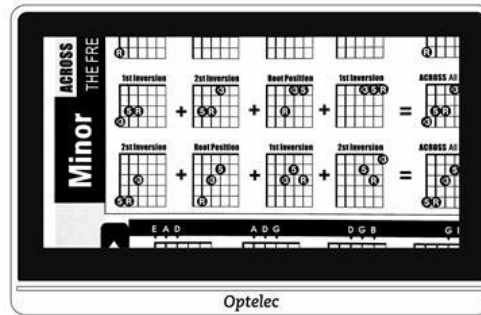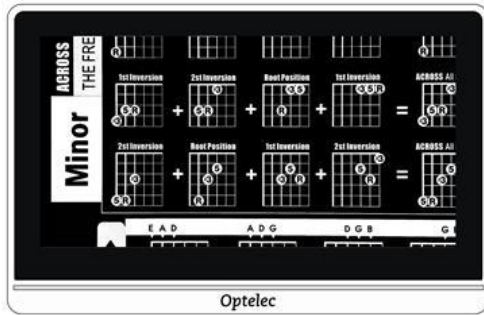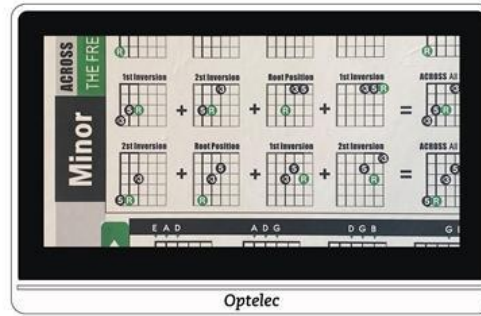

5. TA STILLBILDER

När du startar Compact 8 HD är Livevyn igång som standard. Skärmen visar varhelst Compact 8 HD-kameran är fokuserad. Du är i Livevyn tills du tar en stillbild, vilket fryser bilden på skärmen. Med stillbilder kan du ta dig tid att studera föremål mer i detalj.

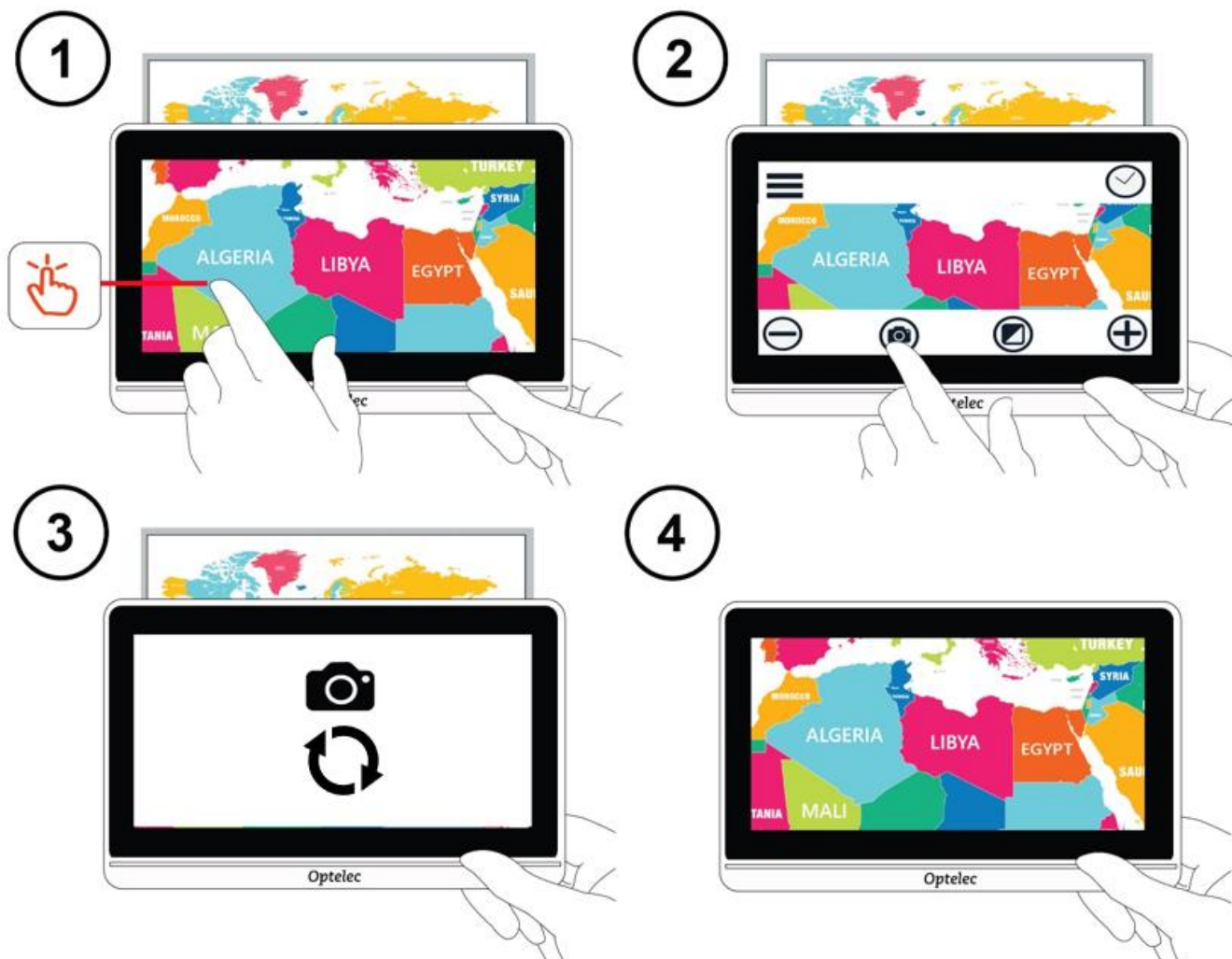

Så här tar du en stillbild:

1. Centrera bilden du vill spara.
2. Håll enheten stadigt. Rörelse kan göra bilden suddig.
3. Tryck på skärmen för att visa knappfälten.
4. Tryck på Kameraknappen. En kameraikon och en rörlig cirkel visas under fotograferingen.
5. Håll enheten stadigt tills du hör ett ljud från kameran. Stillbilden visas.



5.1 STÄNG EN STILLBILD

I Stillbildsläget visas ett **X** i det övre högra hörnet när du visar knappfälten. Den tagna bilden visas tills du stänger den genom att trycka på **X**.



För att återgå till livevyn måste du stänga stillbilden.

5.2 ÄNDRA EN STILLBILD


Du kan anpassa stillbilder på samma sätt som du anpassar livevyn. Du kan till exempel ändra förstorings- eller kontrastläget för en stillbild.

5.3 SPARA EN STILLBILD

Om du vill att en stillbild ska vara tillgänglig för visning senare kan du spara den:

1. Tryck på skärmen för att visa knappfälten.
2. Tryck på menyknappen för att visa huvudmenyn.
3. Tryck på **SPARA**. Det här alternativet är endast tillgängligt efter att du har tagit en stillbild.

Notera! Stillbilden förblir öppen tills du trycker på **X** i det övre -högra hörnet.

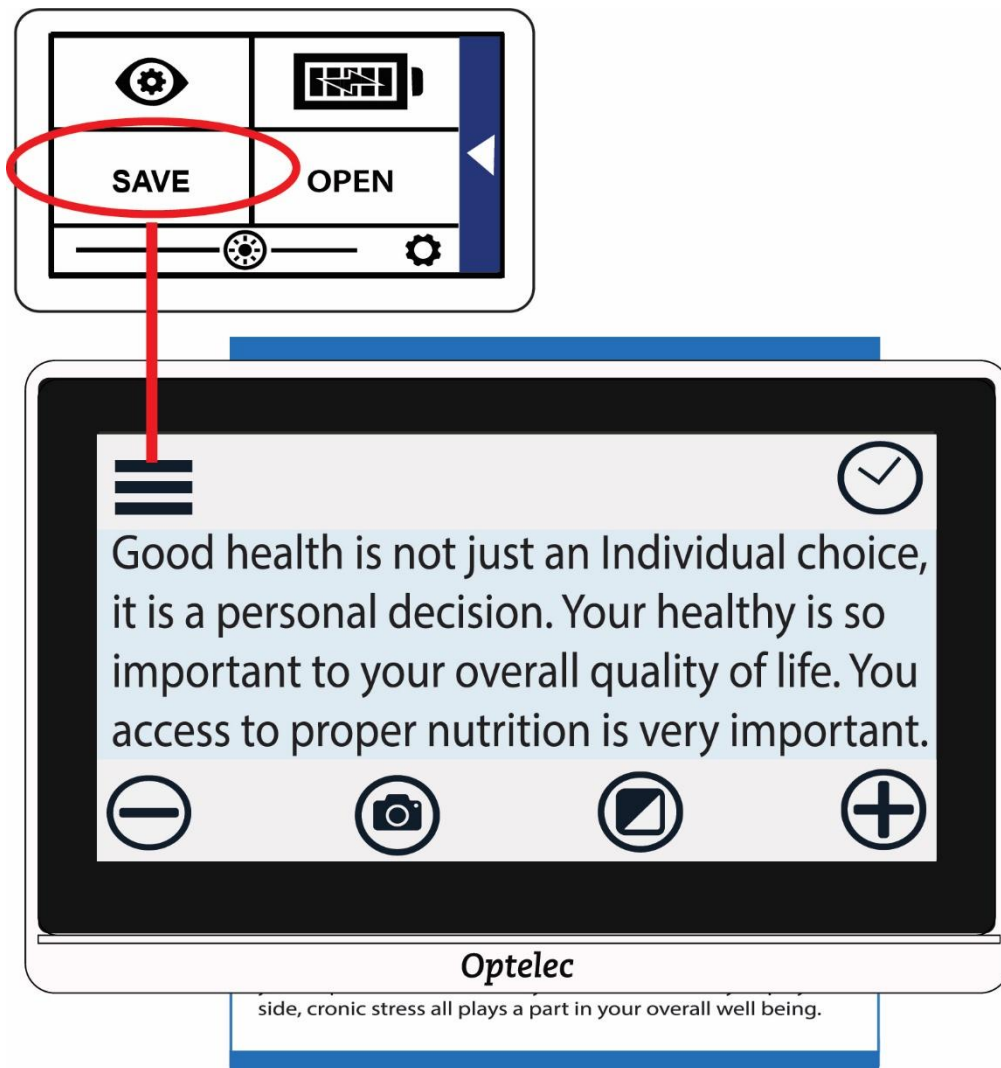

5.4 ÖPPNA EN SPARAD STILLBILD

Så här öppnar du en sparad stillbild:

1. Tryck på skärmen för att visa knappfälten.
2. Tryck på menyknappen för att visa huvudmenyn.
3. Tryck på **ÖPPNA**. Alla bilder du har sparat kommer att visas i ett rutnät. Alla stillbilder sparas med naturliga färger.



4. Tryck på stillbilden som du vill öppna. Meddelandet "Öppnar" visas tills bilden visas.



5. Om så önskas, ändra förstoringen och kontrastläget. Du kan också panorera i förstorade bilder precis som du kan i livevyn. Ändringar av en sparad bild med hög kontrast tillämpas endast när du har bilden öppen och visar den. Bilden återgår till naturlig färg när du stänger den.
6. För att stänga den öppna stillbilden, tryck på skärmen för att visa knappfälten och tryck på **X** i det övre högra hörnet. Livevyn visas.

5.5 TA BORT STILLBILDER

Så här raderar du en eller flera stillbilder:


1. Tryck på skärmen för att visa knappfälten.

- Tryck på menyknappen för att visa huvudmenyn.
- Tryck på **ÖPPNA**. Alla bilder du har sparat kommer att visas i ett rutnät. Alla stillbilder sparas med naturliga färger.



- Tryck på **RADERA** längst ned på skärmen. En kryssruta läggs till i det övre högra hörnet av varje stillbild.
- Klicka på kryssrutan på varje stillbild som du vill ta bort.

Tips: För att ta bort alla stillbilder från Compact 8 HD kan du lämna alla kryssrutor tomma, tryck på **RADERA** och tryck sedan på **JA** på bekräftelseskärmen.

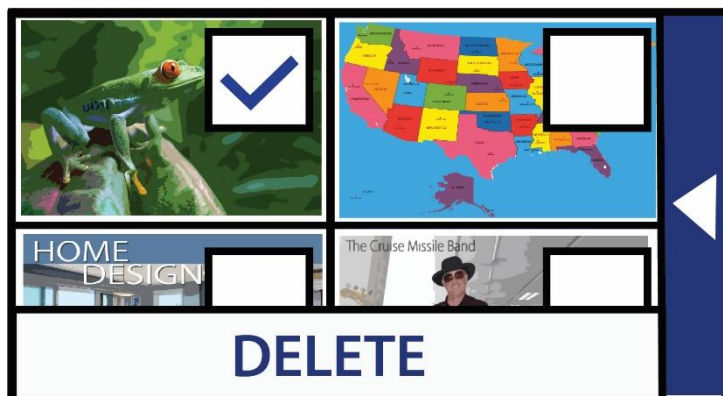

- Tryck på **RADERA**. Ett bekräftelsemeddelande visas.
- Tryck på **JA** och systemmeddelandet "Valda dokument raderade" visas och du återgår till skärmen Ta bort.

5.6 KOPIERA STILLBILDER TILL EN ANNAN ENHET

Innan du tar bort filer för att göra plats på enheten kan du kopiera dem till en USB-enhet för att spara undan dem eller använda USB-C till USB-A-strömkabeln för att lagra dem på en annan enhet, till exempel en dator.

Du måste ha en USB-C till USB-A-kabel för att kopiera filer från Compact 8 HD till en annan enhet. Om du till exempel ansluter en USB-kabel mellan enheten och din bärbara dator, kan du kopiera filerna med Windows Utforskare.

Gå till CP8 > Intern delad lagring > DCIM > CP8 > Bilder för att hitta de sparade filerna.


6. ANPASSA UTSEENDE



Menyn Utseende visar alternativ som gör att du kan anpassa bildens visuella egenskaper på Compact 8 HD-skärmen. För att ändra inställningarna måste du vara i avancerat läge så att den övre knappraden visas. Om du trycker på skärmen och bara den nedre knappraden visas är du i Enkelt läge. För att ändra läget, se avsnittet Enkel och Avancerat läge.


Så här visar du menyn Utseende:

1. Tryck på skärmen för att visa knappfälten.
2. Tryck på menyknappen i det övre vänstra hörnet av skärmen. Huvudmenyn visas.
3. Tryck på ikonen Utseende. Menyn Utseende visas.

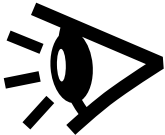Rad 1	 FÄRG	 LINJE
Rad 2	 LJUSKÄNSLIGHET	 KANT
Rad 3	FÄRGLINDHET	

Alla alternativ i den här menyn är tillgängliga i både Livevy samt i stillbilder, förutom alternativet Linje, som bara är tillgängligt i Livevyn. De tillgängliga kanteffekterna beror på det aktuella färgläget.

Alternativen som är tillgängliga från menyn Utseende beskrivs i följande tabell.

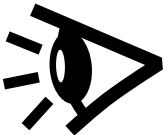Alternativ	Beskrivning
 FÄRG	 Här ställer du in de fyra färgkombinationer som är tillgängliga via Kontrastknappen. Notera! Naturliga färger, som alltid är tillgängligt som det femte färgläget, kan inte inaktiveras.
 LINJE	 Här väljer du vilken typ av läsinje eller gardiner som ska visas i livevyn när ikonen för läsinje väljs i huvudmenyn. Tryck för att välja en horisontell eller vertikal linje eller gardiner.
 LJUSKÄNSLIGHET	Tryck för att aktivera (vald) eller inaktivera (ej vald) inställning för ljuskänslighet. När det är aktiverat reduceras våglängder som ofta upplevs som smärtsamma vid ljuskänslighet.
 KANT	 Här kan du kan aktivera eller inaktivera en funktion som tar bort skräp och förbättrar kanterna på bilder med i högkontrastläge.
FÄRGBLINDHET	Alternativ som förbättrar färgdifferentiering och kontrast för tre typer av färgblindhet. Om någon av rutorna är grå, tryck på den. Annars är INGEN valt som standard. Notera: Du måste rulla ned för att se det här alternativet.


6.1 FÄRGER




Du kan ställa in fyra färgkombinationer som ingår vid tryckning på kontrastknappen genom att gå till **Huvudmeny > Utseendemeny > Färg**. Samma färger erbjuds i Livevyn samt stillbilder.

Notera: Naturliga färger, som är det femte färgläget, kan inte inaktiveras.

Tryck på upp- och nedpilarna för att välja de två färgerna för varje färgkombination.

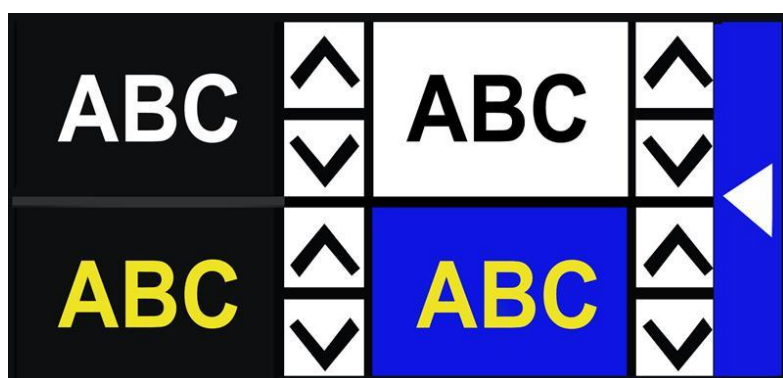

Den övre vänstra färgkombinationen krävs. Om du vill ha färre än fyra färgkombinationer i rotationen, rulla tills X visas i de andra tre rutorna.

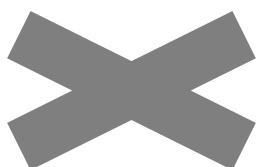

Färgkombinationerna ställs in när du lämnar färgskärmen. Tryck på högerpilen för att återgå till föregående skärm.

Tillgängliga färgkombinationer


Följande tvåfärgskombinationer kan användas för att visa bilder. När de refereras nämns förgrunden först. Till exempel betyder vitt på svart: vit text på en svart sida.

Förgrund	Bakgrund
Vit	Svart
Svart	Gul
Svart	Grön
Blå	Gul
Blå	Vit
Svart	Orange
Svart	Röd
Svart	Blå
Gul	Svart
Grön	Svart
Gul	Blå
Vit	Blå
Orange	Svart
Röd	Svart
Blå	Svart
Svart	Förbättrad färg
Svart	Gråskala

Dynamisk kontrast

Compact 8 HD justerar dynamiskt kontrasten i distinkta delar av bilden för att förbättra tittarupplevelsen. Dynamisk kontrast ställs in automatiskt när du använder valfri tvåfärgskombination eller förbättrad färg.

6.2 LINJE

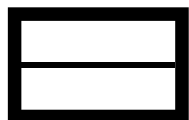

Alternativet Linje på menyn Utseende används för att välja vilken typ av läslinje eller gardiner du vill använda när alternativet Linje i huvudmenyn är aktiverat (vald). Att använda en läslinje eller gardiner i Livevyn kan hjälpa dig att bibehålla din plats på skärmen.

Du kan ändra positionen för en läslinje genom att använda ett finger för att flytta en horisontell linje uppåt eller nedåt, eller en vertikal linje åt vänster eller höger.


Du kan ändra storleken på en gardin genom att använda ett finger för att flytta en sida av en horisontell gardin uppåt eller nedåt, eller en vertikal gardin åt höger eller vänster.

Du kan välja mellan fyra alternativ:

- Horisontell läslinje (överst till vänster)
- Vertikal läslinje (överst till höger)
- Horisontell gardin (nedre till vänster)
- Vertikal gardin (nederst till höger)

Läslinje eller gardiner visas tvärs över skärmen och fortsätter att visas tills alternativet Läslinje avmarkeras.

6.3 LJUSKÄNSLIGHET

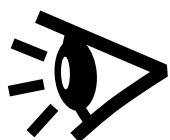

Compact 8 HD är designad för att minimera obehag från ljuskänslighet under långvarig användning av denna enhet. Denna funktion minskar ljusets våglängder som är förknippade med detta obehag. Målet är att öka komforten samtidigt som acceptabla luminans- och kontrastnivåer bibehålls. Användare med många typer av ögonsjukdomar kan dra nytta av denna funktion, men särskilt de som har makuladegeneration eller retinitis pigmentosa.

För att aktivera den här funktionen, gå till **Huvudmeny > Utseende** och tryck på Ljuskänslighet. När det är valt är funktionen Ljuskänslighet aktiverad.

6.4 KANTEFFEKTER



Alternativet Kanteffekter är utformat för att hjälpa dig att känna igen objekt genom att ta bort skräp och förbättra kanterna. Med den här funktionen aktiverad förbättras kontrasten för att hjälpa objekt att sticka ut mot bakgrunden.

För naturliga färger eller förstärkt färg finns två alternativ tillgängliga: inaktiverad (standard) eller aktiverad.

För valfri tvåfärgskombination finns fyra alternativ tillgängliga: inaktiverad (standard), jämn, endast kant eller markering.

En beskrivning av varje typ av kanteffekt följer, tillsammans med exempel.

Naturliga färger eller förstärkt färg

Om du använder naturliga färg eller förstärkt färg, tryck på något av följande:

Inaktiverat

Inga ändringar görs i bilder.



Amazon Studios series. In Tolkien's story, his lust for immortality leads to cataclysm. >

Wayland's Smithy, a Neolithic burial



Optelec



lion. These, together with The Hobbit and The Lord of the Rings, form a connected body of tales, poems, fictional histories, invented languages, and literary essays about a fantasy world called Arda and, within it, Middle-earth. Between 1951 and 1955, Tolkien applied the term legendarium to the larger part of these writings.

While many other authors had published works of fantasy before Tolkien, the great success of The

Optelec

Förbättra

Förbättrar kontrasten i bilder och konturer text.

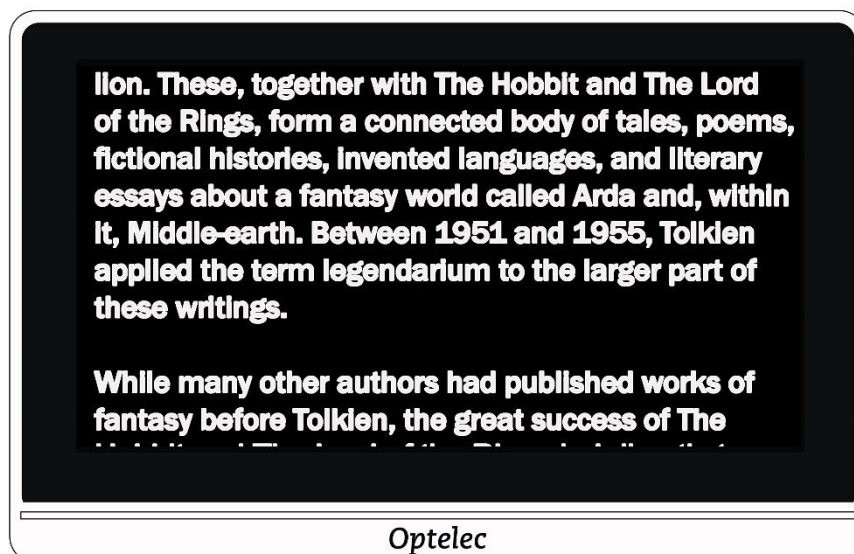
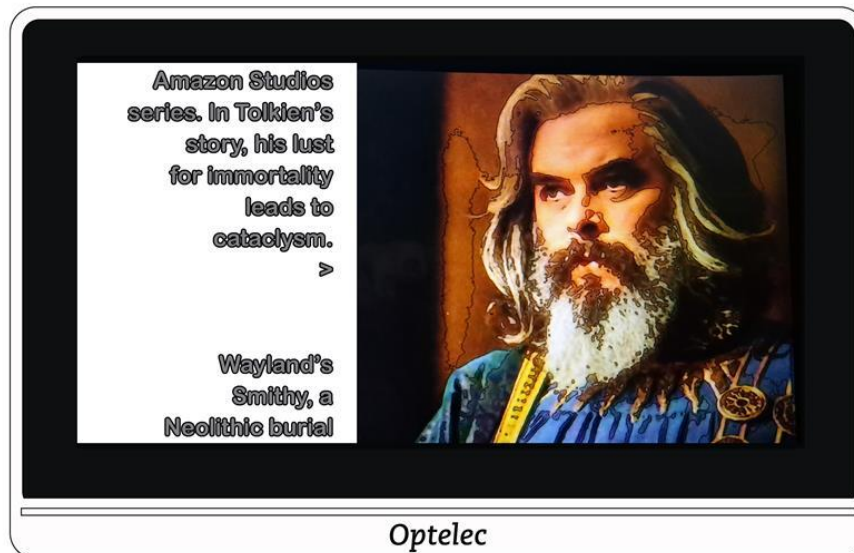


Tvåfärgskombination

Om du använder en kombination av tvåfärgad bakgrund och förgrund, tryck på något av följande:



Inaktiverat

Inga ändringar görs i bilder.

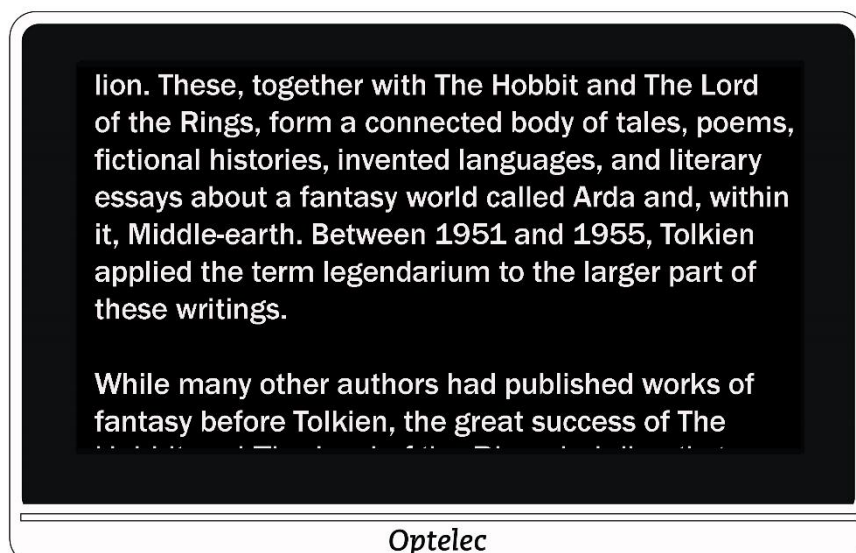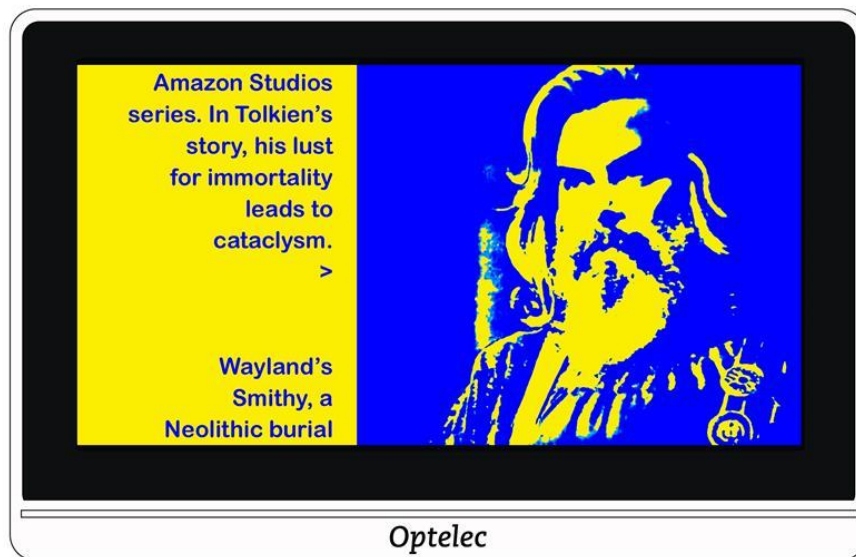


Kantutjämna

Minskar visuellt brus i bilder.

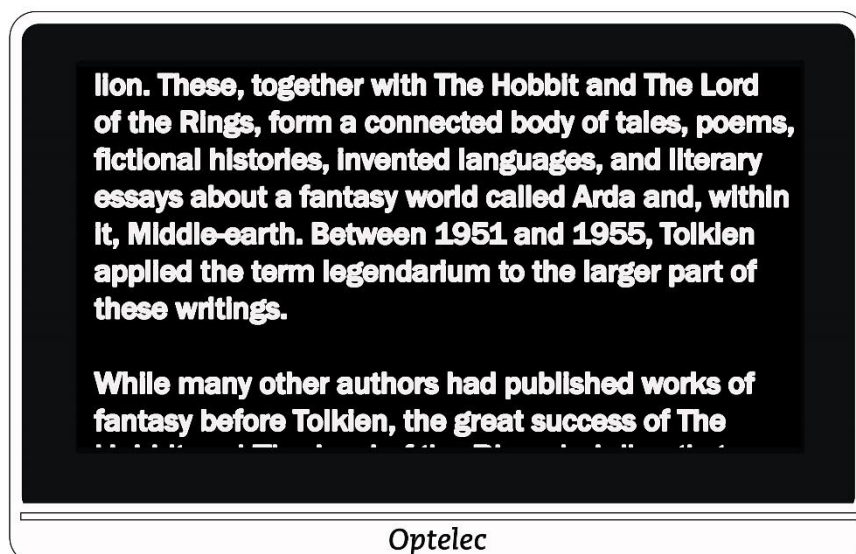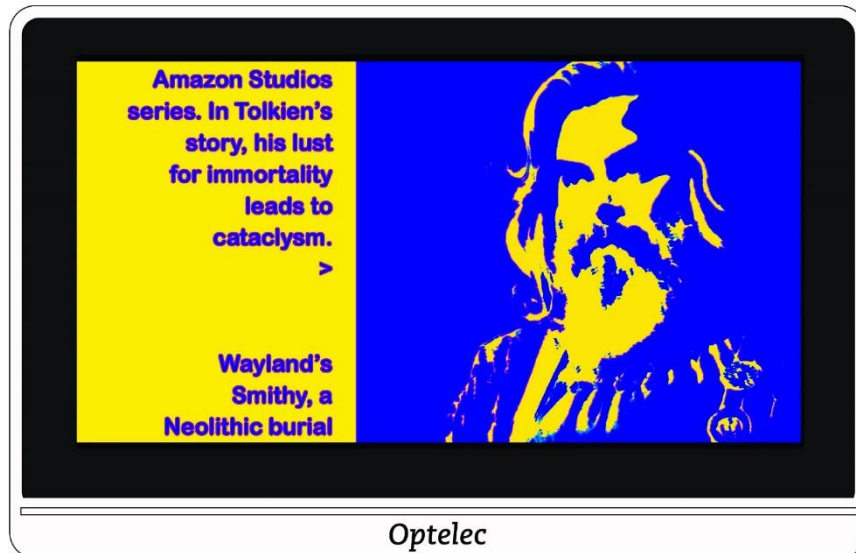

Endast kanter

Visa endast linjerna och kanterna på objekten i bilden.


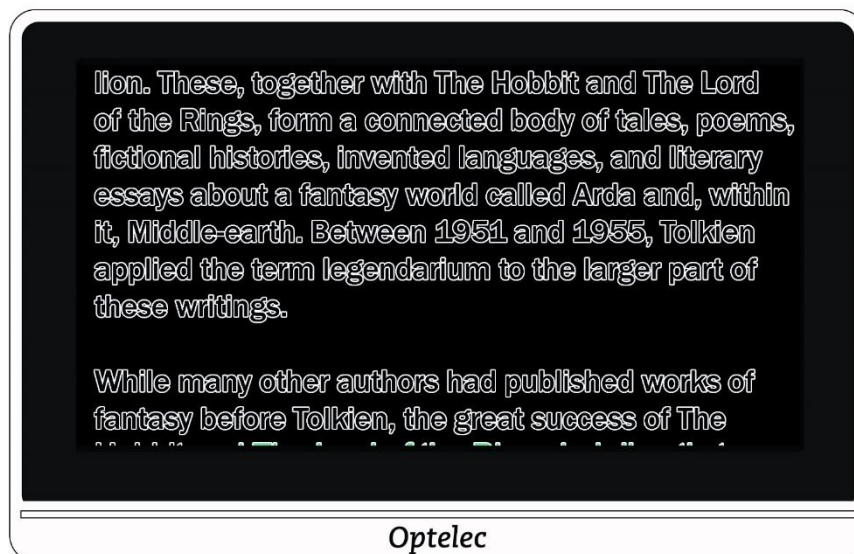


Markera


Markerar kanterna på bilder.



Du kan välja mellan fem färger som används för att markera konturerna av text och bilder. När du trycker på alternativet Markera visas alternativ. Tryck på färgen som används för att markera.

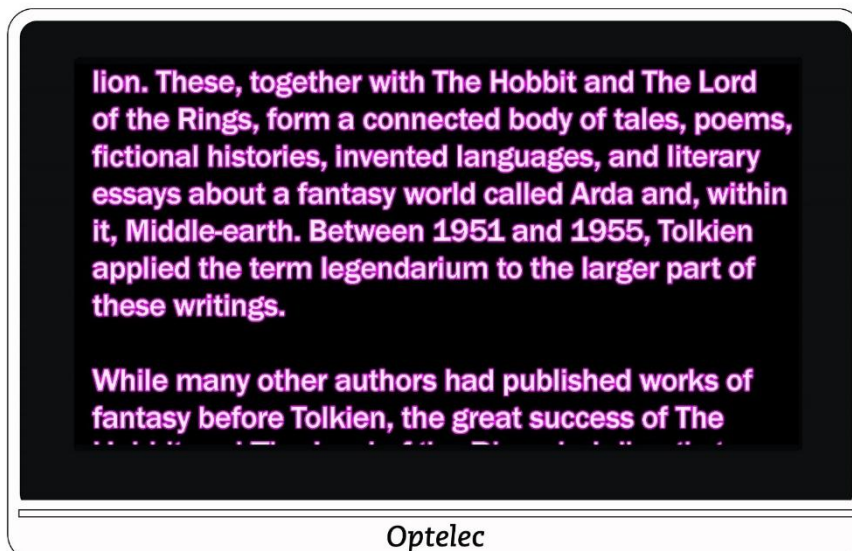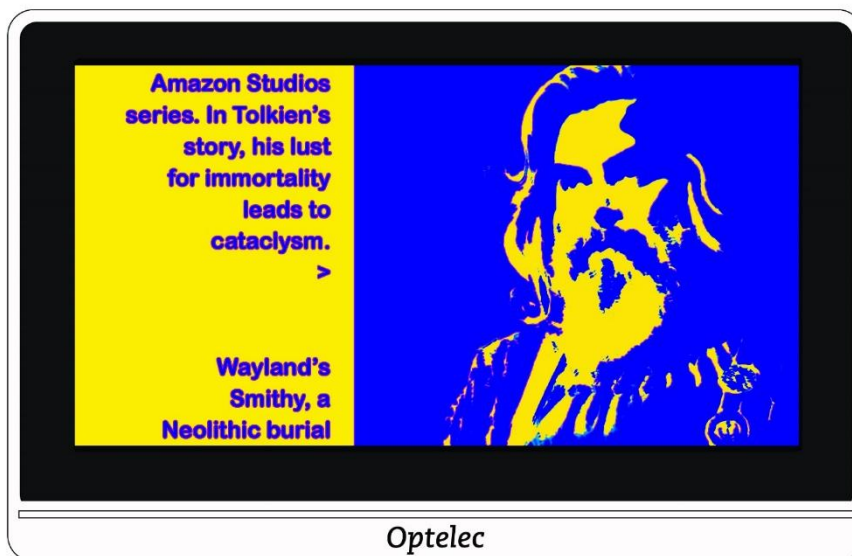

6.5 FÄRGBLINDHET

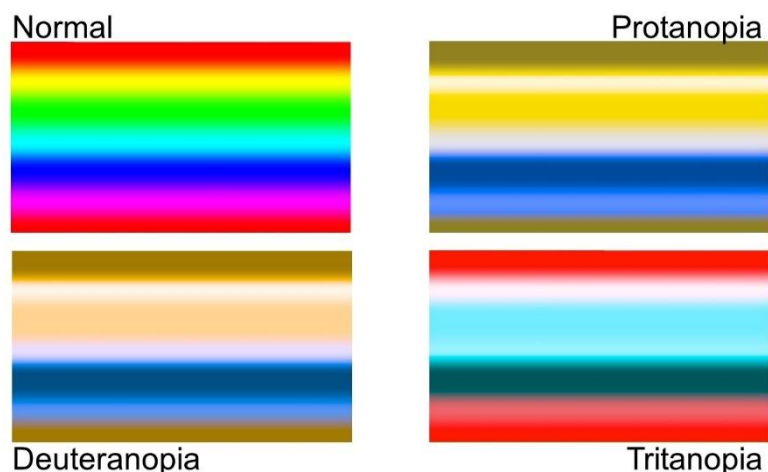


Compact 8 HD är utformad för att hjälpa till med färgdifferentiering som förbättrar kontrasten för användare med tre typer av färgblindhet. För att använda funktionen för färgblindhet, gå till **Huvudmeny > Utseende > FÄRGBLINDHET**. Du måste scrolla ner för att se det här alternativet.

Skärmen Färgblindhet visar fyra rutor. **INGET** är valt som standard. Om en av rutorna är grå, tryck på den.

Denna funktion adresserar tre typer av färgblindhet.


- Protanopia (färgblindhet mot rött) upptäcks genom att placera en blå ruta bredvid en grå.
- Deuteranopia (färgblindhet till grönt) upptäcks genom att placera en grön ruta bredvid en grå.
- Tritanopia (färgblindhet mot blått) upptäcks genom att placera en gul ruta bredvid en grå.

7. ÄNDRA SYSTEMINSTÄLLNINGAR

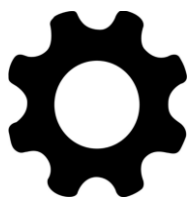

Menyn Inställningar visar alternativ som gör att du kan hantera viktiga systeminställningar. För att ändra inställningarna måste du vara i avancerat läge så att den övre knappraden visas. Om du trycker på skärmen och bara de nedersta knapparna visas är du i Enkelt läge. För att ändra läget, se avsnittet Enkelt och Avancerat läge.

Anvisningar för att visa menyn Inställningar finns efter följande grafik över menyns innehåll.

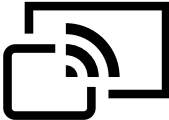Rad 1	 TEMA	 LAMPOR
Rad 2	 LJUD	 MIRACAST
Rad 3	 VILOLÄGE	 SPRÅK
Rad 4	 UPPDATERA	 ÅTERSTÄLL
Rad 5	 INFORMATION	

Så här visar du menyn Inställningar:



1. Tryck på skärmen för att visa knappfälten.
2. Tryck på menyknappen i det övre vänstra hörnet av skärmen. Huvudmenyn visas.

3. Tryck på ikonen Inställningar i det nedre högra hörnet. Menyn Inställningar visas.



Menyn

Varje alternativ i menyn Inställningar definieras i följande tabell. Detaljer finns i detta kapitel.

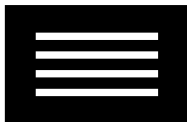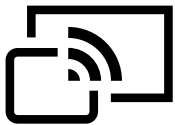Alternativ	Beskrivning
 TEMA	 Ställ in ett ljust eller mörkt tema för knapparna och menyerna.
 LAMPOR	 Styr om belysningen är aktiverad när du använder kamerorna.
 LJUD	 Gör att du kan ställa in systemvolymen.
 MIRACAST	 Ställ in Compact 8 HD så att den visas på en Miracast-aktiverad enhet, till exempel en tv eller bildskärm.
 VILOLÄGE	 Gör att du kan ställa in den inaktivitetsperiod som krävs innan Compact 8 HD går in i viloläge.

Alternativ	Beskrivning
 SPRÅK	 Ändra språket som används på knapparna och menyerna.
 UPPDATERA	 Installera den senaste Compact 8 HD-mjukvaran och firmware.
 ÅTERSTÄLL	Återställ Compact 8 HD till dess standardinställningar.
 INFORMATION	Ger fakta som kan vara till hjälp om du behöver teknisk support.

7.1 TEMA



Med alternativet Tema kan du välja en mörk eller ljus bakgrund för menyer, skärmar och knappar. Att till exempel välja **LJUS** betyder svart text mot en vit bakgrund; att välja **MÖRK** betyder vit text mot en svart bakgrund.

7.2 LAMPOR



Den här skärmen låter dig aktivera eller inaktivera de två lamporna för närbildskameran (märkt **FÖRSTORARE** på ljusskärmen) och ljuset för distanskameran (märkt **ÖVERSIKT** på ljusskärmen).



FÖRSTORARE, Dessa lampor används med närbildskameran, där stativet är öppet så att du kan läsa material under enheten. Som standard är läslamporna aktiverade för optimal bildkvalitet.



ÖVERSIKT, Denna lampa används med avståndskameran, som används för att titta på objekt på kort avstånd när stativet är stängt. Som standard är översiktslampan inaktiverad.

Tryck på rutan för att sätta belysningen på eller av för varje kamera. Fyrkanten och bockmarkeringen väljs när lamporna är tända



Skjut åt höger för att markera bockmarkeringen och aktivera lamporna. Skärmen väljs när den är aktiverad.



Dra åt vänster för att välja X och inaktivera lamporna. Skärmen är inte vald när den är inaktiverad.

7.3 LJUD



Ljudskärmen låter dig styra volymen för systemljud, till exempel kamerans slutarljud som avges när en bild har tagits. Den uppdaterade volymen tillämpas omedelbart.

Du kan ändra volymen på följande sätt:



Skjut volymknappen åt höger för att öka volymen och åt vänster för att minska den. Varje gång du ändrar ljudnivån spelas ett mjukt poppande ljud som ett exempel på volymen. När ljudet är uppe är **MUTE**-delen av skärmen inte vald och fältet markerar **X**.



Använd ja/nej-reglaget under ikonen Tystläge. När ljudet är avstängt är delen med **Tystläge** markerad.




För att stänga av systemljuden, tryck till höger för att markera **bockmarkeringen** längst ned på skärmen. När ljudet är avstängt ändrar botten av skärmens bakgrundsfärg och volymindikatorn längst upp på skärmen flyttas längst till vänster.



För att aktivera ljud, tryck till vänster för att markera **X** längst ned på skärmen. Om du tidigare ställt in volymen överst på skärmen kommer volymindikatorn ihåg den senaste inställningen och flyttas till den.


7.4 MIRACAST

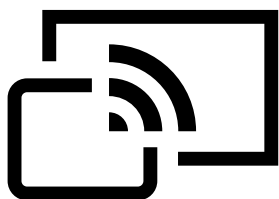

Miracast® är en standard för trådlös anslutning. Det kan beskrivas som HDMI över Wi-Fi, där Wi-Fi-anslutningen ersätter en USB till HDMI-kabel från Compact 8 HD till en dator, TV, surfplatta eller mobiltelefon.

Notera: Bluetooth krävs inte för att använda Miracast.

För att använda Miracast på Compact 8 HD måste du ha en dator eller annan bildskärmsenhet som stöder Miracast och är aktiverad för en anslutning. För anvisningar, se dokumentationen för den enheten.

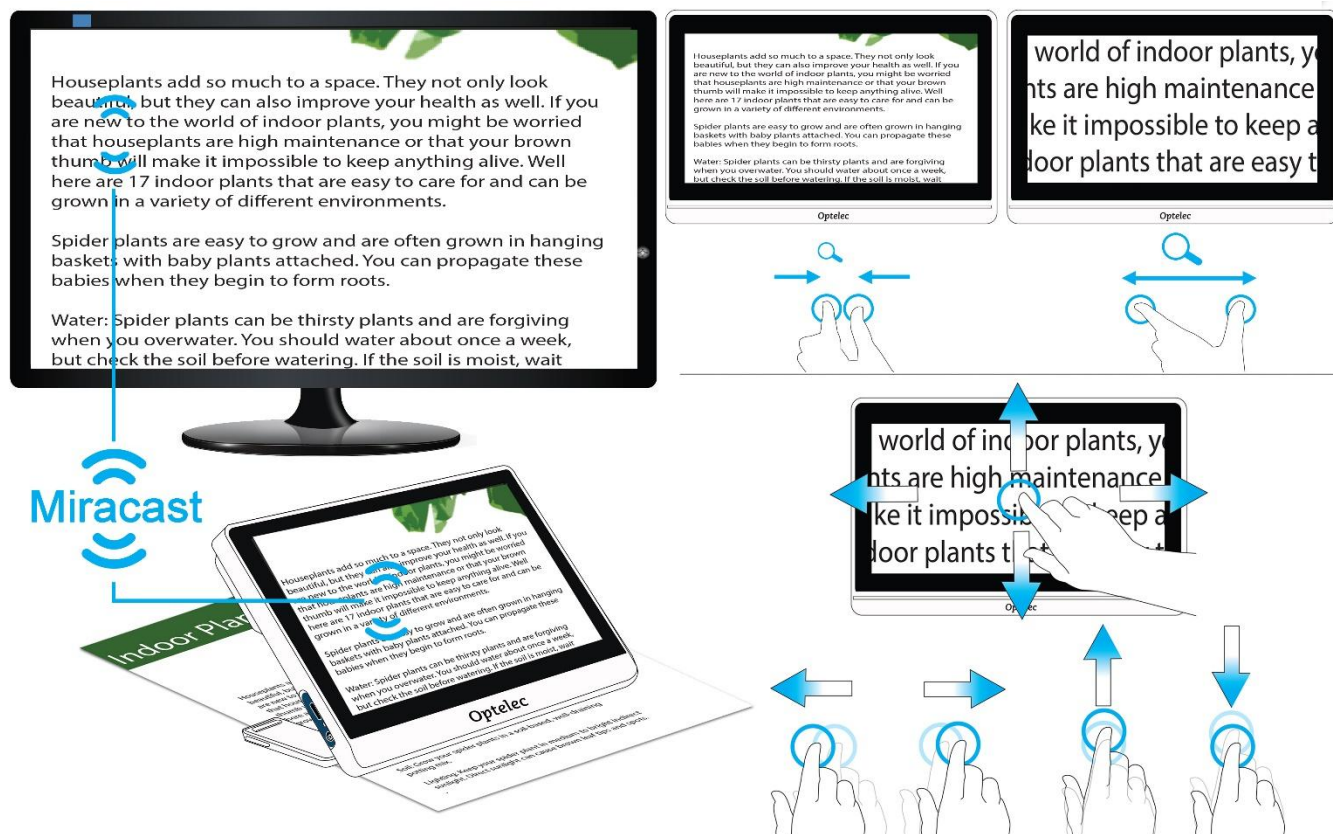

För att garantera en bra anslutning måste Compact 8 HD vara inom en meter från TV:n eller annan enhet. Beroende på anslutningen kan en kort fördröjning uppstå.

En dubblett av Compact 8 HD-skärmen visas på den anslutna enheten. Du kan panorera i en bild och den anslutna enheten kommer att visa bilden när den flyttas upp, ned, vänster och höger.

Så här aktiverar du Miracast på Compact 8 HD och ansluter den till en annan bildskärmsenhet:

1. Gå till **Huvudmeny > Inställningar > Miracast**.
2. I det övre högra hörnet av Miracast-skärmen sveper du på/av-knappen åt höger för att markera bocken.
3. Compact 8 HD söker automatiskt efter tillgängliga enheter och listar dem på skärmen. Tryck på ett enhetsnamn för att ansluta. På skärmen som visas trycker du på **ANSLUT**. (För att återgå till Miracast skärm istället för att ansluta, tryck på **GLÖM**.) Det kan ta upp till en minut att upprätta anslutningen. När den har upprättats kommer videon att strömmas och samma innehåll visas på den sammankopplade visningsenheten och Compact 8 HD.

4. För att koppla från, återgå till Miracast-skärmen. Svep knappen åt vänster i det övre högra hörnet så att **X** väljs.

7.5 VILOLÄGE



Tiden för viloläge anger vilken period av inaktivitet som krävs för att enheten ska gå ner i viloläge. Minimum är **INGEN** och max är **30 minuter**. Om du trycker på **15 MIN**, till exempel, går Compact 8 HD ner i viloläge när ingen användarinteraktion inträffar under 15 minuter.

Om du trycker på **INGEN** kommer enheten aldrig att gå ner i viloläge trots den långa inaktiviteten. Det här alternativet rekommenderas inte eftersom viloläget hjälper till att förlänga batteritiden.

7.6 SPRÅK




På språkskärmen trycker du på för att kontrollera vilket språk som används för knapparna och menyerna. Förändringen är omedelbar.

Notera: Se till att rätt språk är valt innan du stänger skärmen.

Språket ställs in när enheten startar för första gången. Men den här skärmen låter dig ändra språk när som helst.

7.7 UPPDATERA

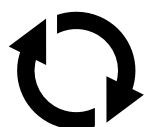

För maximal prestanda bör du regelbundet uppdatera Compact 8 HD för att installera den senaste programversionen. För att utföra uppdateringen

behöver du en dubbel USB-enhet (USB-C och USB-A) eller dubbel USB-kabel (USB-C och USB-A).

Notera: Det rekommenderas att du uppdaterar med en USB-enhet. Men du kan också använda en USB-kabel. För att göra det, kopiera uppdateringsfilen till enhetens huvudkatalog, gå till steg 2 och hoppa över steg 3. Om uppdateringen misslyckas, försök att använda en USB-enhet.

Så här uppdaterar du enheten:

1. Ladda ner mjukvaran från Optelecs webbplats till en USB-enhet som kan stödja både USB-C och USB-A. Utgivningsfilen, som har ett VHU-tillägg (Vispero Hardware Update), uppdaterar Compact 8 HD-programvaran och den fasta programvaran.

Tips: En USB-C-adapter kan användas med en USB-A-flashenhet.

2. Se till att du har minst 50 % batterikraft genom att titta på batteriikonen i huvudmenyn. Ladda enheten vid behov.



3. Sätt i USB-C-enheten med VHU-releasefilen i USB-kontakten i Compact 8 HD.
4. Gå till **huvudmenyn > Inställningar > Uppdatering**.

Tips: Om "Insert USB Drive" visas, vänd på USB-C-enheten och sätt tillbaka den i kontakten.

5. Tryck på **UPPDATERA**. Under uppdateringen, som kan ta flera minuter, visas statusmeddelanden. I slutet av uppdateringen startar systemet om.

Varning: Ta inte bort enheten förrän uppdateringen är klar. Om du gör det kan det leda till att enheten inte svarar som kräver servicereparation.

6. Efter uppdateringen visas Livevyn.

7.8 ÅTERSTÄLL



Om du är missnöjd med hur din Compact 8 HD är konfigurerad kan du återställa dess standardinställningar. Du kommer att vara i Enkelt läge, och alla inställningar kommer att återställas till hur enheten kom i lådan. Färgkombinationerna och andra anpassade inställningar som du kan ha gjort raderas.

Notera: Inga sparade bilder raderas när du återställer Compact 8 HD. Endast anpassning av enheten påverkas.

Om du vill återställa Compact 8 HD till dess fabriksinställningar, gå till **Huvudmeny > Inställningar > Återställ**. En bekräftelseskärm visas. Om du trycker på **JA** återställs dina inställningar och du återgår till Livevyn i Enkelt läge.

8. FELSÖKNING

Compact 8 HD startar inte:

Tryck ner och håll inne Strömknappen. Om enheten inte startar kan batteriet behöva laddas upp.

Anslut den medföljande USB-kabeln och laddaren till ett eluttag eller bara USB-kabeln till en dator som är igång. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan enheten visa några.

Skärmen är svart:

Om enheten ligger på ett bord eller annan plan yta kan bilden bli svart. Lyft förstoringskameran för att avgöra om detta är anledningen att skärmen är svart.

Om detta inte löser problemet - prova att starta om enheten.

Bilden är ur fokus:

Kontrollera så att närbildskameran eller avståndskameran inte är smutsig. Rengör kameranlinserna försiktigt med en lätt fuktad putsduk.

Compact 8 HD stänger av efter inaktivitet:

Detta är normalt beteende ämnat för att spara batteriladdning. Som standard går Compact 8 HD ner i viloläge efter 30 minuter av inaktivitet. Det är möjligt att ställa in den tiden för viloläge till 1, 2, 5, 15, 30 minuter eller INGEN.

Färger är svåra att upptäcka:

Försäkra dig först om att det är tillräckligt med belysning runt om. Välj en annan färgkombination genom att trycka på Kontrastknappen.

Det blänker väldigt mycket:

Vrid på objektet som förstoras så att ljuset studsar i en annan riktning vilket kan minska blänk. Man kan också prova att stänga av belysningen i menyn under alternativet Lampor.

Andra problem:

Återställ fabriksinställningar i menyn. Aktivera menyn och välj alternativet Återställ. Välj sedan Ja.

9. RENGÖRING OCH REKOND

Titta inte rakt in i LED-ljuset på baksidan av förstoringskameran. Håll enheten borta från vatten eller hög luftfuktighet. Sänk inte ner i vätska.

Stäng av Compact 8 HD innan den rengörs.

Använd endast de kablar som följer med din Compact 8 HD.

Batteri:

- Compact 8 HD har ett internt uppladdningsbart Litium-Jon-batteri.
- Lämna inte eller använd enheten nära en värmekälla eller eld. Förvara inte enheten i höga temperaturer.
- Använd endast USB-kompatibel strömadapter för att ladda batteriet.
- Plocka inte isär eller modifiera enheten.
- Sänk inte ner enheten i vatten, låt den inte bli blött.
- Utsätt inte enheten för slag eller stötar.
- Stick inte hål på eller slå enheten med vassa föremål eller en hammare.
- Om batteriet läcker och vätska kommer in i dina ögon, gnugga inte ögonen. Skölj istället ögonen med rent rinnande vatten och sök genast sjukvårdshjälp för att undvika skador.
- Om batteriet läcker och vätskan kommer i kontakt med skinn, skölj genast det utsatta området med rinnande vatten för att förhindra skada.

Rengöra LCD-skärmen:

Försäkra dig om att enheten är avstängd samt ej ansluten till ett strömuttag.

Använd endast mikrofiberdukar av typen som följer med enheten för att rengöra LCD-skärmen.

Rengör försiktigt skärmen med en mikrofiberduk.

Om man väljer att rengöra skärmen med rengöringsmedel måste man försäkra sig om att den är ok att använda på LCD-skärmen. Destillerat vatten, isopropyl-alkohol samt lösningar med vinäger och vatten (inte mer

än 10% vinäger) är ok att använda som rengöringsmedel för LCD-skärmen.

Använd endast en minimal mängd vätska för att undvika fukt i enheten. Om vätska kommer in i enheten kan den skadas. Försäkra dig om att ingen vätska finns kvar på skärmen. Repetera tidigare steg för fläckar som är svåra att få bort.

Använd aldrig hushållsrengöringsmedel för att rengöra skärmen.

Spreja aldrig vätska direkt på LCD-skärmen.

Använd aldrig starka rengöringsprodukter som innehåller etanol, etylsyra, ammoniak, aceton eller metylklorid.

Använd aldrig produkter som innehåller isopropyl-alkohol för att rengöra kameranlinsen.

Använd aldrig pappersservetter för att rengöra.

Rengöra utsidan på enheten:

Försäkra dig om att enheten är avstängd samt ej ansluten till ett eluttag.

Om det är nödvändigt kan du använda en fuktig tygbit för att rengöra enhetens utsida. Milda rengöringsmedel och desinfektionsmedel med isopropyl-alkohol går bra att använda – undvik dock själva kameranlinsen.

Försäkra dig om att ingen vätska finns kvar på enheten. Repetera tidigare steg för fläckar som är svåra att få bort.

Använd aldrig slipande material, sprej, etanol eller lösningsmedel för att rengöra utsidan på din Compact 8 HD.

10. INFORMATION



Informationsskärmen innehåller produktinformation, inklusive versioner av programvara och firmware, plattformsnamn och serienummer.

Beskrivning av **TEKNISK SUPPORT** följer.

Teknisk support

Den här sidan tillhandahålls för att hjälpa till med att utvärdera och korrigera systemproblem. Du behöver den endast om du uppmanas till det av teknisk support eller din distributör. Innan du ringer eller skickar e-post och begär hjälp, följ dessa förslag för snabb hjälp.

- Skriv en kort beskrivning av problemet med ett exempel, till exempel serien av åtgärder som vidtas när problemet uppstår. Ta bilder om möjligt.
- Skriv ner siffrorna på informationsskärmen: Appversion, HAL-version, plattform och serienummer.

Exportera supportfil

Om teknisk support ber dig att skicka en supportfil via e-post, följ dessa anvisningar:

1. Sätt i en USB-C-enhet i Compact 8 HD.
2. Gå till **Huvudmeny > Inställningar > Informationsmeny > Teknisk support**.
3. Tryck på **EXPORTERA SUPPORT** för att exportera Compact8SupportData.zip. När du ser meddelandet om att supportdata har kopierats kan du ta bort USB-C-enheten.
4. Kopiera den exporterade filen från USB-C-enheten till en enhet där du kan skapa ett e-postmeddelande.
5. Bifoga den exporterade filen till ett e-postmeddelande. I det här e-postmeddelandet ger du en kortfattad beskrivning av problemet, plus all information som begärs av teknisk support.
6. Skicka e-postmeddelandet till den angivna adressen.

7. Ta bort supportfilen genom att följa stegen i nästa procedur.

Ta bort supportfil

Om teknisk support uppmanar att radera supportfilen:

1. Gå till **Huvudmeny > Inställningar > Informationsmeny > Teknisk support**.
2. Tryck på **DELETE SUPPORT**.
3. På bekräftelseskärmen trycker du på **JA**.

11. TEKNISK SPECIFIKATION

Storlek: 20.5 x 13.9 x 2.5 cm

Bildskärm: 8" ISP LCD

Vikt: 780 g

Ingående ström: Anslutning av USB Typ C. 5V@2,4A

Batteridrift: 3,2 timmar

Batterityp: Litium-jon

Laddningstid: upp till 4 timmar

Driftförhållanden:

Temperatur: 10 °C till 40 °C

Luftfuktighet: 20% till 80%

Förhållande vid transport och förvaring:

Temperatur: -20 °C till 60 °C

Luftfuktighet: 10% till 95%

Polar Print

Växel, teknisk hjälp och support
Tel 010-470 99 00

info@polarprint.se

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Twistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHOV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ