

ZoomCam – Visningsappar och inställningar

OS

Applikationskonfiguration



Windows

Ljud: Aktivera "Lyssna på den här enheten"

Inställningar – System – Ljud – Fler ljudinställningar – Inspelning – Mikrofon ZoomCam - Egenskaper – Lyssna – Lyssna till denna enhet

Windows
Kamera



Klicka på nästa kamera om bilden inte visas.



Video - Inställningar 1080p 16:9 60fps.

ZoomText Verktyg - Kamera



- Kamera: ZoomCam USB-videoström
- Upplösning: 1920 x 1080 – Bildhastighet: 60 FPS

SuperNova Visual – Anslut och visa



- Kamera: ZoomCam USB-videoström
- Använd kamerans optiska zoom.
- Använd kamerafärgbyte.
- Inställningar: upplösning 1920 x 1080, 60 fps.
- Video – Enhet – ZoomCam USB-videogränssnitt.
- Ljud – Enhet – ZoomCam USB-gränssnitt.
- Ljud – Ljud av.



MacOS

[Kamera](#)
[Fönster](#)



iPadOS 17

[CamX](#)



Endast USB-C iPads.



ChromeOS

Ljud över externa högtalare (minijackadapter eller Bluetooth-adapter).

Kamera



Klicka på nästa kamera om bilden inte visas.



Klicka på Spegling om bilden är spegelvänd.



Android

[nExt kamera](#)



Endast surfplatta med USB-C 3-dataport.
Inställningar: Aktivera "Audio loopback".



Linux

Ljud: Lyssna på mikrofon: module-loopback eller alsaloop.

[Cheese](#)



- Kamera: ZoomCam USB-videoström.
- Upplösning: 1920 x 1080.