

Användarmanual



STELLARTREK
DEL 1 av 2

20260311

Om StellarTrek

HumanWare är stolta över att presentera StellarTrek, en kraftfull, bärbar GPS-enhet. Utformat som ett innovativt orienteringshjälpmedel för studenter, folk i arbetslivet eller aktiva människor med synnedsättning.

Tänkt användning

StellarTrek är ett orienteringshjälpmedel för blinda eller personer med synnedsättning och avsedd att användas utomhus. GPS-data bearbetas i realtid av dedikerad navigationsmjukvara för att avgöra riktning till en destination. Som sådan är StellarTrek tänkt att användas av blinda eller personer med nedsatt syn.

Det finns inga medicinska fördelar associerade med StellarTrek.

StellarTrek gör det möjligt för dig att ta dig från en adress till en annan med precisa ljudinstruktioner. Enheten kan känna igen en gatuadress och läsa text med hjälp av optisk teckenigenkänning (OCR). Den har också ett kompassverktyg, upptäckt/igenkänning av övergångsställen, identifierar vissa färger samt läser streckkoder. I korthet ger StellarTrek stöd till blinda och synsvaga personer och förbättrar deras livskvalitet.

Detta dokument är en användarmanual som detaljerat beskriver hur du konfigurerar och använder StellarTrek.

Copyright 2025. Alla rättigheter förbehållna, Technologies HumanWare.

Denna användarmanual är skyddad av upphovsrätt som tillhör HumanWare, med alla rättigheter förbehållna. Denna användarmanual får inte kopieras i delar eller till sin helhet, utan skriftlig tillåtelse av HumanWare.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. ÖVERBLICK AV STELLARTREK	4
1.1 UPPACKNING AV SPELAREN	4
1.2 FYSISK BESKRIVNING AV STELLARTREK	4
1.2.1 <i>Framsida av enheten</i>	4
1.2.2 <i>Vänster sida av enheten</i>	4
1.2.3 <i>Höger sida av enheten</i>	4
1.2.4 <i>Nederkanten av enheten</i>	5
1.2.5 <i>Baksida av enheten</i>	5
1.2.6 <i>Laddning av batteriet</i>	5
1.2.7 <i>Bälteshållare</i>	6
1.3 STRÖMKNAPPEN	6
1.3.1 <i>Slå på och av spelaren</i>	6
1.3.2 <i>Viloläge</i>	6
1.4 KNAPPBESKRIVNINGSLÄGE	6

1.5	KNAPPBESKRIVNING	6
1.6	KOM IGÅNG.....	8
2.	KONFIGURERA STELLARTREK	10
2.1	SPRÅK OCH RÖSTER.....	10
2.1.1	<i>Hantera röster</i>	<i>10</i>
2.1.2	<i>System, navigering och läsröster.....</i>	<i>11</i>
2.1.3	<i>Ändra språk för taligenkänning</i>	<i>11</i>
2.1.4	<i>Ändra talhastighet.....</i>	<i>12</i>
2.1.5	<i>Automatisk röstväxling.....</i>	<i>12</i>
2.2	TEXTINMATNING	13
2.2.1	<i>Ändra tangentbordslayout.....</i>	<i>13</i>
2.3	BLUETOOTH.....	14
2.3.1	<i>Aktivera bluetooth.....</i>	<i>14</i>
2.3.2	<i>Parkoppla ny bluetoothenhet</i>	<i>14</i>
2.3.3	<i>Ansluta till bluetoothenhet.....</i>	<i>15</i>
2.3.4	<i>Koppla ifrån bluetoothenhet.....</i>	<i>15</i>
2.3.5	<i>Glöm bort bluetoothenhet</i>	<i>15</i>
2.3.6	<i>Visa information om ansluten enhet.....</i>	<i>15</i>
2.4	TRÅDLÖST NÄTVERK.....	16
FÖR ATT KONFIGURERA TRÅDLÖST NÄTVERK (WiFi) I STELLARTREK MÅSTE DU FÖRST GÅ IN I MENYN TRÅDLÖST NÄTVERK:.....		16
MENYN INNEHÅLLER FÖLJANDE OBJEKT:		16
2.4.1	<i>Aktivera trådlöst nätverk</i>	<i>16</i>
2.4.2	<i>Nätverksstatus.....</i>	<i>16</i>
2.4.3	<i>Sök efter tillgängliga nätverk.....</i>	<i>16</i>
2.4.4	<i>Visa sparade nätverk.....</i>	<i>17</i>
2.4.5	<i>Ange nätverk manuellt.....</i>	<i>17</i>
2.5	INSTALLERA OCH UPPDATERA KARTOR	17
2.5.1	<i>Välja och installera kartor</i>	<i>18</i>
2.5.2	<i>Installera kartor utan Wi-Fi-anslutning (offline).....</i>	<i>19</i>
2.6	EXPORTERA ENHETSKONFIGURATION	20
2.7	IMPORTERA ENHETSKONFIGURATION	21
2.8	TID OCH ENHETSSTATUS	21
2.9	UPPDATERA MJUKVARAN.....	22
2.10	TIDSGRÄNS FÖR AVSTÄNGNING I VILOLÄGE.....	22
2.11	FABRIKSÅTERSTÄLLNING	22
3.	GPS - ORIENTERINGSLÄGE	24
3.1	ALLMÄN BESKRIVNING.....	24
3.1.1	<i>Kartor installerade på enheten.....</i>	<i>25</i>
3.1.2	<i>Favoriter</i>	<i>25</i>
3.1.3	<i>Intressepunkter.....</i>	<i>25</i>
3.1.4	<i>Längdenheter</i>	<i>25</i>
3.2	ANVÄNDA GPS	26
3.2.1	<i>Uppdatera position</i>	<i>26</i>
3.2.2	<i>Uppdatera positioner för GPS-satelliter</i>	<i>26</i>
3.2.3	<i>Stegräknare.....</i>	<i>27</i>
3.3	BÄRA STELLARTREK.....	28
3.4	UTFORSKA	28

3.4.1	<i>Information vid utforska omkring</i>	28
3.4.2	<i>Tvinga färdläge</i>	30
3.5	HÄMTA INFORMATION	30
3.5.1	<i>Var är jag?</i>	30
3.5.2	<i>Vad finns runt omkring?</i>	31
3.5.3	<i>Nästa instruktion eller nästa korsning</i>	33
3.5.4	<i>Upprepa föregående meddelande</i>	34
3.5.5	<i>Allmän information</i>	34
3.6	ALTERNATIV FÖR FAVORITER	34
3.6.1	<i>Spela in favoriter</i>	34
3.6.2	<i>Ställa in intressepunkt som favorit</i>	35
3.6.3	<i>Sortera favoriter</i>	35
3.6.4	<i>Exportera instruktioner för fotgängar- och motoriserat läge</i>	36
3.7	RUTTER	36
3.7.1	<i>Spela in rutt</i>	36
3.7.2	<i>Aktivera inspelad rutt</i>	37
3.7.3	<i>Avvika från rutt</i>	38
3.7.4	<i>Förhandsvisa rutt inomhus</i>	38
3.7.5	<i>Avbryta en rutt</i>	38
3.8	VÄGLEDNING TILL FAVORIT	39
3.9	VÄGLEDNING TILL ADRESS	40
3.9.1	<i>Skapa favorit för en adress</i>	40
3.10	VÄGLEDNING TILL POSTNUMMER (STORBRIANNIEN OCH NEDERLÄNDERNA)	41
3.11	UTFORSKARLÄGET	42
3.11.1	<i>Starta Utforskarläget från din aktuella position</i>	42
3.11.2	<i>Starta Utforskarläge från en specifik favorit, intressepunkt eller adress</i>	42
3.11.3	<i>Använda Utforskarläge</i>	42
3.12	LÄSA ÖPPET OMRÅDE	43
3.13	KONFIGURATION AV FAVORITER OCH RUTTER	43
3.13.1	<i>Konfigurera Favoriter</i>	44
3.13.2	<i>Konfigurera rutter</i>	45
3.13.3	<i>Exportera personlig data</i>	46
3.13.4	<i>Importera personlig data</i>	46

1. Överblick av StellarTrek

1.1 Uppackning av spelaren

Förpackningen innehåller följande artiklar:

- StellarTrek
- USB-C-kabel
- Nätadapter
- Bälteshållare och rem
- Kom igång-blad

1.2 Fysisk beskrivning av StellarTrek

1.2.1 Framsidan av enheten

I mitten på enhetens framsida finns nio knappar. De två övre knapparna är **Tillbaka** (vänster) och **Gå till** (höger). Till vänster om **Tillbakaknappen** finns ett litet hål. Detta är mikrofonen.

Nedanför **Tillbaka** och **Gå till** finns fyra pilknappar, **Upp**, **Ner**, **Vänster** och **Höger**, samt knappen **Bekräfta** i mitten. Pilknapparna **Vänster** och **Höger** används normalt till att navigera i menyer medan pilknapparna **Upp** och **Ner** används för att navigera i snabbmenyer.

De två nedre knapparna är **Var är jag?** (vänster) och **Röstknappen** (höger). Slutligen, nere på framsidan av enheten sitter en högtalare i form av en fördjupning.

1.2.2 Vänster sida av enheten

Uppe på vänster sida av enheten finns två knappar. Dessa är **Volym Upp** samt **Ner** och används för att höja och sänka volymen. För bekvämlighetens skull sparas separata volyminställningar för den inbyggda högtalaren och anslutna hörlurar.

1.2.3 Höger sida av enheten

På höger sida av enheten, nära det övre hörnet sitter **Strömknappen**. Tryck ner och håll inne denna knapp tills det vibrerar för att starta enheten. Nedanför **Strömknappen** finns en ljusdiod. Denna ljusdiod lyser när StellarTrek ansluts till en nätadapter. Ljusdiodens färg är röd när batterinivån är under 15%, orange när batterinivån är mellan 15 och 90% och grön när batterinivån är över 90%. Nedanför ljusdioden sitter **Inspelningsknappen**.

1.2.4 Nederkanten av enheten

Till höger på StellarTreks nederkant finns en 3,5mm ljudkontakt för att ansluta hörlurar.

I mitten av nederkanten finns en USB-C-anslutning. Använd denna anslutning för att ladda enheten eller för att komma åt innehåll på enhetens interna minne med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

Anslut USB-kabeln till denna port och andra sidan av kabeln till en USB-port på en dator för att överföra innehåll mellan datorn och enheten.

1.2.5 Baksidan av enheten

Nära övre kanten på baksidan av enheten finns två kameralinser. Det är ett kamerasystem som kan användas för att både hitta husdörrar och gatunummer samt identifiera text.

Nära nedre kanten på baksidan finns modell- och serienummer för enheten. Samma information finns även i Inställningsmenyn som du kommer åt genom att trycka och hålla ner **Pil ner**.

Längst ner på baksidan av enheten finns en fästpunkt för remmen som kan användas för att underlätta samt göra det säkrare att bära med sig StellarTrek.

1.2.6 Laddning av batteriet

När batteriet är fulladdat kan enheten användas i upp till 24 timmar. Batteriet kommer automatiskt laddas upp om det behövs så snart enheten är ansluten till ett eluttag eller en dator. När enheten är avslagen och ansluts känner du en lång och två korta vibrationer som indikerar att batteriet laddas. Enheten kan användas under uppladdning. Tryck två gånger **Pil ner** för att få reda på batteriets laddningsstatus. En full uppladdning tar upp till 3,5 timmar via ett eluttag. Datorer ger olika strömnivåer eller ingen ström alls via sina USB-portar beroende på dator och konfiguration. Därför kan det ta längre tid, eller inte gå alls, att ladda StellarTrek via en USB-port på en dator.

Notera att det är rekommenderat att endast använda den medföljande USB-C-nätadaptern för säker och optimerad laddning.

Varning: Det är normalt att batteriet blir varmt under uppladdning. Det är därför rekommenderat att inte ladda upp batteriet med enheten nära en värmekälla eller inne i bälteshållaren. Batteriet laddar inte om enhetens innertemperatur är 45 grader eller högre.

1.2.7 Bälteshållare

StellarTrek sätts in i bälteshållaren med övre kanten först så att USB-C-porten och 3,5mm ljudutgången blir tillgängliga. När enheten placeras i bälteshållaren på detta sätt får du även tillgång till Volymknapparna på vänster sida samt Inspelnings- och Strömknappen på höger sida.

Notera att enheten måste plockas ur bälteshållaren för att använda kameran som sitter placerad på baksidan, den är annars skyddad av fodralet.

1.3 Strömknappen

1.3.1 Slå på och av spelaren

För att starta enheten, tryck och håll ner **Strömknappen** som du finner på vänster sida av enheten, nära det övre hörnet. Du kommer att känna en vibration. Efter en kort stund hörs ett välkomstmeddelande.

För att slå av enheten, tryck ner och håll inne **Strömknappen** igen. StellarTrek meddelar: "**Tryck Bekräfta för att stänga av eller någon annan knapp för att avbryta**". Efter att knappen **Bekräfta** har tryckts in hörs två pip och två vibrationen känns vilket indikerar att enheten stänger av. Notera: Du måste minst 30 sekunder innan du kan starta StellarTrek igen.

1.3.2 Viloläge

Försätt StellarTrek i viloläge genom att trycka på **Strömknappen**. Tryck på **Strömknappen** igen för att återaktivera den

1.4 Knappbeskrivningsläge

Du kan använda Knappbeskrivningsläget när som helst för att få hjälp att komma ihåg de olika knapparna på StellarTrek. För att aktivera Knappbeskrivningsläget, dubbeltryck på **Var är jag** som finns nere till vänster på enheten framsida.

När Knappbeskrivningsläget är aktivt kommer enheten att meddela namnet på varje knapp du trycker på. Avsluta Knappbeskrivningsläget genom att dubbeltrycka på **Var är jag** igen.

1.5 Knappbeskrivning

- **Strömknappen:** Tryck för att försätta enheten i Viloläge. Tryck igen för att väcka enheten. Tryck ner och håll inne **Strömknappen** för att stänga av enheten. Ett bekräftelsemeddelande hörs. Tryck **Bekräfta** för att slutföra avstängningen.

- **Inspelningsknappen:** Tryck för att skapa en favorit och spela in en fyra sekunders röstbeskrivning.
 - Tryck och håll ner **Inspelningsknappen** för att påbörja skapande av en färdväg och du kan även spela in en 4 sekunders beskrivning av färdvägen. Notera att inspelningar kan ändras vid ett senare tillfälle.
- Knappen **Volym upp:** Tryck för att öka röstvolymen.
- Knappen **Volym ner:** Tryck för att minska röstvolymen.
 - Tryck samtidigt på knapparna **Volym upp** och **ner** för att växla till justering av hastighet. När detta är gjort kan du ändra StellarTreks rösthastighet med **Volymknapparna**.
- **Röstknappen:** Tryck för att upprepa senast lästa meddelande. Kan även användas för att avbryta uppspelning av ett meddelande.
 - Tryck och håll ner **Röstknappen** för att aktivera funktionen röstigenkänning
- Knappen **Var är jag:** Ger information om användarens aktuella position.
 - Tryck och håll ner **Var är jag** för att enheten ska meddela vad som finns i närheten (favoriter eller intressepunkter) inom en radie på 200 meter i fotgängarläge och 500 meter i motoriserat läge.
 - Dubbeltryck på **Var är jag** aktiverar Knappbeskrivningsläget.
- Knappen **Tillbaka:** Används för att flytta till föregående nivå i en meny. När du följer en rutt kan du avaktivera denna och istället utforska närområdet utan att få vägledning.
 - Tryck och håll ner **Tillbaka:** Oavsett vilka åtgärder som har utförts kan du alltid återgå till grundläggande utforskning av omgivningen genom att trycka och hålla ner knappen **Tillbaka**.
- Knappen **Gå till:** Används för att kontrollera inmatad text eller för att aktivera vägledning till en favorit. Tillhandahåller en lista med favoriter som finns tillgängliga som möjliga destinationer.
 - Tryck och håll ner **Gå till** för att aktivera en förinspelad rutt.
- Knappen **Bekräfta:** Används för att aktivera funktioner samt bekräfta aktuellt val.
- **Vänster- och Högerpil:** Används för att utforska alternativ i listor.

- Tryck och håll ner **Högerpil** för att låsa öppet område och förhindra StellarTrek från att automatiskt placera dig på närmaste gata. Tryck och håll ner **Högerpil** igen för att lämna öppet område. Nu kommer StellarTrek automatiskt att känna ifall du befinner dig i ett öppet område eller på en gata. Tryck och håll ner vid utforskande av rutt för att gå till läget Förhandsgranskning inomhus.
- Tryck och håll ner **Vänsterpil** för att aktivera menyn för färdläge där du kan välja mellan fotgängarläge, motoriserat läge eller automatiskt läge. Tryck och håll ner **Vänsterpil** när du följer en rutt för att lägga om rutten.
- **Pil upp:** Används för att aktivera kartans Utforskarläge. **Pil upp** används även för att flytta upp i en snabbmeny och visa tillgängliga alternativ.
 - Tryck och håll ner **Pil upp** för att gå till Applikationer (se avsnitt 4 för mer information).
- **Pil ner:** Används för att få systeminformation. Använd pilknapparna **Vänster** och **Höger** för att få tillgång till flera informationsnivåer. **Pil ner** används även för att flytta ner i en snabbmeny och visa tillgängliga alternativ.
 - Dubbeltryck på **Pil ner** meddelar aktuell systemstatus.
 - Tryck och håll ner **Pil ner** aktiverar systeminställningarna. Använd pilknapparna **Vänster** och **Höger** för att navigera i menyer och använd **Bekräfta** för att aktivera markerat alternativ.
- **Inaktivitet från användare:** Varje gång du meddelas att göra ett val måste du bekräfta valet. Om ingenting utförs inom 45 sekunder kommer StellarTrek att meddela det aktuella alternativet i menyn.

1.6 Kom igång

När StellarTrek startas för första gången måste du följa en inställningsguide för att konfigurera enheten.

Innan du börjar, var god notera att om batterinivån är under 25% kommer StellarTrek uppmana dig att ladda enheten. Ladda med nätadapter i minst 30 minuter innan du försöker igen.

- En meny för språkval kommer att presenteras. Använd Vänster- och Högerpil för att navigera i listan och tryck **Bekräfta** för att välja önskat språk som enheten ska använda.
- Ett introduktionsmeddelande läses upp. Tryck **Högerpil** för att fortsätta.

- En sammanfattning av enhetens huvudknappar beskrivs. Tryck **Högerpil** för att fortsätta.
- En kort text som beskriver hur man skriver med tangentbordet läses upp. Tryck **Högerpil** för att fortsätta.
- Sedan presenteras en meny för val av tangentbordslayout. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att navigera i listan och tryck **Bekräfta** för att välja önskad tangentbordslayout för enheten (se avsnitt 2.2.1).
- Du kommer nu till menyn för aktiva applikationer. Enheten frågar om du vill behålla standardkonfigurationen eller om du vill anpassa vilka applikationer som installeras. Om du trycker på någon annan knapp än **Bekräfta**, går du vidare till nästa steg och alla applikationer installeras som standard. Om du trycker på **Bekräfta** visas en lista med applikationer som är förvalda, och du kan avmarkera dem genom att trycka **Bekräfta** på den applikation du vill ta bort. Tryck på **Gå till** när du är klar. Endast de valda applikationerna kommer att installeras.
- StellarTrek ger dig sedan möjlighet att ställa in Bluetooth-enheter (se avsnitt 2.3 nedan för mer information).
Notera att det går att hoppa över detta steg med hjälp av **Vänster-** och **Högerpil** tills du når alternativet "Fortsätt till nästa steg" och sedan trycker **Bekräfta**.
- StellarTrek ger dig sedan möjlighet att ställa in trådlöst nätverk (se avsnitt 2.4).
Notera: Det går att hoppa över detta steg med hjälp av **Vänster-** och **Högerpil** tills du når alternativet "Fortsätt till nästa steg" och sedan trycker **Bekräfta**. Notera att det krävs att ställa in ett trådlöst nätverk för att kunna installera uppdateringar och kartor.
- Om en ny uppdatering finns tillgänglig frågar StellarTrek om du vill installera den genom att trycka **Bekräfta**.
- StellarTrek ber dig att installera kartor (se avsnitt 2.5).
- Om kartor installerades offline (se avsnitt 2.5.2), visas istället för installationsmenyn för kartor en lista över installerade kartor. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att navigera tills du når knappen "Fortsätt till nästa steg", och tryck sedan **Bekräfta**.
- Enheten ger information om Knappbeskrivningsläget och ytterligare inställningar. Tryck **Bekräfta** för att börja använda enheten.

Notera att alla inställningar som görs under denna process kan ändras via Inställningsmenyn vid ett senare tillfälle (se avsnitt 5 för mer detaljer).

2. KONFIGURERA STELLARTREK

2.1 Språk och röster

2.1.1 *Hantera röster*

Som standard finns det endast en röst installerad på enheten. När enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk får du dock tillgång till flera olika talsyntesröster från Acapela. Du kommer att kunna hantera installerade röster genom att lägga till en ny eller ersätta den befintliga rösten (med ett maxantal på två röster installerade på enheten).

Notera: Installerade röster kan ersättas men inte tas bort.

2.1.1.1 *Lägga till en ny röst till StellarTrek*

- Tryck och håll ner Pil ner för att aktivera Inställningsmenyn.
- Tryck Vänster- och Högerpil i Inställningsmenyn för att komma till alternativet röster och tryck Bekräfta.
- Tryck Vänster- och Högerpil i Röstmenyn för att komma till alternativet Hantera röster och tryck Bekräfta.
- Tryck Vänster- och Högerpil i menyn Hantera röster för att komma till alternativet Lägg till röst och tryck Bekräfta.
- Välj önskat språk i listan och tryck Bekräfta.
- Efter att språk har valts visar StellarTrek en lista med olika röster som du kan välja för detta språk. Välj önskad röst i listan och tryck Bekräfta. Tryck på någon annan knapp för att avbryta.
- Slutligen kommer enheten att visa hur mycket utrymme den nya rösten kräver. Tryck Bekräfta för att fortsätta.

Så snart rösten är vald kommer den att installeras på enheten. StellarTrek meddelar "Uppdatering av röster klart" och återgår till röstmenyn.

2.1.1.2 *Ersätta en röst i StellarTrek*

- Tryck och håll ner Pil ner för att aktivera Inställningsmenyn.
- Tryck Vänster- och Högerpil i Inställningsmenyn för att komma till alternativet röster och tryck Bekräfta.
- Tryck Vänster- och Högerpil i Röstmenyn för att komma till alternativet Hantera röster och tryck Bekräfta.
- Välj rösten du vill ersätta och tryck Bekräfta.
- Använd Vänster- och Högerpil för att välja önskat språk i listan och tryck Bekräfta.

- Efter att språk har valts visar StellarTrek en lista med olika röster som du kan välja för detta språk. Välj önskad röst i listan och tryck Bekräfta.
- Tryck Bekräfta för att ersätta rösten. Tryck på någon annan knapp för att avbryta.

StellarTrek påbörjar installationen av den nya rösten samt avinstallerar den andra rösten innan den återgår till röstmenyn.

Notera: Installerade röster kan ersättas men inte tas bort.

2.1.2 System, navigering och läsröster

Du kan välja olika röster för systemet, för navigering samt för läsning. Systemrösten används för de flesta funktioner som utförs på enheten. Navigeringsrösten används för instruktioner och annan information vid vägledning. Läsrösten används för applikationer.

Ändra system-, navigerings- eller läsröst i enheten:

- Tryck och håll ner Pil ner för att aktivera Inställningsmenyn.
- Tryck Vänster- och Högerpil i Inställningsmenyn för att komma till alternativet röster och tryck Bekräfta.
- Tryck Vänster- och Högerpil i Röstmenyn för att komma till den typ av röst som ska ändras: Systemröst, Navigeringsröst eller Läsröst och tryck Bekräfta.
- Använd Vänster- och Högerpil för att välja önskad röst i listan och tryck Bekräfta. Om det endast finns en röst på enheten finns valet att lägga till en röst genom att välja alternativet Lägg till röst och sedan trycka Bekräfta.
- Om du vill att läsrösten automatisk ska identifiera språket när text läses använder du Höger- och Vänsterpil för att välja Automatisk och trycker Bekräfta.

Notera att en ändring av systemröst även ändrar systemets språk.

2.1.3 Ändra språk för taligenkänning

Det är möjligt att ändra språket som används för taligenkänning när en adress skrivs in om detta inte har konfigurerats i inställningar tidigare. Första gången du försöker använda taligenkänning, blir du tillfrågad vilket som är det önskade språket. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja önskat språk i listan och tryck **Bekräfta**.

2.1.3.1 Ändra språk för taligenkänning

- Tryck och håll ner Pil ner för att aktivera Inställningsmenyn.

- Tryck Vänster- och Högerpil i Inställningsmenyn för att komma till alternativet röster och tryck Bekräfta.
- Tryck Vänster- och Högerpil i Röstmenyn för att komma till alternativet Röst för taligenkänning och tryck Bekräfta.
- Använd Vänster- och Högerpil för att välja önskat språk i listan och tryck Bekräfta.

2.1.4 Ändra talhastighet

En annan egenskap för talsyntesen som kan ändras är hastigheten.

2.1.4.1 Ändra hastighet för talsyntesen

- Tryck och håll ner Pil ner för att aktivera Inställningsmenyn.
- Tryck Vänster- och Högerpil i Inställningsmenyn för att komma till alternativet Röster och tryck Bekräfta.
- Tryck Vänster- och Högerpil i Inställningsmenyn för att komma till alternativet Hastighet och tryck Bekräfta.
- De tillgängliga hastigheterna listas från långsammast till snabbast. Använd Vänster- och Högerpil för att välja önskad hastighet och tryck Bekräfta.

Alternativt kan du växla mellan volym och hastighet genom att trycka på knapparna **Volym upp** och **ner** samtidigt. Så snart du växlat från volym till hastighet kommer knapparna **Volym upp** och **ner** att användas för att ändra talhastighet istället för volym.

2.1.5 Automatisk röstväxling

Automatiskt röstväxling är en funktion som konfigureras för Navigeringsrösten. Den aktiverar smart röstväxling för gatunamn och intressepunkter.

Om du exempelvis har enheten på engelska men navigerar på en plats där gatunamnen och intressepunkterna är på franska kommer funktionen automatisk röstväxling att ge vägledning på engelska men meddela platsnamn på franska.

2.1.5.1 Aktivera funktionen Automatisk röstväxling

- Tryck och håll ner Pil ner för att aktivera Inställningsmenyn.
- Tryck Vänster- och Högerpil i Inställningsmenyn för att komma till alternativet Röster och tryck Bekräfta.

- Tryck Vänster- och Högerpil i röstmenyn för att komma till alternativet Automatisk Röstväxling och tryck Bekräfta.
- Tryck Bekräfta för att växla Automatisk Röstväxling mellan på och av.

2.2 Textinmatning

När StellarTrek uppmanar dig att skriva in en text såsom lösenord till trådlöst nätverk eller en söktext kan du göra detta genom att använda enhetens virtuella tangentbord.

Använd pilknapparna **Upp**, **Ner**, **Vänster** och **Höger** för att navigera mellan alla tecken när du ska skriva. Beroende på enhetens konfiguration kan du välja att sortera tecken som på ett standard QWERTY-tangentbord eller i alfabetisk ordning. Tryck och håll ner **Bekräfta** på ett tecken för att växla till stor bokstav eller olika accenttecken. Tryck **Bekräfta** för skriva det valda tecknet. Notera att när du skriver en stor bokstav kommer enheten att läsa den med ett lite högre tonläge för att särskilja den från små bokstäver.

Du kan också komma åt symboltangentbordet genom att navigera till knappen "Växla till symboler", den första knappen på första raden av tangentbordet (nedanför "z"). Nästa knapp är "Växla till siffror" som ger tillgång till ett numeriskt tangentbord. Mellan dessa två knappar finns Shift som kan användas för att skriva tecken med stor bokstav. Tryck och håll ner Shift för att låsa inmatningen till stora bokstäver.

När som helst kan du trycka på **Röstknappen** eller trycka och hålla ner **Högerpil** för att lyssna på texten du har skrivit in dittills. När du har skrivit klart kan du kontrollera inmatningen genom att trycka på knappen **Gå till**.

Alternativt är det möjligt att parkoppla och använda ett fysiskt Bluetoothtangentbord för inmatning (se avsnitt 2.3 för mer information om parkoppling via Bluetooth).

2.2.1 Ändra tangentbordslayout

Som standard används QWERTY-layouten för det virtuella tangentbordet vid textinmatning. Det är dock möjligt att ändra layouten till en som du kanske är mer van vid. Andra tillgängliga tangentbordslayouter inkluderar vanliga alternativ som AZERTY eller QWERTZ, men även ett tangentbord arrangerat i alfabetisk ordning. Observera att en ändring av tangentbordslayouten även kommer att tillämpas på ett anslutet Bluetooth-tangentbord.

2.2.1.1 Ändra layouten för det virtuella tangentbordet

- Tryck och håll ner **Pil ner** för att öppna inställningsmenyn.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** i inställningsmenyn för att gå till alternativet System och tryck **Bekräfta**.

- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att gå till alternativet Regionala inställningar och tryck **Bekräfta**.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** i Regionala inställningar för att gå till alternativet Tangentbordslayout och tryck **Bekräfta**.
- Välj önskad layout från listan med hjälp av **Vänster-** och **Högerpil** samt avsluta med **Bekräfta**.

2.3 Bluetooth

För att konfigurera Bluetoothinställningar i StellarTrek måste du först gå in i Bluetoothmenyn:

- Tryck och håll ner **Pil ner** för att aktivera Inställningsmenyn.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja Bluetooth och tryck **Bekräfta**.

Menyn innehåller följande objekt:

- Aktivera bluetooth på eller av
- Anslutna enheter
- Parkopplade enheter
- Parkoppla ny enhet

2.3.1 Aktivera bluetooth

Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i röstmenyn för att komma till alternativet Aktivera bluetooth och tryck **Bekräfta**. Tryck **Bekräfta** för att växla Aktivera bluetooth mellan på och av.

2.3.2 Parkoppla ny bluetoothenhet

Försäkra dig om att Bluetoothenheten som ska parkopplas med StellarTrek är igång.

- Använd Vänster- och Högerpil för att välja Parkoppla ny enhet i Inställningsmenyn för Bluetooth och tryck Bekräfta.
- StellarTrek börjar söka efter tillgängliga Bluetoothenheter i närheten och meddelar alla enheter som hittas.
Notera att StellarTrek kommer att leta efter enheter i 15 sekunder. Om ingen enhet hittas kommer StellarTrek att meddela "Starta sökning efter Bluetoothenheter". Tryck Bekräfta för att påbörja en ny sökning eller Tillbaka för att återgå till Bluetoothmenyn.
- Navigera till önskad enhet med hjälp av Vänster- och Högerpil. Tryck sedan Bekräfta för att parkoppla med den. Du får en bekräftelse så snart den är parkopplad.

Notera att enheten som du försöker parkoppla med StellarTrek kan behöva ställas i parkopplingsläge.

Vissa enheter kräver en PIN-kod för att kunna parkopplas. Om så är fallet kommer StellarTrek att meddela PIN-koden som ska anges på enheten med hjälp av en textinmatningsmetod (se avsnitt 2.2).

Så snart du har parkopplat med en bluetoothenhet kommer StellarTrek automatiskt att ansluta till den varje gång du startar enheten.

2.3.3 Ansluta till bluetoothenhet

Om du vill ansluta till en bluetoothenhet som StellarTrek är parkopplad med väljer du Parkopplade enheter i Inställningsmenyn för Bluetooth. När du väljer denna undermeny kommer StellarTrek att presentera en lista med alla bluetoothenheter som har parkopplats. Navigera till önskad enhet med hjälp av **Vänster-** och **Högerpil**. Tryck sedan **Bekräfta** för att ansluta till den. Du får en bekräftelse när den är ansluten.

Så snart du har anslutit till en bluetoothenhet kommer StellarTrek automatiskt att ansluta till den varje gång du startar enheten.

2.3.4 Koppla ifrån bluetoothenhet

Om du vill koppla ifrån en bluetoothenhet börjar du med att välja alternativet Anslutna enheter. När du väljer denna undermeny kommer StellarTrek att presentera en lista med alla bluetoothenheter som är anslutna. Navigera till önskad enhet med hjälp av **Vänster-** och **Högerpil**. Tryck sedan **Pil upp** eller **ner** för att komma till alternativet Koppla ifrån. Tryck **Bekräfta** för att koppla ifrån den anslutna enheten. Du får en bekräftelse så snart enheten har kopplats ifrån.

2.3.5 Glöm bort bluetoothenhet

Om du vill ta bort parkopplingen med en bluetoothenhet börjar du med att välja alternativet Parkopplade enheter. När du väljer denna undermeny kommer StellarTrek att presentera en lista med alla bluetoothenheter som har parkopplats. Navigera till önskad enhet med hjälp av **Vänster-** och **Högerpil**. Tryck sedan **Pil upp** eller **ner** för att komma till alternativet Glöm enhet. Tryck **Bekräfta** för att ta bort parkoppling. Du får en bekräftelse så snart enheten är glömd. Notera att enheten fortfarande kommer att vara möjlig att upptäcka via undermenyn Parkoppla ny enhet.

2.3.6 Visa information om ansluten enhet

Du kan visa information, såsom MAC-adress eller batterinivå, för en bluetoothenhet som är ansluten till StellarTrek. Navigera till alternativet Anslutna enheter i Bluetoothmenyn och tryck **Bekräfta** för att visa

enhetsinformation. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att navigera till önskad enhet samt tryck **Bekräfta** för att få information om enheten.

2.4 Trådlöst nätverk

För att konfigurera Trådlöst nätverk (WiFi) i StellarTrek måste du först gå in i menyn Trådlöst nätverk:

- Tryck och håll ner Pil ner för att aktivera Inställningsmenyn.
- Använd Vänster- och Högerpil för att välja Trådlöst nätverk och tryck Bekräfta.

Menyn innehåller följande objekt:

- Aktivera trådlöst nätverk på eller av
- Nätverksstatus
- Sök efter tillgängliga nätverk
- Visa sparade nätverk
- Ange nätverk manuellt

2.4.1 Aktivera trådlöst nätverk

Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i Röstmenyn för att komma till alternativet Aktivera trådlöst nätverk. Tryck **Bekräfta** för att växla Aktivera trådlöst nätverk mellan på och av.

Notera att ifall du ej tänkt använda trådlöst nätverk är det rekommenderat att ha Trådlöst nätverk av för att spara batteri.

2.4.2 Nätverksstatus

Om du är ansluten till ett trådlöst nätverk och önskar höra dess status kan du använda **Vänster-** och **Högerpil** för att navigera till alternativet Nätverksstatus i menyn för Trådlöst nätverk. StellarTrek meddelar namnet på nätverket samt kvaliteten på den trådlösa signalen. Tryck **Bekräfta** för att få StellarTrek att meddela ytterligare information om nätverket (SSID, signalstyrka, MAC- och IP-adresser, WiFi-frekvens).

2.4.3 Sök efter tillgängliga nätverk

För att ansluta till ett trådlöst nätverk måste du först söka efter tillgängliga nätverk inom räckhåll för StellarTrek.

Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i Inställningsmenyn för Trådlöst nätverk för att komma till alternativet Sök efter tillgängliga nätverk och tryck **Bekräfta**. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att stega bland de tillgängliga nätverksnamn (SSIDn) som hittades. Tryck **Bekräfta** för att välja det nätverk du önskar ansluta till.

Du kommer att behöva ange lösenord för det valda nätverket. Notera att lösenord är skiftlägeskänsliga. Du kan växla mellan stora och små bokstäver samt numeriska tecken. Se avsnitt 2.2 för mer information om hur du skriver text med StellarTrek. Avsluta inmatningen med knappen **Gå till**. Om det lyckades kommer nätverkets SSID och lösenord att läggas till i listan med konfigurerade anslutningar och den nya anslutningen aktiveras.

2.4.4 Visa sparade nätverk

Efter första gången som du anslutit till ett nätverk behöver du inte söka efter det varje gång du vill ansluta till det igen.

Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i Inställningsmenyn för Trådlöst nätverk för att komma till alternativet Vispa sparade nätverk och tryck **Bekräfta**. StellarTrek presenterar en lista med nätverk som sparats på enheten. Använd pilknapparna **Vänster** och **Höger** för att stega i listan med nätverk. Om ett nätverk är inom enhetens räckvidd kommer det att meddelas. Tryck **Bekräfta** för att ansluta till det.

Om du vill koppla ifrån det aktuella nätverket kan du använda **Vänster-** och **Högerpil** för att navigera till det i listan. Använd **Pil upp** och **ner** för att gå till alternativet Koppla ifrån och tryck **Bekräfta**. Om du vill att enheten ska glömma det aktuella nätverket och ta bort det från listan med Sparade nätverk använder du **Pil upp** och **ner** för att navigera till alternativet Glöm och trycker **Bekräfta**. Det trådlösa nätverket kommer fortfarande att finnas tillgängligt i listan över Tillgängliga nätverk efter att det tagits bort.

2.4.5 Ange nätverk manuellt

Om du inte kan hitta nätverket som du söker efter i undermenyn Sök efter tillgängliga nätverk eller om listan med nätverk är för lång kan söka manuellt.

Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i Inställningsmenyn för Trådlöst nätverk för att komma till alternativet Ange nätverk manuellt och tryck **Bekräfta**. Du uppmanas att ange namnet på nätverket som du letar efter.

Om nätverket är tillgängligt kommer det att meddelas av StellarTrek. Tryck **Bekräfta** för att ansluta till det. Du uppmanas att i följd ange, SSID, typ av säkerhet, lösenordet samt synlighet (synligt eller dolt). Du kan hoppa över ett steg genom att trycka **Högerpil** och återgå till ett föregående steg genom att trycka **Vänsterpil**. Tryck **Bekräfta** på alternativet Anslut för att spara och ansluta till nätverket.

2.5 Installera och uppdatera kartor

När du har korrekta kartor installerade på din enhet kan du få din aktuella GPS-position i dessa kartor.

Notera att kartorna i StellarTrek är väldigt stora och detaljerade så en direkt nedladdning till enheten kan ta flera minuter per karta. Du kan även använda menyn Val av karta för att markera och avmarkera specifika kartor som du önskar ha installerade. Ett sätt att även hantera lagringsutrymmet i StellarTrek.

2.5.1 Välja och installera kartor

För att välja kartor måste du först trycka och hålla ner **Pil ner** för att aktivera Inställningsmenyn. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att gå till alternativet Karthantering och tryck **Bekräfta**.

Du kan välja att lägga till eller ta bort kartor från StellarTreks interna minne. Om du redan har installerade kartor kommer dessa att visas som "markerad" i listan. Om du väljer en karta som inte finns i din StellarTreks minne kommer enheten att ladda ner den via det trådlösa nätverket. Detta kan ta flera minuter.

Notera att du inte kan installera nya kartor om enheten behöver en mjukvaruuppdatering.

Kartor är indelade i nivåer: Kontinenter, Länder samt Regioner inom ett land, om det finns.

- Nivå 1 (Kontinenter): Kontinenter är den mest grundläggande kartnivån (Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika, Oceanien, Mellanöstern). Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att navigera i listan med tillgängliga kontinenter och tryck **Bekräfta** för att utforska en kontinent.
- Nivå 2 (Länder): Kartor för varje land inom kontinenten finns tillgängliga. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att navigera i listan med tillgängliga Landskartor och tryck **Bekräfta** för att utforska kartan för ett land och välja specifika regioner eller provinser inom det landet. Om du vill välja ett helt land kan du tryck **Pil upp** eller **ner** för att komma till alternativet Markera samt trycka **Bekräfta**. Om du vill avmarkera ett helt land kan du tryck **Pil upp** eller **ner** för att komma till alternativet Avmarkera samt trycka **Bekräfta**. Tryck **Tillbaka** för att återgå till listan med kontinenter.
- Nivå 3 (Regioner, om tillgängligt): Om de finns tillgängliga kommer regioner i det valda landet att listas efter landets namn. Regioner består ofta av provinser eller stater. StellarTrek meddelar kartans status ("Markerad" eller "Avmarkerad"). Använd **Vänster-** eller **Högerpil** tills önskad region meddelas. StellarTrek meddelar statens namn samt ny markeringsstatus ("Markerad" eller "Avmarkerad"). Tryck **Bekräfta** för att markera/avmarkera regionen. Tryck **Tillbaka** för att återgå till listan med länder.

När du är klar med valet av kartor trycker du på **Gå till** för att acceptera ändringar eller **Tillbaka** för att avbryta dem och lämna menyn. Enheten beskriver vilka ändringar som ska genomföras, inklusive hur lagringsutrymmet påverkas och väntar sedan på att du ska bekräfta. Efter att du tryck **Bekräfta** kommer de nya markerade kartorna att installeras samt avmarkerade kartor att tas bort vilket frigör internminne. När installationen av kartorna är klar kommer du att uppmanas att starta om enheten. Tryck **Bekräfta** för att göra det.

Notera att om en karta behöver uppdateras kommer den automatiskt att uppdateras när enheten fortsätter med en mjukvaruuppdatering (se avsnitt 6 för mer information).

2.5.2 Installera kartor utan Wi-Fi-anslutning (offline)

StellarTrek gör det möjligt att installera kartor även när enheten är offline. För att göra detta måste du använda ett USB-C-minne där du lägger de önskade kartorna.

Notera att vi rekommenderar att installera kartor via en Wi-Fi-anslutning eftersom detta säkerställer att enheten laddas med den senaste kartdatan. Offlineinstallation av kartor kan göras när som helst, även innan enheten har konfigurerats.

Installera kartor offline:

- Ladda ner önskade kartor från <https://support.humanware.com/>
- Ladda ner det önskade kartpaketet (.hwmap) till din dator och kopiera sedan denna fil till rotmappen på USB-C-minnet. Notera att ditt USB-C-minne måste vara formaterat i FAT32.
- Det är rekommenderat att stänga av enheten innan du sätter in USB-C-minnet. Sätt in USB-C-minnet i enhetens USB-port.
- Starta enheten om den var avstängd.
- Systemet meddelar: "Undersöker extern lagring. Kartor har upptäckts på extern lagring. Vill du fortsätta med installationen?" Systemet varnar också för att denna installation tar bort alla tidigare installerade kartor.
- Tryck **Bekräfta** för att fortsätta eller valfri annan knapp för att avbryta.
- Notera att om inte **Bekräfta** trycks inom 10 sekunder av meddelandet avbryts installationsprocessen, och du måste koppla bort USB-C-minnet från enheten och starta om processen.

- Systemet meddelar “Förbereder kartpaket/verifierar paketets integritet” och anger sedan framsteg med följande meddelanden: “Installerar karta (X av Y)”, där X är aktuellt kartnummer och Y är det totala antalet kartor som installeras. När data ska kopieras till enheten meddelar systemet också vilket land/delstat som installeras.
- Observera att den största kartfilen installeras först, därefter den näst största osv. Om det inte finns tillräckligt med utrymme i enhetens interna minne meddelar systemet tillgängligt utrymme, kartornas storlek och att utrymmet är otillräckligt. Exempel: användaren vill installera sju kartor, men enheten har bara plats för tre – resultatet blir att tre kartor installeras och fyra inte.
- När installationen är klar meddelar systemet: “Tryck **Bekräfta** för att stänga av.” Tryck **Bekräfta**, och enheten stängs av.
- Mata ut USB-C-minnet efter att enheten stängts av.
- **VIKTIGT: Du måste mata ut USB-C-minnet efter att installationen slutförts, annars startar kartinstallationen om vid nästa uppstart.**
- Starta enheten för att använda de nyligen installerade kartorna.

2.6 Exportera enhetskonfiguration

Du kan exportera enhetens konfiguration. För att göra detta:

- Tryck och håll ner **Pil ner** för att gå till Inställningar.
- Tryck **Vänster-** eller **Högerpil** tills du når alternativet ”Personlig data” och tryck sedan **Bekräfta**.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** tills du når alternativet ”Exportera enhetskonfiguration” och tryck **Bekräfta**.
- En fil med konfigurationen skapas i det interna minnet och systemet meddelar att åtgärden lyckades.
- Du återvänder sedan till menyn “Personlig data”.

För att hämta denna fil ansluter du enheten till en dator som då får åtkomst till enhetens interna filer.

Filen identifieras som: st-serienummer-systemversion.hwp

Serienumret tillhör enheten och systemversionsnumret är den aktuella installerade systemversionen. Du kan säkerhetskopiera denna fil på din dator för att importera den senare på en annan enhet eller på samma enhet efter

exempelvis en reparation eller fabriksåterställning. Du kan dock inte läsa innehållet i filen på datorn.

2.7 Importera enhetskonfiguration

Du kan använda en konfigurationsfil för att konfigurera enheten. Denna fil gör det t.ex. möjligt att importera ett Wi-Fi-nätverk eller regionala inställningar (meter, miles, fot etc.).

Notera att Wi-Fi-anslutning krävs för att importera vissa konfigurationsinställningar, t.ex. röster. För att göra detta:

- Anslut enheten till en dator.
- På datorn, hämta den tidigare exporterade filen och kopiera den till följande mapp: StellarTrek\Intern delad lagring\StellarTrek
- Tryck och håll ner **Pil ner** för att gå till Inställningar.
- Tryck **Vänster-** eller **Högerpil** tills du når alternativet "Personlig data" och tryck sedan **Bekräfta**.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** tills du når alternativet "Importera enhetskonfiguration" och tryck **Bekräfta**.
- Enheten påbörjar importen. Om enheten är ansluten till Wi-Fi sker även en uppdateringskontroll under importen.
- Ett meddelande bekräftar att åtgärden slutförts. Du återvänder därefter till menyn "Personlig data".

2.8 Tid och enhetsstatus

Med en känd GPS-positionen justerar StellarTrek tiden automatiskt.

För att få reda på tiden, batterinivån samt kvaliteten på GPS-signalen dubbeltrycker du **Pil ner**.

Det är också möjligt att ändra tidsformatet från 24-timmar till 12-timmar eller omvänt.

- Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i Inställningsmenyn för att komma till alternativet System och tryck **Bekräfta**.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja Regionala Inställningar och tryck **Bekräfta**.
- Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i menyn Regionala Inställningar för att komma till alternativet Tidsformat.

- Tryck **Bekräfta** för att ändra tidsformat för enheten.

2.9 Uppdatera mjukvaran

Alternativet Mjukvaruuppdatering i Systemmenyn kontrollerar varje vecka ifall en ny uppdatering finns tillgänglig. Det är även möjligt att manuellt kontrollera om en ny uppdatering finns tillgänglig för nedladdning. För att uppdatera StellarTrek måste enheten först ha en aktiv Internetanslutning via trådlöst nätverk. Notera att du även måste ansluta StellarTrek till ett eluttag med nätadaptorn eller ha en batterinivå på minst 20% i enheten för att kunna genomföra en uppdatering.

Se avsnitt 6 för mer detaljer om hur du uppdaterar mjukvaran i StellarTrek.

2.10 Tidsgräns för avstängning i viloläge

Du kan konfigurera din StellarTrek så att enheten stängs av automatiskt efter en viss tid i viloläge. För att göra detta:

- Tryck och håll ner **Pil ner** för att gå till Inställningar.
- Använd **Höger-** och **Vänsterpil** tills du når alternativet "System", tryck sedan **Bekräfta**.
- I undermenyn System, använd **Höger-** och **Vänsterpil** tills du når alternativet "Tidsgräns för avstängning i viloläge", tryck sedan **Bekräfta**.
- I denna undermeny kan du välja mellan 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och aldrig (detta är standardinställningen). Välj önskat alternativ och tryck **Bekräfta**.
- För att använda denna funktion: Tryck på **Strömknappen** för att sätta enheten i viloläge. Om du inte trycker på **Strömknappen** igen inom den förinställda tiden för avstängning, stängs enheten automatiskt av när tiden är ute. Om du trycker på **Strömknappen** under denna tid vaknar enheten, och för att aktivera nedräkningen på nytt måste du trycka på **Strömknappen** igen för att återgå till viloläge. Nedräkningen startar då om från början, och enheten stängs av efter den valda tiden.

2.11 Fabriksåterställning

Om du önskar återställa alla inställningar samt radera all data, inklusive kartor, från enheten kan du göra detta genom att genomföra en fabriksåterställning. Detta tar bort alla användarinställningar och återställer applikationen till systemversionen.

Utföra fabriksåterställning:

- Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i Inställningsmenyn för att komma till alternativet System och tryck **Bekräfta**.
- Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i Inställningsmenyn för att komma till alternativet Fabriksåterställning och tryck **Bekräfta**.
- StellarTrek frågar: "Är du säker på att du vill fabriksåterställa enheten?"
- Tryck **Bekräfta** för att genomföra en fabriksåterställning.

3. GPS - ORIENTERINGSLÄGE

3.1 Allmän beskrivning

StellarTrek designades som ett orienteringshjälpmedel för att hjälpa dig finna din väg. StellarTrek lokaliserar din position via det globala positioneringssystemet (GPS) och presenterar den på en digital karta över ditt område. Du kan spela in rutter samtidigt som du går dem. StellarTrek ger sedan stegvis instruktioner hur du ska navigera efter dem. Med StellarTrek kan du utforska din omgivning och låta systemet meddela löpande gatuinformation.

Efter att StellarTrek har laddats och startats upp för första gången krävs det att den ansluts till ett trådlöst nätverk. En anslutning till ett trådlöst nätverk försäkrar att du kör senaste versionen av mjukvaran i StellarTrek samt låter StellarTrek ladda ner och uppdatera information om GPS-satelliter innan du går ut för att navigera. Att ha den senaste informationen om GPS-satelliter i förväg snabbar upp GPS-anslutningen när det är dags att gå utomhus. Notera att inga kartor installeras första gången enheten används. De måste laddas ner (se avsnitt 2.5 för mer information).

Första gången StellarTrek startas kan den behöva extra tid för ansluta till GPS-satelliterna. Detta är för att enheten laddar ner satellitdata samt räknar ut var du befinner dig på jordklotet. Så snart du fått en anslutning till satelliterna kommer din position att sparas i tre dagar. Ifall du använder StellarTrek regelbundet betyder det att enheten ansluter till satelliter och finner sin position inom 5 till 30 sekunder.

Det är rekommenderat att du ansluter till ett trådlöst nätverk regelbundet så att enheten kan uppdatera sin satellitdata.

Varning: Systemet är enbart designat som orienteringshjälpmedel och får ej under några omständigheter användas som det enda hjälpmedlet vid resande. Vid användande av StellarTrek skall användaren alltid vara observant och hålla koll på sin närmaste omgivning. Konventionella rörelsehjälpmedel såsom käpp och ledarhund skall också användas. StellarTrek är inte tänkt att användas som ett ensamt rörelsehjälpmedel utan användas tillsammans med andra rörelsehjälpmedel som nämnts ovan. Det ligger på ditt eget ansvar att använda denna apparat med försiktighet. Använd inte hörlurar när du promenerar längs en gata. Använd inte StellarTrek som en GPS för bilkörning.

Noggrannheten på GPS-informationen för kommersiella produkter såsom StellarTrek är för närvarande ungefär 5 meter. Detta kan dock variera beroende på ett antal faktorer:

- Hur klar och fri vy av himlen har GPS-mottagaren?

- Finns det några hinder som blockerar signalen såsom höga byggnader eller tak?
- Positionen för satelliterna som enheten kommunicerar med: ovanför, vid horisonten eller någonstans mitt emellan.
- Hur många satelliter kommunicerar enheten med?
- Finns det något molntäcke eller kraftledning ovanför?
- Hur snabbt färdas användaren?

Notera: StellarTrek använder följande navigationssystem: GPS, GLONASS, Galileo och Beidou. Detta ger optimal satellittäckning beroende på din geografiska position.

3.1.1 Kartor installerade på enheten

GPS-systemet använder elektroniska kartor för att ge detaljerad och användbar information om alla gatunamn och adresser för stadsområden samt intressepunkter såsom banker, restauranger och apotek.

Det är även möjligt att uppdatera eller installera nya kartor på enheten. Se avsnitt 2.5 i denna användarmanual.

3.1.2 Favoriter

Favoriter är speciella plaster längs din rutt som markeras som referenspunkter (postlådan i hörnet av gatan där du måste svänga), platser som bör undvikas (krukväxt på trottoaren) eller en plats du går till (mataffär). När en favorit skapas måste du ge den ett namn. Du kan skapa röstinspelningar för obegränsat antal favoriter. Notera att du kan byta namn på en favorit vid ett senare tillfälle. Favoriter meddelas när du passerar nära dem, oavsett om du går till fots eller färdas i ett fordon.

Platser som du anser vara möjliga destinationer i ditt normala rörelsemönster, såsom ditt hem, en väns bostad, ditt apotek eller en bra restaurang, kan med fördel markeras som favoriter. När du gjort detta kan StellarTrek ge vägledning från din aktuella position till den valda favoriten.

3.1.3 Intressepunkter

Intressepunkter är kommersiell tillgänglig information såsom restauranger, sjukhus, banker, tågstationer och busshållplatser som finns angiven i kartorna. Denna information hanteras tillsammans med kartorna som redan finns inkluderade i ditt system. Notera att Intressepunkter inte meddelas automatiskt när du färdas i motorfordon. Endast favoriter meddelas.

3.1.4 Längdenheter

Det är möjligt att ändra enheten längdenheter för navigation. Gör detta genom att trycka och hålla ner **Pil ner** för att aktivera Inställningsmenyn.

Använd sedan **Vänster-** och **Högerpil** för att välja System och tryck **Bekräfta**. Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i Systemmenyn för att komma till alternativet Regionala inställningar och tryck **Bekräfta**.

Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i menyn Regionala inställningar för att komma till alternativet Längdenheter och tryck **Bekräfta**.

Använd pilknapparna **Vänster** och **Höger** för att flytta mellan alternativen och tryck **Bekräfta** på önskat val. Inställningarna för längdenheter är följande:

- Kilometer och meter
- Miles och feet
- Miles och yards

3.2 Använda GPS

Som standard befinner sig StellarTrek i utforskarläge. Efter att StellarTrek har startats samt upprättat kommunikation med satelliterna kommer enheten att meddela din aktuella position samt försöka finna gatunamn och favoriter. Din StellarTrek är klar för användning. Om en anslutning ej kan etableras eller om den förloras under vägen försök då att förflytta dig till en ny position med klar sikt mot himlen. Notera att detta steg kan ta några minuter första gången du använder StellarTrek.

3.2.1 Uppdatera position

Vid vissa tillfällen kommer StellarTrek inte kunna avgöra positionen korrekt. Till exempel kan detta hända i miljöer omgivna av höga byggnader eller täta träd. I dessa situationer kan det vara användbart att nollställa GPS-positionen för mer noggrann navigering.

Nollställ GPS-positionen genom att:

- Trycka och hålla ner **Pil ner** för att aktivera Inställningsmenyn.
- Använd sedan **Vänster-** och **Högerpil** för att välja System och tryck **Bekräfta**.
- Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i Systemmenyn för att komma till alternativet Uppdatera position och tryck **Bekräfta**.

Efter att detta valts kommer enheten att uppdatera sin position automatiskt samt meddela "Positionen har uppdaterats. Söker efter satelliter" när den är klar.

3.2.2 Uppdatera positioner för GPS-satelliter

Även fast StellarTrek automatiskt och regelbundet uppdaterar satellitpositioner i upp till tre dagar är det möjligt att uppdatera satelliternas

orbitalpositioner manuellt för att uppnå optimal GPS-noggrannhet i upp till två veckor.

För att manuellt uppdatera GPS-satelliternas positioner:

- Enheten måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk.
- Tryck och håll ner **Pil ner** för att aktivera Inställningsmenyn.
- Använd sedan **Vänster-** och **Högerpil** för att välja System och tryck **Bekräfta**.
- Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i Systemmenyn för att komma till alternativet Uppdatera GPS-satellitpositioner och tryck **Bekräfta**.

Efter att detta valts kommer enheten att meddela "Uppdatering lyckades" när den är klar. Notera att det kan ta upp till två minuter för GPS-positionerna att uppdateras i StellarTrek.

3.2.3 Stegräknare

När du är i fotgängarläge kan det vara mycket användbart att veta hur långt du har gått. StellarTrek har därför en inbyggd stegräknare.

För att aktivera denna funktion, tryck och håll ner **Pil ner** för att gå till Inställningar. Använd **Höger-** och **Vänsterpil** tills du når alternativet Stegräknare och tryck **Bekräfta** för att aktivera det. Ett meddelande som säger "Stegräknare aktiverad" hörs och du återgår till Utforskarläge. Notera att när StellarTrek startas är stegräknaren inaktiverad som standard, och du måste själv aktivera funktionen för att använda den. Du kan även inaktivera stegräknaren manuellt genom att trycka och hålla ner **Pil ner**, välja Stegräknare och trycka **Bekräfta**. Då avaktiveras funktionen och du återgår till Utforskarläge.

För att läsa stegräknarinformationen, tryck **Pil ner** för att öppna Informationsmenyn, och använd sedan **Höger-** och **Vänsterpil** tills du hör "Stegräknarinformation", följt av gångsträcka och gångtid. Nedräkningen börjar efter att stegräknaren aktiverats och när GPS-signal har uppnåtts. Om det inte finns någon GPS-signal när funktionen aktiveras, meddelas att "Stegräknaren är aktiverad men väntar på GPS-signal".

Dessutom pausas nedräkningen när StellarTrek växlar till motoriserat läge. Ett meddelande säger då att "Stegräknare är pausad och väntar på fotgängarläge". När enheten återgår till fotgängarläge, återupptas stegräknaren och fortsätter att mäta gångsträckan från där den pausades.

Notera att om du manuellt avaktiverar stegräknaren och sedan aktiverar den igen, så kommer mätningen att börja om från noll, även om tidigare mätningar gjorts under samma session. Du kan när som helst få information om stegräknarens status genom att trycka **Pil ner** för att gå till Informationsmenyn och sedan använda **Höger-** och **Vänsterpil** tills du hör "Stegräknare" följt av dess status och relevant information.

Notera: Var försiktig när du tolkar den uppmätta gångsträckan. GPS-precisionen kan variera under promenaden och ibland ge felaktig information som påverkar mätningen. Dessutom, när du går in i ett fordon, tar det några sekunder innan enheten växlar från fotgängarläge till motoriserat läge. Under denna tid fortsätter stegräknaren att mäta, vilket kan leda till en överskattad gångsträcka. För att undvika detta, stäng av stegräknaren manuellt när du går in i ett fordon, eller tvinga färdläget till motoriserat (se avsnitt 3.4.2 för mer information).

3.3 Bära StellarTrek

Av säkerhetsskäl bör du inte använda hörlurar när du promenerar längs en gata.

I hårt trafikerade områden eller där bakgrundsljud gör det svårt att höra den interna högtalaren är det rekommenderat att du slutar att gå och använder hörlurar för att lyssna på en specifik instruktion.

Det är rekommenderat att använda den medföljande bärremmen samt att bära enheten i bälteshållaren när den används för att undvika att den tappas i marken.

3.4 Utforska

Som standard befinner sig StellarTrek i Utforskarläget som är designat för att utforska utomhusmiljön. När du går på en gata eller i ett öppet område (såsom en park eller parkeringsplats) eller till och med färdas i ett fordon kommer GPS-enheten att ge information i realtid om din position samt färdriktning.

Notera att du alltid kan återgå till att utforska genom att trycka och hålla nere **Tillbaka** oavsett var du befinner dig i enheten.

3.4.1 Information vid utforska omkring

Oberoende på om du promenerar eller färdas i fordon kommer StellarTrek att meddela information i realtid. Växling mellan fotgängarläge till motoriserat läge görs automatiskt genom att bedöma hur snabbt du färdas. Eftersom hastigheten vid motoriserad färd inte tillåter samma informationsnivå som vid promenad justerar StellarTrek informationsnivån beroende på sättet du färdas.

Notera: Du kan tvinga StellarTrek att använda fotgängarläge eller motoriserat läge i menyn Färdläge genom att trycka och hålla ner **Vänsterpil**. Välj önskat färdläge med **Vänster-** och **Högerpil** samt tryck **Bekräfta** för att aktivera. Valet som görs i denna meny är aktivt tills enheten startas om då den återgår till automatiskt läge.

- Adresser och gator: Du kommer att informeras om gatan eller området du befinner dig på. När du färdas i ett öppet område kommer du också att få namnet på den närmaste gatan framför dig när den närmar sig.
- När namnet på en gata inte går att finna i kartdatabasen kommer systemet att meddela "Gata utan namn", "Korsning" eller "Påfart".
- Nästa korsning: Användaren informeras när den närmar sig en korsning. I fotgängarläge informerar StellarTrek dig om namnet på den korsande gatan samt ger detaljerad information samt alla vägar som korsningen innefattar. StellarTrek meddelar först typ av korsning (2-, 3-, 4-vägs korsning eller mer) och det aktuella gatunamnet följt av den korsande gatans namn. Korsningen delas upp och varje segment i korsningen meddelas i medurs ordning. Exempelvis, om du går på Storgatan och stöter på en 3-vägs korsning där Kungsgatan korsar Storgatan på din vänstra sida. StellarTrek kommer att meddela följande information: "3-vägs korsning. Storgatan korsar Kungsgatan på din vänstra sida." I motoriserat läge meddelar StellarTrek endast första korsande gata med början från höger till vänster. I fotgängarläge piper StellarTrek för att indikera att en korsning närmar sig.
- Trafikljus: När det finns ett trafikljus i en korsning, kommer enheten att meddela detta när du närmar dig korsningen. Till exempel, om det finns ett trafikljus vid korsningen mellan Storgatan och Hamngatan, kommer StellarTrek att meddela: "Trekorsning med trafikljus. Storgatan korsar Hamngatan på din vänstra sida.". Använd denna information med försiktighet, eftersom den endast indikerar närvaron av trafikljus. Den visar inte vilka vägsegment trafikljuset gäller för, när det är säkert att korsa, eller hur länge gångsignalen varar. Det förekommer även att informationen i databasen är felaktig, då den bygger på offlinekartor. Vissa korsningar med trafikljus anges inte som sådana, och vissa korsningar anges felaktigt ha trafikljus. Var alltid försiktig, använd dina färdigheter inom orientering och förflyttning, och var uppmärksam på din omgivning.
- Stoppskyltar: När det finns en stoppskylt i en korsning kan StellarTrek meddela detta, eftersom informationen finns i kartorna. Stoppskylten anges alltid direkt efter gatunamnet den tillhör. Exempel: Om det finns en stoppskylt på Storgatan, meddelar enheten: "Trekorsning: Storgatan med stoppskylt korsar Hamngatan." Om stoppskylten är på Hamngatan, meddelar StellarTrek: "Trekorsning, Storgatan korsar Hamngatan med stoppskylt.". Precis som med trafikljus, bör denna information tolkas med viss försiktighet, då den kan vara felaktig.
- Favoriter: Användaren informeras om en favorit eller intressepunkt (om det är aktiverat) finns inom 10 meters avstånd. Den kommer att identifieras med sitt namn. Notera att i motoriserat läge kommer endast favoriter att meddelas.

- Busshållplatser: Vi har tillgång till en databas med busshållplatser i Kanada, USA och Storbritannien. Om du bor i något av dessa länder kommer du, när du passerar nära en busshållplats, att höra ett annat ljud än för vanliga favoriter, följt av numret på busslinjen som passerar där. Om flera busslinjer passerar samma hållplats, kommer ljudet följas av en lista över samtliga linjer. Information om busshållplatser finns även i listan “Vad finns runt omkring” som du får fram genom att trycka och hålla ner knappen **Var är jag**. De presenteras där på samma sätt som andra intressepunkter. Du kan också lägga till busshållplatser i din lista med favoriter, på samma sätt som andra intressepunkter. Se avsnitt 3.6.1 för mer information.
- Om stegräknaren är aktiverad (se avsnitt 3.2.3), får du information om gångsträcka när du går och när GPS-positionen är tillgänglig. Tryck på **Pil ner** och använd **Vänster-** och **Högerpil** för att höra information om gångsträcka och gångtid. Stegräknaren pausas om du växlar till motoriserat läge eller om GPS-signalen förloras.
- Om meddelande om cykel- och gångvägar är aktiverade i Inställningar (se avsnitt 5 för mer information), kommer enheten att upptäcka sådana vägar längs din rutt.

3.4.2 Tvinga färdläge

När du använder StellarTrek i Utforskarläge är enheten som standard inställd på automatiskt läge. Växlingen mellan fotgängarläge och motoriserat läge sker automatiskt genom att enheten utvärderar din hastighet. Det tar två minuter att automatiskt växla mellan fotgängarläge och motoriserat läge när automatiskt läge är valt.

Du kan behöva växla färdläge snabbt, till exempel när du stiger ur ett fordon.

Tvinga färdläge:

- Tryck och håll ner **Vänsterpil** för att aktivera menyn Färdläge.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja önskat färdläge och tryck **Bekräfta**. Det nya färdläget meddelas av enheten och den återgår till utforska.

Notera: Valet som görs i denna meny kommer att gälla tills du startar om enheten. Därefter återställs färdläget till standardinställningen.

3.5 Hämta information

3.5.1 Var är jag?

För att få reda på din aktuella position, tryck på knappen **Var är jag**.

StellarTrek meddelar färdriktning, gata och gatunummer, nästa instruktion om du följer en rutt samt nästa korsning om du inte följer en rutt. Om du färdas i ett fordon meddelar StellarTrek även stadens namn.

Notera: Om du befinner dig mindre än 10 meter ifrån någon korsning räknas det som att du är i en övergångszon. I denna zon ger StellarTrek ingen beskrivning av nästa korsning eftersom användaren inte ännu befinner sig på nästkommande gata.

3.5.2 Vad finns runt omkring?

Tryck ner och håll inne knappen **Var är jag** för att aktivera funktionen Vad finns runt omkring. När du färdas i gatumiljö kommer intressepunkter och favoriter i närheten av dig att meddelas. I fotgängarläge meddelas alla intressepunkter och favoriter inom 200 meter. I motoriserat läge meddelas alla intressepunkter inom 500 meter. Notera att i motoriserat läge meddelas endast intressepunkter. StellarTrek informerar även huruvida intressepunkten ligger till vänster eller höger om din aktuella position. När du färdas i öppna områden meddelas favoriter som finns inom standardavståndet (100 meter). Använd **Vänster-** eller **Högerpil** för att stega i listan över vad som finns runt omkring och få reda på vilka favoriter som finns i närområdet. Tryck **Bekräfta** på någon favorit eller intressepunkt för att påbörja en guidad rutt i fotgängarläge där du får stegvisa instruktioner. Om du vill starta rutten i motoriserat läge trycker du **Pil upp** eller **ner** och väljer alternativet Motoriserat läge samt trycker **Bekräfta**. Om du vill utforska kartan från denna position trycker du **Pil upp** eller **ner** och väljer alternativet Aktivera utforska kartan offline samt trycker **Bekräfta**.

3.5.2.1 Filtrera kategorier av intressepunkter

Det är möjligt att filtrera vilka kategorier av intressepunkter som ska visas i listan "Vad finns runt omkring ". Detta alternativ finns under Inställningar, sedan under System, och därefter under Feedback och meddelanden. I denna undermeny är alla kategorier av intressepunkter aktiverade som standard. Tryck **Bekräfta** för att inaktivera en eller flera av dessa kategorier. Om du trycker **Bekräfta** när "Återställ till standard" är markerat, återställs inställningen till standardkonfigurationen och alla kategorier aktiveras igen. Notera att eventuella ändringar här även påverkar den information som ges under promenader.

3.5.2.2 Rapportera en ogiltig intressepunkt

Det kan hända att en intressepunkt på kartan inte längre är korrekt. Du kan då rapportera denna till HumanWare. När detta är gjort kommer intressepunkten inte längre att visas på denna enhet, såvida du inte återställer enheten till fabriksinställningarna. Intressepunkten kommer även att rapporteras till Here, som så småningom tar bort den från de tillhandahållna kartorna. Så här gör du:

- I listan "Vad finns runt omkring", navigera med **Vänster-** och **Högerpil** tills du hittar den intressepunkt du vill rapportera.
- När du valt intressepunkten, använd **Pil ner** för att bläddra bland alternativen tills du når "Rapportera intressepunkt" och tryck **Bekräfta**.
- En bekräftelsefråga visas – tryck **Bekräfta** för att fortsätta.
- Ett meddelande bekräftar att intressepunkten har rapporterats, och du återvänder till listan.
- Om enheten inte är ansluten till trådlöst nätverk när du rapporterar intressepunkten, visas ett meddelande om att rapporten kommer att skickas till HumanWare så snart en trådlös anslutning är tillgänglig. När du senare ansluter till internet meddelas att rapporterade intressepunkter har skickats.

3.5.2.3 Återställ rapporterade intressepunkter

Du kan också återställa tidigare rapporterade intressepunkter. Det kan vara användbart om du av misstag rapporterat en punkt som ogiltig, men senare inser att den är korrekt. Så här gör du:

- Tryck och håll ner **Pil ner** för att öppna menyn Inställningar.
- Navigera med Vänster- och **Högerpil** tills du når alternativet "Personliga data" och tryck **Bekräfta**.
- Navigera vidare med **Pilknapparna** tills du hittar alternativet "Återställ intressepunkter" och tryck **Bekräfta**.
- Ett meddelande bekräftar att intressepunkterna har återställts.

3.5.2.4 Utökad sökning

När pilknapparna används för att stega i listan med favoriter och intressepunkter finner du i slutet ett alternativ kallat Utökad sökning. Tryck **Bekräfta** för att aktivera det. Använd sedan **Vänster-** eller **Högerpil** för att söka antingen via kategori eller namn.

3.5.2.5 Sökning via Kategori

Om du väljer Sökning via kategori kan du finjustera din sökning genom att välja specifika kategorier ur en lista. Använd åter **Pilknapparna** för att utforska listan med sökträffar och välj en destination. Tryck **Bekräfta** för att påbörja en rutt i fotgängarläge. Om du vill starta rutten i motoriserat läge

trycker du **Pil upp** eller **ner** och väljer alternativet Motoriserat läge samt trycker **Bekräfta**.

Listan med kategorier är följande:

- "Alla kategorier"
- "Favoriter"
- "Transport"
- "Mat"
- "Bank"
- "Hälsa"
- "Shopping"
- "Logi"
- "Utbildning"
- "Offentliga byggnader"
- "Bilhandlare"
- "Fritid"
- "Sport"
- "Affärsverksamheter"
- "Funktioner"
- "Kollektivtrafik"

3.5.2.6 Sökning via namn

Om du väljer Sökning via namn kan du enkelt skriva in ett namn för önskad destination med hjälp av det virtuella tangentbordet och sedan trycka **Bekräfta**. Du behöver inte skriva in hela namnet för att påbörja sökningen. Se avsnitt 2.2 i denna användarmanual för mer information om hur du skriver med det virtuella tangentbordet.

Avsluta med knappen **Gå till** efter att du skrivit klart. StellarTrek presenterar en lista med upp till 50 intressepunkter inom 8 kilometer som innehåller den del av namnet som du skrivit. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja önskad intressepunkt och tryck **Bekräfta**.

Notera: Du kan spara en kommersiell intressepunkt som en favorit som du sedan kan få vägledning till. Var god se avsnitt 3.6.1 för mer information.

3.5.3 Nästa instruktion eller nästa korsning

När du befinner dig på en aktiv rutt kan du förhandslyssna på nästa instruktion genom att trycka **Högerpil**. StellarTrek meddelar avståndet till nästa instruktion följt av vad som skall göras där. Varje gång du trycker **Högerpil** meddelar StellarTrek den följande instruktionen. Använd **Vänsterpil** för att höra föregående instruktion. När du trycker **Högerpil** i Utforskarläge meddelar enheten nästa korsning som du stöter på ifall du fortsätter i samma riktning.

3.5.4 Upprepa föregående meddelande

Om du vill höra det senaste meddelandet eller instruktionen igen, tryck på **Röstknappen**. Om du vill höra ett av de tidigare meddelandena kan du trycka **Vänsterpil** för att stega i en lista med enhetens fem senaste meddelanden.

Om du vill ha namnen på städer eller gator bokstaverade i dessa meddelanden kan du trycka **Pil upp** och **ner**.

I "Vad finns runt omkring" är det också möjligt att få talsyntesen att bokstavera intressepunkter. Även i utforskarläget kan du använda upprepningskän för att bokstavera intressepunkter och gatunamn.

3.5.5 Allmän information

Tryck **Pil ner** för att få allmän information om rutten och systemet.

Tryck **Pil ner** för att få mer kontextuell information om den aktuella aktiviteten i StellarTrek. Du får följande information: PÅ eller AV rutten, ruttens namn, återstående sträcka, tillryggalagd sträcka, uppskattad ankomsttid för en rutt i fotgängarläge samt ruttens längd.

Tryck **Pil höger** för att få information om hastigheten.

Tryck en gång till på **Pil höger** för att få information om stegräknaren: om den är aktiverad eller inaktiverad, och om den är aktiverad meddelas gångavståndet och gångtiden.

3.6 Alternativ för favoriter

3.6.1 Spela in favoriter

Du kan skapa favoriter när som helst när du befinner dig utomhus. Dessa fungerar som referenspunkter eller märken och kommer att meddelas när användaren färdas i närheten av dem. Det är starkt rekommenderat att markera alla meningsfulla platser i din omgivning som kan fungera vägledande såsom hinder eller möjliga destinationer.

Spela in en favorit:

- Tryck på **Inspelningsknappen**.
- Efter pipet ska du läsa in en 4 sekunder lång beskrivning av favoriten. Ytterligare ett pip indikerar slutet för skapandet av favoriten. Beskrivningen och platsen för favoriten kommer att sparas av systemet.

Notera att det är möjligt att avbryta inspelning av en favorit genom att trycka **Tillbaka**. De inspelade favoriterna sparas i listan över möjliga destinationer.

Viktigt: Innan du spelar in en favorit bör du trycka på knappen **Var är jag** för att försäkra dig om att StellarTrek har identifierat din korrekta position. Om

favoriten ligger på en adress, försäkra dig om att StellarTrek identifierar den som en position på gatan och inte som del av ett öppet område. På liknande sätt bör du försäkra dig om att StellarTrek inte tycker att favoriter i öppna områden tillhör gatunätverket.

3.6.2 Ställa in intressepunkt som favorit

Du kan spara en kommersiell intressepunkt som en favorit som du sedan kan få vägledning till:

- Tryck och håll ner **Var är jag** för att meddela alla intressepunkter i din närhet (se avsnitt 3.5.2 för mer information).
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja önskad Intressepunkt som ska sparas som favorit.
- Använd **Pil upp** och **ner** för att gå till alternativet Ställ in som möjlig destination och tryck **Bekräfta**.

3.6.3 Sortera favoriter

När favoriter har skapats kan du sortera dem efter stad, avstånd, senast använd eller datum för skapande:

- Tryck på knappen **Gå till**. StellarTrek meddelar: "Välj en favorit som din destination".
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att gå till alternativet Sortera.
- Använd **Pil upp** och **ner** för att välja under vilken kategori du önskar sortera dina favoriter. Kategorierna är: Sortera efter avstånd, Sortera efter senast använd, Sortera efter stad och Sortera efter datum för skapande. Tryck **Bekräfta** för att välja kategori. StellarTrek meddelar första raden i den sorterade listan.

Alternativt kan du sortera favoriter via menyn Hantering av favoriter:

- Tryck och håll ner **Pil ner** för att aktivera Inställningsmenyn.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja alternativet Personlig data och tryck **Bekräfta**.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja alternativet Hantering av favoriter och tryck **Bekräfta**.
- Tryck **Vänster-** och **Högerpil** i menyn Hantering av favoriter för att komma till alternativet Sortera och tryck **Bekräfta**.
- Använd **Pil upp** och **ner** för att välja under vilken kategori du önskar sortera dina favoriter samt tryck **Bekräfta**.

3.6.4 Exportera instruktioner för fotgängar- och motoriserat läge

Du kan exportera instruktionerna för att ta dig från din nuvarande position till en specifik favorit. Detta kan vara mycket användbart att i förväg lära sig vägen som ska färdas för att nå en destination. Gör så här:

- Tryck på knappen **Gå till** i Utforskarläget för att visa listan med favoriter.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja önskad favorit. Om du sorterar dem efter stad måste du först välja den stad där favoriten finns innan du väljer den.
- När du är på den önskade favoriten använder du **Pil upp** och **ner** för att välja för att gå till något av dessa två alternativ: "Exportera instruktioner i fotgängarläge" eller "Exportera instruktioner i motoriserat läge". Tryck **Bekräfta** för att exportera instruktionerna. En fil kommer att genereras som sammanställer instruktionerna från din aktuella plats till din valda favorit. Denna fil sparas i StellarTrek's interna minne, i mappen "Instructions". Du kan läsa filen på en dator. Filen är i txt-format och visar informationen på samma sätt som om du förhandsgranskade din rutt. Innehållet börjar med att meddela din aktuella plats. Filen döps till "pedestrian" eller "motorised" följt av din destinationspunkt (om det är en adress). Om inte, får den ett allmänt namn.

Notera: Om du har GPS-täckning kommer startpositionen för din rutt att vara den senaste platsen med GPS-täckning.

Notera även: Det är möjligt att exportera instruktioner även i Utforskarläge. För att göra detta, välj först den position du vill utgå ifrån i Utforskarläget, och genomför sedan exporten som det beskrivs ovan.

3.7 Rutter

StellarTrek ger dig möjlighet att spela in en rutt när den promeneras för första gången. På detta sätt är det möjligt att välja den säkraste eller mest önskvärda färdvägen. Den skapade ruten kan namnges och sedan användas vid ett senare tillfälle. Notera att inspelade rutter endast är tillgängliga i fotgängarläge.

3.7.1 Spela in rutt

Skapa rutt:

- Tryck och håll ner **Inspelningsknappen** samt tryck **Bekräfta** för att börja skapa en rutt. StellarTrek ber dig läsa in ett namn för ruten.
- Efter pipet har du 4 sekunder för att beskriva ruten. Det är ofta smart att döpa ruten efter dess startpunkt och destination. Till exempel, "hem till apoteket".

- När StellarTrek har bekräftat att du skapar en rutt kan du sedan färdas hela ruttens sträcka. StellarTrek piper var sextionde sekund för att indikera inspelning av rutten.
- Notera att du kan skapa favoriter efter vägen. Tryck på **Inspelningsknappen** för att göra detta. Efter pipet har du 4 sekunder för att tala in en beskrivning av favoriten. Ett andra pip indikerar slutet för skapandet av favoriten och du kan fortsätta med din rutt.
- När du nått din destination, tryck och håll ner **Inspelningsknappen** tills du hör ett pip vilket informerar StellarTrek om att destinationen har nåtts. Popen upphör och ett meddelande informerar dig om att inspelningen av rutten är klar.

Viktigt: Du kan inte spela in rutter i ett fordon. Om du börjar åka i ett fordon under tiden en rutt skapas kan rutten bli ogiltig. Var god kontrollera innan denna rutt används.

3.7.2 Aktivera inspelad rutt

Du kan använda StellarTrek för att bli guidad längs en tidigare inspelad rutt.

Välja en rutt:

- Tryck och håll ner knappen **Gå till**.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att stega bland tillgängliga rutter.
- När rutten du letar efter meddelas trycker du **Bekräfta** för att ladda rutten i StellarTrek. Om du vill starta rutten i omvänd riktning trycker du **Pil upp** eller **ner** och väljer alternativet Starta rutt i omvänd riktning samt trycker **Bekräfta**.

Efter vägen får du instruktioner om vilken riktning du skall välja när du kommer till korsningar. Instruktioner i gatunätverk ges i form av olika riktningar (vänster/höger/gå rakt fram). Exempelvis kan StellarTrek säga "sväng vänster på Hamngatan".

När du går in i ett öppet område informeras du om det. I detta fall används instruktioner baserade på klockriktningar för att guide dig i rätt. Till exempel kan StellarTrek ge följande meddelande: "Sväng mot klockan 10. Nästa instruktion om 25 meter".

När du nått din destination hörs ett meddelande och rutten inaktiveras automatiskt.

För favoriter skapade genom att skriva in en adress samt för kommersiella intressepunkter på kartan meddelar StellarTrek på vilken sida av gatan destinationen finns.

Som vid förhandsvisning av en rutt kan du när som helst få StellarTrek att meddela nästa eller föregående instruktion genom att trycka **Höger-** eller **Vänsterpil**. Du får information om avstånd samt vilken handling som ska utföras.

Pil ner ger information om rutten och alternativ: På eller av rutten, namnet på rutten, uppskattad ankomsttid samt hastighet.

3.7.3 *Avvika från rutt*

Om du avviker från en rutt i ett öppet område kommer enheten att varna dig. Tryck **Bekräfta** för att få instruktioner om hur du kommer tillbaka till rutten.

I dessa situationer kan du alltid använda **Högerpil** för att få information om kommande instruktioner för att återvända till din rutt. Till exempel: "Om 50 meter, gå rakt fram".

Om du avviker från din rutt och befinner dig på en gata, kommer StellarTrek även att varna dig. Tryck **Bekräfta** för att omdirigeras till den kortaste vägen till din destination.

3.7.4 *Förhandsvisa rutt inomhus*

StellarTrek låter dig förhandsvisa en rutt innan du navigerar efter den. Detta ger dig en chans att lära dig guideinstruktionerna på förhand. Förhandsvisning inomhus ger dig detaljerad information om korsningar och svängar.

Gör så här för att förhandsvisa en rutt inomhus utan att avbrytas av GPS-information:

- Aktivera rutten. För att göra detta trycker du ner knappen **Gå till** och använda **Vänster-** och **Högerpil** för att stega bland de tillgängliga rutterna. När rutten du letar efter meddelas trycker du **Bekräfta** för att ladda rutten i StellarTrek.
- Tryck och håll ner **Högerpil**. StellarTrek meddelar att du befinner dig i läget Förhandsvisning inomhus följt av första instruktionen.
- Du kommer att kunna navigera genom alla instruktioner med **Vänster-** och **Högerpil** utan att avbrytas av inkommande GPS-information.
- Tryck och håll ner **Högerpil** för att avsluta Förhandsvisning inomhus. StellarTrek meddelar "Förhandsvisning av rutt stoppades".

3.7.5 *Avbryta en rutt*

Efter du aktiverat en rutt kan alltid avbryta navigeringen när som helst genom att trycka **Tillbaka**. Du blir ombedd att bekräfta. Om du trycker **Bekräfta** inom

10 sekunder avslutas vägledningen och StellarTrek återgår till utforskning av omgivningen. Om **Bekräfta** inte trycks ner kommer rutten att förbli aktiv.

3.8 Vägledning till favorit

StellarTrek kan ge guideinstruktioner från användarens aktuella plats till vald favorit som destination. Guideinstruktionerna liknar dem som ges när du färdas längs en förinspelad rutt.

Svänginstruktioner justeras för navigering i fotgängarläge eller motoriserat läge. Svänginstruktioner i motoriserat läge beräknas efter kriteriet "snabbast rutt". Rutter beräknade för motoriserat läge använder motorvägar och andra vägar som oftast inte passar för fotgängare. Svänginstruktioner i fotgängarläge är tänkta att ge kortast möjliga rutt anpassad till promenad.

Vägledning till en favorit:

- Tryck på knappen **Gå till**. Detta presenterar listan med favoriter som möjliga destinationer.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja önskad favorit. En röstbeskrivning av varje favorit spelas upp.
- Som standard startas rutter i Fotgängarläge. Om du istället vill starta rutten i motoriserat läge trycker du **Pil upp** eller **ner** och väljer alternativet Motoriserat läge.
- Tryck **Bekräfta** för att börja få instruktioner om hur du tar dig fram längs rutten.

Om du befinner dig i ett öppet område gående mot en favorit som också finns i ett öppet område kommer StellarTrek att vägleda dig i en rakt linje mot favoriten. Enheten ger dig information om det relativa avståndet samt riktningen. StellarTrek informerar dig när du når favoriten och rutten inaktiveras.

Om StellarTrek upptäcker att du avviker från din rutt kommer enheten att varna dig och du blir ombedd att trycka **Bekräfta** ifall du vill få vägledning tillbaka till din ursprungliga rutt. Så snart du är tillbaka på din rutt kommer enheten att börja ge guideinstruktioner.

Viktigt: Effektiv vägledning bygger på kvalitén hos positioneringen (startposition och favoriter). Försäkra dig alltid om att gator inte registreras i öppna områden och att öppna områden inte registreras i gatunätverket.

Du kan avbryta vägledningen när som helst genom att trycka **Tillbaka**. Du blir ombedd att bekräfta. Om **Bekräfta** inte trycks ner kommer rutten att förbli aktiv.

3.9 Vägledning till adress

När du utforskar listan med favoriter som du kan vägledas till (se avsnitt 3.8) kommer du även att finna ett alternativ som låter dig ange en adress. Se avsnitt 2.2 för att lära dig hur du matar in text med StellarTrek.

3.9.1 Skapa favorit för en adress

Om du väljer alternativet Ange en adress när du utforskar listan med favoriter får du möjlighet att skriva in önskad adress.

Vägledning till en adress:

- Tryck på knappen **Gå till**. Detta presenterar listan med favoriter som möjliga destinationer.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** i listan med favoriter och välj Ange en adress. Tryck **Bekräfta** för att välja detta alternativ.
- StellarTrek ber dig ange land, stat/provins där du ska färdas. Tillgängliga alternativ beror på vilka kartor som finns installerade. Om kartor från fler än ett land är installerade måste du först välja land, följt av provins eller stat. Om kartor från ett enda land är installerade men det finns fler än en provins eller stat, kommer det första steget vara att ange den provins eller stat där adressen är belägen. Om endast en karta över en enda provins eller stat är installerad, kommer du att föras vidare till nästa steg. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att göra ett val följt av **Bekräfta**.
- Du måste nu ange namnet på staden. Föregående stadsnamn kommer att meddelas. Om du vill välja denna stad trycker du **Gå till**. Om du inte vill välja denna stad eller om ingen stad tidigare skrivits in kan du skriva in stadens namn med det virtuella tangentbordet (avsnitt 2.2) eller trycka och hålla ner **Röstknappen** för att diktera namnet. Ange stadens namn och tryck **Gå till**.
- Välj ett namn i listan med möjliga val och tryck **Bekräfta**. Notera att du inte behöver ange ett komplett namn för en stad eller gata. Du kan skriva in en delmängd av namnet följt av **Gå till** för att StellarTrek ska söka efter alla namn som innehåller texten du skrivit. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att stega mellan namnen i listan och tryck **Bekräfta** för att göra ett val.
- Efter att du skrivit in stadsnamn måste du ange gatunamn. Fortsätt med samma metod som när du angav stadsnamnet. Du kan trycka **Tillbaka** för att återgå till tidigare steg.
- Så snart ett gatunamn skrivits in behöver du även ange ett gatunummer. Om du känner till det exakta gatunumret, skriver du in det, eller dikterar det, följt av **Gå till**.
- Om gatunumret du angett inte finns kommer StellarTrek att presentera en lista med gatunummer för den aktuella gatan följt av en lista med

korsningar där gatunummer ej finns tillgängliga. Använd **Vänster-** och **Högerpil** för att stega i listan och tryck **Bekräfta** för att göra ett val.

Vid denna punkt har en ny favorit skapats för denna adress och kommer att läggas till i listan med favoriter som kan väljas för att påbörja en rutt (se avsnitt 3.8).

Notera: När tecken skrivs in kan du när som helst trycka och hålla ner **Vänsterpil** att ta bort ett tecken. Om du vill återgå till tidigare steg trycker du **Tillbaka**. För att få det som skrivits in uppläst och bokstaverat trycker du på **Röstknappen**.

3.10 Vägledning till postnummer (Storbritannien och Nederländerna)

När du utforskar listan med favoriter som du kan vägledas till (se avsnitt 3.8) kommer du även att finna ett alternativ som låter dig ange ett postnummer. Detta avsnitt innehåller information om hur du använder StellarTreks knappar för att skriva in postnummer vilket liknar sättet man skriver in adresser (se avsnitt 3.9).

Vägledning till ett postnummer:

- Tryck på knappen **Gå till**. Detta presenterar listan med favoriter som möjliga destinationer.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** i listan med favoriter och välj Ange ett postnummer. Tryck **Bekräfta** för att välja detta alternativ.
- StellarTrek ber dig ange postnumret som du vill färdas till. Du måste skriva in alla tecken, med eller utan mellanslag, antingen bokstäver (stora eller små) eller siffror som ingår i postnumret. Det är även möjligt att diktera postnumret genom att trycka och hålla ner **Röstknappen**. Tryck **Gå till** när det är klart. StellarTrek upprepar postnumret som angetts.
- Du måste ange gatunummer för adressen som du vill vägledas till. Antingen genom att skriva in det eller diktera det.

Notera: Att ange ett gatunummer efter ett postnummer ger en mer exakt plats för destinationen eftersom postnummer i många fall innefattar ett stort geografiskt område.

Vid denna punkt har en ny favorit skapats för detta postnummer. För att påbörja en guidad rutt till denna plats väljer du postnumret i listan med favoriter (se avsnitt 3.8).

Notera: När tecken skrivs in kan du när som helst trycka och hålla ner **Vänsterpil** att ta bort ett tecken. För att få den aktuella inskrivna texten uppläst trycker du på **Röstknappen** eller trycker och håller ner **Högerpil**.

3.11 Utforskarläget

Utforskarläget låter dig virtuellt navigera på en karta som finns installerad på enheten. Det ger dig möjlighet att lära känna och utforska ett område oavsett om du är på väg eller sitter hemma. Utforskarläget kan aktiveras från din aktuella position, från en sparad favorit, från en adress eller från en intressepunkt i listan vad finns runt omkring.

3.11.1 Starta Utforskarläget från din aktuella position

Du kan starta Utforskarläget när som helst från din aktuella position. Om du har en GPS-anslutning samt en identifierad position kommer den att börja från denna punkt. Om du inte har en GPS-anslutning kommer Utforskarläget att starta från senast kända punkt. Du kan när som helst trycka **Pil upp**. StellarTrek meddelar "Tryck **Bekräfta** för att starta utforskarläge från den här positionen". Tryck **Bekräfta** för att börja utforska området runt omkring.

3.11.2 Starta Utforskarläge från en specifik favorit, intressepunkt eller adress

Du kan också starta Utforskarläget från en sparad favorit, Intressepunkt från listan Vad finns runt omkring eller en specifik adress från valfri karta som finns installerad på enheten. Du behöver ingen GPS- eller Internetanslutning.

Från sparade favoriter och specifika adresser, innan du startar utforskarläget, tryck på **Gå till** och använd sedan **Vänster-** eller **Högerpil** för att bläddra bland sparade favoriter eller för att ange en adress (se avsnitt 3.8 för mer information). När du har valt en favorit eller angett en adress, använd **Pil upp** eller **ner** för att komma till alternativet "Aktivera kartans utforskarläge" och tryck **Bekräfta**.

För att välja en intressepunkt i listan Vad finns runt omkring från startpunkten i utforskarläget, tryck och håll ner **Var är jag** för att gå till menyn Vad finns runt omkring. Se avsnitt 3.5.2 för mer information om hur du navigerar i denna meny. När du har valt den önskade intressepunkten använder du **Pil upp** eller **ner** för att komma till alternativet "Aktivera kartans utforskarläge" och tryck **Bekräfta** för att börja utforska från denna punkt.

3.11.3 Använda Utforskarläge

Så snart du befinner dig i Utforskarläge offline kommer StellarTrek automatiskt att orientera dig så att du står mot norr eller öst beroende på vägens riktning. StellarTrek meddelar dig ditt aktuella gatunamn och riktning. Du kan navigera i kartan på följande sätt:

Tryck **Pil upp** för att flytta framåt till nästa gatussegment. Om du kommer till en korsning (3-vägs, 4-vägs, 5-väg, etc.) meddelar enheten de korsande vägarna.

Tryck och håll ner **Pil upp** för att flytta fram till nästa gatusegment och informeras om alla intressepunkter inom området. Du kan gå igenom alla intressepunkter genom att trycka **Vänster-** och **Högerpil**. Om det fanns intressepunkter behöver du trycka **Tillbaka** för att återgå till att utforska kartan offline.

Vid en korsning kan du trycka **Vänster-** och **Högerpil** för att stega igenom den. Om du exempelvis kommer till en korsning och trycker **Vänsterpil** orienteras du mot det första segmentet till vänster och tryckningar på **Högerpil** roterar dig medurs tills du når sista segmentet där StellarTrek även piper till. Du kan alltid trycka **Vänsterpil** för att rotera moturs. När du hör önskat segment som du vill utforska vidare trycker du **Pil upp** för att flytta framåt eller tryck och håll ner **Pil upp** för att flytta framåt och få intressepunkter i området meddelade. Om du vill vända om trycker du **Pil ner** som beskrivet ovan.

Tryck **Var är jag** för att få reda på aktuell riktning, närmaste plats och närmaste korsning.

Tryck och håll ner **Var är jag** för att höra närliggande intressepunkter.

Tryck **Inspelningsknappen** för att skapa en ny favorit vid den aktuella positionen på kartan.

Tryck **Tillbaka** för att avsluta Utforska kartan offline. Du blir tillfrågad om du vill avsluta detta läge. Tryck **Bekräfta** för att avsluta eller någon annan knapp för att förbli i Utforskarläge offline. Vid avslut kommer StellarTrek att återgå till det vanliga Utforskarläget online.

3.12 Låsa öppet område

Om du promenerar i en park, ett universitetsområde eller i skogen kan du försäkra att StellarTrek förblir i öppet området utan att automatiskt placera dig på en närliggande gata. Tryck och håll ner **Högerpil** för att göra detta. Du kommer att höra ett pip samt att enheten meddelar "Låser öppet område". Om du har en aktiv rutt måste denna först inaktiveras genom att trycka **Tillbaka** innan du låser öppet område.

I läget Låst öppet område kommer du att få vägledning fågelvägen mot någon intressepunkt eller favorit oavsett om din destination har skapats i gatunätverket eller i ett öppet område.

För att lämna Låst öppet område, tryck och håll ner **Högerpil** igen. StellarTrek meddelar "Lämnar låst öppet område" och kommer automatiskt att identifiera huruvida du befinner dig i ett öppet område eller på en gata.

3.13 Konfiguration av favoriter och rutter

För att konfigurera favoriter och rutter i StellarTrek:

- Aktiverar Inställningsmenyn genom att trycka och hålla ner Pil ner.
- Använd sedan **Vänster-** och **Högerpil** tills du når alternativet Personlig data samt tryck **Bekräfta**.
- Använd **Vänster-** och **Högerpil** tills du når alternativet Hantering av favoriter samt tryck **Bekräfta**.

3.13.1 Konfigurera Favoriter

När du är i undermenyn för hantering av favoriter, använd **Vänster-** och **Högerpil** för att välja favoriten som du vill konfigurera. Om du tidigare har ställt in att dina favoriter ska sorteras efter stad, måste du först välja den stad där favoriten finns innan du kan välja favorit.

Använd sedan **Pil upp** eller **ner** för att välja vad du vill göra med favoriten. Tillgängliga alternativ:

- Ange/ta bort favoriten som möjlig destination
- Ta bort favorit
- Döp om favorit med ljud
- Döp om favorit med text

Tryck **Bekräfta** för att aktivera ett val.

Notera vid konfiguration av favoriter: Du kan komma åt inställningar för favoriter direkt. Tryck **Gå till** för att göra detta och välj sedan en favorit med **Vänster-** och **Högerpil**. Använd **Pil upp** eller **ner** för att välja vad du vill göra med favoriten.

3.13.1.1 Ange favorit som möjlig destination eller ta bort som destination

När du aktiverar detta alternativ ombeds du ange den aktuella favoriten som möjlig destination eller ta bort den som destination. När du tar bort en favorit som möjlig destination kommer den ej längre att visas i listan över möjliga destinationer när du skapar en rutt.

Tryck **Bekräfta** för att ange som möjlig destination eller ta bort som destination.

3.13.1.2 Ta bort favorit

När du valt detta alternativ meddelar StellarTrek om att du tar bort den valda favoriten. Tryck **Bekräfta** för att ta bort.

3.13.1.3 Döp om favorit

Det finns två sätt att döpa om en favorit. Antingen genom att skriva in eller spela in ett namn.

Om du väljer att skriva in favoritens namn trycker du **Pil upp** eller **ner** och väljer alternativet Döp om favorit samt trycker **Bekräfta**. Enheten meddelar "Ange namn för favoriten". Skriv in önskat namn med en textinmatningsmetod och tryck **Bekräfta** när det är klart.

Om du väljer att spela in favoritens namn trycker du **Pil upp** eller **ner** och väljer alternativet Döp om favorit med ljud samt trycker **Bekräfta**. Enheten meddelar "Spela in namn för favoriten" och piper till vilket signalerar början av inspelningen. Uttala namnet för favoriten. Efter fyra sekunder avslutas inspelningen med ett pip och meddelande vilket signalerar att inspelningen sparades.

3.13.1.4 Ta bort alla favoriter

När detta alternativ väljs raderas alla favoriter sparade på enheten. StellarTrek ber dig bekräfta raderingen. Om du är säker på att du vill ta bort alla bokmärken trycker du **Bekräfta**.

Notera att om dina favoriter är sorterade efter stad, och en stad tidigare valdes, kommer alternativet istället att vara Ta bort alla favoriter för denna stad.

3.13.2 Konfigurera rutter

Tryck och håll ner **Gå till** för att konfigurera en rutt på enheten. Välj sedan önskad rutt med **Vänster-** och **Högerpil**. Använd **Pil upp** eller **ner** för att välja vad du vill göra med rutten.

Tillgängliga alternativ:

- Ta bort rutt
- Döp om rutt

Tryck **Bekräfta** för att aktivera ett val.

3.13.2.1 Ta bort rutt

När du valt detta alternativ meddelar StellarTrek om att du tar bort den valda rutten. Tryck **Bekräfta** för att ta bort.

3.13.2.2 Döp om rutt

Du kan döpa om en rutt genom att spela in ett namn. Använd **Pil upp** och **ner** för att gå till alternativet Döp om rutt och tryck **Bekräfta**. Enheten meddelar "Spela in namn för rutten" och piper till vilket signalerar början av inspelningen. Uttala namnet för rutten. Efter fyra sekunder avslutas inspelningen med ett pip och meddelande vilket signalerar att inspelningen sparades.

3.13.3 Exportera personlig data

I undermenyn Personlig data finns ett alternativ som heter "Exportera personlig data". När du väljer detta alternativ exporteras alla dina sparade favoriter och rutter till enhetens interna lagring. Även etiketter exporteras om du har några. På det interna minnet kommer mappar att skapas för favoriter och, om det finns några, för rutter.

Det blir då möjligt att ansluta StellarTrek till en dator med hjälp av USB-C-kabeln som medföljer enheten. När den är ansluten kommer StellarTrek att kännas igen av datorn som en extern enhet, och favoriter samt rutter kommer att vara åtkomliga från datorn.

3.13.4 Importera personlig data

I undermenyn Personliga data finns ett alternativ som heter "Importera personlig data". Om du väljer detta alternativ importeras all personlig data som finns i enhetens interna lagring och som har kopierats från en dator, inklusive favoriter, rutter och etiketter.

Polar Print

Växel, teknisk hjälp och support
Tel 010-470 99 00

info@polarprint.se

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Twistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHOV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ