

ZoomCam – snabbguide fjärrkontrollens knappar


Kort tryck: växla mellan fotoläge, 2
negativ, positiv bild

Långt tryck i negativ/positiv vy:
ändra färg på bakgrund eller text

Långt tryck i långdistansvy:
spegelvänd bilden

Zooma in 3

Zooma ut 4

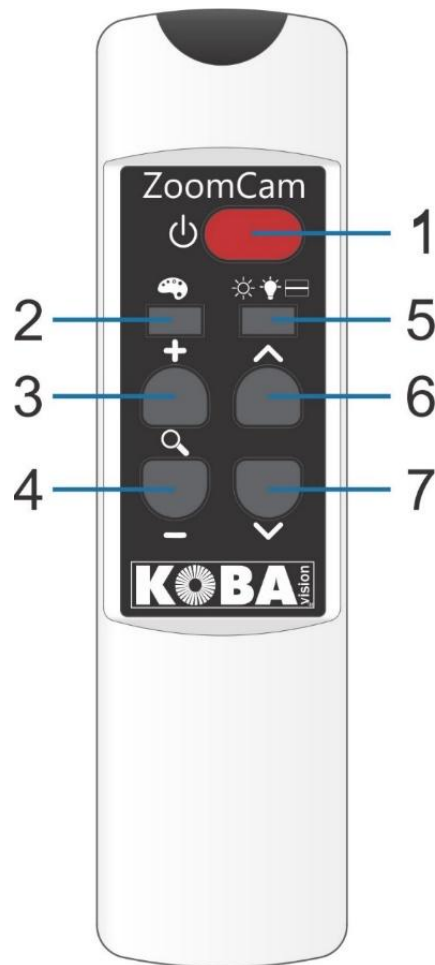

1 Kort tryck: **slå PÅ**
Håll knappen: **stäng AV**

5 **Kort tryck:** växla mellan
ljusstyrka/bakgrund, belysning, läslinje
Långt tryck: växla mellan översikt
och förstoring

6 Tryck vid **färgläge:** öka ljusstyrka
Tryck vid **negativ eller positiv
läsning:** öka bakgrundskontras
Tryck vid **belysning:** mer ljus
Tryck vid **läslinje:** flytta raden upp

7 Tryck vid **färgläge:** minska ljusstyrka
Tryck vid **negativ eller positiv
läsning:** minska bakgrundskontrast
Tryck vid **belysning:** mindre ljus
Tryck vid **läslinje:** flytta raden nedåt